

### Evolsin® Anti Warzen Stift



Der EVOLSIN® ANTI WARZEN STIFT enthält ein ätzendes Mittel.



Bitte lesen Sie vor Gebrauch diese Anwendungshinweise.



Nur zur äußerlichen Anwendung. Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

#### INDIKATION:

Der EVOLSIN® ANTI WARZEN STIFT ist für die Behandlung von Warzen an Füßen, Händen, Körper, Armen und Beinen angezeigt. Das Produkt kann von Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren verwendet werden.



Warzen sind lokale Wucherungen in der Haut, die durch das menschliche Papillomvirus (HPV) verursacht werden. Sie können allein oder gehäuft vorkommen. Es gibt verschiedene Arten von Warzen. Am häufigsten kommen sie an Händen, Füßen, Ellenbogen und Knien vor. Warzen sind ansteckend und verbreiten sich durch den Kontakt des Virus mit der Haut.

Der EVOLSIN® ANTI WARZEN STIFT ist ein CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt. Die Packung besteht aus einem Behandlungsstift und diesen Anwendungs-hinweisen.

Der EVOLSIN® ANTI WARZEN STIFT enthält 3 ml, ausreichend für mindestens 220 Anwendungen. Der EVOLSIN® ANTI WARZEN STIFT wurde speziell für die lokale Anwendung direkt auf der Warze entwickelt. Der Inhalt des Evolsin-Stifts gegen Warzen wird sofort von der Warze aufgenommen. Der Stift enthält eine keratolytische Verbindung, die das Gewebe aufricht, lokal trocknet und die Warze dadurch beseitigt.



#### WARNHINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Produkt enthält einen ätzenden, stark riechenden Wirkstoff. Nicht einatmen.
- Das Produkt NICHT für die Behandlung von Genitalwarzen oder im Gesichtsbereich anwenden.
- Verwenden Sie den EVOLSIN® ANTI WARZEN STIFT nicht, wenn Sie bekanntermaßen überempfindlich oder allergisch auf die Inhaltsstoffe sowie Bienen-/Ameisenstiche reagieren.
- Bei der Anwendung den Kontakt mit der gesunden Haut um die Warze herum vermeiden.
- Setzen Sie den behandelten Bereich erst dem Sonnenlicht aus, wenn sich die Haut wieder normalisiert hat.
- Wenden Sie den EVOLSIN® ANTI WARZEN STIFT nicht auf wunden oder blutenden, gereizten Warzen oder entzündeter/beschädigter Haut/Blasen an.
- Unterbrechen Sie die Behandlung, bis die Haut sich erholt hat.
- Nicht auf Warzen mit Haaren, Geburts- oder Muttermalen, pigmentierter Haut verwenden, oder wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es überhaupt eine Warze ist.
- Bei der Anwendung der Behandlung auf dünner und empfindlicher Haut sowie bei der Behandlung von Kindern und Menschen mit Diabetes ist besondere Vorsicht geboten.
- **Es ist besser, im Zweifelsfall zu wenig Flüssigkeit aufzutragen. Eine übermäßige Anwendung kann zu Nebenwirkungen wie Wunden, Blasen, Entzündungen, Absterben von Gewebe (Nekrose), Narben und chemischen Verbrennungen führen.**
- **Überschreiten Sie die empfohlene Anzahl von Anwendungen nicht.**
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn der behandelte Bereich rot und schmerzhaft wird oder sich entzündet.
- Einzelner Patient - Mehrfachverwendung.
- Nicht in Kombination mit anderen Behandlungen zur Warzenentfernung verwenden.
- Nicht für Kinder unter 4 Jahren verwenden, es sei denn, es wird vom Arzt verordnet.

BEI VERSEHENTLICHEM KONTAKT DES PRODUKTS MIT DEN AUGEN ODER SCHLEIMHÄUTEN 15 MINUTEN LANG MIT VIEL WASSER AUSSPÜLEN UND ÄRZTLICHEN RAT EINHOLEN.

#### ANWENDUNG:

Es wird empfohlen, die Warze vor der Behandlung mindestens 5 Minuten in lauwarmem Wasser einzuweichen, um die Haut weich zu machen. Wenn die Warze von harter Haut bedeckt ist, kratzen Sie die Oberfläche der Warze vorsichtig ab (z. B. mit einer Scherenklinge) und entfernen Sie vorsichtig die harte Haut. Feilen Sie die Warze nicht ab. Es wird empfohlen, die Behandlung von Kindern von Erwachsenen durchführen zu lassen.

1. Entfernen Sie die Kappe vom EVOLSIN® ANTI WARZEN STIFT.
2. Massieren Sie die Warze mit der Spitze des Behandlungsstiftes sanft maximal 20 Sekunden lang ein. Die Lösung dringt sofort ein. Achten Sie darauf, die gesamte Warze zu bedecken und dass Sie die umliegende gesunde Haut nicht berühren. Setzen Sie die Kappe nach der Anwendung wieder fest auf den Stift.
3. Wiederholen Sie die Behandlung 3 Mal pro Woche (mit einem Tag zwischen den Anwendungen, gefolgt von 2 Tagen Pause) für bis zu 6 Wochen.



**Überschreiten Sie die empfohlene Anzahl von Anwendungen nicht.**

Der EVOLSIN® ANTI WARZEN STIFT setzt eine kleine Menge einer farblosen Lösung frei. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Spitze des Stifts trocken ist, drücken Sie die Spitze gegen ein Stück saugfähiges Papier, um den Flüssigkeitsfluss zu überprüfen.

**SCHÜTTELN SIE DEN STIFT NICHT.**

Sollten Beschwerden oder Schmerzen auftreten, beenden Sie die Anwendung. Wenn es brennt, sticht, oder die Lösung auf gesunde Haut gelangt ist, mit kaltem Wasser abspülen.

#### MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN:

Es ist wichtig, dass Produkt wie angewiesen zu verwenden. Nicht zu viel anwenden, da dies zu Hautschäden führen kann (siehe VORSICHTSMASSNAHMEN oben). In manchen Fällen tritt für 10-15 Minuten nach der Anwendung ein leichtes Kribbeln oder Brennen auf. Bei übermäßiger Anwendung können vorübergehende Nebenwirkungen wie Stechen, Rötung, Schmerzen oder Blutungen auftreten. Unterbrechen Sie die Behandlung, bis sich die Haut vollständig erholt hat. Es sind keine Risiken für schwangere oder stillende Frauen bekannt.

Schwere Vorfälle sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

#### LAGERUNG:

Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von Kindern bei einer Temperatur zwischen 2 bis 25 Grad Celsius auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung. Das Arzneimittel darf nach dem Verfalldatum oder 6 Monate nach dem ersten Entfernen der Verschlusskappe vom Stift nicht mehr verwendet werden. Setzen Sie die Kappe des Stifts nach jedem Gebrauch sorgfältig wieder auf. Das Produkt kann entsorgt werden.

#### INHALTSSTOFFE:

Ameisensäure (85 %), Dimethylisosorbid, Wasser, Caprylsäure, Origanum Vulgare Blattextrakt.

**INHALT:** 3 ml, ausreichend für mindestens 220 Anwendungen.

**REGISTRIERUNG:** Der EVOLSIN® ANTI WARZEN STIFT zur Behandlung von Warzen ist als Medizinprodukt der Klasse IIa klassifiziert und registriert.

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Aktualisierung der Informationen: 2020-02.



#### Hersteller:

Unigroup APS, Diplomvej 373,  
DK-2800 Lyngby, Dänemark.

#### Vertrieb:

Evolsin medical UG,  
Schlehenweg 7,  
61267 Neu-Anspach, Germany  
Fragen?: [info@evolsin-medical.com](mailto:info@evolsin-medical.com)  
[www.evolsin-medical.com](http://www.evolsin-medical.com)



CE0425

PZN 18359049

