

Antes de que inicie, necesitará:

- El kit GLO Science Professional Chairside Whitening (blanqueamiento en la consulta del dentista)
- El dispositivo GLO® cargado, unido a la boquilla GLO, nueva o esterilizada, que se incluye en el kit GLO Take-Home (para llevar a la casa)
- Materiales adicionales: Guía de tonos VITA para utilizarse para tomas de tonos motivacionales (organizados del más claro al más oscuro), espejo de mano, cámara, ángulo profiláctico, piedra pómez, hisopos de algodón, luz de curado, gasa 2x2, cepillos de adhesión desechables, extractor de saliva, aspirador quirúrgico



* Las tomas correspondientes de tonos garantizarán mejores resultados de blanqueamiento



1 Tome el tono inicial de los dientes; muéstrelalo al paciente e introdúzcalo en el diagrama; fotografíe la sonrisa "antes de" del paciente (con y sin el tono correspondiente del diagrama)



2 La boquilla universal GLO es flexible. Para una mejor solución, pruebe la boquilla antes del blanqueamiento.



3 Limpie los dientes del paciente con piedra pómez.



4 Aplique el tratamiento de labios GLO en los labios usando un hisopo de algodón para cada aplicación.



5 Apriete hasta juntar los extremos del retractor de mejilla GLO, coloque uno de los extremos en la boca y el otro extremo (el logotipo de GLO debe ser visible dentro de la boca) descansando sobre la lengua.



6 Presione el botón "GLO" para precalentar la boquilla para una pasada de 8 minutos con el fin de alcanzar la temperatura óptima para asegurar mejores resultados de blanqueamiento.



7 Seque al aire la encía superior con la jeringa de aire/agua; aplique una barrera gingival GLO al margen gingival (y CEJ), y asegúrese de cubrir toda la encía conectada de 4 a 5mm.



8 Si hay recesión presente, cubra estas áreas para prevenir la sensibilidad. Fotocure inmediatamente después de colocar la barrera gingival.



9 Seque al aire la encía inferior con la jeringa de aire/agua; aplique una barrera gingival GLO al margen gingival (y CEJ), y asegúrese de cubrir toda la encía conectada de 4 a 5mm; aplique una barrera gingival al borde incisal y fotocure.



10 Coloque la gasa 2x2 doblada en los vestíbulos labiales superior e inferior.



11 Conecte la punta mezcladora de blanqueamiento y asegúrese de que esté firmemente asentada en una jeringa de gel de blanqueamiento de doble cilindro; antes del uso inicial, vierta una pequeña cantidad sobre la bandeja del soporte para asegurarse de lograr una mezcla uniforme.



12 Cepille el gel transversalmente sobre los dientes superior e inferior.



13 Alinee la pieza dentro de la boca, un extremo a la vez, de manera tal que el logotipo "GLO pro" quede en el lado derecho orientado hacia arriba; aplique tratamiento de labios adicional y asegúrese de que los labios no entren en contacto con la boquilla ni con el gel blanqueador



14 Pida al paciente que cierre ligeramente la boca para sujetar la boquilla; la mandíbula del paciente debe estar cerrada, pero relajada. Los dientes deben encajar directamente en la boquilla para obtener mejores resultados de blanqueamiento.



15 Inicie la sesión de blanqueamiento de 8 minutos pulsando el botón "GLO" en el control; el control y la boquilla se encenderán.



16 Mientras sostiene el retractor de mejillas GLO por la lengüeta, inserte suavemente una pequeña succión entre la boquilla GLO y la mejilla.



17 El control del GLO parpadeará para indicar que el intervalo de 8 minutos está terminando; la boquilla se apagará de forma automática.



18 Al final del intervalo de 8 minutos, retire suavemente la boquilla GLO y utilice aspirador quirúrgico para sacar el gel de blanqueamiento GLO de la boquilla GLO y de los dientes.



19 Confirme que la barrera gingival sigue intacta; limpie la boquilla de cualquier residuo de gel H₂O₂. Revise los tejidos blandos/labios y agregue más tratamiento labial.



20 Vuelva a aplicar el gel de blanqueamiento profesional GLO a todos los dientes; para obtener los mejores resultados, siempre sangre la punta de la jeringa para gel recién mezclado antes de volver a aplicar el gel blanqueador.



21 Repita los pasos 10 al 20 hasta un total de cuatro aplicaciones de 8 minutos (32 min).



22 Después de la cuarta aplicación, o final, retire el gel, la barrera y el retractor; pida al paciente que se enjuague bien



23 Tome el tono final de los dientes y compárelo en la tabla; tome una fotografía de la sonrisa de la paciente con y sin la etiqueta de tono correspondiente; compare con el tono inicial y muéstrela al paciente.




24 Después del procedimiento en el consultorio, el paciente continuará con el blanqueamiento GLO At-Home en su hogar 5 días seguidos, hasta 4 aplicaciones al día. En el reverso se incluyen las instrucciones para después del blanqueamiento.

El gel de blanqueamiento con peróxido de hidrógeno no debe tragarse. Si una pequeña cantidad es ingerida accidentalmente, el paciente debe enjuagarse la boca profusamente y beber líquidos.

Para obtener más información acerca de cualquiera de los pasos de esta guía, incluidas las indicaciones de uso, las contraindicaciones, las instrucciones de seguridad y las precauciones del paciente, consulte el Manual del usuario que se incluye con el kit GLO Science Professional Chairside Whitening.


Instrucciones para el cuidado del paciente en su hogar

- El paciente debe evitar comer o beber cualquier cosa que pueda manchar una camiseta blanca durante 48 horas después del blanqueamiento
- GLO® está especialmente diseñado para utilizarse en pacientes con sensibilidad. A pesar de esto, todavía es normal que algunas personas experimenten una leve sensibilidad después del tratamiento durante 1 a 3 días después del blanqueamiento. Para minimizar esto, instruya al paciente a:
 - Evitar alimentos o bebidas excesivamente calientes o fríos
 - Cepillarse con una pasta para dientes sensibles
 - Con la aprobación de su médico, tome un analgésico de venta sin receta moderado
- Si los tejidos blandos tienen sensibilidad, enjuague el área afectada y aplique un tratamiento GLO para labios extra

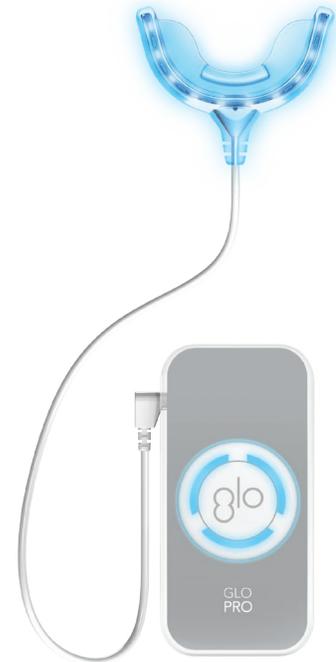

Guía del protocolo para el tratamiento con GLO Dual Whitening (Blanqueamiento doble)

El Blanqueamiento doble (tratamiento con GLO en la consulta del dentista seguido inmediatamente por un régimen de blanqueamiento con GLO en el hogar) produce los mejores resultados. Este enfoque doble, iniciado por GLO Science, permite a los pacientes estabilizar sus resultados de blanqueamiento después de su visita al consultorio y seguir blanqueando en casa para lograr y mantener sus sonrisas RELUCIENTES ideales.

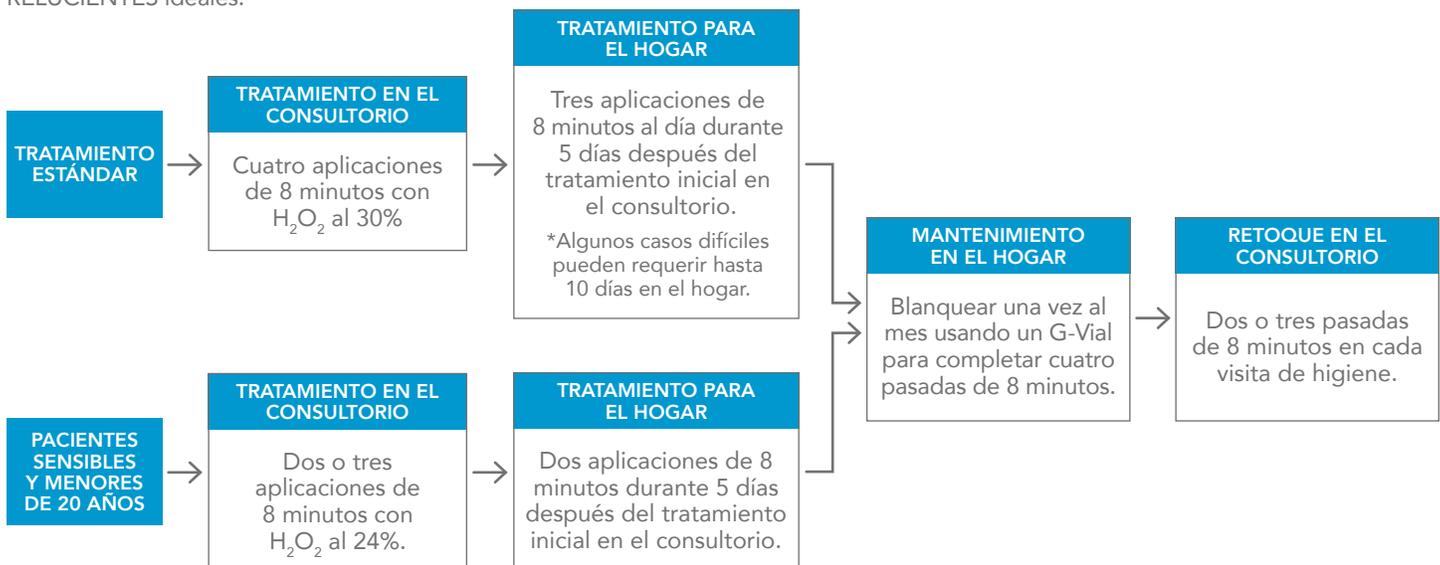

Las tinciones avanzadas de tetraciclina requieren un protocolo de tratamiento más prolongado y agresivo.

Complete 2 tratamientos de blanqueamiento en el consultorio de cuatro aplicaciones de 8 minutos de H₂O₂ al 30% con dos semanas de diferencia.

Siga cada tratamiento en el consultorio con 14 días de blanqueamiento Take Home (para la casa), completando cuatro pasadas de 8 minutos al día en su hogar.

www.glosciencepro.com Follow Us! #getgloing GLOscience glosciencenyc @GLO_Science

Descargue materiales de marketing gratuitos para su consultorio en el portal de recursos profesionales de GLO Science en www.glosciencepro.com