

Lassekudden

Applicera överdrag

Hur man applicerar ett överdrag på Lassekudden

Överdrag i bomullstrikå

Täck översidan av Lassekudden med överdraget, avigsidan utåt.
Den långsida på överdraget som inte har någon söm, läggs ovanpå Lassekudden med 6-8 cm överhäng utanför kuddens långsida.
Överdragets kortsida och söm placeras vid kuddens kortsida/fotsida.



Kuddvarets överhäng stoppas ner i springan.





Vänd kudden mot dig, sätt in båda armarna i överdraget.
Se till att överdragets midsöm hålls i mitten under hela proceduren.

För ner överdraget mot kuddens yttersidor hela vägen fram till fotändan. Sömmen på kortsidan lyfts upp så att 20-25 cm blir kvar i hälen håll. Där förs fingrarna i sidled mot kuddens båda hörn.



Vräng över. Se till att överdraget kommer ner ordentligt, så att inte hälen kommer att ligga emot.

Finjustera. Klart!

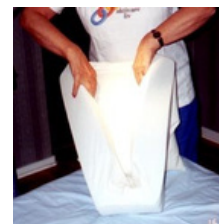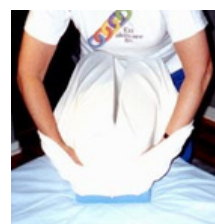

Hygienöverdrag

Öppna dragkedjan. För in Lassekudden i överdraget, med kortsidan där hålet för foten finns, först. Se till att sömmarna hamnar på Lassekuddens långsidor.

För ned överdraget i springan och se till att det blir så slätt som möjligt där benet, foten och hälen ska ligga.

