

## Tryckvlastnings- och positioneringskuddar med hygienskydd

Isakudden, Lindrakudden, Knäskena, Roffekudden, Abduktionskudde Ben, Abduktionskudde Liten, Positioneringskudden Rulle, Universalkudden, Kilkudde 45, Kilkudde 30 / 60, Kilkudde Avlasta

### Art.nr och mått

Artikelnummer	Benämning	Storlek
279-HS	Lindrakudden (skumplast, hygienskydd svetsad söm)	3 sidor x 38 cm och 1 till 5 cm hög
350-HS	Knäkudden (skumplast, hygienskydd svetsad söm)	29 x 22 x 9 (innermått 14 x 5) cm
351-HS	Isakudden (skumplast, hygienskydd svetsad söm)	72 x 39,5 x 30 cm
351-HSBX	Isakudden (skumplast, hygienskydd blixtlås)	72 x 39,5 x 30 cm
352-HSBX	Roffekudden (skumplast, hygienskydd blixtlås)	44,5 x 20 x 40 cm
447-HS	Lassekudden Basic (47 cm, skumplast, hygienöverdrag)	47 x 20 x 19 cm
455-HS	Lassekudden Basic (55 cm, skumplast, hygienöverdrag)	55 x 20 x 19 cm
5575S-HSBX	Abduktionskudde ben (Small, hygienskydd blixtlås)	45 x 30 x 10 x 20 cm
5575M-HSBX	Abduktionskudde ben (Medium, hygienskydd blixtlås)	58 x 40 x 10 x 20 cm
5575L-HSBX	Abduktionskudde ben (Large, hygienskydd blixtlås)	75 x 55 x 100 x 20 cm
5570-HSBX	Abduktionskudde liten	25 x 14 x 17 cm
600-HSBX	Positioneringskudde Rulle	Ø 12 x 42 cm
703-HSBX	Universalkudde (2 st/förp, hygienskydd blixtlås)	41 x 20 x 4,5 cm
845-HSBX	Kilkudde 45 (hygienskydd blixtlås)	60 x 60 x 30 cm
83060-HSBX	Kilkudde 30 / 60 (hygienskydd blixtlås)	60 x 60 x 30 / 1 cm
8603015-HSBX	Avlasta Kilkudde (hygienskydd blixtlås)	60 x 30 x 15 cm
81003015-HSBX	Avlasta Kilkudde (hygienskydd blixtlås)	100 x 30 x 15 cm

Produkterna är medicintekniska produkter klass I. CE-märkta enligt MDR (EU) 2017/745.

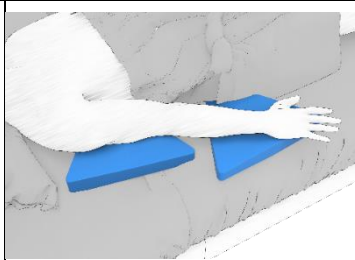
Eudamed-registreringsnummer / SRN: SE-MF-000001678.

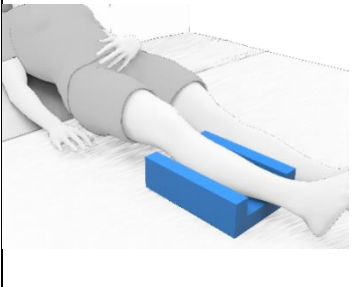


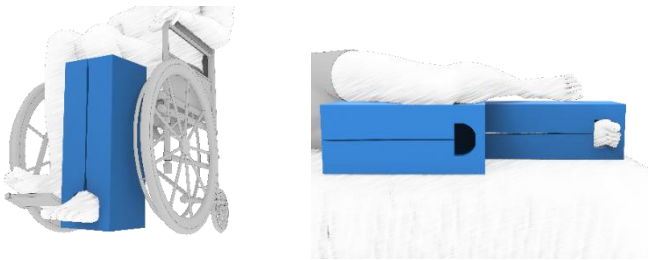
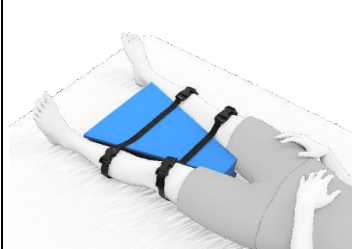
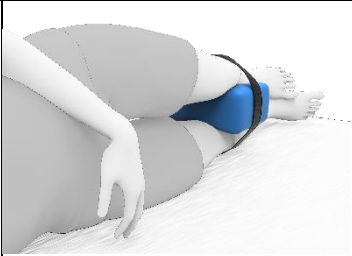
Produkterna är märkta med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

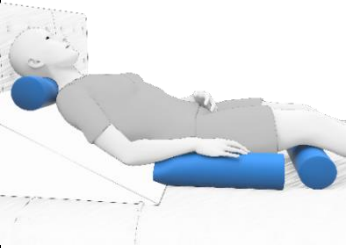
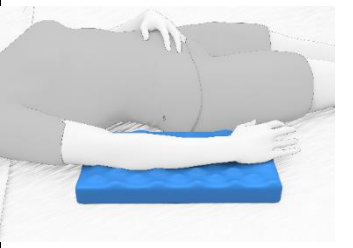
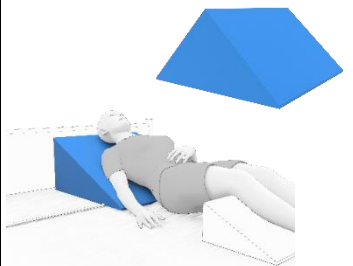
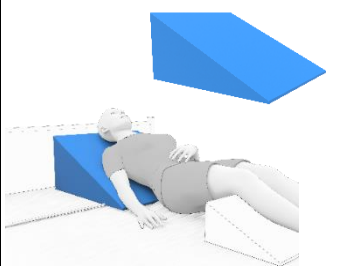
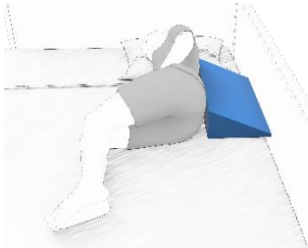
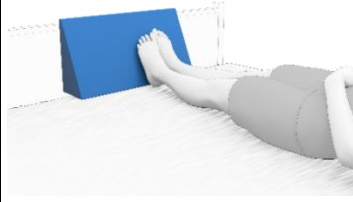
Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Utvecklade av 4care Sverige AB och tillverkade i Sverige av BIMA PLASTTEKNIK AB. BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad ISO9001 samt miljöcertifierad ISO14001. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0431-717 30 eller via e-post: [kundservice@4care.nu](mailto:kundservice@4care.nu)

### Målgrupp och användning

<b>Lindrakudden</b>	Används för att ge avlastning och stöd vid besvär och smärtor från skelett, muskler och leder. I sittande ställning ger Lindra stöd i svanken, avlastning för armbågar, hindrar tryck vid knäna och ger ett bekvämt sittande. I liggande ställning ger Lindra ett bra stöd åt immobiliserade patienter. Kan även användas mellan knän när patienten ligger i sidoläge.	
---------------------	--	---

<p><b>Knäkudden</b></p>	<p>Används för att avlasta knät efter operation. Den ger stabilitet och stöd åt knät.</p>	
<p><b>Isakudden</b></p>	<p>Används efter skador och operationer på de nedre extremiteterna, när högläge önskas. Urgröpningen ger benet ett bra stöd så det inte glider av. Ger stabilitet med ett komfortabelt högläge för ben.</p>	
<p><b>Roffekudden</b></p>	<p>Används efter skador och operationer på de övre extremiteter, när högläge är viktigt för att minska svullnad i handen. Den största fördelen med kudden är att arm och hand ligger stabilt samtidigt som det är komfortabelt för patienten. Kudden är ett enklare alternativ än upphängningsanordningar som monteras på sängen. Ger stabilitet med ett komfortabelt högläge för arm.</p>	
<p><b>Lassekudden</b></p>	<p>Används för att förebygga trycksår, ge stöd samt avlasta hälar hos patienter som ligger mycket. Den används också för akuta höftpatienter, i ambulansen, genom röntgen samt efter operation.</p>	
<p><b>Abduktionskudde Ben kilformad</b></p>	<p>Abdukerar benen och ger komfortabelt och tryggt stöd. Används främst efter lårbensbrott, höftfrakturer eller operationer. Skyddar mot rörelser så som rotation i höftled under den postoperativa perioden. Stöttar benen hela vägen ner utan att orsaka tryck. Fästs med remmar runt benen.</p>	
<p><b>Abduktionskudde Liten</b></p>	<p>Mindre version av abduktionskudde. Abdukerar knäna i sittande eller liggande läge och ökar komforten när personen sover på sidan. Kan även användas mellan vaderna, som ländryggskudde och nackkudde medan du sover. Fungerar bra för rullstolar.</p>	

<b>Positioneringskudde Rulle</b>	Universell stödrulle. Stabiliserar kroppens relevanta delar och minskar trycket och risken för trycksår. Underlättar patientpositionering.	
<b>Universalkudde</b>	Universalkudde för avlastning. Kan läggas under exempelvis arm eller ben för att förebygga trycksår.	
<b>Kilkudde 45</b>	Kilkudden har en lutningsvinkel på 45 grader. Ger stöd för ryggen och är avsedd för användning i sängen, kan även användas under rehabilitering, sjukgymnastik och massage.	
<b>Kilkudde 30 / 60</b>	Kilkudden har en lutningsvinkel på antingen 30 eller 60 grader. Ger stöd för ryggen och är avsedd för användning i sängen, kan även användas under rehabilitering, sjukgymnastik och massage.	
<b>Kilkudde Avlasta</b>	Kilkudden Avlasta används för att avlasta och stabilisera kroppspositionen (t.ex. ben och rygg) och kan minska risken för trycksår. Kan också användas som sidostöd och vid fotändan.	 

### Rengöring och skötsel

Produkterna kräver ingen inställning eller service. Rengöring för en god hygien är det enda som behövs. Basen i skumplast rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning. Den kan också rengöras med ånga. Produkterna torkas i ett varmt väl ventilerat utrymme (torkskåp). Hygienöverdraget rengörs med desinfektionsmedel t.ex. DAX Ytdesinfektion plus, DAGS Desisoft, Virkon eller liknade. Dessa medel desinfekterar utan att torka ut materialet. Andra desinfektionsmedel eller spritlösningar kan ha en uttorkande effekt vilket gör att galonens egenskaper försämras med sprickbildningar som följd. Överdragen kan tvättas i upp till 95 grader. Produkten förvaras i torrt, och gärna rumstempererat utrymme. Kläm eller vik den inte.

### Kvalitetssäkring

För att säkerställa att produkten fungerar på ett korrekt och säkert sätt under sin avsedda livslängd (5 år). Kontrollera produktens yta som ska vara utan sprickor och sättningar. Överdraget ska vara intakt. Gropar/ sättningar i produkten tyder på att den är förbrukad och ska bytas ut. Livslängden kan variera beroende av användning och skötsel.

### Extra/ alternativa överdrag

För att beställa extra överdrag se aktuellt sortiment på <https://4care.nu/products/hygienskydd>.

### Källsortering

Skumplastbas och överdrag sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.

### Försiktighetsåtgärder

1. Produkten är avsedd till att användas för avlastning alternativt positionering.
2. I de fall det finns olika storlekar i utbudet ska produktens storlek passa patientens längd.
3. När produkten inte används ska den förvaras i ett torrt utrymme, gärna i rumstemperatur.
4. Undvik att klämma eller böja produkten vid förvaring.
5. Undvik att utsätta produkten för fukt. Vassa föremål och starka kemikalier kan också skada den.
6. Mindre förändringar som att runda av kanter, justera produkten efter patienten kan normalt göras utan att det påverkar egenskaperna negativt. Dokumentation ska dock alltid göras.
7. Rapportera eventuella olyckor och tillbud som sker i samband med användandet av produkterna till 4care Sverige AB. Allvarliga olyckor och tillbud skall även rapporteras till berörd myndighet via ett MIR – formulär <https://www.lakemedelsverket.se/sv>