

## Tryckavlastnings- och positioneringskuddar skumplast

Lindrakudden, Knäkudden, Isakudden, Roffekudden, Lassekudden, Skyddskudde armbåge, Skyddskudde häl/fotled

### Art.nr och mått

Artikelnummer	Benämning	Storlek
279-S	Lindrakudden (skumplast)	3 sidor x 38 cm och 1 till 5 cm hög
350-S	Knäkudden (skumplast)	30 x 22,5 x 9 (innermått 14 x 5) cm
351-S	Isakudden (skumplast)	72 x 39,5 x 30 cm
352-S	Roffekudden (skumplast)	44,5 x 20 x 40 cm
447-S	Lassekudden Basic (47 cm, skumplast)	47 x 20 x 19 cm
455-S	Lassekudden Basic (55 cm, skumplast)	55 x 20 x 19 cm
447-B	Lassekudden Basic (47 cm, skumplast, bomullstrikå)	47 x 20 x 19 cm
455-B	Lassekudden Basic (55 cm, skumplast, bomullstrikå)	55 x 20 x 19 cm
701-S	Skyddskudde armbåge (2 st/förp)	40 x 15 x 3 cm
702-S	Skyddskudde häl/fotled (2 st/förp)	20 x 15 x 3 cm

Produkterna är medicintekniska produkter klass I. CE-märkta enligt MDR (EU) 2017/745.

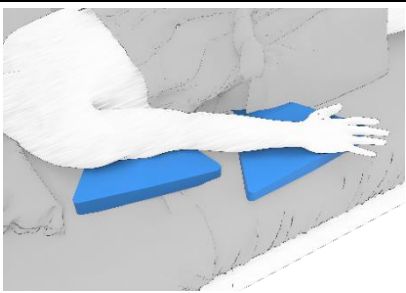
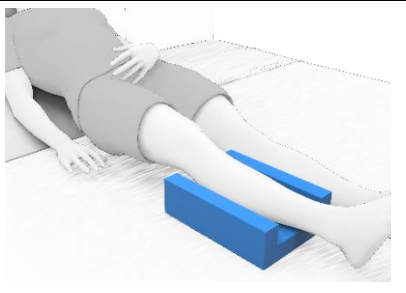
Eudamed-registreringsnummer / SRN: SE-MF-000001678.

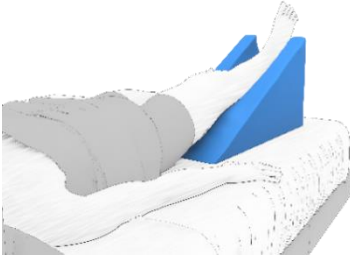

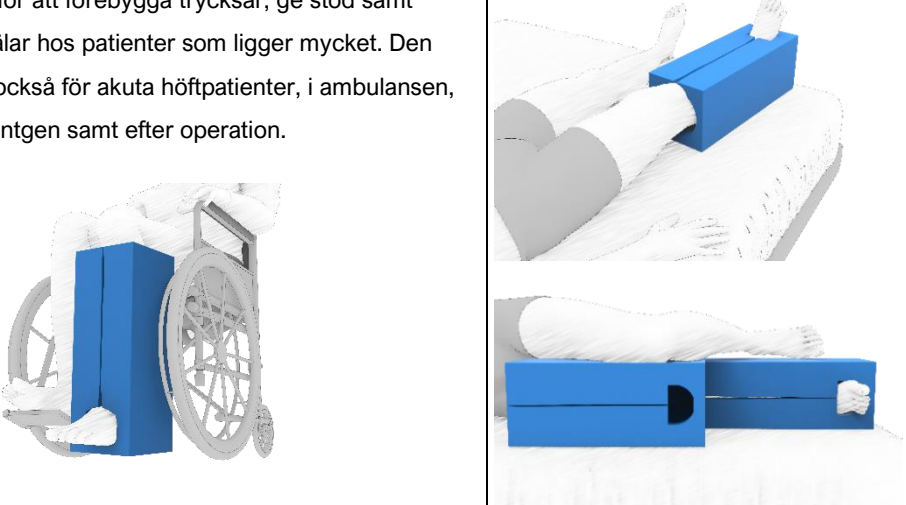
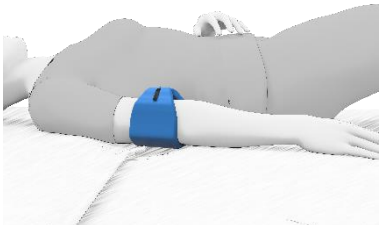
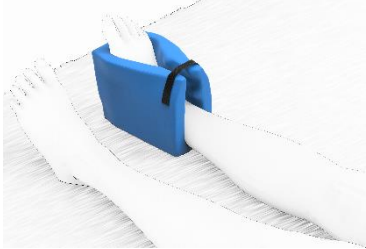
Produkterna är märkta med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Utvecklade av 4care Sverige AB och tillverkade i Sverige av BIMA PLASTTEKNIK AB. BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad ISO9001 samt miljöcertifierad ISO14001. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0431-717 30 eller via e-post: [kundservice@4care.nu](mailto:kundservice@4care.nu)

### Målgrupp och användning

<b>Lindrakudden</b>	Används för att ge avlastning och stöd vid besvär och smärtor från skelett, muskler och leder. I sittande ställning ger Lindra stöd i svanken, avlastning för armbågar, hindrar tryck vid knäna och ger ett bekvämt sittande. I liggande ställning ger Lindra ett bra stöd åt immobiliserade patienter. Kan även användas mellan knän när patienten ligger i sidoläge.	
<b>Knäkudden</b>	Används för att avlasta knät efter operation. Den ger stabilitet och stöd åt knät.	

<p><b>Isakudden</b></p>	<p>Används efter skador och operationer på de nedre extremiteterna, när högläge önskas. Urgröpnigen ger benet ett bra stöd så det inte glider av. Ger stabilitet med ett komfortabelt högläge för ben.</p>	
<p><b>Roffekudden</b></p>	<p>Används efter skador och operationer på de övre extremiteter, när högläge är viktigt för att minska svullnad i handen. Den största fördelen med kudden är att arm och hand ligger stabilt samtidigt som det är komfortabelt för patienten. Kudden är ett enklare alternativ än upphängningsanordningar som monteras på sängen. Ger stabilitet med ett komfortabelt högläge för arm.</p>	
<p><b>Lassekudden</b></p>	<p>Används för att förebygga trycksår, ge stöd samt avlasta hälar hos patienter som ligger mycket. Den används också för akuta höftpatienter, i ambulansen, genom röntgen samt efter operation.</p>	
<p><b>Skyddskudde armbåge</b></p>	<p>Skyddar armbågen och minskar risken för trycksår. Fästs med kardborreband</p>	
<p><b>Skyddskudde hälfotled</b></p>	<p>Skyddar häl och fotled och minskar risken för trycksår. Fästs med kardborreband.</p>	

### Rengöring och skötsel

Produkterna kräver ingen inställning eller service. Rengöring för en god hygien är det enda som behövs. Vid normal rengöring rengörs produkterna genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning. De kan också rengöras med ånga. Produkterna torkas i ett varmt väl ventilerat utrymme (torkskåp). Produkten förvaras i torrt, och gärna rumstempererat utrymme. Kläm eller vik den inte.

### Kvalitetssäkring

För att säkerställa att produkten fungerar på ett korrekt och säkert sätt under sin avsedda livslängd (5år). Kontrollera produktens yta som ska vara utan sprickor och sättningar. Gropar/ sättningar i produkten tyder på att den är förbrukad och ska bytas ut. Livslängden kan variera beroende av användning och skötsel.

### Källsortering

Skumplastbas och överdrag sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.

### Försiktighetsåtgärder

1. Produkten är avsedd till att användas för avlastning alternativt positionering.
2. I de fall det finns olika storlekar i utbudet ska produktens storlek passa patientens längd.
3. När produkten inte används ska den förvaras i ett torrt utrymme, gärna i rumstemperatur.
4. Undvik att klämma eller böja produkten vid förvaring.
5. Undvik att utsätta produkten för fukt. Vassa föremål och starka kemikalier kan också skada den.
6. Mindre förändringar som att runda av kanter, justera produkten efter patienten kan normalt göras utan att det påverkar egenskaperna negativt. Dokumentation ska dock alltid göras.
7. Rapportera eventuella olyckor och tillbud som sker i samband med användandet av produkterna till 4care Sverige AB. Allvarliga olyckor och tillbud skall även rapporteras till berörd myndighet via ett MIR – formulär <https://www.lakemedelsverket.se/sv>