
Grippy by Malm



Användarmanual

Medical Innovation Design MID AB | +46 (0) 709 40 76 | www.mid.nu | info@mid.nu

Innehållsförteckning

- 1. Avsedd användning**
- 2. Produktbeskrivning**
- 3. Produktspecifikation**
- 4. Summering av varning, observera och notera**
- 5. Användarinstruktioner**
- 6. Rutinunderhåll**

1. Avsedd användning

Grippy by Malm är en hållare designad för att passa operationsbordets skena. Den är till för att hänga urin, dränage påsar och timdiures kit under operationen. Grippy är vrid och låsbar och utformad för att kunna nås under operationsdukar och följa ev. tippning av bord men ändå gå att läsa av horisontellt.

2. Produktbeskrivning

Hela produkten mäter 33 cm på längden. Den övre delen består av en krok i aluminium som är 7,5 cm lång och 4 cm bred med gummerad undersida för att motverka att produkten glider på vårdskenan. Den vita delen består av PVC, är 8 cm bred med två utstansade hål med diameter 6,5 cm i vilka dränage och timdiures-kit kan krokas på. Hålen medger bibehållet horisontellt läge av uppsamlingspåsar även vid tippning av operationsbordet. Avståndet ifrån krok till hålens underkant är 22 cm respektive 30 cm. Max vikt 6 kg.

3. Produktspecifikation

Produkt: Grippy by Malm

Artikel.nr: GM22 01

Basic UDI-DI nr: 735013281GM22-01Q4

Innovatör: Eva Malm Leg. Anestesisjuksköterska SUS Malmö i samarbete med Innovation Skåne

Tillverkare: Medical Innovation Design MID AB

Material: Produkten är tillverkad av PVC, EPDM, POM, Aluminium och rostfritt stål.

4. Summering av varningar, observera och notera

Grippy by Malm är en medicinteknisk produkt avsedd att användas av kvalificerad personal. Användaren av denna utrustning är ansvarig för att ha läst igenom och grundligt förstått all tillhandahållen produktinformation. Uppmaningar genom all produktdokumentation har speciell betydelse och kan delas in enligt följande:

WARNING

- innebär att risk finns för skada på patient eller användare.

OBSERVERA

- innebär att risk finns för skada på aktuell eller annan utrustning.

NOTERA

- används för att påkalla uppmärksamhet till uppmaningar.

Syftande till ett effektivare och mer ändamålsenligt användande av utrustningen.

Nedan följer en summering av samtliga Varningar, Observera och Notera i denna bruksanvisning.

VARNINGAR

Följ alltid anvisningar och instruktioner för att minska risken för överbelastning eller felanvändning av produkten
Max vikt 6 kg

Använd ej produkten för annat än avsedd användning.

Bristfälligt hygieniskt handhavande av produkten kan leda till kontaminering av patient/personal, se rutinunderhåll

Se till att kateter eller dränageslang **inte sträcks** och **ger risk för utdragning**

OBSERVERA

Iakttag försiktighet vid användning av produkten. Kontrollera att produkten inte hakar av vårdskenan.

Placera alltid produkten så att den ligger stabilt på vårdskenan och inte kasar

Var vaksam så att inte produkten tar emot golvet, hakar av vårdskenan med risk för att personal snubblar över slangar.

NOTERA

Produkten är bland annat tillverkad i plast, vilket innebär ett visst åldrande och utslitning av plastmaterialet.

5. Användarinstruktioner

Grippy by Malm kan användas överallt där bord med vårdskena används. Perfekt för operation, anestesi men även för angiografiundersökningar eller andra ställen där det kan vara svårt att komma åt och läsa av dränage och urinpåsar.




Haka på vårdskenan där du önskar att göra dina avläsningar.

En gummerad undersida på kroken minskar risken för att den ska glida.





Häng sedan på påsen/påsarna och/eller dränage i den höjd som önskas i de två runda hålen.

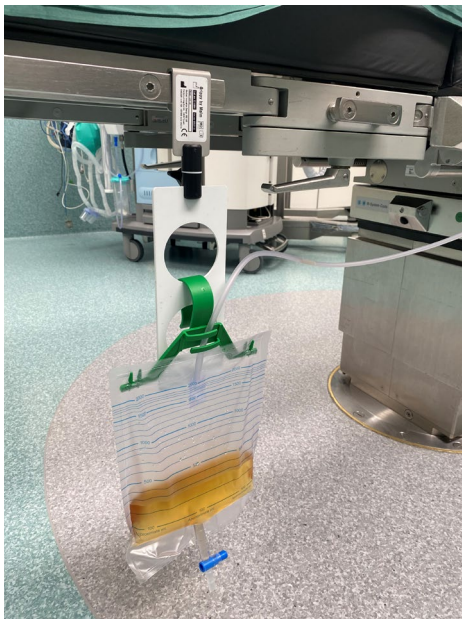

Se till att hållaren sitter ordentligt mot vårdskenan.


Kontrollera så att inga slangar kan fastna i annan utrustning och/eller bli översträckta med risk för utdragning av dränage och kateter.

MAX vikt 6 kg



Det går nu enkelt att vrida och låsa hållaren till önskad position. Använd den lilla svarta ratten nedanför aluminium-kroken

En bra funktion då du slipper att böja dig fram och vrida på huvudet för att kunna göra kontroller.

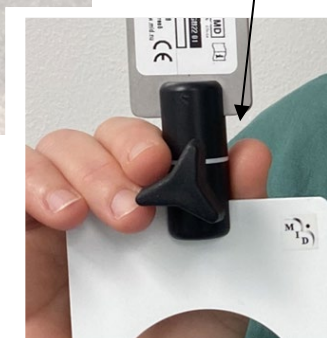

Tack vare de utstansade runda hålen så hamnar påsarna alltid i horisontalläge även vid tippning av bordet.

Detta gör det enklare och säkrare att avläsa timdiures och kontrollera dränage.

6. Rutinunderhåll

Grippy by Malm skall grundligt torkas av och desinficeras med ytdesinfektion efter användning.

Produkten tål minst 100 grader och kan således även rengöras i diskdesinfektor.

2 års garanti

Medical Innovation Design MID AB Sweden | +46 (0)709-407698 | www.mid.nu | info@mid.nu