

Lassekudden Basic

Skötselråd

Vid normal rengöring av Lassekudden i skumplast rengörs produkterna genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning. De kan också rengöras med ånga. Produkterna torkas i ett varmt väl ventilerat utrymme (torkskåp).



Överdrag i bomullstrikå

Kan tvättas i maskin 70°C. Torka i rumstemperatur eller i torkskåp.



Hygienskydd

Ett överdrag i polyester och polyuretan. Ett slitstarkt elastiskt överdrag, försett med en vattentät dragkedja. Dragkedjan är böjd i ena kortsidan för att underlätta appliceringen över kudden. Materialet ångandas och fukt transporteras ut från skyddet, bort från användaren. Svetsade sömmar ger en bra barriär mot bakterier.

Rengöring:

Torka av med alkoholbaserat desinfektionsmedel.

Skyddet kan tvättas i maskin 95°C och torktumlas eller dropptorka.

Klor och fenoler kan påverka ytan negativt och bör undvikas.

