

HighTech Combi Hydro WKB005

- Hydrodermabrasion.
- Ultraschall.
- Scrubber (Ultraschall peeling).
- Cold Hammer.
- Bipolare Radiofrequenz.
- Sauerstoff-Spray.



HighTech Combi Hydro

WKB005

Das WKB005 ist ein Gerät mit fortschrittlicher Technologie, das das Beste von Weelko vereint, um komplette und intensive Behandlungen zur Tiefenreinigung, Erneuerung und Ernährung der Haut durchzuführen, um unseren Kunden in kurzer Zeit die besten Ergebnisse zu bieten..



HighTech Combi Hydro WKB005




Das HighTech ist ein digitales Kosmetikgerät mit Touchscreen, sehr komplett, das 6 super wichtige Werkzeuge kombiniert, um eine tiefe Gesichtereinigung durchzuführen.

- 1 Hydrodermabrasions-Handstück, mit Ersatzdüsen.
- 1 Ultraschall-Handstück.
- 1 Scrubber-Handstück (Ultraschall-Peeling).
- 1 Cold Hammer Handstück.
- 1 Radiofrequenz-Handstück.
- 1 Galvanikstrom-Handstück.
- 1 Sauerstoff-Spray-Handstück.
- 1 Hauptgerät
- 1 Anschlusskabel.

Hinweis: Das Gerät wird mit einer sehr dünnen Klebefolie geliefert, die den Bildschirm vor möglichen Kratzern während des Verpackens schützt und in der Regel markiert ist, sie kann nach dem Auspacken entfernt werden.

Anschlussdetails

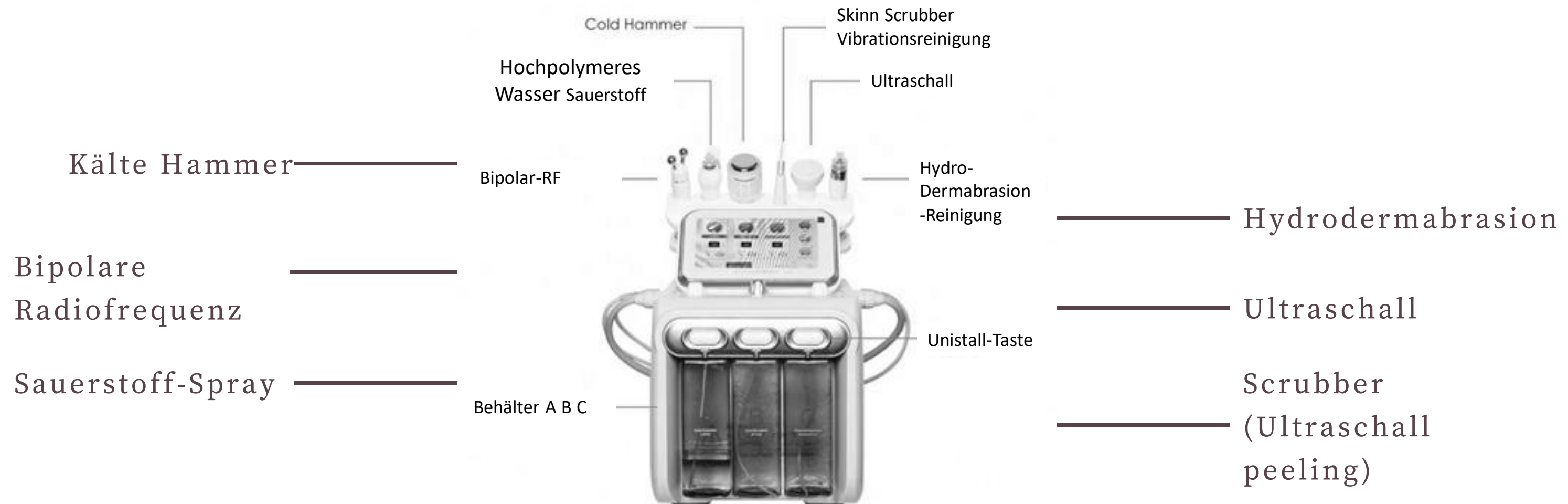


Die Handstücke müssen auf der Acrylstruktur aufliegen, die am hinteren Teil des Geräts installiert ist, um mögliche Unfälle und deren Absturz zu vermeiden.




Um das Gerät einzuschalten, befindet sich auf der rechten Seite eine Taste. Klicken Sie dann auf den Bildschirm, um die durchzuführende Behandlung aus dem Menü auszuwählen.

HighTech Combi Hydro

WKKB005

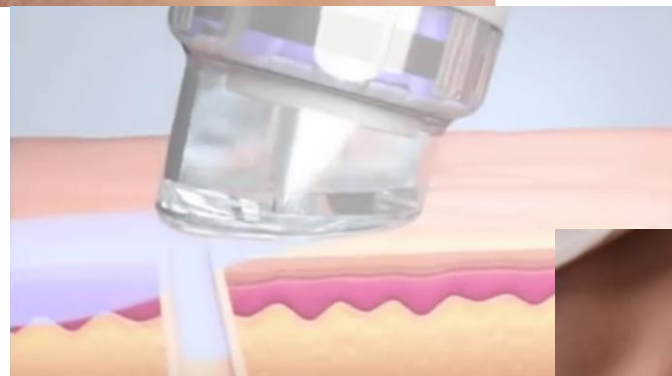

Das Gerät wurde für nicht-invasive Behandlungen zur Tiefenreinigung, Befeuchtung, Ernährung und Sauerstoffzufuhr der Haut entwickelt. Geeignet für Behandlungen zur Entfernung von Mitessern, Akne, angesammeltem Schmutz auf der Haut und für fettige Haut. Auch zu nähren, erhöhen Elastizität und Hautton.

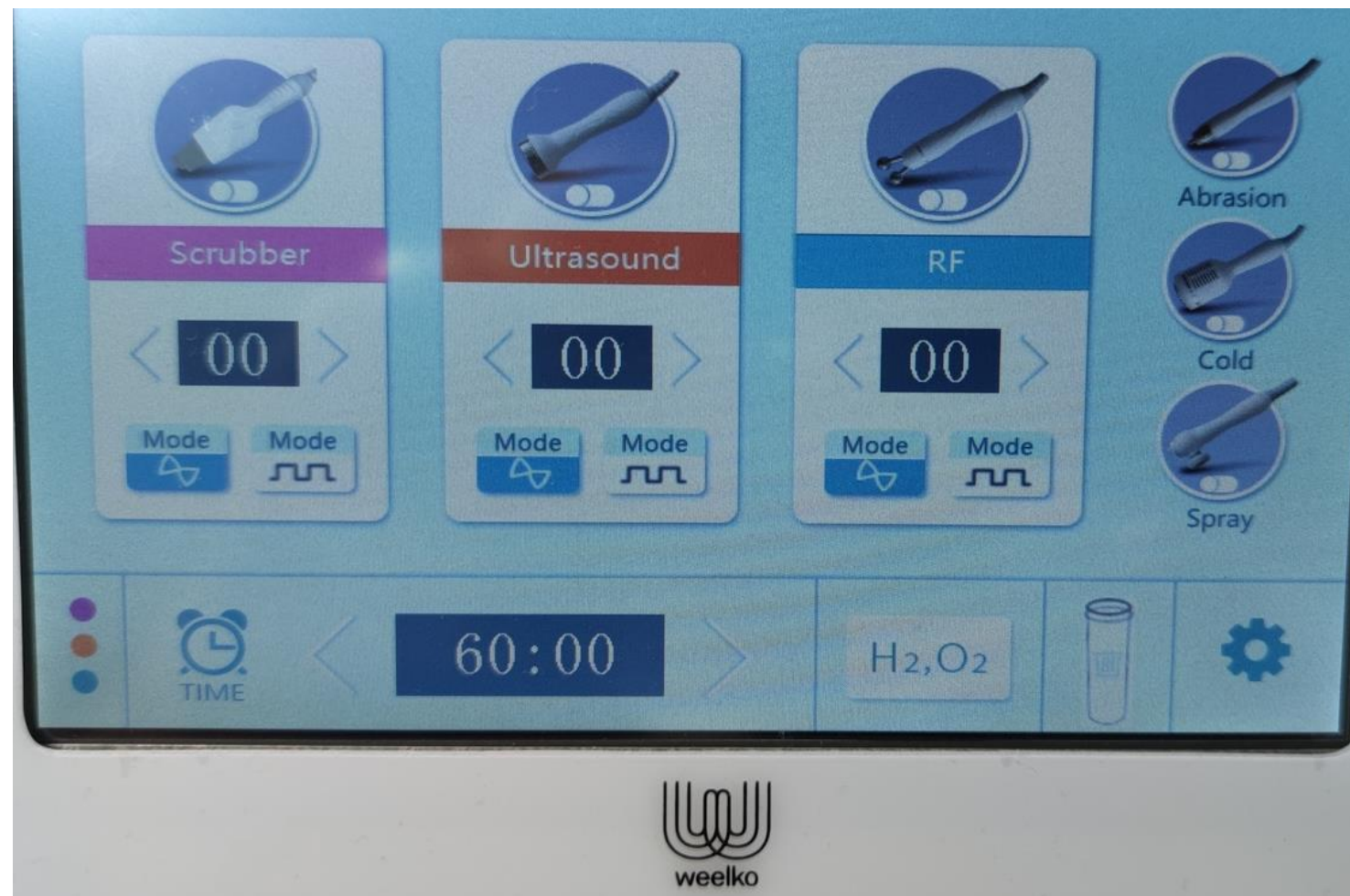

Als erstes müssen wir die gewünschte Art der Behandlung auswählen:

- **Scrubber:** Um es zu aktivieren, klicken Sie auf das Bild, wo sich das Scrubber-Handstück befindet, und programmieren Sie dann die Intensität von 1 bis 10, den Modus (kontinuierlich oder gepulst) und die Zeit entsprechend der Behandlung, die Sie durchführen möchten.
- **Ultraschall:** Um es zu aktivieren, klicken Sie auf das Bild, in dem sich das Ultraschall-Handstück befindet, dann stellen Sie die Intensität von 1 bis 10, den Modus (kontinuierlich oder gepulst) und die Zeit entsprechend der Behandlung ein, die Sie durchführen möchten.
- **Bipolare Gesichtsradiofrequenz:** Um es zu aktivieren, müssen Sie auf das Bild des RF-Handstücks klicken und dann die Intensität von 1 bis 10, den Modus (kontinuierlich oder gepulst) und die Zeit entsprechend der Behandlung, die Sie durchführen wollen, programmieren.

- **Abrasion:** Aktiviert die Hydrodermabrasion-Behandlung.
- **Kalt:** Aktiviert den Kälte-Hammer.
- **Spray:** Aktiviert die Funktion Sauerstoff.
- **Zeit:** bestimmt die Behandlungszeit.

An jedem Handstück finden Sie eine Taste, mit der Sie die Behandlung starten oder beenden können.



Mode

Kontinuierlich: Sowohl beim Ultraschall-Peeling als auch beim Ultraschall und bei der Radiofrequenz wird die Emission der Welle nicht unterbrochen, was die Behandlung verstärkt, mehr Wärme im behandelten Bereich erzeugt und die Durchblutung erhöht.

Gepulst: Die Wellenemission wird in Form von Pulsen unterbrochen, so dass die Emission geringer ist, dies reduziert die Wirkung auf die Haut und ermöglicht das Arbeiten mit höheren Leistungen. Wird auch für Bereiche verwendet, in denen das Knochengewebe stärker ausgeprägt ist.

Die Hydrodermabrasion ist eine weniger invasive Art der Tiefenreinigung, bei der wir mit Wasserdruck abgestorbene Haut entfernen und sie mit reinigenden und feuchtigkeitsspendenden Substanzen versorgen und so die Qualität der Haut verbessern. Aufgrund seiner tiefen Reichweite ist eine ideale Behandlung für alle Hauttypen, insbesondere: trockene Haut, Haut mit Mitessern, Unreinheiten, Haut ohne starke Akne. Die Kombination aus Befeuchtung, Peeling und sehr sanfter Absaugung entfernt effektiv Unreinheiten und versorgt die Haut gleichzeitig mit Sauerstoff. Während der Behandlung gibt das Gerät über die Handstücke einen Substanzfluss ab, die die Haut nähren und reinigen, feine Linien und Fältchen glätten und die Elastizität verbessern. Bei jedem Schritt wird die Haut mehrmals gepeelt und befeuchtet. Dabei wird ein sehr sanfter Sog verwendet, der Unreinheiten und Mitesser entfernt. Die Düsen sind spiralförmig und eignen sich daher hervorragend zum Lösen von Unreinheiten und zum Einschleusen von Produkten, die von der Haut sehr gut verwertet werden. Einer der bedeutendsten Unterschiede zur Mikrodermabrasion ist, dass dieses Peeling mit nasser Haut durchgeführt wird, und da diese Substanzen während des Verfahrens eingearbeitet werden, gereinigt wird, was eine Tiefenreinigung der Poren erzeugt, während Substanzen eingearbeitet werden, die nähren und auch eine wichtige Funktion für die Haut erfüllen, indem sie den Zellumsatz fördern.



Die Hydrodermabrasion

Sein auf Wasser basierender Wirkmechanismus ermöglicht uns eine Tiefenreinigung der Hautoberfläche und eine effektivere Aufnahme der Moleküle der verwendeten Produkte. Es ist eine intensive Behandlung zur Zellerneuerung und Ernährung, die ein unvergleichliches Strahlen auf der Haut hinterlässt. Mit drei grundlegenden Schritten:

- Reinigung der Haut.
- Beseitigung von abgestorbener Haut und Hornschicht.
- Befeuchtung und Sauerstoffzufuhr.

Hydrodermabrasion

Wählen Sie die zu verwendende Düse aus und stellen Sie dann die Saugintensität und die Wassermenge ein, je nach Haut des Patienten und der zu behandelnden Fläche.

Dieses Gerät hat mehrere Düsen, die je nach Behandlung gewechselt werden können.

Wir werden auch die Flasche des zu verwendenden Produkts auswählen:

A: Gesichtereinigungsprodukt.

B: Intensive Behandlung je nach Hauttyp.

C: Geräte-Reinigungsmittel.


D: Sauerstoffhaltiges Produkt.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, qualitativ hochwertige Produkte zu verwenden, die für die Hydrafacial-Behandlung geeignet sind. Je nach Präsentation des Produkts kann es in Wasser verdünnt werden oder nicht. Ideal ist es, mit der richtigen Menge des Produkts zu arbeiten, um es nicht zu verschwenden, für eine vollständige Behandlung können Sie 50ml konzentriertes Produkt und 50ml Wasser verwenden. Lassen Sie das Produkt vor allem nicht über mehrere Tage im Gerät liegen, die Angaben sind herstellerabhängig.

Setzen Sie die hinteren und vorderen Behälter ein. Wenn Sie die hinteren Behälter trennen wollen, müssen Sie diese abschrauben. Für die vorderen müssen Sie zuerst die obere Taste drücken, dann können Sie sie entfernen.

Wählen Sie denn Behälter entsprechend dem zu verwendenden Produkt mit dem mittleren Rad auf dem gewünschten Flaschenbuchstaben.

Reinigen Sie die Behälter, bevor Sie sie mit Schönheitsprodukten befüllen. Wenn Sie sie nach einer Behandlung zur Reinigung entleeren müssen, stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht läuft, da das Produkt in das Gerät gelangen und dessen Komponenten beschädigen könnte.

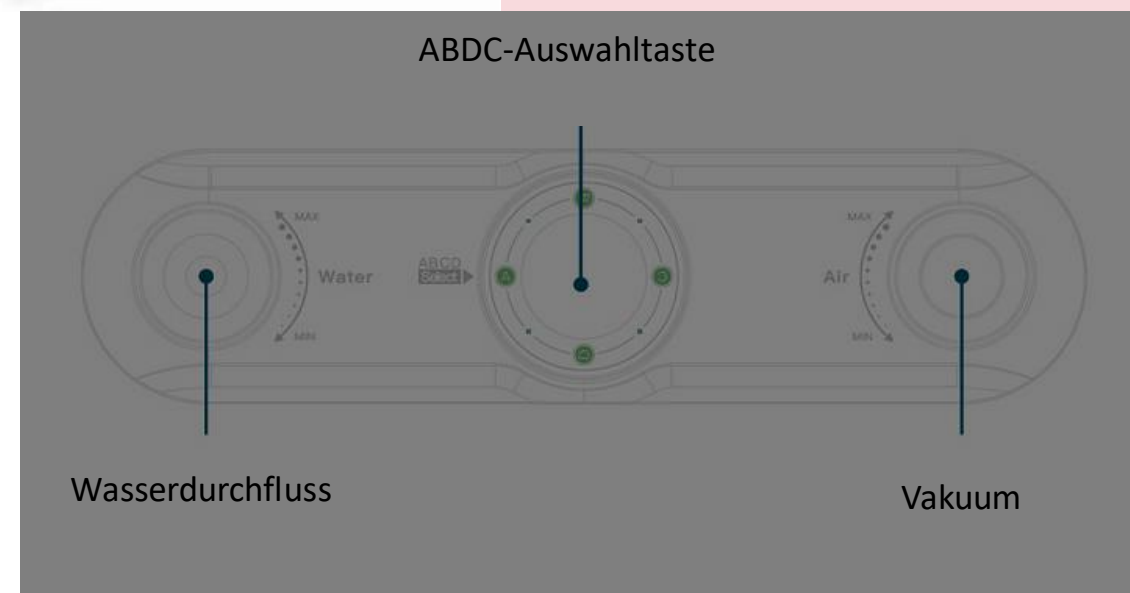

Ultraschall Peeling

Die Behandlung dient der Tiefenreinigung der Haut, wobei abgestorbene Zellen und die Hornschicht entfernt werden; mit Hilfe eines Spatels, der Ultraschallwellen erzeugt und Vibrationen erzeugt, die in Kontakt mit dem Gewebe helfen, alle Rückstände zu ziehen, sowie die Stimulation der Haut zu begünstigen.

Scrubber (Ultraschall-Peeling) Wählen Sie die Behandlungszeit, stellen Sie die Intensität von 1 bis 10 mit den Pfeilen ein und wählen Sie die Art der Welle mit den "MODE"-Tasten: Die Verwendung der kontinuierlichen Welle (links) wird für Behandlungen von dickerem Gewebe empfohlen, während die gepulste Welle (rechts) ideal für empfindlichere Bereiche und dünneres Gewebe ist. Halten Sie gleichzeitig die Seitentasten am Spatel gedrückt und positionieren Sie den Spatel in einem Winkel von 45°. Die Behandlungszeit beträgt ca. 10-15 Minuten.

Ultraschall

Ultraschall-Gesichtsbehandlung 1Mhz, nicht-invasive und schmerzlose Methode der Ultraschallwellen, die bei Kontakt mit der Haut ihre Temperatur erhöht und eine direkte Wirkung auf das Gewebe hat, fördert die Freisetzung und Beseitigung von Fettzellen, verbessert die Ernährung und Sauerstoffversorgung des Gewebes, aktiviert den venösen Kreislauf, da es die Durchblutung vor allem auf der Ebene der Haut verbessert, wird häufig für postoperative Behandlungen, Fibrose, Ernährung und Sauerstoffversorgung der Haut verwendet, da es die Durchlässigkeit der Membran und die Regenerationsfähigkeit der Gewebe erhöht.

Kälte- Hammer

Geeignet nach Hautverjüngungsbehandlungen, um den Tonus zu verbessern und die Empfindlichkeit zu reduzieren. Es ist sehr vorteilhaft nach Dermabrasionsbehandlungen, da es hilft, die Poren zu straffen, die Haut weich zu machen, zu beruhigen, zu reparieren und Rötungen und Spannungen zu reduzieren.

Bipolare Radiofrequenz

Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein Radiofrequenzgerät mit zwei Elektroden, durch die der elektromagnetische Strom zirkuliert, der die Dermis erreicht und eine Aktivierung in den Kollagenfasern erzeugt, wodurch sich diese zusammenziehen, vergrößern und somit die Elastizität der Haut verbessern. Die Temperaturerhöhung dieser bipolaren Radiofrequenz von 2 MHz ist sehr oberflächlich, deshalb ist sie besonders zur Korrektur von Erschlaffungen im Gesicht und am Hals geeignet.

Sauerstoff-Spray

Diese Behandlung wurde entwickelt, um die Gesichtshaut zu nähren. Die Technik, die Epidermis mit Vitaminen, Mineralien und essentiellen Nährstoffen zu besprühen, bewirkt, dass die Moleküle des Produkts, das die Haut aufnehmen soll, auf viel direktere Weise eindringen und eine weichere, glattere und super befeuchtete Haut erzeugen.

Protokoll

Vor Beginn der Behandlung sollte eine vorherige Beurteilung der Gesichtshaut erfolgen, es wird empfohlen, eine fotografische Aufzeichnung zu machen.

- Entfernen Sie Make-up oder jede andere Art von Produkt von der Haut.
- Zum Öffnen der Poren können vorher Dampf oder heiße Kompressen verwendet werden.
- **Skin Scrubber:** ist die perfekte Ergänzung für diese Art der Reinigung. Wir empfehlen, aufsteigend bis Leistungstufe 5 für die Reinigung zu erreichen, im Dauerbetrieb. Das Paddle dieses Geräts sollte ohne Handschuhe und auf beiden Seiten verwendet werden, um es bedienen zu können (+ und - Pol). Den Spatel je nach Hautoberfläche 1 bis 2 Mal über das Gesicht führen, erst die eine, dann die andere Seite, immer aufsteigend. Die Haut sollte mit einem Tonikum, Reinigungsmittel oder Entkalker leicht befeuchtet werden..



Protokoll

Hydrodermabrasion

Der Kopf wird gewechselt und die Saugintensität wird entsprechend der Haut des Kunden und dem zu behandelnden Bereich eingestellt. Wählen Sie entsprechend der Behandlung:

Behälter A, (Gesichtsreinigung), wir empfehlen Tiefenreinigungsprodukte, die eine keratolytische oder entkalkende Wirkung haben, Produkte mit Wirkstoffen wie Milchsäure, Allantoin (Entfernung abgestorbener Zellen), was wir in diesem Schritt suchen, ist Hautregeneration und Tiefenreinigung. Stellen Sie die Ansaugung und die Wassermenge ein, setzen Sie die Düse zum Gebrauch ein. Machen Sie kurze und lange Durchgänge, gleichmäßige Berührungen, immer aufsteigend, betonen Sie die Arbeit in dem Bereich mit mehr Mitessern, Kinn, T-Zone.

Protokoll

Hydrodermabrasion

Behälter C: Es ist wichtig, die Geräte zwischen den einzelnen Schritten zu reinigen, wozu der Behälter C mit einer desinfizierenden Substanz verwendet wird. Arbeiten Sie mit einer Substanz, die das Gerät reinigt, damit später ein anderes Produkt verwendet werden kann. Diese Substanz kann eine bakterizide Lösung, ein Reinigungsmittel, ein Bakterien-, Viren- und Pilzentferner sein.

Gehen Sie bei jedem Behälterwechsel wie folgt vor: Drücken Sie zunächst einige Sekunden lang mit dem Finger auf die Düse und wechseln Sie dann von Flasche A zu C. Setzen Sie dann die maximale Saugkraft und eine höhere Wasserintensität ein (wechseln Sie ggf. die Düse). Zum Schluss legen Sie Ihren Daumen auf das Mundstück und verschließen Sie es für 5-10 Sekunden. Dann befreien und den Vorgang 3 bis 4 Mal wiederholen, um Rückstände des vorherigen Produkts zu entfernen.

Protokoll

Hydrodermabrasion

Behälter B: sobald das Gerät gereinigt ist, fahren wir mit dem nächsten Schritt fort, wir wechseln die Düse und arbeiten mit dem Behälter B, für diesen Schritt werden wir ein Produkt zur Befeuchtung und Regeneration der Haut verwenden. Wir empfehlen die Verwendung von Produkten mit den folgenden Wirkstoffen: Salicylsäure (entzündungshemmende und regenerierende Wirkung). Panthenol (hervorragend zur Anregung der Zellneubildung). Fahren Sie auf die gleiche Weise von unten nach oben fort, indem Sie kurze Durchgänge machen und eine Seite des Gesichts und die andere bearbeiten. Danach reinigen wir die Geräte wieder mit Behälter C.

Behälter D: (H₂O₂) Sobald das Gerät gereinigt ist, fahren wir mit dem nächsten Schritt fort, **Behälter D**. In den hinteren Behälter geben wir ein sauerstoffspendendes oder nährendes Produkt, da dies der letzte Schritt der Reinigung sein wird. So dass wir spezifische Nährstoffe für jeden Hauttyp bereitstellen, je nach dem Protokoll das wir verwenden und den Ergebnissen die wir erreichen wollen. Wir empfehlen die Verwendung eines Produkts mit den folgenden Wirkstoffen: Produkt mit Hyaluronsäure (sorgt für Elastizität und Hydratation), Aloe vera (feuchtigkeitsspendend und fördert die Heilung), Peptide (stimulieren die Produktion von Kollagen).

Protokoll

Sauerstoffspray: Legen Sie das Produkt, das Sie auf die Haut auftragen möchten, in den Glasbehälter, der in das Handstück passt, es kann eine Ampulle sein, ein sauerstoffhaltiges Produkt. Achten Sie beim Wechseln der Düsen darauf, dass diese gut platziert sind und keine Undichtigkeiten auftreten, sprühen Sie von unten nach oben, ebenso von einer Seite zur anderen. Reinigen Sie das Gerät anschließend erneut mit Behälter C. Die Empfehlungen der Wirkstoffe der Produkte sind nur Vorschläge, ideal ist, dass der Fachmann ein Produkthaus auswählt, das mit diesem Gerät arbeitet.

Waste liquid: In diesen Behälter werden keine Produkte gegeben, sondern nur die Reste aller Flüssigkeiten gesammelt, es ist wichtig, ihn am Ende jeder Behandlung zu leeren.

Radiofrequenz: wir verwenden leitfähiges Gel, die empfohlene Intensität ist 6, immer nach der Toleranz des Kunden, kontinuierlich, Aufwärts- und Kreisbewegungen, ca. 10 bis 15 Minuten auf dem ganzen Gesicht, eine Seite und die andere.

Kälte-Hammer: Gel oder Tonic auflegen, 10 Minuten lang aufwärts anwenden.

Ultraschall: mit Gel und einem speziellen Produkt für Ultraschall arbeiten, mit Wirkstoffen, die die Behandlung verbessern, die empfohlene Intensität ist 4 bis 6, kontinuierlicher oder gepulster Modus. Führen Sie Aufwärts- und Kreisbewegungen aus, 10 bis 15 Min. empfohlen.

Nach der Behandlung können wir eine Maske nach den Bedürfnissen der Haut des Kunden auftragen, ca. 15 bis 20 min.

Vorteile der Hydrafacial HIGHTECH WKB005

- Reinigt tiefenwirksam.
- Hält die Haut weich, feucht und leuchtend.
- Verbessert Anzeichen der Hautalterung, wie Falten und feine Linien.
- Verbessert die Festigkeit der Haut.
- Gleicht den Hautton aus.
- Reduziert das Erscheinungsbild von vergrößerten Poren.
- Behandelt Akne und Narben.

Hinweise Hydrofacial HIGHTECH WKB005

Eine Hydrofacial-Behandlung kann jeden Monat oder anderthalb Monate durchgeführt werden, aber auch jedes Mal, wenn Sie Ihre Haut zum Strahlen bringen wollen, z. B. bei einem besonderen Ereignis. In der Regel 30-60 Minuten Behandlung, unter den Hinweisen sind folgende:

- Verbesserung des Tones.
- Bekämpfung der ungleichmäßigen Textur und Fältchen.
- Tiefenreinigung des Gesichts.
- Reinigung der Poren.
- Regeneration von Kollagen.
- Trockenheit.
- Verbesserung der Zeichen der Hautalterung.
- Akne.
- Verbesserung der Hautfeuchtigkeit und beseitigung vom Erscheinungsbild von feinen Linien.
- Hyperpigmentierung und Reduzierung von Flecken, Sonnenflecken.
- Kontrolle von Fett und Mitessern.
- Geeignet für alle Hauttypen.



Gegenanzeige

- Schwangerschaft und Stillen.
- Sehr empfindliche Haut.
- Rosacea.
- Seborrhische Dermatitis.
- Kürzliche Verletzungen, Haut mit Wunden, Infektionen, Schuppenflechte, Dermatitis oder ungesunde Haut.
- Rasierte oder enthaarte Haut.
- Bei Haut, die kürzlich ein tiefes chemisches Peeling, Verbrennungen oder eine Operation erlitten hat.
- Veränderungen in der Hautsensibilität, nicht in der Lage, zwischen Kälte und Wärme zu unterscheiden.
- Schlechte Heilung.
- Vorgeschichte von Keloiden.
- Bereiche mit Tätowierungen im Gesicht oder Permanent Make-up.
- Hautbedingungen.
- Metallische Implantate.
- Infektiöse Prozesse oder Pilze.
- Schwere Akne.
- Vorsicht bei der Arbeit an Geweben mit eingespritzten Fillern, und bei Kunden, die vor kurzem mit Hyaluronsäure, Botox oder einem anderen Produkt unterspritzt wurden, sollten Sie eine angemessene Zeit warten, um mit Hydrafacial behandelt zu werden..



Pflege

- Die Verwendung von Sonnenschutzmitteln wird nach jeder Sitzung empfohlen.
- Trinken Sie 1,5 bis 2 Liter Wasser pro Tag, um die Haut befeuchtet zu halten.
- Pflegen Sie Ihre Haut täglich, achten Sie auf Sauberkeit und verwenden Sie Cremes, die für Ihren Hauttyp geeignet sind.
- Da die Gesichtshaut dünner ist, ist sie sehr empfindlich und birgt ein höheres Verbrennungsrisiko, so dass zu keiner Zeit eines der Handstücke angelassen werden sollte.
- In einigen Fällen kann die Behandlung eine Rötung der Haut, Reizung und Schwellung verursachen, die sich mit der Zeit bessern.
- Es ist wichtig, die Handstücke richtig zu reinigen und die Flaschen ohne Produkt leer zu lassen. Die Düsen können mit einer antiseptischen Lösung gereinigt oder sogar in Wasser eingeweicht werden.

Achtung

- Diese Behandlung ist nicht ohne Risiko, weshalb sie von einer professionellen Kosmetikerin durchgeführt werden muss.
- Der Kunde und der Profi müssen darauf achten, dass sie während der Behandlung keine metallischen Gegenstände bei sich tragen.
- Die Verwendung von Isolierhandschuhen durch den Profi wird empfohlen.
- Vergessen Sie nicht, eine ausreichende Menge des Gels aufzutragen.
- Befolgen Sie stets die Empfehlungen der Fachleute des Kosmetikinstitutes.
- Versuchen Sie unter keinen Umständen, die internen Komponenten oder das Zubehör der Maschine zu öffnen oder zu inspizieren. Wenn eine Inspektion erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder einen qualifizierten Techniker.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in feuchten oder unzureichend belüfteten Umgebungen, wie z. B. in Wasserbereichen, Badezimmern usw., um Schäden an den elektrischen Komponenten Ihres Geräts zu vermeiden.

Warnungen

- Benutzen Sie das Gerät niemals im Freien, schlechte Wetterbedingungen können zu Schäden führen.
- Wenn das elektrische Kabel gebrochen ist, bitten Sie einen Fachmann, Ihnen ein anderes zu besorgen und es zu ersetzen, um Risiken zu vermeiden, oder wenden Sie sich an den Lieferanten.
- Am Ende der Sitzung ist es wichtig, die Handstücke nach jeder Behandlung mit einem antiseptischen Produkt zu reinigen.
- Überprüfen Sie während der Behandlung mit dem Kunden, ob die Temperatur angemessen ist.
- Es wird empfohlen, dass der Kunde vor und nach der Behandlung viel Wasser trinkt.
- Füllen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät.
- Seien Sie vorsichtig bei elektrischen Anschlüssen.
- Lassen Sie die Demontage und Montage des Gerätes durch Fachpersonal durchführen.
- Prüfen Sie bei einer Störung des Geräts sorgfältig alle Anschlüsse und wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Servicetechniker.