

RIORES®

品番：eye-fresher-lana

取扱説明書

2021.05刷  
Ver.202105

# Lana

## EYE FRESHER

アイフレッシャーラナ



**コンタクトレンズを装着したままでの使用は、  
眼球を傷つける恐れがあるためおやめください。**

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。  
安全にご使用いただくためにも、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。  
また、読み終えました取扱説明書は大切に保管してください。

 SOMA FACTORY

発売元:株式会社そうまファクトリー  
〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町7-1 川崎日進町ビルディング10F

## 安全にお使いいただくために

使用する前に必ず取扱説明書及び注意に関する全ての内容をよくお読みになり、正しく使用してください。

### ⚠ 注意

付属しているUSB電源アダプターとUSBケーブル以外は使用しないでください。  
本製品の定格入力(DC5V、1.0A)を超えたUSB電源アダプターを使用すると、  
機器の誤作動や故障、発煙の恐れがございます。

- 本製品は健康な方を対象とした製品です。現在医師による目、皮膚の治療を受けている方、又は目や周囲に怪我や不安のある方は使用をお控えください。
- 本製品を本来の目的以外で使用しないでください。
- 本製品は日本国内での使用を想定しております。国外では使用しないでください。
- 安全のため、小さいお子様への使用はおやめください。
- 本製品は家庭内での使用を想定した機器ですので、公共の場などの大人数での使用には適していません。ご家庭以外の場所で使用しないでください。
- 本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。
- 使用中に体調に異変(吐き気・めまい・動悸・痛み等)を感じた場合すぐに使用を中止し、心配な場合は直ちに病院での診察を受けてください。
- 本製品の使用推奨時間は最大15分です。過度に使用しないでください。
- お手入れの際は必ず電源をオフにしてください。
- 本製品を分解または改造しないでください。感電・発火・機器の誤作動が起こる恐れがあります。
- 使用後は必ず電源をオフにし、安全な場所に保管してください。
- 作動中に異音・異臭・本体への傷が見られた場合はすぐに使用を中止してください。また、充電中に落雷や停電、水漏れが発生した場合は感電の恐れがあるため、直ちに使用を中止し機器本体から離れてください。
- 長期間使用しない場合は、高温・多湿な場所を避け、日の当たらない安全な場所に保管してください。
- 濡れた手で本体または充電用USBケーブルなどを触らないでください。
- 充電用USBケーブルを無理に曲げないでください。万が一破損した場合は充電を中止し、電源をオフにしてください。
- 付属の充電用USBケーブルとUSB電源アダプターは本製品専用です。他社の製品やその他の用途には使用しないでください。
- 使用後は本体が熱を持つことがあります。電源を切った後で十分に冷えてから保管してください。
- 充電の際、電子レンジやエアコン等の大きな電力を伴う機器との配線の共有はお止めください。発火の原因となります。
- 本製品を火気、高温、多湿、直射日光の当たる場所、埃の多い場所や火気の近くに置かないでください。
- リチウムイオン電池の爆発や火災の恐れがありますので、本製品を火中に投下しないでください。
- 本製品を廃棄するときには、各自治体の取り決めに従って廃棄またはリサイクルしてください。
- 本製品において発生した事故、損害などの責任は一切負いかねます。ご了承ください。

## 商品仕様

※商品の仕様や外見は予告なく変更となる場合があります。

本体サイズ	約21cm×8cm×5cm
収納時サイズ	約15.5cm×8cm×10.5cm
重量	本体:約344g
素材	フレーム部分:ABS樹脂 革部分:ナノシリコン 銀フレーム:ABS樹脂、銀メッキ バンド部分:ナイロン
推奨年齢	18歳～
生産国	中国
USB電源アダプター	定格入力:100~125V、50/60Hz、0.4A 定格出力:DC5V、1.0A
・充電方法:USB充電式(USB Type-C) ・定格入力:DC5V、1.0A ・本体電源:リチウムイオン二次電池(DC3.7V、1650mAh) ・定格消費電力:4.5W	

## 梱包品


※付属品をお確かめください。



本体



USBケーブル  
(Type-C)

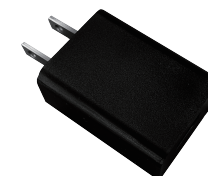

USB電源アダプター



収納袋




取扱説明書

## パーツの名称

右サイド



表示パネル

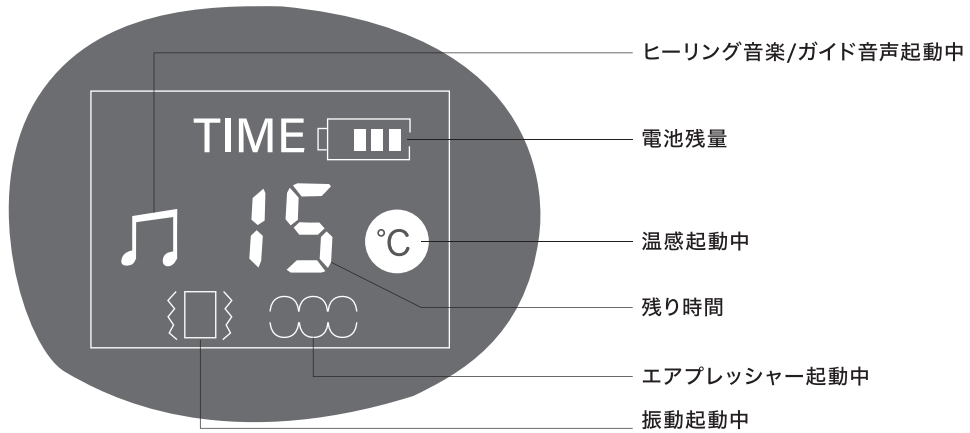

左サイド



## 装着方法

電源ボタンがある方を右にし、バックルを調節し固定バンドの長さを頭の大きさに合わせてしっかりフィットするように取り付けます。

**⚠ 装着時は以下の点にお気をつけください。**


固定バンドを強く締め付け過ぎないでください。眼球を圧迫し目に悪影響を及ぼす恐れがございます。  
アイフレッシャーラナ本体が頭に完全に固定された状態でご使用ください。




## 充電方法

**⚠ 付属しているUSB電源アダプターとUSBケーブル以外は使用しないでください。**

本製品の定格入力(DC5V、1.0A)を超えたUSB電源アダプターを使用すると、機器の誤作動や故障、発煙の恐れがございます。

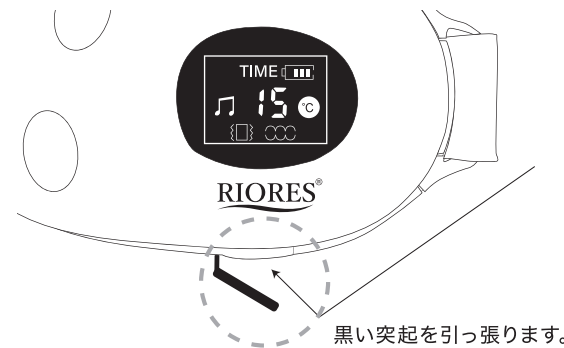


- 充電を開始すると表示パネルのバッテリーアイコン  が点滅します。
- 約4時間でフル充電になります。
- フル充電で一回の使用時間15分を約7~8回使用する事が出来ます。

※使用する場所の気温によってバッテリーの消費量が違う為、回数は異なる恐れがございます。


## 操作方法

※モードは15分で自動的に終了します。

### 電源オン

 ボタンを約3秒以上長押しすると、電源がオンになり、スペシャルケアモードがスタートします。




### モード選択

起動後、再度  を押しとモードを選択できます。

## 5つのモード

スペシャルケアモード    

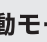

温感+振動+空気圧+ヒーリング音楽

エアー振動モード   

振動+空気圧+ヒーリング音楽

エアーホットアイマスクモード   

温感+空気圧+ヒーリング音楽

エアーモード  


空気圧+ヒーリング音楽

ホットアイマスクモード  


温感+ヒーリング音楽

※ヒーリング音楽をオフにしたい場合はP5を参照。


### 電源オフ


 ボタンを約3秒以上長押しすると電源がオフになります。

## 空気圧調整

 マークが表示されるモードのみ適用

空気圧が含まれるモードのみ、内部のエアーバックを調整し、空気圧の負荷を変更できます。

モードを運動中に  ボタンを押すとハイプレッシャーとロープレッシャーを選択できます。

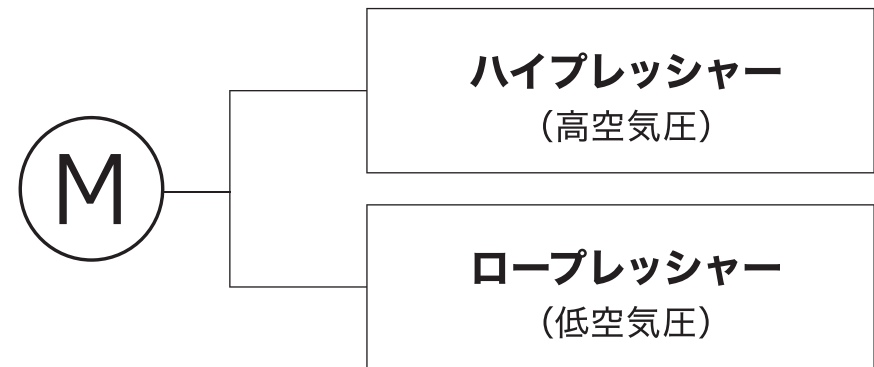

### 対応モード

- スペシャルケアモード
- エアー振動モード
- エアーホットアイマスクモード
- エアーモード

## 温度調整


°C マークが表示されるモードのみ適用

温感が含まれるモードのみ、内部のヒーターを調整し、温度の変更できます。

モードを運動中に °C ボタンを押すとヒートアップとヒートダウンを選択できます。

※温度はおよそ38°C~42°C間で調節されます。

※使用環境やバッテリーの状態により、温度が変動することがございます。

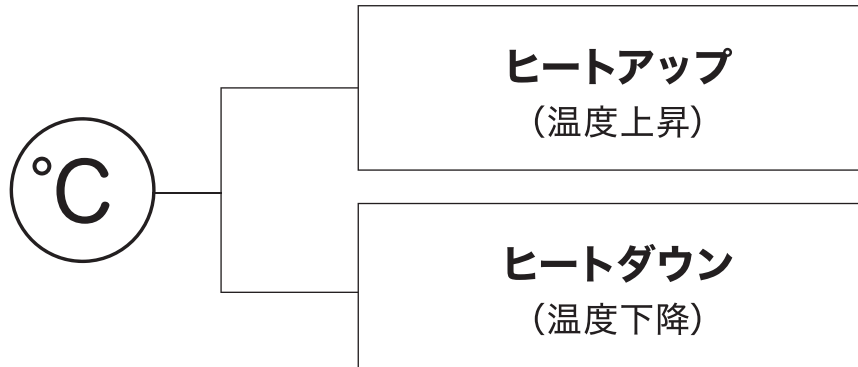

## 対応モード

●スペシャルケアモード ●エアーホットアイマスクモード ●  
ホットアイマスクモード

## 音量調節

°C ボタン長押しで音量が徐々に上がり、M ボタン長押しで徐々に下がります。お好みの音量になったところで長押ししている手を離してください。

※音量を設定し、パワーオフになった後、①で新しくスタートすると以前設定した音量で起動します。ただし、一度音量を下まで設定しても再起動した際はモードをお知らせするため少量の音量でスタートします。

## 音楽変更

M ボタンを素早く2回押すと次の曲が再生され、°C ボタンを素早く2回押すと一つ前の音楽に戻ります。

## 常時音楽不要の場合

公共の場で使用したいなどで音楽が不要な場合は...

① ボタンを2回素早く押すと音楽が停止し、再度素早く2回押すと再生されます。

※音楽を停止した状態でモードを変更してもガイド音声は流れます。ガイド音声も無くしたい場合は停止せず、音量を一番下まで下げてください。

## お手入れ方法

水またはアルコール配合のスプレーを布に湿らせて目にあたる部分を軽く拭き、そのあとに乾いた布で湿り気が残らないように残った水分を拭き取ってください。

肌が触れる裏面箇所は定期的に清掃し、清潔を保ってください。



- 塗装の剥離や機器の故障につながる恐れがありますので、洗剤やアルコールなどが含まれたものを表面部分(操作ボタンがある面)には使用しないでください。
- 水や液体に本体を浸したりしないでください。

## 保管方法

- 本製品を長期間使用しない場合は乾燥した風通しの良い日陰に保管してください。
- 本製品を使用されない場合でも月に一度は充電を行ってください。
- 充電しないまま長期間放置するとバッテリーの消耗が早まりますのでご注意ください。
- 長時間充電をしたまま放置しておくとも内部のバッテリーが劣化します。充電したまま放置しないでください。

### 折りたたんでコンパクトに収納可能

専用収納袋が付属。  
かさばらないので持ち運びにもとても便利です。



## 保証について

初期不良または自然故障があった場合、製品が到着してから保証期間内であれば返金・交換の保証対象となりますので、お問い合わせ先にご連絡ください。保証期間を過ぎてしまった場合、またはお客様側で分解や改造を行ったものは対応致しかねます。ご了承ください。

保証期間	1年間		
製品到着年月日	年	月	日
お問い合わせ先	【店舗で購入されたお客様】		【インターネット等で購入されたお客様】
	ご購入された販売店へご連絡ください。		注文番号と店舗名を控え、 ご購入された販売店へご連絡ください。