

# ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものではありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。


※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

**家庭用 添付文書**

フットタタキトントン  
**EM-2706**  
**取扱説明書**

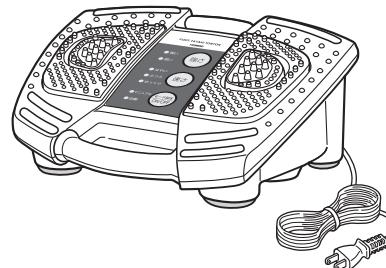

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。  
業務用などにご使用にならないでください。

つながる  
お得なコンテンツ  
製品登録・facebook



製品登録でサポートがスムーズに

● もくじ	
安全上のご注意	1・2
使用目的、効能・効果	3
各部の名称	
準備	4
使いかた	5・6
お手入れと保管	7
こんなときは	
アフターサービス	8
仕様	

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。  
必ず記入をお受けください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

**警告** 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

**注意** 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

は、してはいけない「禁止」の内容です。

は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

## 警告



医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談の上ご使用ください。

事故や体調不良をおこす恐れがあります。

- (1)ベースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- (2)悪性腫瘍のある人 (3)心臓に障害のある人 (4)妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- (5)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- (6)マッサージする部位の創傷や、疾患から生じるむくみや疼痛のある人
- (7)安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき
- (8)病気などで熱の高い人(38℃以上)
  - 急性炎症症状【倦怠感、寒戻り、血圧変動など】の強い時期 ●衰弱しているとき
- (9)骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど、急性疼痛性疾患の人
- (10)背骨に異常のある人、背骨が左右に曲がっている人 (11)けんしょう(腱鞘)炎の人
- (12)上記以外に身体に特に異常を感じているとき



医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。

例: 血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症【皮下組織の炎症を含む】など。症状を悪化させる恐れがあります。



本製品を使用しても効果が現れない場合は、医師又は専門家に相談してください。

交流100V以外では使用しないでください。

火災・感電の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだり破損した場合、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

感電やショート、発火、故障の原因になります。電源コードや電源プラグの修理はお買い求めの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



電源プラグにピンやゴミ、水分などを付着させないでください。

感電やショート、発火の原因になります。



分解・修理・改造は行わないでください。

発火・感電・けがの原因になります。



修理はお買い求めの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。



使用中に身体に異常があらわれたり、感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

事故や体調不良をおこす恐れがあります。



自分で意思表示ができない人、または、操作できない人への使用はおやめください。また、安全に責任を負う人の監視や指示がない限り、補助を必要とする人単独での使用はおやめください。

事故やけがの恐れがあります。



幼児や子供に使用させたり、本製品の上で遊ばせたり、のせたりしないでください。

事故やけがの恐れがあります。



アクセサリーなど装飾品をつけたまま使用しないでください。

事故やけがの恐れがあります。



本製品は足用のマッサージ器です。足以外の部位へは使用しないでください。また、マッサージ以外の用途に使用しないでください。

事故やけがの恐れがあります。



使用前にたたきパッドの破れのないことを確認してください。

外れたり、破れた場合は直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き修理を依頼してください。

けがや感電の原因になります。



お願い

## 注意



電源プラグは、容易に外れないように、確実に最後まで差し込んでください。  
感電、ショート、発火の原因になります。



スイッチやタイマーが正常に動作することを確かめてから使用してください。  
けがの原因になります。



他の治療器と同時に使用しないでください。  
体調不良の原因になります。



頭部・首・骨部・関節部には使用しないでください。また、治療中の患部には使用しないでください。  
事故やけがの原因になります。



マッサージは1回15分以内にしてください。  
また、同一箇所への連続使用はおさけください。

長時間の使用は筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果になります。



使い始めは弱い刺激でマッサージしてください。  
けがや体調不良の原因になります。



お年寄りや虚弱体質の人が使用する場合、始めは使用時間を短くしてください。  
体調不良の原因になります。



動かない場合や異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼してください。  
感電や発火の原因になります。



停電のときは直ちに電源スイッチを「切」の位置に戻し、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
停電から復帰したときに事故やけがの恐れがあります。



使用後は、電源スイッチを「切」の位置に戻したあと、電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



電源プラグを抜き差しするときは、ぬれた手で触ったり、コードを引っ張ったりしないで、必ずプラグ部を持って抜き差してください。  
感電やショート、発火の原因になります。



浴室など湿気の多い場所で使用しないでください。  
また、水や湯をかけないでください。  
感電や故障の原因になります。



ストーブなどの熱いものの近くや、布団や電気毛布、コタツの中では使用しないでください。  
火災や故障の原因になります。



風呂上がり直後や、スポーツなど、身体がぬれたままの状態では、使用しないでください。  
また、素肌では使用しないでください。  
事故や故障の原因になります。



使用中に眠ったりしないでください。  
また、飲酒後の使用はしないでください。  
事故やけがの恐れがあります。



幼児や子供の手の届くところでは、使用しないでください。  
事故やけがの原因になります。



使用中、強くあてすぎて、たたき動作を止め続けないでください。  
故障の原因になります。



本体の上で飛びはねたり、立ちながらの使用はしないでください。  
事故やけが、故障の原因になります。



落としたり、踏んだりなどの強い衝撃を与えないでください。  
けがや故障の原因になります。



直射日光のある場所や、重いものを載せたままで放置しないでください。  
色あせ、変形、劣化、故障の原因になります。




お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
感電やけがの原因になります。

# 使用目的、効能・効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用する。

- 疲労の回復
- 血行の促進
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる

# 各部の名称

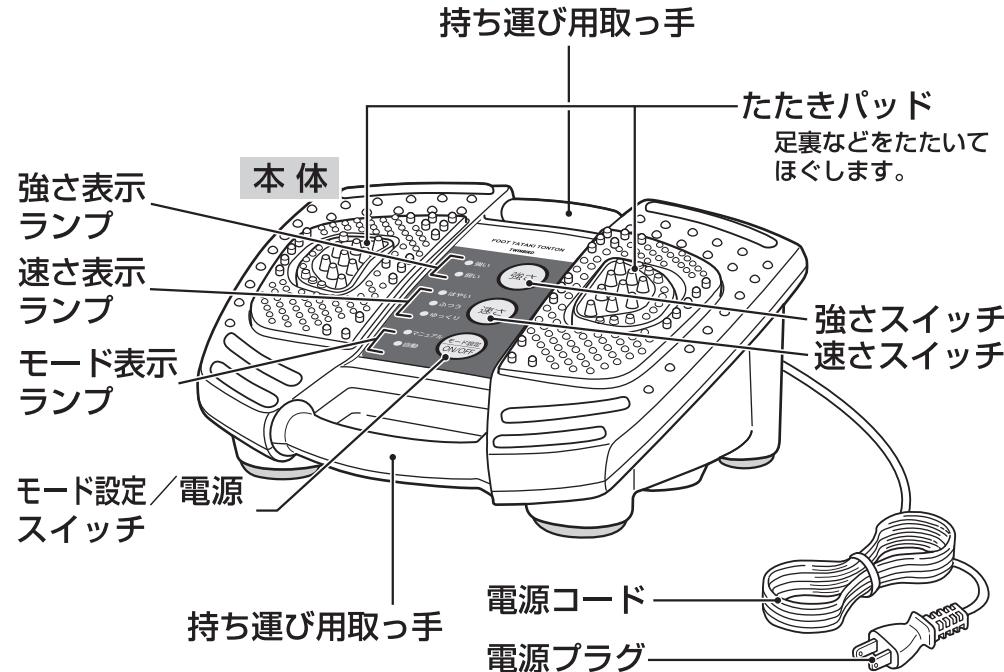

## △警告

医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談の上ご使用ください。  
事故や体調不良をおこす恐れがあります。

- (1)ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- (2)悪性腫瘍のある人
- (3)心臓に障害のある人
- (4)妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- (5)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- (6)マッサージする部位の創傷や、疾患から生じるむくみや疼痛のある人
- (7)安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき
- (8)病気などで熱の高い人(38℃以上)
  - 急性炎症症状【倦怠感・悪寒・血圧変動など】の強い時期 ●衰弱しているとき
- (9)骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど、急性疼痛性疾患の人
- (10)背骨に異常のある人、背骨が左右に曲がっている人
- (11)けんしょう(腱鞘)炎の人
- (12)上記以外に身体に特に異常を感じているとき



# 準備

ご使用中はテレビ等の画面が乱れることがあります。

## 1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。



- 安定性のよい場所に設置します。
- 「モード設定/電源」スイッチが正常に動作するか確認します。

## △警告

〈感電や発火の恐れがあります。〉


- 必ず交流100Vで使用してください。
- 電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

## △注意


- 動かなくなったり、異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検・修理を依頼してください。

## 2. コリ、疲れの部位にあてます。

### 足のうら

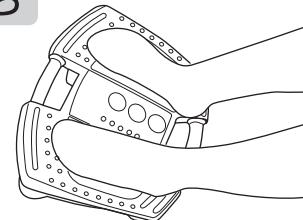

### ふくらはぎ

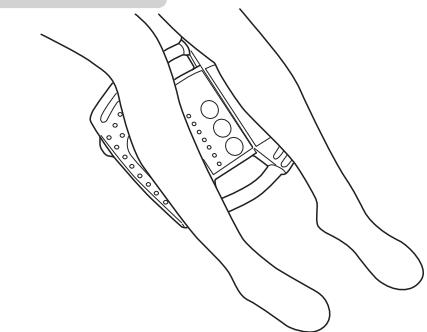

椅子等に座った状態で足をたたきパッドの  
上にのせてください。  
土踏まずを中心に足うら全体をほぐします。

## △注意

〈感電や故障、火災の恐れがあります。〉

- 布団やコタツの中では使用しないでください。

## △注意

- 浴室などの湿気の多い場所や、濡れた足、身体で使用しないでください。

## 動作音についてのお願い

機器の構造と使用環境により、動作音が他の人にご迷惑となる恐れがありますので、以下の点をご注意の上ご使用ください。

〈隣室の方へのご配慮をお願いします。〉

- 深夜のご使用はお避けください。

〈階下の方へのご配慮をお願いします。〉

- 厚めの座布団などを下に敷いてご使用ください。

# 使いかた

## 1. モード設定／電源スイッチを押します。



- モード表示ランプの「自動」が点灯します。電源を入れてから約15分でタイマーが動き、動作が停止します。


## 2. 自動モードかマニュアルモードを選びます。



- 「モード設定／電源」スイッチを押すごとに、「切」→「自動モード」→「マニュアルモード」→「切」の順で切り替わります。

自動モード：自動的にたたきのリズムと「強さ」・「速さ」が変化します。（「強さ」・「速さ」の調節はできません。）  
マニュアルモード：「強さ」・「速さ」を選べます。

## 3. マニュアルモードの強さ、速さを調節します。

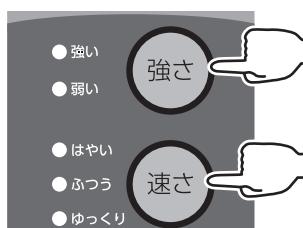

- モード設定／電源スイッチで「マニュアル」モードを選ぶと、強さ表示ランプの「強い」と速さ表示ランプの「はやい」が点灯します。
- 強さスイッチ・速さスイッチを押して、「強さ」・「速さ」を調節します。

### 強さの調節

強さスイッチを押すごとに「強い」→「弱い」→「強い」と切り替わります。

### 速さの調節

速さスイッチを押すごとに「はやい」→「ふつう」→「ゆっくり」と切り替わります。

### △警告

#### 〈事故やけが、故障の恐れがあります。〉

- 本製品は足用のマッサージ器です。足以外の部位へは使用しないでください。  
また、マッサージ以外の用途に使用しないでください。
- 幼児や子供に使わせたり、本体の上で遊ばせないでください。
- たたきパッドがはずれた状態では使用しないでください。
- 使用中や身体に異常があらわれたり感じたときは、直ちに使用を中止し、医師に相談して指示に従ってください。
- 自分で意思表示のできない人、または、自分で操作できない人への使用はおやめください。

### △注意

#### 〈事故やけが、体調不良の恐れがあります。〉

- 本体の上に座ったり、立っての使用はしないでください。
- 頭、おなか、ひじ・ひざなどの関節部には使用しないでください。

# 使いかた(つづき)

### △注意

#### 〈逆効果やけがの恐れあり〉

- マッサージは1回15分以内にしてください。  
また、同一箇所への連続使用はおさけください。

#### 〈故障の恐れあり〉

- 使用中、たたきパッドを強く押しすぎて、たたき動作を止めないでください。
- 定格時間15分以上の連続使用はしないでください。  
連続でご使用になる場合は、30分程度休ませてからご使用ください。

### タイマーについて

電源を入れてから約15分でタイマーがはたらき、動作が停止します。  
安全のため使いすぎを防止するタイマーが内蔵されています。

### 安全装置について

長時間の連続使用や、たたきパッドを強く押しつけすぎたりすることにより、機器の内部温度が上昇すると、安全装置が働きたたき動作が停止します。  
この場合は、電源プラグをコンセントから抜いて1時間程度休ませてからご使用ください。安全装置が解除したときに、たたき動作が再開することがあります。危険です。

- 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
安全装置が解除したときに、たたき動作が再開することがあります。危険です。

## 4. 途中で止めたいときは、モード設定／電源スイッチを押して、モード表示ランプを消します。



## 5. 使用後は必ずスイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜きます。



### △注意

- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず先端の電源プラグを抜いてください。  
感電やショート、発火の原因になります。

# お手入れと保管

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
感電や故障の原因になります。
- 水洗いはしないでください。内部に電気部品がありますので事故や故障の原因になります。

## 本体

- 本体の汚れのお手入れは、水でうすめた食器用中性洗剤少量をやわらかい布に浸して、よくしぼって拭き、その後乾いた布で拭き取ります。
- シンナーやベンジン、スプレー式クリーナー類は絶対使用しないでください。
- たたきパッドにたまたまほこり、ゴミは綿棒などで拭き取ってください。

## 保管のしかた

- 子供の手の届く所に置かないでください。
- 湿度・温度の高いところや直射日光の当たるところに置かないでください。
- 使用後は本体及び付属品の汚れやホコリを取り、湿気の少ないところに保管してください。

# こんなときは

こんなときは？	調べるところ	処置
動かない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。
	スイッチが切れていませんか？	スイッチを入れてください。
	電源コードが傷んでいませんか？	修理を依頼してください。
使用中に停止した	スイッチを入れてから約15分経過していませんか？	内蔵タイマーによって、約15分間で自動的に停止します。 この場合は、スイッチを入れ直してください。
たたき動作が停止した	足等を強く押しつけすぎている。	使用中に強く押しつけすぎたり、長時間の連続使用により内部の温度が上昇した場合、安全装置が作動し停止します。 この場合、電源プラグを抜いて、1時間程度放置して内部の温度を下げた後、ご使用ください。
破損してしまった		修理を依頼してください。

★長年ご使用のフットタタキトントンの点検を！		
<b>愛情点検</b>  ご使用の際 このようないことは ありませんか。	●電気コードや電源プラグが異常に熱い。 ●コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。●いつもより異常に熱くなったり、こげくさい臭いがある。●製品に触れるときビリビリと電気を感じる。 ●自動的に切れないときがある。●その他の異常・故障がある。	故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。 点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

# アフターサービス

## 1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

## 2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。  
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

### ●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。  
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

### ●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。  
お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。



お客様ご自身の修理は大変危険です。  
絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

## 4. 補修用性能部品の最低保有期間

- このフットタタキトントンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

### 〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

### 〈修理部品について〉

修理部品は、部品共化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

### お客様サービス係

0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

# 仕様

販 售 名	フットタタキトントン
形 名	EM-2706
電 源	AC100V 50／60Hz
消 費 電 力	50Hz：19W / 60Hz：14W
定 格 時 間	15分
タ イ マ ー	15分
医 療 機 器 の 分 類	管理医療機器
類 別	機械器具(77)バイブレーター
一 般 的 名 称	家庭用電気マッサージ器(JMDNコード34662000)
医 療 機 器 認 証 番 号	220AGBZX00101A01
製 造 販 売 者	ツインバード工業株式会社 新潟県燕市吉田西太田2084-2
製 造 業 者	Kolvin Industries Limited(中国)
本 体 尺 法	約幅350mm×奥行き295mm×高さ160mm
本 体 質 量	約2.4kg

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。  
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

TB00002588-2  
2021年3月8日(第2版)