



BERLIN EAR GUARD® - „DOPPELDECKER“ OHRSTÖPSEL ZUM SCHLAFEN ANWENDUNGS- & SICHERHEITSHINWEISE

DIE OHRSTÖPSEL ZUM SCHLAFEN SIND DAZU VORGESEHEN, DIE TRÄGERIN / DEN TRÄGER DAS EINSCHLAFEN UND DURCHSCHLAFEN ZU ERLEICHTERN. DIE ANWENDERIN BZW DER ANWENDER SOLLTE DARAUF ACHTEN, DASS DIE OHRSTÖPSEL IM EINKLANG MIT DIESER ANLEITUNG EINGESETZT, ANGEPASST UND GEPFLEGT WERDEN. ANDERE ANWENDUNGSFÄLLE ALS DAS TRAGEN ZUM SCHLAFEN SIND NICHT VORGESEHEN UND DESHALB UNTERSAGT.

EINSETZEN: IM ERSTEN SCHRITT SOLLTEN DIE HÄNDE DESINFIZIERT WERDEN. ANSCHLIEßEND MIT DER EINEN HAND DAS OHR LEICHT HOCHZIEHEN UND MIT DER ANDEREN HAND DEN SCHLAFHILFE - OHRSTÖPSEL VORSICHTIG EINSETZEN, BIS ER ANLIEGEND PASST. DEN OHRSTÖPSEL NICHT ZU TIEF INS OHR EINSETZEN.

DIE ABNEHMBAREN ENDEN DER OHRSTÖPSEL SICHER VOR KINDERN AUFBEWAHREN, DA DIE GEFAHR BESTEHT, DASS DIESE VERSCHLUCKT WERDEN KÖNNTEN.

BERLIN EAR GUARD® HAFTET NICHT FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH UNSACHGEMÄßE ANWENDUNG VERURSACHT WERDEN.

DIE OHRENSTÖPSEL SIND AUSSCHLIEßLICH IN DER SAUBEREN ORIGINALVERPACKUNG AUFZUBEWAHREN. REGELMÄßIG SIND DIE OHRENSTÖPSEL MIT MILDER SEIFE (ZUM BEISPIEL SPÜLMITTEL) UND LAUWARMEM WASSER ZU REINIGEN. NACH DEM REINIGEN SIND SIE MIT EINEM FUSSELFREIEN TUCH ABZUTROCKNEN.

DIE WIEDERVERWENDBAREN OHRENSTÖPSEL ZU SCHLAFEN KÖNNEN CA. 100 MAL WIEDERVERWENDET WERDEN. KEINE VERBINDUNGSSCHNUR BENUTZEN, WENN DAS RISIKO BESTEHT, DASS SICH DIESE VERHEDDERT.

DIESES PRODUKT KANN DURCH BESTIMMTE CHEMISCHE SUBSTANZEN NACHTEILIG BEEINFLUSST WERDEN. HIERMIT ERKLÄRT BERLIN EAR GUARD®, DASS DIE VORLIEGENDE SCHLAFHILFE MIT DER PSA - VERORDNUNG (EU) 2016/425 IN ÜBEREINSTIMMUNG IST. DER GESAMTE TEXT DER EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG IST AUF FOLGENDER WEBSEITE VERFÜGBAR: BERLINEARGUARD.COM/KONFORMITAETSERKLAERUNGEN