

# THESERA O+ Octa Active Anti-Aging Program - Behandlungsprotokoll

## STEP 1: Cleansing

Benutze den **Repose Balance Milk Cleanser** zur gründlichen Hautreinigung vor der Behandlung.

## STEP 2: pH Balance

Sprühe etwas der **Hydroglow Cell Ampoule** gleichmäßig auf das gereinigte Gesicht auf. Die hochkonzentrierte Ampulle zieht schnell in die Haut ein und hydriert die Haut nachhaltig.



Tipp: Die Hydroglow Cell Ampoule ist ein Mehrzweckprodukt, das auch als Toner und Feuchtigkeitsampulle, vor und nach dem Make-up verwendet werden kann.

## STEP 3: Deep Cleansing

Vor diesem Schritt sollte eine Hautanalyse erfolgen um die individuelle Einwirkzeit, der in diesem Schritt verwendeten Produkte, zu bestimmen:

- Einwirkzeit bei empfindlicher Haut: 1 – 1,5 Minuten
- Einwirkzeit bei normaler Haut: 2 – 2,5 Minuten

Mische 2 Pumpstöße des Balance Foam mit einer Pipette (2 ml) des Dermis Balance Peelenser in einer Glasschale zusammen. Trage das Peeling anschließend auf die Haut auf – die Augenpartie sowie die Lippen sollten dabei ausgespart werden.

Nach der Einwirkzeit wird das Produkt mit frischem Wasser und einem Schwamm gründlich von der Haut abgenommen und das Gesicht abgetrocknet.

## STEP 4: Intensive Absorption

**Anwendung ohne THESERA Pen:** Trage eine **Octa Climax Ampoule** auf das Gesicht auf und verteile das Produkt mit einem Silikonpinsel. Klopfe das Produkt anschließend sanft in die Haut ein.

**Anwendung mit THESERA Pen:** Schließe die **Octa Climax Ampoule** an den THESERA Pen an. Die Gesamtmenge einer Ampulle beträgt 2cc. Verwenden Sie 200 Injektionen à 0,01cc.



### Zone 1: Tox-Zone


Die Tox-Zone ist ein Bereich mit tiefen Falten wie die Glabellafalte an der Stirn, die Krähenfüße in der Augenpartie und die Marionetten- sowie Nasolabialfalten in der Mundpartie. Diese Falten werden durch die kontinuierliche und wiederholte Kontraktion der Gesichtsmuskeln verursacht und sind dementsprechend individuell.

➔ Hier sollten ca. 20 Injektionen entlang der Falten gegeben werden.

### Zone 2: Vector-Zone

Die Vector-Zone ist der Punkt, an dem sich der Lippenendpunkt und die Mitte der Pupille treffen. Wenden Sie den THESERA Pen in einem Winkel von 45 Grad zu diesem Punkt linienförmig im gesamten Gesicht an.

➔ Um einen guten Lifting-Effekt zu erreichen sollten hier ca. 100 Injektionen entlang der Linien gesetzt werden.

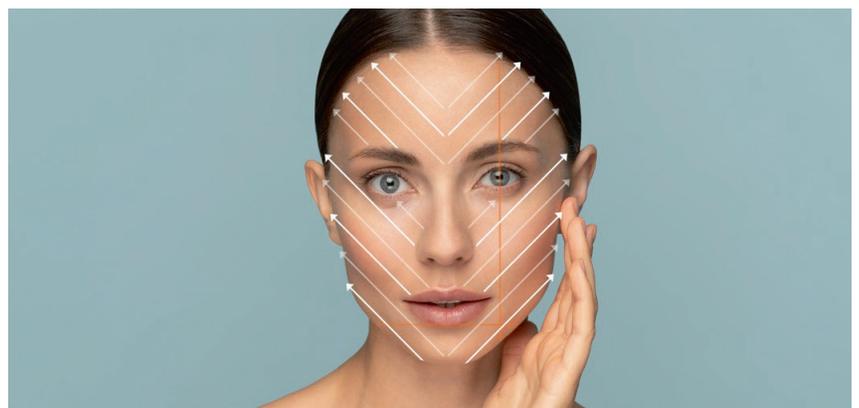



### Zone 3: Lifting-Zone

Wenden Sie den THESERA Pen auch entlang der Lifting-Zone an, um den Lifting-Effekt zu maximieren. Dabei wenden Sie den Pen unterhalb des Kieferknochens, unterhalb des Wangenknochens sowie auf der Wange an. Hierbei wird jeweils in Linien von der Mitte des Gesichts zum Ohr hingearbeitet. Ebenfalls wird auch auf zwei Linien von Kiefer zum Haaransatz direkt vor und hinter dem Ohr gearbeitet. Bei Bedarf kann auch am Haaransatz weiter in Richtung Hinterkopf gearbeitet werden.

➔ Hier sollten ca. 80 Injektionen entlang der Falten gegeben werden.

Das überschüssige Produkt auf der Haut kann im Anschluss vorsichtig verteilt und sanft in die Haut einmassiert werden.

#### STEP 5: Holding Active Ingredients

- Nehme eine **Superbly Shape Holding Mask** aus der Packung und lege diese beiseite. Drücke den restlichen Inhalt der Packung in eine Schale und trage diesen anschließend mit einem Pinsel auf das Gesicht auf.
- Platziere die Tuchmaske nun auf dem Gesicht und lasse diese für 20 min. einwirken. In dieser Zeit kann die Tuchmaske mit einem Spatel oder Silikonpinsel an das Gesicht angedrückt, und die Wirkstoffe in die Haut eingearbeitet, werden.
- Entferne die Maske nach der Einwirkzeit und massiere das übrige Produkt in die Haut ein.

#### STEP 6: Protection

Trage ein paar Tropfen der **7.2 Revital Cell Ampoule** auf das Gesicht auf und arbeite die vitalisierende Ampulle gleichmäßig in die Haut ein.

#### STEP 7: Regeneration

Trage eine kleine Menge der **Hydrating Repair Cream** auf die Haut auf und klopfe diese vorsichtig und gleichmäßig in die Haut ein.

#### STEP 8: Sun Care

Zum Schluss wird ein Sonnenschutz aufgetragen, um die Haut perfekt vor schädlichen Sonnenstrahlen zu schützen. Hierfür wird eine kleine Menge der **Perfect Sun Screen** auf die Haut aufgetragen.

Nur für den professionellen Gebrauch  
Inhalt: 4 Behandlungen/Set

THESERA

THESERA O liefert mit der Octa Climax Ampoule mit 8 bewährten Wirkstoffen die Lösung für die vier häufigsten Hautprobleme: Falten, Trockenheit, vergrößerte Poren und Pigmentierungen. Es wird eine Verbesserung der Hautbeschaffenheit, des Hauttonus, der Hautelastizität sowie der Hautfeuchtigkeit herbeigeführt. Ebenfalls werden dezente Falten verbessert und die Haut erscheint jünger und frischer.



VS



**8** bewährte Wirkstoffe in **einer** Ampulle  
Rundum Pflege für anspruchsvolle Haut

THESERA O