

Kit de test rapide d'ovulation urinaire One Step LH (pour Auto Test)



CE 0123



Description

Ce test rapide d'ovulation urinaire est un test de diagnostic rapide pour la détection qualitative d'hormone lutéinisante (LH) dans l'urine humaine.

Caractéristiques

Interprétation simple et rapide

Boîte de 5 Tests

Spécificité : 100%

Sensibilité : 100%

Fiabilité : 100%

Révèle un pic de LH dès que la concentration de LH dépasse 25mIU/mL



Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

✉ commandes@metzecare.com
☎ 01 88 61 13 86

Caractéristiques (suite)

Reference Metze H112-36U


Fabricant/ Laboratoire Qingdao Hightop Biotech

Conformité CE Directive 98/79/EC on in Vitro Diagnostic Medical Devices (IvDD), Annex IV excluding (4, 6)(List A and B and devices for self-testing) Numero de Certificat No.V1 093780 0004 Rev.01 délivré par le le TUV SÜD, n° d'organisme 0123


Conditionnement 5 Tests par boite | 19*8*4.8cm / boite | 0.120 kgs
200 Boites par carton | 60*39*45cm /carton | 25kg/carton

Contenu de la boite 5 bâtonnets-test
5 sachets d'emballage (comprenant chacun un batonnet test)
Un mode d'emploi

Procédure de Test

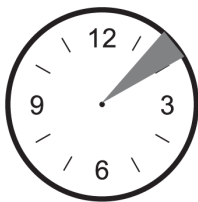


1. Retirer le dispositif de test du sachet scellé
2. Retirer le bouchon puis verser l'urine dans le bâtonnet absorbant du test directement pendant 3 à 5 secondes.
3. Ne pas dépasser la flèche.
4. Recouvrir le bouchon.
5. Lecture des résultats dans les 10 minutes suivant le test. Les résultats sont invalides après 10 minutes. Ne pas lire les résultats après 20 minutes.

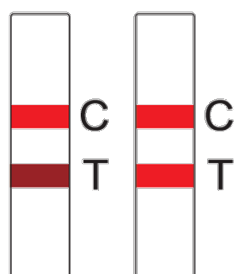


Positif

Période d'Ovulation

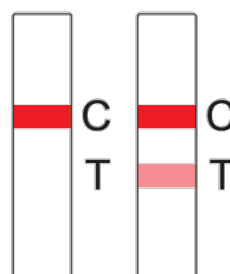

Négatif

Hors Période d'Ovulation

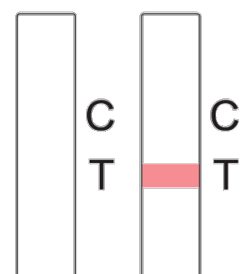

Invalide