

Autotest urinaire de grossesse HCG



Description

Ce test de grossesse est un test de diagnostic rapide pour la détection qualitative de l'hormone chorionique gonadotrope humaine (hCG) dans l'urine humaine afin de faciliter la détection de la grossesse.

Caractéristiques

Interprétation simple et rapide

Spécificité : 100%

Sensibilité : 100%

Fiabilité : 100%

Révèle une grossesse dès que la concentration de hCG dépasse 25UI/L



Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

✉ commandes@metzecare.com
☎ 01 88 61 13 86


Caractéristiques (suite)

Fabricant/ Laboratoire	Qingdao Hightop Biotech	
Conformité CE	Directive 98/79/EC on in Vitro Diagnostic Medical Devices (IvDD), Annex IV excluding (4, 6)(List A and B and devices for self-testing) Numero de Certificat No.V1 093780 0004 Rev.01 délivré par le le TUV SÜD, n° 0123 d'organisme 0123	
Reference Metze	H111-36U	H111-36U2
Conditionnement	1 Test/ boîte 504 boites/ carton 57*47*48cm 16.5kg/carton	2 Tests/ boîte 400 boites/ carton 69*39*45cm 20kg/carton
Contenu de la boite	1 * bâtonnet-test 1 *sachet d'emballage en aluminium (comprenant le bâtonnet-test) 1 * mode d'emploi	2 * bâtonnet-test 2 *sachet d'emballage en aluminium (comprenant les bâtonnet-test) 1 * mode d'emploi

Procédure de Test



1. Retirer le dispositif de test du sachet scellé.
2. Retirer le bouchon puis verser l'urine dans le bâtonnet absorbant du test directement pendant 3 à 5 secondes.
3. Ne pas dépasser la flèche.
4. Recouvrir le bouchon.
5. Lecture des résultats dans les 5 minutes suivant le test. Les résultats sont invalides après 5 minutes. Ne pas lire les résultats après 5 minutes.

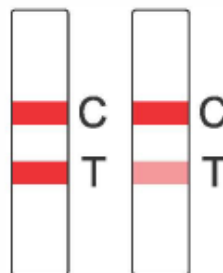


Positif

Je suis Enceinte



Négatif

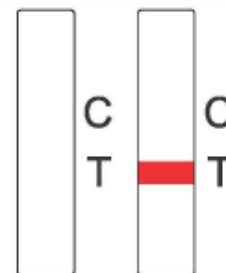

Invalide