



Pratique · Simple d'utilisation · Resultat en 12 minutes

## SARS-CoV-2 Kit antigénique (Or Colloïdal) (Pour autotest)



**A**utotest antigénique rapide sur prélèvement nasal conçu pour aider le dépistage des infections par le SARS-CoV-2 chez les personnes asymptomatiques et non contact à risque de plus de 15 ans dans le cadre d'une utilisation restreinte à la sphère privée.

Vise à déterminer une infection en cours par le virus responsable de la COVID-19.



Product name	Sample type	Package	Packaging size
SARS-CoV-2 Kit antigénique (Or Colloïdal) (Pour autotest)	Nasal		1T
SARS-CoV-2 Kit antigénique (Or Colloïdal) (Pour autotest)	Nasal		5T

MATÉRIEL FOURNI			
Contenu	Illustration	1T CG123001	5T CG123005
Cassette de test		1	5
Écouvillon d'échantillon		1	5
Tube d'extraction		1	5
Notice d'utilisation		1	1

Bon usage : Ce test est à utiliser uniquement chez les adultes ou sous la supervision d'un adulte chez les jeunes de plus de 15 ans asymptomatiques et non contact à risque.


# PROCÉDURE DE TEST

Instructions : Lire attentivement la notice d'instruction.


1. Enlevez le couvercle du compte-goutte
2. Placez et trempez l'écouillon dans le tube
3. Tournez l'écouillon, pendant que vous pressez
4. Insérez le tube dans le trou de la boîte du kit. Laissez l'écouillon pendant 1 minute.
5. Remuez pour bien mélanger le contenu
6. Enlevez l'écouillon pendant que vous pressez les côtés du tube
7. Fixez et serrez le couvercle du compte-goutte
8. Inversez doucement plusieurs fois
9. Enlevez le capuchon blanc
10. Retirez le bouchon blanc, ajoutez deux gouttes d'échantillon et lisez le résultat après 12 minutes.

La précision du test dépend de la qualité du prélèvement de l'échantillon :

- Des résultats faussement négatifs peuvent résulter d'un mauvais prélèvement.
- Des résultats faussement positifs ou négatifs peuvent résulter d'une mauvaise utilisation (respect des conditions d'utilisation, température de conservation du test, durée de révélation).

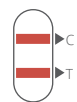

Test positif :  
 - **Isolez-vous**  
 - **Confirmez au plus vite avec un test PCR**

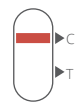

Test négatif :  
 - **Continuez à respecter les gestes barrières**

Flashez pour plus d'infos



Ministère des Solidarités et de la Santé

Compte tenu d'une sensibilité plus limitée liée au mode de prélèvement, une utilisation itérative est recommandée pour les autotests, une à deux fois par semaine par exemple ;

Goldsite Diagnostics Inc.  
 No. 103C, 503C & 504D,  
 Technology Building & No. 3A  
 & 4A, Technology Building  
 Annex, Zhaoshang Sub-District,  
 Nanshan District, Shenzhen,  
 China, 518067  
 TEL: 0086 755 2689 0807  
 Email: export@goldsite.com.cn  
 service@goldsite.com.cn  
 Website: en.goldsite.com.cn

distributor info.

Prudence :

1. En cas d'apparition de symptômes ou de contact à risque avec une personne testée positive à la Covid-19, un autotest sur prélèvement nasal n'est pas indiqué. Il est nécessaire de réaliser un test diagnostic par RT-PCR ou un test antigénique sur prélèvement nasopharyngé ;
2. Un résultat négatif chez une personne asymptomatique ne permet pas d'exclure une infection à la COVID-19. Devant un résultat de test négatif, maintenez l'application des mesures barrières et de la distanciation ;
3. Un résultat positif doit être confirmé par un test RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé. Isolez-vous immédiatement, prévenez vos contacts et prenez rendez-vous avec un laboratoire de biologie médicale pour procéder rapidement à un test de confirmation ;
4. En cas de doute, consultez votre médecin et ne prenez pas de décision médicale importante sans l'avis de votre médecin traitant ;