

*Corps à usage unique pour le prélèvement
des tubes de diamètre 13 et 16 mm*



Caractéristique générales

Fabricant	Yangzhou Medline Industry Co., Ltd Certification ISO 13485:2016 par le TUV SRHEINLAND No: SX 2110300-1 Report No: 244362168-200
Pays d'origine	Chine
Représentant Européen	Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Conformité	Dispositif Médical – Classe I Non sterile Directive européenne 93/42/CEE



Caractéristiques Spécifiques

Reference Metze	LAB-PREL-1390
Conditionnement	100 pcs / sachet 20 sachets par cartons. 2000 pcs / carton 59*43*30cm / carton ,
Couleur	Blanc Translucide
Dimensions utiles	Ø 18 * H48mm
Autres	<ul style="list-style-type: none">• A usage unique• Compatible avec les tubes de diamètre 13 et 16mm
Matériaux	Polypropylène
Presence Latex	Non
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 5 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires



Instructions d'utilisation

1. Assemblage de l'équipement :

1. Sortir le corps de prélèvement U.U du sachet et Fixer une nouvelle aiguille de prélèvement sanguin ou un adaptateur Luer stérile sur le corps de prélèvement U.U en le vissant jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

2. Insertion du tube de prélèvement :

1. Insérer un tube de prélèvement dans le corps de prélèvement U.U. Pousser doucement le tube vers l'avant pour commencer le prélèvement de sang. Une fois la quantité de sang désirée collectée, retirer le tube du corps de prélèvement U.U et répéter l'opération avec un nouveau tubes si besoin.

3. Élimination :

1. Éliminer le corps de prélèvement U.U et l'aiguille utilisés dans un conteneur approprié pour objets tranchants immédiatement après l'utilisation. Ne pas réutiliser.
2. Suivre les réglementations locales pour l'élimination des déchets médicaux.

Précautions :

- Utiliser des gants et un équipement de protection approprié lors des procédures de prélèvement sanguin.
- Si le corps de prélèvement U.U est endommagé ou contaminé, ne pas utiliser. Utiliser un nouveau corps de prélèvement U.U.

Etiquetage : (sachet de 100 pcs)

Corps de prélèvement à usage unique

REF: Lab-prel-130811

Quantité: 100pcs / sachet

Numéro de lot:

Date de fabrication:

Date de péremption:



Fabricant: Yangzhou Medline Industry Co., Ltd. No. 108, Jinshan Road, Economic Development Zone, Yangzhou, 225009, Jiangsu, China

EC REP: Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

(Tel: 049-40-2513175; Fax: 049-40-255726)

Distribué par : Metze SAS, 10 rue de Penthievre, 75008 Paris