

Kit Combo de tests rapides urinaires Ovulation et Grossesse (pour Auto Test)



Description

Ce Kit rassemble 5 tests rapide d'ovulation et 2 Tests de grossesse.

Test Ovulation

Test de diagnostic rapide urinaire pour la détection qualitative d'hormone lutéinisante (LH) dans l'urine humaine qui indique la période d'ovulation.

Test de Grossesse

Tests de diagnostic rapide urinaire pour la détection qualitative de l'hormone chorionique gonadotrope humaine (hCG) afin de faciliter la détection de la grossesse.

Caractéristiques


Test Ovulation

Test de Grossesse

- ✓ Interprétation simple et rapide
 - ✓ Spécificité : 100%
 - ✓ Sensibilité : 100%
 - ✓ Fiabilité : 100%

✓ Révèle une ovulation dès que la concentration de LH dépasse 25IU/mL

✓ Révèle une grossesse dès que la concentration de hCG dépasse 25UI/mL

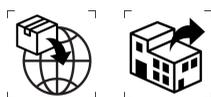


Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

✉ commandes@metzecare.com
☎ 01 88 61 13 86


Reference Metze	H113-36U
Fabricant/ Laboratoire	Qingdao Hightop Biotech
Conformité CE	Directive 98/79/EC on in Vitro Diagnostic Medical Devices (IvDD), Annex IV excluding (4, 6)(List A and B and devices for self-testing) Numero de Certificat No.V1 093780 0004 Rev.01 délivré par le le TUV SÜD, n° d'organisme 0123
Conditionnement	7 Tests (5 Tests Ovulation + 2 Tests Grossesse) par boîte 19*8*4.8cm / boîte 0.120 kgs/Boîte 200 Boîtes par carton 60*39*45cm /carton 25kg/carton
Contenu de la boîte	7 bâtonnets-test 7 sachets d'emballage (comprenant chacun un batonnet test) Un mode d'emploi

Procédure de Test

Auto Test d'ovulation LH

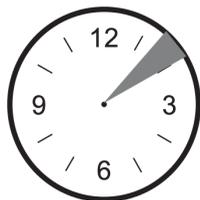


1. Retirer le dispositif de test du sachet scellé
2. Retirer le bouchon puis verser l'urine dans le bâtonnet absorbant du test directement pendant 3 à 5 secondes.
3. Ne pas dépasser la flèche.
4. Recouvrir le bouchon.
5. Lecture des résultats dans les 10 minutes suivant le test. Les résultats sont invalides après 10 minutes. Ne pas lire les résultats après 20 minutes.

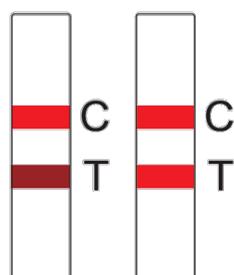


Positif

Période d'Ovulation

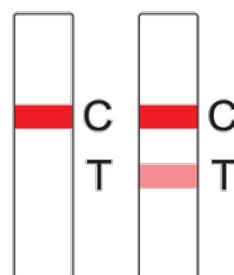

Négatif

Hors Période d'Ovulation

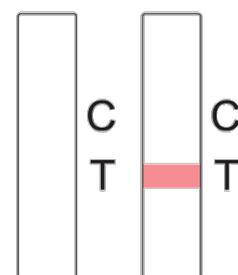


Invalide

Procédure de Test

Autotest de grossesse HCG




1. Retirer le dispositif de test du sachet scellé
2. Retirer le bouchon puis verser l'urine dans le bâtonnet absorbant du test directement pendant 3 à 5 secondes.
3. Ne pas dépasser la flèche.
4. Recouvrir le bouchon.
5. Lecture des résultats dans les 5 minutes suivant le test. Les résultats sont invalides après 5 minutes. Ne pas lire les résultats après 5 minutes.

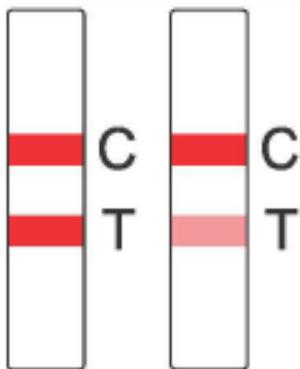

Positif

Je suis Enceinte

Négatif

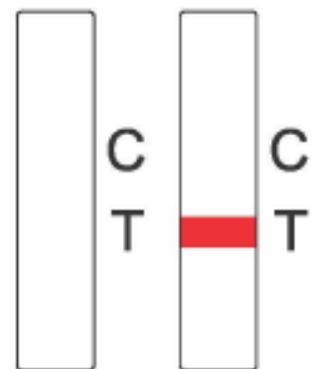Je ne suis pas enceinte

Invalide