

Notice d'instruction

PFW35

Agrafeuse chirurgicale sous cutanée (Skin Stapler)

[Nom du produit] Agrafeuse chirurgicale sous cutanée 35 agrafes (Skin Stapler).

[Spec produit] PFW35

[Matériaux] Manche Agrafeuse: ABS, Cartouche agrafes: PC, Agrafes: acier inoxydable.

[Performance] Non toxique, Stérile, non caustique, biocompatible.

[Application] Pour suture sous cutanée et coupures chirurgicales.

[Instruction d'utilisation]

1. Tenir fermement l'agrafeuse, maintenir les agrafes à la verticale de la peau, centrer légèrement l'activateur sur le bord de la plaie, appuyer l'agrafeuse sur la peau.
2. Comprimer complètement la poignée de déclenchement jusqu'à la butée pour que l'agrafe soit complètement fermée (ne pas relâcher la poignée avant que l'agrafe ne soit fermée).
3. Relâcher la poignée jusqu'à ce qu'elle revienne en position initiale. Placer ensuite l'agrafeuse à l'emplacement suivant.
4. Répéter les 3 étapes ci-dessus jusqu'à la fin de la pose des agrafes.

[Avertissement et précaution]

1. Si la tension des tissus est trop élevée, faire une suture approximative avant de fermer la peau avec l'agrafeuse cutanée.
2. Si la distance entre la peau agrafée et la structure vitale sous-jacente est inférieure à 5 mm, l'agrafeuse cutanée ne doit pas être utilisée.
3. L'agrafeuse chirurgicale sous cutanée est destinée uniquement à la fermeture de la peau.
4. Vérifier l'étanchéité de l'emballage avant utilisation. ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
5. Utiliser l'agrafeuse durant le délai de stérilisation valide.
6. A usage unique.
7. Ne pas restériliser l'agrafeuse.

[Emballage]

L'agrafeuse chirurgicale est emballée dans une boîte blister et stérilisée à l'oxide d'éthylène. Emballage individuel. Chaque boîte en carton contient 6 pièces et présente les inscriptions suivantes:



■ Stérilisé à l'oxide d'éthylène



■ A usage unique

La mention " forbidden to use if package is damaged " (Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé) est également présente sur l'emballage.

La durée de validité de la stérilisation est de 5(cinq) ans.

[Stockage]

Stocker dans un lieu sec, frais et aéré.



Jiangsu Brightness Medical Devices Co.,Ltd.

ADD:The 3rd floor of Building 3, Building 1 & Building 5-3, No.66,Hehuan Road,
Zhonglou Economic Development Area, Changzhou, Jiangsu 213013, China
FAX:0086-519-83908831



Importé & Distribué par: **Metze SAS**
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

ECREP Lepu Medical (Europe) Cooperatief U.A.

ADD: Abe Lenstra Boulevard 36, 8448 JB, Heerenvveen, The Netherlands
Tel: +31-515 573399 Fax: +31-515 760020
Date of issue: 10.01.2020 Revision no: A/1

