

# A-Tam<sup>®</sup> Tampons anaux

en PVA (mousse d'alcool polyvinylique)

## Mode d'emploi

CE 0197

**Veillez lire également les consignes/recommandations complémentaires.**

Pour l'introduction du tampon, veuillez procéder conformément aux illustrations et légendes ci-dessous. La procédure est comparable à celle requise pour un suppositoire. En raison des règles d'hygiène universellement applicables, ce produit est à usage unique ☒. L'applicateur est utilisable plusieurs fois.



1

Se laver les mains avec de l'eau et du savon.



2

Laver soigneusement la zone anale.



3

Déchirer le film de protection au niveau de la perforation et retirer le tampon.



4

Sortir le cordonnet du trou intérieur.



5

Ramollir brièvement le tampon dans de l'eau chaude.



6

Presser le tampon pour en retirer l'excès d'eau. Ne pas le tordre !



7

Enfiler le trou intérieur du tampon sur la tige de l'applicateur. Suivant besoin, de la vaseline pourra être appliquée sur la partie supérieure du tampon afin d'obtenir un meilleur glissement.



8

Avec l'applicateur, introduire le tampon dans le canal intestinal à une profondeur permettant encore de voir le cordonnet (voir l'illustration).



9

Serrer les fesses pendant l'extraction de l'applicateur.



10

Coller le cordonnet avec un pansement adhésif contre une fesse. Utiliser le cas échéant un dispositif de sécurité anal.



11

Après avoir mis le tampon en place, se laver soigneusement les mains.



12

Retirer le tampon à l'aide du cordonnet et le jeter à la poubelle des déchets domestiques ; ne pas le jeter dans les toilettes !

## Remarques/Recommandations

- Vider l'intestin avant d'introduire le tampon
- Par une routine de toilette, habituer l'intestin à être vidé à la même heure
- Lors de la première utilisation, commencer avec des petits formats de tampon
- Attendre le réflexe de serrement (env. 15 à 20 secondes) \*\*\*
- Retirer le tampon après 12 heures de port maximum
- Si malgré des contrôles continus, le cordonnet devait casser lors du retrait du tampon et vous empêcher ainsi d'extraire le tampon, nous vous demandons de vous rendre chez un médecin

\*\*\*Après une période d'accoutumance de 5 à 6 semaines environ, ce réflexe ne se manifeste plus

## L'incontinence fécale peut être provoquée par les conditions suivantes :

- Spina bifida
- Insuffisance anale
- Prolapsus rectal
- Atrésie anale
- Sclérose en plaques
- Paraplégie
- Lésions opératoires
- Destruction de la musculature obturatrice par l'application de rayons
- Trouble de la musculature obturatrice liée à l'âge
- Stomie

## Contre-indications / consignes particulières :

Ne pas utiliser le tampon A-Tam® en cas d'intolérances connues à la mousse de PVA\*.

A-TAM est un produit à usage unique et ne doit pas être réutilisé. Des contaminations bactériennes pourraient se produire.

## Effets secondaires

Aucun effet secondaire connu



Herderstraße 5-9 • D-90427 Nuremberg

**Matériau** : mousse d'alcool polyvinylique\* – **cordonnet** : coton



CE 0197

La société Med SSE System GmbH et son distributeur ne pourra être tenue responsable de dommages imputables à une utilisation incorrecte.

Mise à jour  
02/2020

Distribué par: Metze S.A.S  
10 rue de penthièvre 75008 Paris



01 88 61 13 86



www.metzecare.com



commandes@metzecare.com