

Notice d'utilisation du Kit ELEMENTS® pour la mesure de la diurèse horaire et recueil des urines et recueil des urines

[Nom du produit] : Kit ELEMENTS® pour la mesure de la diurèse horaire et recueil des urines

[Identifiant] : TNUM2000524

[Indication] : Mesure de la diurèse en système clos (système où sonde urinaire et poche de recueil des urines ne sont jamais désunies).

[Utilisation prévue] : Un dispositif non électrique utilisé pour collecter et stocker l'urine :




Ce dispositif est à usage unique.





[Spécification] : 2000ml+500ml

[Mode d'emploi]

1 Préparation du Kit ELEMENTS®





- a) Vérifier que l'appareil n'est pas endommagé de manière évidente. N'essayez pas d'utiliser un appareil endommagé. Lavez-vous les mains et portez des gants avant de connecter l'appareil.
- b) Maintenir la stérilité de la sonde urinaire du patient. Retirer le capuchon protecteur du connecteur du tube d'entrée, connecter le tube d'entrée directement à la sonde urinaire du patient.
- c) S'assurer que le robinet de vidange est bien fermé et rabattu dans l'espace prévu sur le côté gauche.
- d) Raccorder et fixer le crochet de fixation des sangles à l'arrière du réservoir de mesure à l'endroit prévu.
- e) Utilisez les sangles et les crochets pour fixer le réservoir de mesure au bord du lit.
- f) Le réservoir de mesure doit être suspendu près du pied du lit, en position verticale, sous le niveau de la vessie du patient.
- g) Le tube doit être placé à plat sur le lit, à l'extérieur des jambes et ne doit pas présenter de plis ou de boucles.
- h) Le port de prélèvement sans aiguille doit être placé à plat. Posez le cathéter sur la cuisse du patient.
- i) Lors du transfert du patient, placez le réservoir de mesure sur le lit, avec l'échelle de mesure vers le haut.

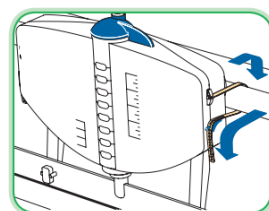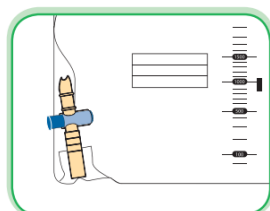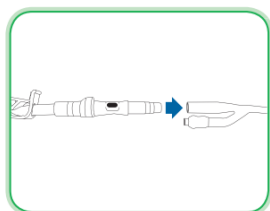

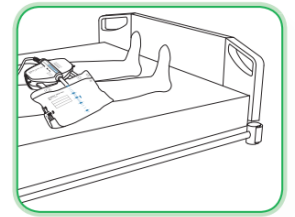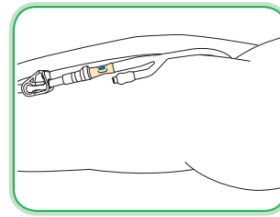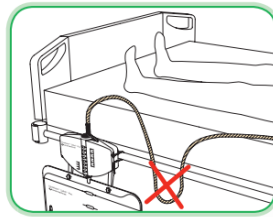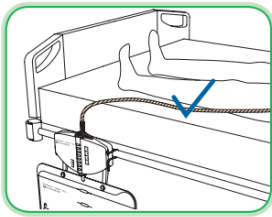

2 Contrôle de l'urine





- Avant de surveiller la diurèse, assurez-vous qu'il ne reste pas d'urine dans le tube. Soulevez la tubulure au-dessus de la chambre pendant 10 à 15 secondes, jusqu'à ce que l'urine s'écoule.
- Ouvrez le levier bleu situé sur le dessus de la chambre pour vider l'urine dans le sac de collecte. Après avoir vidé l'urine, fermer le levier bleu. Ne pas exercer une force excessive lors de l'ouverture et de la fermeture du levier bleu.
- Inspecter périodiquement le système pour s'assurer que l'urine s'écoule librement. Si l'écoulement n'est pas libre, vérifiez la présence de plis et de boucles dans la tubulure et/ou le positionnement correct du dispositif.
- Lorsque vous devez évacuer l'urine du sac de collecte, vous devez ouvrir le robinet de vidange située en bas à gauche du sac de collecte. Une fois vidé, fermer le robinet de vidange et le rabattre dans l'orifice de stockage prévu à cet effet sur le côté gauche.

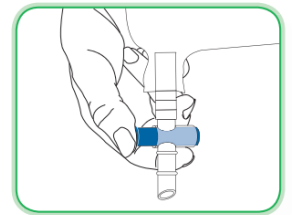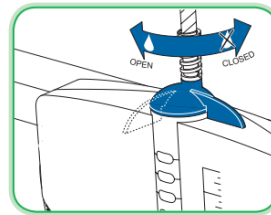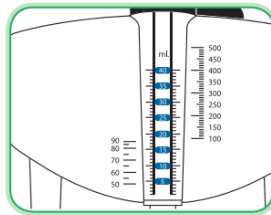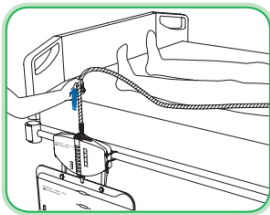

3 Prélèvement d'urine via le site de prélèvement sans aiguille

- Placez le clamp près de l'orifice de prélèvement avant le prélèvement, fermez complètement le clamp à tube pendant 10 à 15 minutes ou jusqu'à ce qu'une quantité suffisante d'urine soit prélevée.
- Nettoyer le port d'échantillonnage sans aiguille en utilisant la procédure de stérilité standard.
- Insérer une seringue standard dans le port de prélèvement et prélever lentement l'échantillon. Il est recommandé de prélever jusqu'à 10 échantillons.
- Retirer la seringue après l'échantillonnage et rouvrir le clamp de serrage.

4 Éliminer comme un déchet hospitalier normal conformément aux directives de travail de l'hôpital.

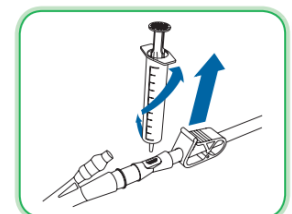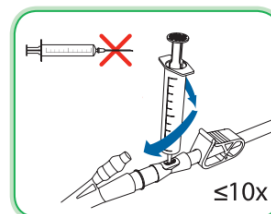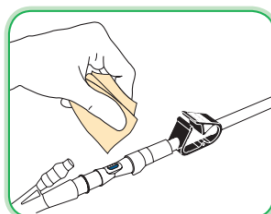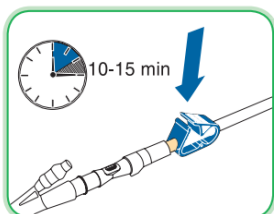

[Contre-indications] :

Interdiction d'utilisation pour les personnes allergiques au chlorure de polyvinyle.

[Mise en garde] :

1. Pour un usage unique, jeter après utilisation.
2. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.
3. La réutilisation du produit peut entraîner une réinfection ou une infection croisée.
4. Ne pas stocker dans des conditions toxiques , harmonieuses, corrosives.
5. La durée de conservation est de 5 ans. Ne pas utiliser après 5 ans.
6. Ne pas utiliser le produit en cas de présence de substances/particules/pollution dans l'emballage ou sur le produit.















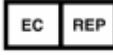
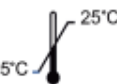

[Stockage et transport] :

1. L'appareil doit être stocké à une humidité relative inférieure à 80 %.

L'environnement de stockage doit être exempt de gaz corrosifs, sec, à l'abri de la lumière du soleil, bien ventilé et propre.

2. L'appareil doit être manipulé avec soin pendant le transport et la manutention.
3. La température de stockage doit être de 5~25°C

[Symbols]:

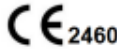	Lot number		Caution		Keep away from sunshine
	EO sterilization		Manufacturing date		Do not resterilize
	Do not reuse		Expiry date		Keep away from rain
	Do not use if the package is damaged		Manufacturer		Fragile, please handle it with great care
	Comply with the MDD, Notified Body identifier 2460		Consult instructions for use		Authorized representative in the European community
	Storage temperature shall be in 5~25°C		Symbol for Latex free		

[Manufactured date]: See the package bag.

[Shelf life]: 5 years.

[After-sales service unit]: Elements Medtec Co.,Ltd

Quality complaint phone: +86-021-5830 5829.



Changshu Taining Medical Equipment Co.,Ltd

Address: Nan Shou, Yangyuan Town, Changshu City, Jiangsu Province, P.R.China

Post code: 215562



MedNet EC-REP GmbH • Borkstrasse 10 • 48163 Münster • Germany



Importé & Distribué par: Metze SAS

10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

commandes@metzecare.com