


## Seringue Tuberculine Sécurisée avec Aiguille Sertie Rétractable

### Description :

- Seringue tuberculine sécurisée par retrait de l'aiguille dans le corps de la seringue
- Seringue stérile
- Graduation en 1/100ème de ml
- Aiguille Sertie



## Caractéristiques Generales

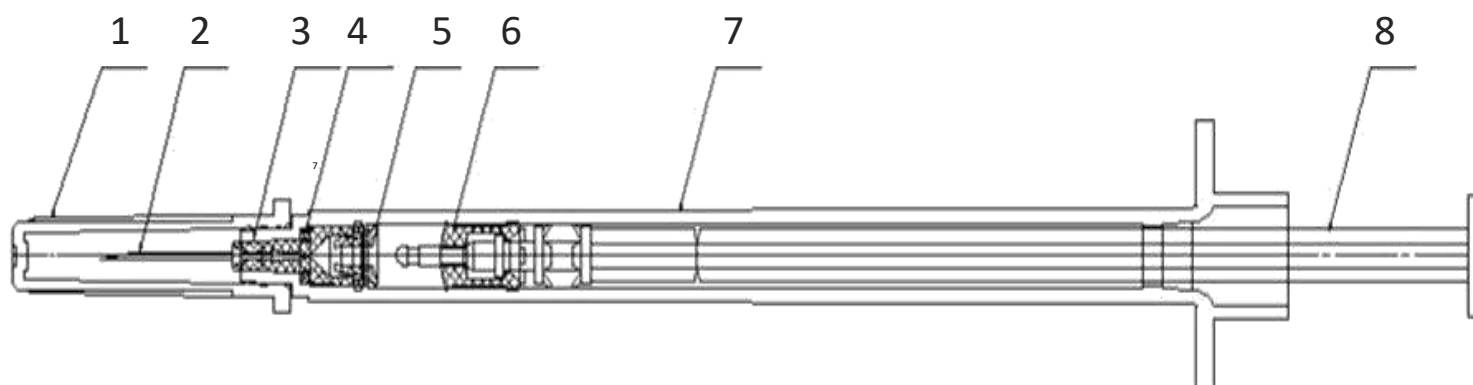

Materiaux	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capuchon aiguille I.V</li> <li>2. Aiguille I.V</li> <li>3. Moyeu superieur de l'aiguille</li> <li>4. Moyeu inferieur de l'aiguille</li> <li>5. O'ring</li> <li>6. Joint</li> <li>7. Cylindre</li> <li>8. Piston</li> </ol> Lubrifiant	Polypropylène (PP) Acier inoxydable Polypropylène (PP) Polypropylène (PP) Caoutchouc médical Caoutchouc médical Polypropylène (PP) Polypropylène (PP) Huile de silicone
Fabricant	Yangzhou Medline Industry Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056	
Pays d'origine	Chine	
Rep. Europeen	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)	
Marquage CE	Dispositif Médical - Classe IIa.- Directive européenne 93/42/CEE Certificat de marquage CE n° DD 601 149237 0001 délivré par le TUV RHEINLAND (n° d'organisme 0197).(Certificat disponible sur demande)	
Stérilité	10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d'Assurance de Stérilité) Procédé de stérilisation : oxyde d'éthylène conforme à la norme internationale EN ISO 11135	
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 5 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires	

Produit Apyrogène: Oui  
 Présence de Latex : Non  
 Présence de DNR (caoutchouc naturel sec) :Non  
 Présence de Phtalates :Non  
 Présence de produits d'origine animale :Non



## Caractéristiques spécifiques

Référence	MDS12516	MDS12609	MDS12613	MDS12714
Volume Seringue	1ml	1ml	1ml	1ml
Dimensions aiguille (Ø externe x Longueur)	25G x 5/8" (0.5mm x 16mm)	26G x 3/8" (0.45mm x 09mm)	26G x 1/2" (0.45mm x 13mm)	27G x 1/2" (0.4mm x 13mm)

## Conditionnement et emballage

Conditionnement détaillé		
Emballage individuel Pouch papier plastique	Boîte cartonnée 100 pcs 205x175x95mm	Master Carton 24 boîtes (24*100pcs) 54x42.5x40cm 13 kgs

*Photos de la mise en sécurité de l'aiguille par retrait de l'aiguille dans le cylindre de la seringue après usage*




## Mode d'emploi


1. Vérifiez que le paquet est complet. NE PAS utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.
2. Retirez l'emballage protecteur de la seringue fournie et sortez la seringue.
3. Après avoir retiré la seringue, NE PAS pousser le piston vers l'avant avant l'injection. Ce mouvement provoquera l'emboîtement du piston avec le moyeu.



4.
  - (1) Retirez soigneusement le capuchon de protection directement de l'aiguille pour éviter d'endommager la pointe de l'aiguille.
  - (2) Préparez les médicaments.
  - (3) Expulsez la bulle d'air.
5. Effectuez l'injection puis enfoncez le piston complètement jusqu'à ce qu'il s'emboîte dans le moyeu de l'aiguille.

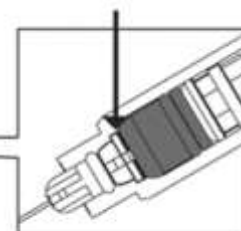

6. Une fois le piston emboîté avec le moyeu, retirez l'aiguille du corps du patient et tirez le piston vers le bas jusqu'à ce que vous sentiez un clic. L'aiguille descend dans le cylindre de la seringue avec le piston.
7. Détachez le piston en le cassant et jetez la seringue usagée dans un contenant tranchant conformément aux dispositions réglementaires.

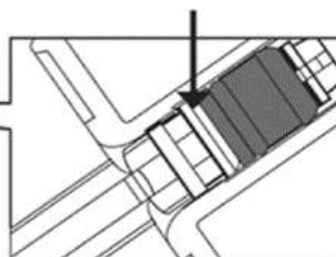

## Aplats & UDI

**MDL** **Seringue Tuberculine avec Aiguille sertie rétractable** REF: MDS12516

•STERILE •NON-TOXIQUE •APYROGENE

Enfoncer complètement le piston pour activer la rétractation

1 ml

25G x 5/8" (0.5mmx16mm)

0 69 70114 92498 8

▲ OUVRIRE ICI ▲

Yangzhou Medline Industry Co.,Ltd.  
No.108, Jinshan Road, Economic Development Zone, Yangzhou 225009 Jiangsu, China.

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Eiffestraße 80 -20537 Hamburg Germany

Metze S.A.S , 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris  
Email: commandes@metzecare.com | Tel: +33 1 88 61 13 88

STERILE EO

CE 0197  
MADE IN CHINA

**MDL** **Seringue Tuberculine avec Aiguille sertie rétractable** REF: MDS12609

•STERILE •NON-TOXIQUE •APYROGENE

Enfoncer complètement le piston pour activer la rétractation

1 ml

26G x 1/2" (0.45mmx13mm)

0 69 70114 92498 8

▲ OUVRIRE ICI ▲

Yangzhou Medline Industry Co.,Ltd.  
No.108, Jinshan Road, Economic Development Zone, Yangzhou 225009 Jiangsu, China.

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Eiffestraße 80 -20537 Hamburg Germany

Metze S.A.S , 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris  
Email: commandes@metzecare.com | Tel: +33 1 88 61 13 88

STERILE EO

CE 0197  
MADE IN CHINA

**MDL** **Seringue Tuberculine avec Aiguille sertie rétractable** REF: MDS12709

•STERILE •NON-TOXIQUE •APYROGENE

Enfoncer complètement le piston pour activer la rétractation

1 ml

27G x 3/8" (0.4mmx9mm)

0 69 70114 92498 8

▲ OPEN HERE ▲

Yangzhou Medline Industry Co.,Ltd.  
No.108, Jinshan Road, Economic Development Zone, Yangzhou 225009 Jiangsu, China.

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Eiffestraße 80 -20537 Hamburg Germany

Metze S.A.S , 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris  
Email: commandes@metzecare.com | Tel: +33 1 88 61 13 88

STERILE EO

CE 0197  
MADE IN CHINA