

REINIGUNGSHINWEISE

DENTCUP - BIO Mehrweg-Mundspülbecher

Mehrweg-Mundspülbecher müssen nicht sterilisiert werden, da sie laut RKI-Empfehlung als semikritisch A eingestuft sind. Demnach sind folgende Reinigungshinweise zu beachten:

UNSERE EMPFEHLUNG:

Reinigen Sie die DENTCUPS nach der Behandlung im Thermodesinfektor.

Wir empfehlen eine Reinigung der DENTCUPS mit einem milden Desinfektionsmittel (pH-Wert <11).

Vor der ersten Benutzung müssen die DENTCUPS im Thermodesinfektor aufbereitet werden.

Lassen Sie die DENTCUPS nach der Aufbereitung auskühlen, bevor die Becher wieder gestapelt werden.

Lassen Sie die DENTCUPS nach der Aufbereitung nicht für längere Zeit (bspw. über Nacht) im geschlossenen Thermodesinfektor.

Bitte stellen Sie sicher, dass zwischen den DENTCUPS und anderen Instrumenten im Thermodesinfektor kein direkter Kontakt besteht.