


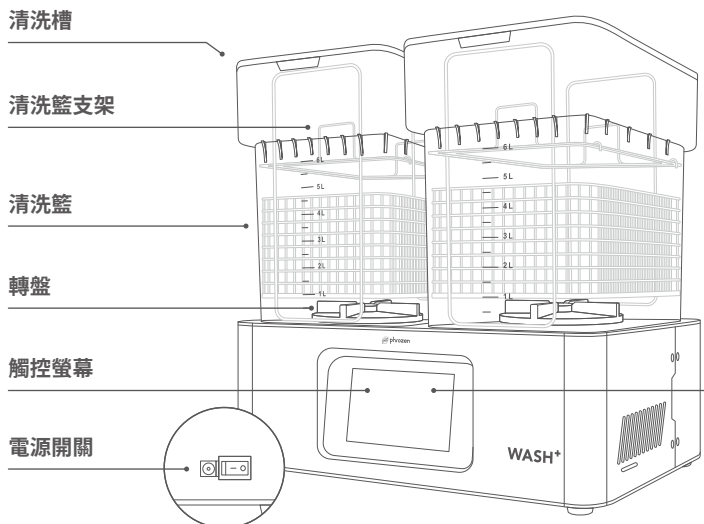

Phrozen Wash+ 牙科清洗機

3D牙科列印多功能清洗機



預設您的自定義清單

- 點擊 **設定**，選擇 **自定義清單設定**。
- 點擊 **新增**，自定義您的清洗模式。
- 設定自定義清洗模式的名稱、轉速和時間。

規格



額定功率 Max 48 W
 輸入電壓 24 V DC ; 2 A
 機器尺寸 28.5 x 39 x 40 公分
 機器淨重 9 公斤

清洗槽尺寸 25 x 18.5 x 25 公分
 清洗槽容量 7 公升 / 一個
 可設置時間 0 - 100 分鐘

*以上為實驗測試數據，若有內容更改請以官網為主。

01 使用前須知

- 請將清洗機放置於空氣流通且乾淨的水平桌面。
- 請將兩個清洗籃放置於清洗槽中。
- 配戴護目鏡、手套、口罩與長袖衣物等個人防護設備。
- 倒入適量95%酒精或IPA (99%)。
- 機器使用中請蓋上蓋子，避免異物掉落或液體噴濺。
- 機器使用後請蓋上蓋子，避免酒精揮發。

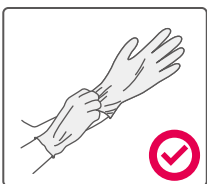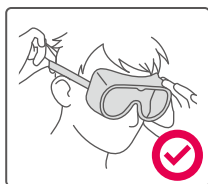


02 使用步驟

- A** 將模型與載台一同清洗：將載台連同模型直接吊掛於清洗籃。
- B** 將模型放置於清洗籃清洗：將模型取下後，小心地放入清洗籃，請確保模型不要互相重疊，避免在清洗過程中造成損壞。

提醒：

- 小於1公分的物件請務必與載台一同清洗，避免掉入清洗槽底部。

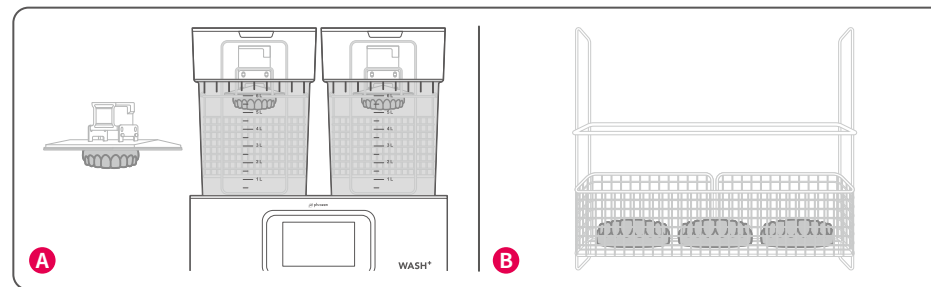

- 1 點擊 **清洗** 按鈕。
- 2 選擇需使用的清洗槽，如需同時使用兩個清洗槽，請同時勾選A清洗槽和B清洗槽。
- 3 手動設置每個清洗槽的清洗時間。或者，點擊 **自定義清單** 按鈕，選擇先前輸入的預設清洗模式。
- 4 點擊 **開始** 按鈕即可開始清洗模型。



注意 事項

- 清潔清洗機前或更換清洗液體 (酒精、Phrozen Wash或水) 前請務必斷開電源。
- 除上述清洗液體外，請勿將樹脂或其它液體倒入清洗槽中，避免造成清洗槽損壞。
- 請避免樹脂或清洗液體直接觸碰皮膚，可能引起過敏反應。
- 若不慎接觸樹脂和清洗液體，請用大量清水立即洗淨。
- 請勿在機器運作時，拿取清洗槽內的物件。

⚠ 本產品若裝有大量的酒精或IPA溶劑。請避免高溫、火源，包括明火、熱源或火花，以防止火災和爆炸。



聯繫客服



Facebook
粉絲專頁



Facebook
英文用戶
社團



Instagram



Phrozen
Dental
官方網站