

Bedienungsanleitung

KARDENA MED: CHECKME BP3-C2




Automatisches Blutdruck- & Pulsmessgerät mit App-Verbindung

Zertifizierung: CE 0413 -

Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß MDR (EU) 2017/745



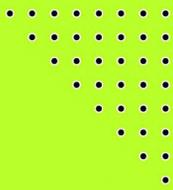

Lieferumfang

- Checkme BP3-C2 Blutdruckmessgerät
- Komfort-Oberarmmanschette (22-42cm)
- USB-C Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	01
Produktbeschreibung	02
Inbetriebnahme & Anwendung	03
App-Verbindung (ViHealth)	04
Messung & Speicherfunktion	05
Reinigung & Pflege	06
Technische Daten	07
Symbolerklärungen	08
Garantie & Kundendienst	09
Rechtliche Hinweise	10



1. SICHERHEITSHINWEISE

1.1 Indikationen

Zur nichtinvasiven Messung des systolischen und diastolischen Blutdrucks sowie der Herzfrequenz (Puls) bei Erwachsenen über den Oberarm.

1.2 Kontraindikationen

NICHT VERWENDEN BEI:

- schweren Arrhythmien oder Herzschrittmachern (nur nach ärztlicher Rücksprache)
- offenen Wunden, Infektionen oder Schwellungen am Oberarm
- Kindern unter 12 Jahren

1.3 Warnungen

Gerät nur zur Eigenkontrolle
- keine Diagnosen stellen

Nicht während des
Autofahrens, Badens oder
bei Bewegung messen

Manschette darf nicht zu
fest angelegt werden

Nicht bei extremer Kälte
oder Hitze messen (siehe
Technische Daten)




2. PRODUKTBESCHREIBUNG

2.1 Funktionen

- Oszillometrische Blutdruckmessung
- Messung von SYS, DIA & Pulsfrequenz
- Speicher für 50 Messungen
- Ein-Knopf-Bedienung mit großem LCD-Display
- Bluetooth-Kopplung zur App ViHealth (iOS & Android)

2.2 Zielgruppen

- Senioren und Angehörige
- Menschen mit Hypertonie, Diabetes oder Kreislaufproblemen
- Pflegepersonal für Hausbesuche und Dokumentation

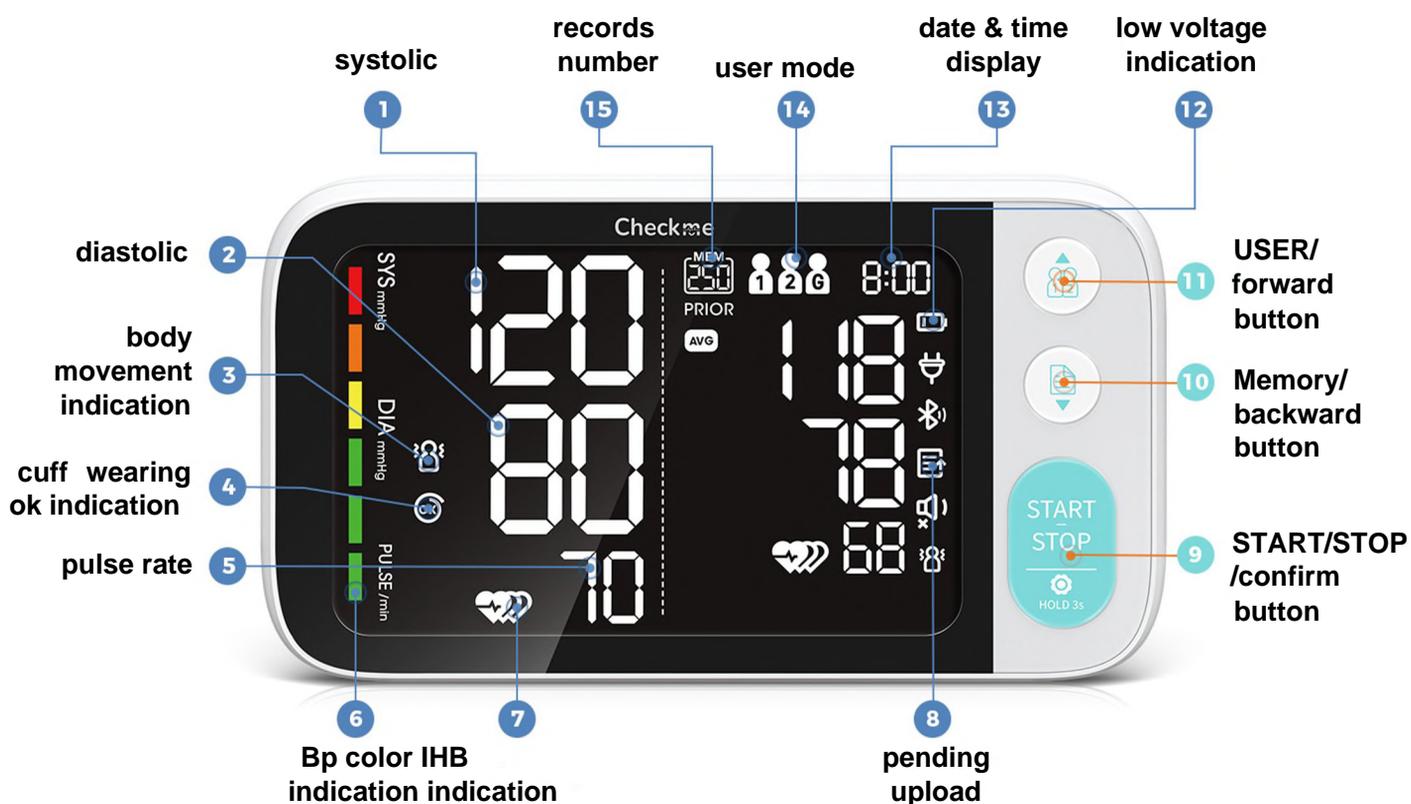

3. INBETRIEBNAHME & ANWENDUNG

Gerät vollständig über USB-C aufladen (ca. 2 Stunden)

Manschette um den linken Oberarm legen (2cm oberhalb der Armbeuge)

Gerät einschalten - automatische Messung beginnt

Nach ca. 30 Sekunden werden die Werte angezeigt

Ergebnisse werden im Gerät gespeichert (max. 50 Werte)



Tipp: Immer zur gleichen Tageszeit messen, idealerweise morgens vor dem Frühstück und abends vor dem Schlafengehen.

4. APP-VERBINDUNG (VIHEALTH)

4.1 VORBEREITUNG

- App „ViHealth“ im App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) installieren
- Bluetooth am Smartphone aktivieren

4.2 VERBINDUNG

- Gerät einschalten
- In der App auf „BP3-C2“ tippen
- Messwerte werden automatisch synchronisiert

4.3 VORTEILE DER APP

- PDF-Berichte zum Weiterleiten an Ärzte
- Verlaufsgrafiken & Trendanalyse
- Benutzerprofile & Messzeitpunkte

5. MESSUNG & SPEICHERFUNKTION

- Speicherplatz für 50 Einzelmessungen
- Nach Erreichen des Limits wird die älteste Messung überschrieben
- Messdaten jederzeit via App abrufbar
- Im Display werden SYS, DIA, Puls und Messzeit angezeigt



6. Reinigung & Pflege

- Gerät mit weichem, trockenem Tuch abwischen
- Manschette regelmäßig mit feuchtem Tuch reinigen
- Keine Lösungsmittel oder Desinfektionsmittel verwenden
- Vor Hitze, direkter Sonne und Feuchtigkeit schützen

7. Technische Daten

- Modell: BP3-C2
- Messmethode: Oszillometrisch
- Blutdruckbereich: 0-300mmHg (± 3 mmHg)
- Pulsbereich: 40-200bpm (± 5 bpm)
- Speicher: 50 Messwerte
- Stromversorgung: Li-Ion Akku 3.7V / 850mAh
- Ladeanschluss: USB-C
- Schutzklasse: IP22
- Maße: 115 x 50 x 30mm
- Gewicht: ca. 220g



1

Wrap the cuff
around the
upper left arm



2

Make sure the cuff
is about one finger
above the elbow



3

Be able to fit one
finger between your
arm and the cuff



4

Sit correctly
and press the
Start button

8. Symbolerklärungen

- ⚠ Achtung: Gebrauchsanweisung lesen
- ♻ Getrennte Entsorgung (WEEE)
- * Seriennummer
- Ⓞ Typ BF Anwendungsteil
- ✓ CE-Zeichen (0413) für MDR-zertifiziertes Medizinprodukt

9. Garantie & Kundendienst

- Garantie: 12 Monate ab Kaufdatum
- Bei Defekten oder Rückfragen: support@kardena.de | www.kardena.de
- EU-Bevollmächtigter: MedNet EC-REP GmbH, Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany



Hersteller: Viatom Technology Co., Ltd.
- Vertrieb durch Kardena GmbH

10. Rechtliche Hinweise

- Medizinprodukt gemäß
Verordnung (Eli) 2017/745
- Konformitätsbewertung durch
Benannte Stelle CE 0413
- Entspricht Normen IEC 60601-1,
60601-1-2,80601-2-30
- Nur zugelassenes
Originalzubehör verwenden





Kardena

**Kardena GmbH
Siemensstr. 34
53121 Bonn, Germany**

Telefon: +49 228 96192116

**service@kardena.de
www.kardena.de**

