

CE 2834**BENUTZERINSTRUKTIONEN:**

Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnungen zur Verwendung dieser Maske während aller Expositionszeiten kann die Wirksamkeit der Maske beeinträchtigen und zu Krankheit oder Behinderung führen.

Eine Kopie der Konformitätserklärung wird mit jedem kleinsten im Handel erhältlichen Paket geliefert.

Wie bei jedem Atemgerät muss der Träger vor dem Gebrauch ausreichend geschult werden. Vor dem Gebrauch sollte der Träger immer überprüfen, ob sich die Maske in einem guten Zustand befindet – kein Schmutz, keine Beschädigung des Kopfgurtaufsatzes usw.

Einschränkung:

Verwenden Sie unter folgenden Umständen keine Atemschutzmaske und betreten oder bleiben Sie nicht in einem kontaminierten Bereich:

a Eine Atmosphäre enthält weniger als 19,5% Sauerstoff.

b Wenn Sie Verunreinigungen riechen oder schmecken.

c Zum Schutz vor Gasen oder Dämpfen.

d Kontaminanten oder ihre Konzentrationen sind unbekannt oder unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdend.

e Zum Sandstrahlen, Sprühen und zur Asbestbehandlung.


f In explosionsgefährdeten Bereichen.

WARNUNG:

- 1 Diese mit „NR“ gekennzeichnete Maske darf nicht länger als eine Schicht verwendet werden.
- 2 Ersetzen, ändern, fügen oder lassen Sie niemals Teile in der vom Hersteller angegebenen Konfiguration aus.
- 3 Diese Maske schützt vor bestimmten Partikelkontaminanten, verhindert jedoch nicht vollständig das Risiko einer Krankheit oder Infektion.
- 4 Es ist unwahrscheinlich, dass die Anforderungen an die Leckage erfüllt werden, wenn das Gesichtshaar unter der Gesichtsversiegelung verläuft.
- 5 Wechseln Sie die Maske sofort, wenn das Atmen schwierig wird oder die Maske beschädigt oder verzerrt wird.
- 6 Wechseln Sie die Maske, wenn keine ordnungsgemäße Gesichtsversiegelung erreicht werden kann.


MONTAGEANLEITUNG:

- 1 Halten Sie die Partikelhalbmaske über Nase und Mund in Position.
- 2 Ziehen Sie den unteren Gurt über den Kopf und legen Sie ihn um den Nacken.
- 3 Ziehen Sie den oberen Gurt über den Kopf und positionieren Sie ihn direkt über den Ohren.
- 4 Stellen Sie sicher, dass der Nasenclip sicher um die Nase geformt ist und die Enden an der Wange anliegen, um eine gute Abdichtung zu erzielen.
- 5 Um den korrekten Sitz zu überprüfen, legen Sie beide Hände über die Maske und atmen Sie kräftig aus. Wenn Luft um die Nase austritt, ziehen Sie den Nasenclip fest. Wenn Luft um die Kante austritt, positionieren Sie den Kopfbügel neu, um eine bessere Passform zu erzielen.
- 6 Wiederholen Sie die Einstellungen, bis die Maske ordnungsgemäß versiegelt ist.
- 7 Wenn keine ordnungsgemäße Abdichtung erreicht werden kann, betreten Sie den kontaminierten Bereich nicht, da dies zu Krankheiten führen kann.

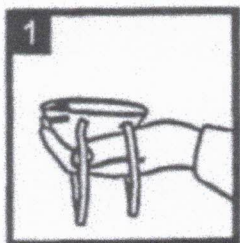


AUBEWAHRUNG UND LAGERUNG:

- 1 Bewahren Sie die Maske in einem verschlossenen Behälter auf, wenn Sie sie nicht verwenden.
- 2 Bewahren Sie die Maske während des Transports in der Originalverpackung auf.

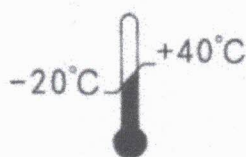

Temperaturbereich
während der Lagerung.

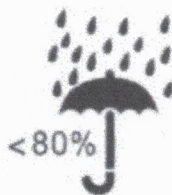

Maximale relative Luftfeuchtigkeit
während der Lagerung



Siehe Herstellerangaben



Ende der Haltbarkeit:
Siehe Aufdruck auf der Verpackung

Notified body: CCQS Certification Services Limited.

Adresse: Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Ireland (NB 2834).

Hersteller: Dongguan Rysam Medical Equipment Manufacturing Co., Ltd.

Adresse: Rom 302, Building 2, No.2 Junye Road, Dongkeng Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R. China

