

# Benutzerinformation

## Produktparameter

Produkt Name: Partikelfilter Halbmaske

Hauptmaterial: nicht gewebtes Vlies

Größe: 11\*16 CM

Type: Nicht medizinische Maske. Model: LANGUAN KN95

Normungs-Standard: EN149:2001+A1: 2009 gem. VO (EU) 2016/425

Produktionsdatum: Monat / Jahr

Haltbarkeit: 2 Jahre

Informationen vor Gebrauch: Siehe Herstellerangaben auf der Verpackungsbeilage

Hersteller: Guangdong Languan Medical Biotechnology Co.,Ltd

Adresse: Room 202, building 3, No.55 Dajing Daxin Road, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province, China. Telefon: +8613604009114

Email: xiechao168@vip.163.com

## Verwendungszweck




- Filterhalbmaske geeignet, um alle Arten von Partikeln zu verhindern.
- Nicht zum Schutz der Atemwege vor schädlichen Gasen und Dämpfen geeignet
- Nicht geeignet für Umgebungen mit niedrigem Sauerstoffgehalt, Unterwasserarbeiten, Flucht und Brandbekämpfung.

Lagerung und Transport: Das Produkt sollte versiegelt, nicht beschädigt, nicht fleckig und während der Lagerung und des Transports vor Feuchtigkeit geschützt sein. Achten Sie auf eine feuerfeste, trockene, säurebeständige, alkalibeständige Umgebung und vermeiden Sie direktes Licht.

Lagermethode: Bitte in einer trockenen und belüfteten Umgebung lagern. Die Lagertemperatur beträgt  $-30 \sim 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ , die relative Luftfeuchtigkeit soll nicht mehr als 80% betragen.

## Verwendung

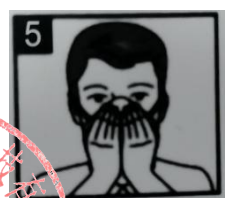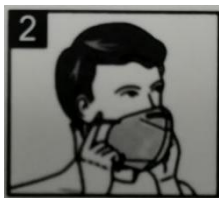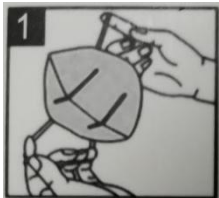


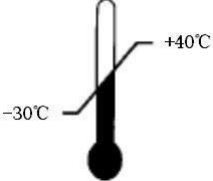


1. Halten Sie die Maske gemäß Abbildung 1, die Nasenklammer soll sich oben befinden.
2. Halten Sie die Maske auf Ihr Gesicht und gegen Ihr Kinn.
3. Ziehen Sie an den Gurten auf beiden Seiten, hängen Sie sie an die Ohren und passen Sie sie an, bis Sie sich wohl fühlen.
4. Legen Sie Ihre Finger auf die Mitte der Nasenklammer aus Metall und bewegen Sie Ihre Finger nach beiden Seiten, bis die Nasenklammer vollständig an die Form des Nasenrückens angepasst ist.
5. Legen Sie Ihre Hände auf Ihr Gesicht, um die Dichtheit der Maske auf Ihrem Gesicht zu überprüfen.



张超



## Angaben auf der Verpackung

	Einmalprodukt		Vermeidung von Sonneneinstrahlung
	Maximale relative Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung		Temperaturbereiche bei der Lagerung
	Lesen Sie die Gebrauchsanweisung		CE Zeichen und Nummer des Notified Body

## Warnung:

### 【Warnung】

1. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung der Masken zunächst, dass sie für den beabsichtigten Gebrauch geeignet sind. Der Träger muss vor dem Gebrauch ausreichend geschult sein und sicherstellen, dass die Masken richtig sitzen.
2. Die Maske ist wegwerfbar und kann nicht wiederverwendet werden.
3. Die Verwendung der Masken mit Gesichtshaar führt zu Dichtheitsproblemen. Wenn das Gesichtshaar nicht entfernt ist, ist es unwahrscheinlich, dass eine dichter Sitz erreicht wird.
4. Entsorgen Sie die Maske und ersetzen Sie sie, wenn sie beschädigt ist oder einen höheren Atemwiderstand aufweist.
5. Verwenden Sie die Maske nicht in der Umgebung von explosiven Gasen, stark verschmutzten Umgebungen, sauerstoffarmen Umgebungen, in der Nähe von Feuer und Unterwasserarbeiten.
6. Patienten mit Herzerkrankungen oder anderen Erkrankungen sollten bei auftretenden Atembeschwerden die Maske absetzen.
7. Mit „NR“ gekennzeichnete Masken dürfen nur für eine Schicht verwendet werden.
8. Dieses Produkt liefert keinen Sauerstoff. Nur in ausreichend belüfteten Bereichen verwenden, die ausreichend Sauerstoff enthalten, um das Leben zu unterstützen. Verwenden Sie dieses Atemschutzgerät nicht, wenn die Sauerstoffkonzentration unter 19,5% liegt.
9. Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
10. Die Verwendung der Maske bei Beschädigung der Verpackung ist strengstens untersagt.

Eine Kopie der Konformitätserklärung wird gemeinsam mit der Benutzerinformation und der Masken in der Verpackung ausgeliefert.

### 【Der Notified Body】

**Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co.**

Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok No: 44/84 Yukarı Dudullu Ümraniye-Istanbul

**NB:2163**

**Vertrieb:** Werner Handle GmbH, [www.handle.at](http://www.handle.at)



