



ROLL ACTÍVATE



TERMO SALUD | MEDICAL & AESTHETIC



TECHNOLOGY
FOR YOUR
BEAUTY
& HEALTH

TERMOSALUD oficinas centrales.

En **TERMOSALUD** somos pioneros en el sector Bienestar, Salud y Belleza (BSB). Nuestra experiencia a lo largo de más de 30 años **investigando, diseñando y fabricando equipos y productos** altamente innovadores nos sitúa a la vanguardia de las últimas tendencias en medicina estética, balneoterapia y spa, cosmética personalizada y textiles inteligentes orientados al ámbito de la biosalud.

La amplia **gama de equipos y productos de fabricación propia**, unida a los servicios de consultoría y asistencia técnica relacionados, nos permiten ofrecer soluciones innovadoras y de vanguardia a un sector caracterizado por su alto nivel de exigencia y dinamismo.

Nacida como empresa fabricante de equipos y aparatos de tratamiento estético profesional, **TERMOSALUD** ha ido evolucionando a lo largo de los años incorporando **líneas complementarias de negocio** relacionadas con la salud y el bienestar.

TRAYECTORIA EMPRESARIAL
35 AÑOS

TERMOSALUD | MEDICAL
& AESTHETIC

LIDERAZGO Y SOLVENCIA TÉCNICA GARANTIZADA

ZIONIC está íntegramente fabricado en España, con el alto nivel de innovación, solvencia y eficacia que exige la fabricación de equipos médico-estéticos desarrollada por Termosalud desde hace tres décadas.

Un equipo de profesionales de alta cualificación ha hecho posible que Termosalud se haya posicionado como empresa líder en la fabricación de equipos médico estéticos, por su continuado compromiso y su alta capacidad en innovación y desarrollo. Una amplia red de partners nacionales e internacionales nos ayuda a conocer las necesidades de nuestros clientes para ofrecerles las soluciones más innovadoras del mercado.

Termosalud cuenta con las certificaciones más exigentes, tanto nacionales como internacionales, de calidad y fabricación de equipos médicos, lo que le capacita para ofrecer el mejor servicio en este sector.

Con ZIONIC obtendrás soporte técnico con respuesta inmediata.



100 % I+D+i

TECNOLOGÍA ESPAÑOLA

TERMO SALUD | MEDICAL & AESTHETIC



TERMO SALUD | MEDICAL & AESTHETIC



ROLL ACTÍVATE

EFICACIA

ZIONIC combina en un mismo dispositivo un sistema de masaje activo rotacional profundo (MARP) con una radiofrecuencia resistiva que garantiza resultados rápidos y de máxima efectividad en el tratamiento de celulitis, flacidez, remodelación y tonificación muscular.

VERSATILIDAD

ZIONIC permite configurar de forma libre y personalizada tanto la energía de la RF Resistiva como la velocidad de rotación de MARP, para adaptar el tratamiento a cada paciente de forma segura y eficaz. Posibilita ofrecer una gran variedad de tratamientos diferenciados a un mismo paciente.

SEGURIDAD

El tratamiento no invasivo ZIONIC ejerce una energía mecánica sobre los tejidos sin ejercer tracción alguna sobre ellos; junto a una radiofrecuencia resistiva, que concentra la emisión de la corriente en la zona específica a tratar.

RENTABILIDAD

ZIONIC ofrece un mayor grado de retorno de la inversión (ROI) respecto a otras tecnologías por ser el único equipo que incorpora radiofrecuencia resistiva y el sistema MARP, obteniendo resultados efectivos y rápidos. Optimiza el trabajo en cabina, actúa en menor tiempo.



ZIONIC rollactive RF



MARP

+RF RESISTIVA
200

MASAJE
ACTIVO
ROTACIONAL
PROFUNDO

ZIONIC es el primer equipo que combina en un mismo cabezal un sistema de masaje activo rotacional profundo (MARP) que ejerce una energía mecánica de alta intensidad sobre el tejido conjuntivo, junto a una radiofrecuencia resistiva que transforma su propia corriente en energía térmica.

El exclusivo sistema MARP proporciona una terapia biomecánica eficaz y segura que estimula el tejido muscular y dérmico en profundidad y activa los procesos fisiológicos de recuperación de los tejidos.

La combinación de MARP y RF, potencia exponencialmente y asegura los **resultados** obtenidos en los distintos tratamientos.



ZIONIC genera un doble efecto térmico y mecánico que desencadena tres acciones diferenciadas sobre los tejidos tratados y asegura la máxima efectividad en todas sus aplicaciones.

ACCIÓN DÉRMICA


Activa los fibroblastos estimulando su proliferación y la síntesis de nuevas fibras de colágeno, elastina y ácido hialurónico, entre otras, mejorando así el aspecto de la piel que recupera elasticidad y densidad.

ACCIÓN MUSCULAR

La activación mecánica de los miofibroblastos (fibroblastos especializados del tejido muscular) induce la síntesis de nuevas fibras de miosina y actina, proteínas estructurales y fundamentales de la contracción de los músculos, contribuyendo a la mejora, mantenimiento y regulación del tono muscular.

ACCIÓN VASCULAR


El tratamiento MARP aumenta el flujo de sangre periférica y mejora la oxigenación del tejido y la eliminación de sustancias de desecho. Mejora el retorno venoso y por tanto la circulación linfática.

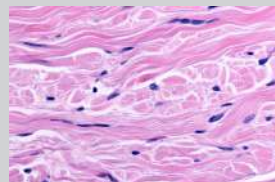

Fibroblastos



Músculo

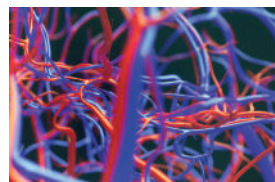

Vascular



ZIONIC rollactive RF

TRATAMIENTOS





REDUCTOR

La radiofrecuencia resistiva aumenta el metabolismo de los adipocitos mejorando su funcionalidad y el **MARP** mejora la eliminación de productos de desecho y líquidos acumulados. El tejido graso se compacta produciendo un efecto reductor a largo plazo.



REAFIRMACIÓN

Estimula la producción de fibras de **colágeno y elastina** y aumenta a medio plazo la formación de nuevas fibras elásticas. La piel adquiere **hidratación y densidad**.



TONIFICACIÓN


Mejora el **tono muscular** por la aportación de nutrientes y oxígeno al tejido conjuntivo.

Además, mejora el **retorno venoso** y por tanto, la circulación linfática.



REMODELACIÓN

Potencia la eliminación linfática de **líquidos, grasas** y desechos liberados por el adipocito.

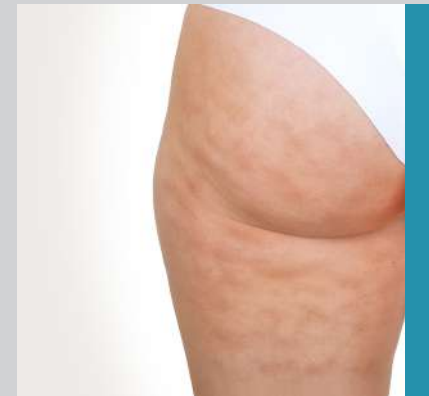

CELULITIS

Actúa de forma efectiva en la reducción de la celulitis (grado I, II, III) por la rotura de las **células adiposas** y elimina la antiestética e indeseable **piel de naranja**.



BENEFICIOS



TERMO SALUD | MEDICAL & AESTHETIC

- Aceleración de la producción de colágeno y elastina
- Incremento del metabolismo de las células grasas y compactación del tejido adiposo
- Favorece la excreción de toxinas y desechos al activar el sistema linfático y conseguir una mejora en la vascularización sanguínea
- Activa la circulación sanguínea
- Aumenta la cantidad de nutrientes y oxígeno
- Disminución de los radicales libres

INDICACIONES:

Celulitis (grado I, II, III)
 Reducción del contorno
 Reafirmación
 Remodelación
 Tonificación muscular



ZONAS:

ABDOMEN
 FLANCOS
 MUSLOS
 GLÚTEOS
 ABDUCTORES
 BRAZOS
 ESPALDA




ZIONIC rollactive RF

tecnología innovadora



Dos tamaños de aplicadores intercambiables DEEP ACTION con velocidad de rotación ajustable.

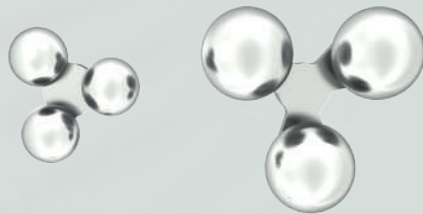

DEEP ACTION MAX
ALTA PROFUNDIDAD
Ø 19 mm

DEEP ACTION
MEDIA PROFUNDIDAD
Ø 30 mm



cabezal ergonómico, ligero y mínimamente ruidoso

Diseñado y desarrollado en torno a las estandarizaciones europeas más estrictas que regulan la óptima **fiabilidad, funcionalidad y seguridad** del producto.

El cabezal es fruto del profundo análisis y competencia del dpto de I+D en coordinación con profesionales expertos en técnicas punteras de masaje manual. Fabricado con materiales y aleaciones de **baja densidad y alta resistencia mecánica**.


El cabezal ZIONIC incorpora en su interior un **motorreductor coreless de baja inercia**: preciso, pequeño y ligero de fabricación alemana, líder en campos de aplicación como la robótica, defensa, ingeniería aeroespacial y medicina. Dicha tecnología nos ha permitido **aligerar y minimizar el cabezal** de tratamiento tanto en su peso como en el ruido emitido, con respecto a tecnologías similares de la competencia.

Su **sensor de temperatura** monitoriza en todo momento la temperatura de la zona tratada, asegurando la **máxima efectividad y seguridad**.

pantalla de control y monitorización

Integrada en el cabezal que permite actuar sobre los parámetros de potencia de **radiofrecuencia** y **rotación de MARP** de manera evolutiva, facilitando al profesional la rápida respuesta y actuación durante todo el tratamiento.


Monitoriza la evolución de la **temperatura interna** y la **profundidad del tratamiento**, permitiendo la visualización gráfica de estos parámetros en diferentes modos: **REAL TIME MODE / TREATMENT RECAP MODE**

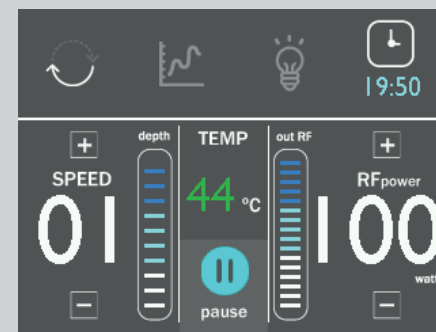

REAL TIME MODE

Visualización instantánea de la evolución de la temperatura durante el tratamiento.

Gráfica evolutiva que se actualiza cada segundo y muestra la evolución de la **temperatura subcutánea en tiempo real**.


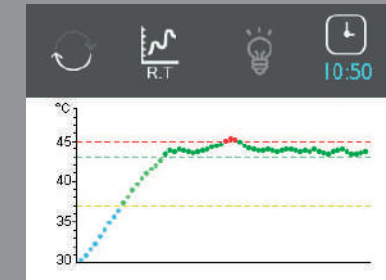


TREATMENT RECAP MODE

Modo en que se visualiza la **evolución de la temperatura y profundidad** durante todo el tratamiento permitiendo la **monitorización simultánea** de ambos parámetros.

En este modo también se visualizan **barras indicadoras** de los valores instantáneos de temperatura y profundidad junto con el valor textual de los mismos.

Para comodidad del profesional, el modo de monitorización puede ser modificado durante todas las fases del tratamiento.

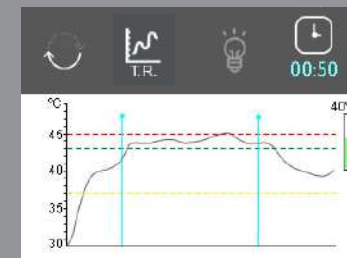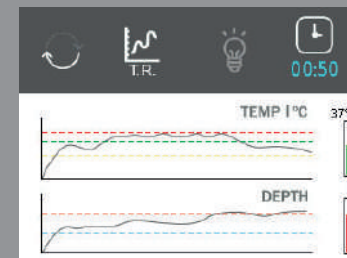



MÁXIMOS RESULTADOS

Combinados con un ejercicio físico y una dieta regular, se prolongan de manera permanente en el tiempo.



MARP + RF
Máxima efectividad y seguridad




EFFECTOS VISIBLES
desde la primera sesión

Gran variedad de tratamientos en un solo equipo



10 NIVELES DE ROTACIÓN

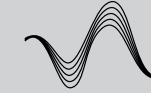


200W RADIOFRECUENCIA RESISTIVA



SENSOR DE TEMPERATURA

rentabilidad en tu centro

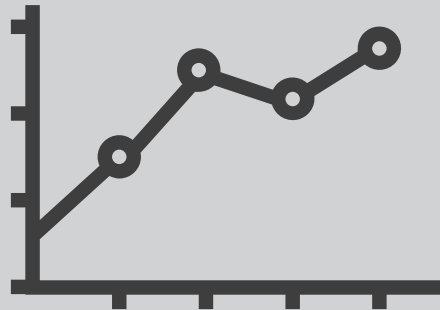

CRECIMIENTO INGRESOS

- Rapidez en tratamiento (30/40 min sesión)
Mayor número de pacientes a tratar en menor tiempo de ejecución.
- Alto beneficio por paciente
- Ampliación cartera de clientes
- Fácil mantenimiento de equipo
- Kit de marketing
Ayuda y soporte de marketing y publicidad para captación de nuevos clientes.
- Rápido retorno de la inversión
Obtiene resultados más efectivos y rápidos que otras tecnologías.


eficacia clínica

Los **estudios clínicos** han demostrado que la combinación de **MARP con radiofrecuencia resistiva** no solo garantiza resultados en remodelación corporal y eliminación de celulitis; sino que además por su acción a nivel dérmico, muscular y vascular incide sobre la mejora de la circulación linfática.

mercado en crecimiento

En **EEUU**, los tratamientos de remodelación corporal crecen un 15,4% cada año.

International Society of Aesthetic Plastic Surgery

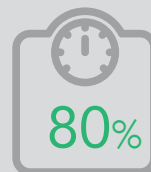

DE LA POBLACIÓN
ESTÁN POR
ENCIMA DE SU
PESO DESEADO



españoles es consumidor de medicina estética.

Fuente Estudio SEME 2016
Sociedad Española de Medicina Estética

+26



Las mujeres de + de 26 años siguen siendo las **principales usuarias** de estos servicios.

Fuente Estudio SEME 2016
Sociedad Española de Medicina Estética




En **ESPAÑA**, Población que ha realizado algún tratamiento médico-estético:

Fuente Estudio SEME 2016
Sociedad Española de Medicina Estética

POBLACIÓN FEMENINA: **42,9%**

POBLACIÓN MASCULINA: **18,4%**

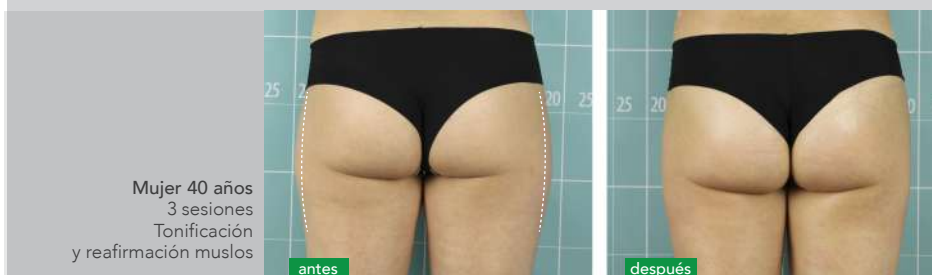

TERMO SALUD | MEDICAL & AESTHETIC

Zionic
rollactive RF



Ref. M98

DATOS TÉCNICOS:

Tensión alimentación:	230 V a.c 50/60 Hz
	110V a.c 50/60 Hz (opcional)
Consumo máximo:	660 VA
Interface:	Pantalla color 2,8" Touch Screen Backlight LED
Grado de protección IP:	IPX0
Clasificación:	Clase eléctrica I tipo BF

CARACTERÍSTICAS DE SALIDA

	MARP	RF
Niveles de intensidad:	1 a 10	Frecuencia salida: 500 KHz
Par max:	2.25 N.m continuo / 3 N.m. intermitente	Potencia máxima de salida RF 200W
Velocidad de giro máxima:	128 rpm	

CONDICIONES AMBIENTALES RECOMENDADAS PARA EL EQUIPO Y SU CABEZAL

Temp. ambiente de funcionamiento	18-30°C
Temp. ambiente de almacenam./transporte:	No existen restricciones
Presión del aire	700-1060 hPa
Humedad relativa del aire	5 - 90%

Cabezales	Deep action Ø 30 mm
	Deep Action MAX Ø 19 mm

Dimensiones:	Equipo: 18 cm (h) x 34 cm (l) x 40 cm (a)
	Carro: 45 cm (h) x 41 cm (l) x 85 cm (a)
Peso:	Equipo: 8,5 kg
	Carro: 29,5 kg

