



ProProtect Filterhalbmaske mit & ohne Ventil

Technisches Datenblatt

EIGENSCHAFTEN

- Alle Varianten erfüllen die Bestimmungen der EU-Verordnung (EU) 2016/425 und sind zugelassen als partikelfiltrierende Halbmasken gemäß den Anforderungen der EN 149:2001+A1:2009.
- Faltbar, einfache Lagerung, 3-teiliges Design passt sich komfortabel den Gesichtsbewegungen an.
- Neue Filtertechnologie für effektive Filterleistung bei niedrigem Atemwiderstand.
- Die spezielle Gestaltung der Nasenregion passt sich optimal der Gesichtsform an und verbessert die Kompatibilität mit Brillen und Augenschutz.
- Innovative Kinnlasche erleichtert das Aufsetzen und das richtige Positionieren im Gesicht.
- Angenehmes Tragegefühl auf der Haut durch die große, weiche Polsterung im Nasenbereich.
- Hygienische Einzelverpackung verhindert Verschmutzung der Maske vor ihrem Einsatz.
- Der gleichmäßige Druck der Kopfbänder erhöht den Komfort im Gesicht, im Nacken und am Kopf bei einem sicheren Gefühl.
- Farbige Kopfbänder zum einfachen Erkennen: blau für FFP2 und rot für FFP3.

MATERIAL

Filterschicht, Innenschicht: Spunbond, Polypropylene - ELEFLEN Filtertechnologie

Nasenclip: Aluminium (Lebensmittelgeeignet)

Komfortschaum am Nasenclip (innen): Polyurethan

Bebänderung: Polyester, Spandex

Größenverstellring: Polypropylen

Ausatemventil: Korb & Ventil aus Polypropylen, Membran aus Silikon

Alle Masken sind frei von Latex & Naturgummi.

GEWICHT & VE

Maske mit Ventil:

Art.Nr. 88526,88527,88529,88530,88532,88533

Gewicht: 17g (FFP2), 19g (FFP3)

Verpackungseinheit: 20 Stück je Box, 9 Boxen je Verpackungseinheit (180 Masken)

Maske ohne Ventil:

Art.Nr. 88525,88528,88531

Gewicht: 14g

Verpackungseinheit: 30 Stück je Box, 9 Boxen je Verpackungseinheit (270 Masken)

VERPACKUNGSGRÖSSE

Abmessungen Maskenbeutel

ca. 290 x 100 mm

Abmessungen Box

ca. 280 x 230 x 95 mm

Abmessungen Versandkarton (entspricht einer VE)

ca. 570 x 400 x 305 mm



ProProtect Filterhalbmaske mit & ohne Ventil

VARIANTENAUSWAHL

MODEL	EINSTUFUNG	VENTIL	VIELFACHES DES GRENZWERTES AGW
88525	FFP1 NR D	OHNE VENTIL	4
88526	FFP1 NR D	MIT VENTIL	4
88527	FFP1 NR D	MIT VENTIL	4
88528	FFP2 NR D	OHNE VENTIL	10
88529	FFP2 NR D	MIT VENTIL	10
88530	FFP2 NR D	MIT VENTIL	10
88531	FFP3 R D	OHNE VENTIL	30
88532	FFP3 R D	MIT VENTIL	30
88533	FFP3 R D	MIT VENTIL	30

ZULASSUNGEN

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie 89/686/EWG (PSA-Richtlinie) und trägt somit ein CE-Zeichen. Die Zertifizierung nach Artikel 10, EG Baumusterprüfung und die Zertifizierung nach Artikel 11, EG Qualitätssicherung, wurde ausgestellt von Central Institute for Labour Protection - National Research Institute, Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte vor der ersten Nutzung sicherstellen, dass das Haltbarkeitsdatum noch nicht abgelaufen ist. Das Ablaufdatum des Artikels ist auf der Verpackung angegeben. Verwenden Sie keine beschädigten oder abgelaufenen Halbmasken.



Dichtheit des Sitzes am Gesicht prüfen: Dazu die Filterhalbmaske mit beiden Händen vollständig abdecken, ohne sie von dem Gesicht zu entfernen und den Test durchführen:

1. Halbmaske mit Ventil - schnell einatmen.

Wenn dabei kein Lufteintritt im Inneren vorhanden ist, so liegt die Halbmaske eng an.

2. Halbmaske ohne Ventil - schnell ausatmen. Kommt keine Luft unter der Halbmaske heraus, liegt die Halbmaske eng an.

LAGERUNG UND PFLEGE

Lagern Sie die Filterhalbmaske in der Originalverpackung. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Dämpfe organischer Lösungsmittel und Öle während der Lagerung. Die garantierte Haltbarkeit in der Originalverpackung beträgt 3 Jahre.

Gebrauchte Filterhalbmasken und Filterhalbmasken mit abgelaufener Haltbarkeit sollten, entsprechend der nationalen Vorgaben, als Sondermüll entsorgt werden.

INFO

Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Atemschutzmaske oder Anwenderschulungen. Bei Rückfragen, Beratungen und Info-Material nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

nordeko SAFETY
 Brookstieg 19
 22145 Stapelfeld
 GERMANY

Tel.: +49 (0) 40 5247973-0
info@nordekosafety.de
 nordeko.de