

# BLOCCS®



# VEDENPITÄVÄ SUOJA

kipseille ja siteille



## HOITO- JA KÄYTTÖOHJE

**F** Vedenpitävä Bloccs®-suoja on suunniteltu varta vasten kipsin tai siteen suojaamiseksi, jotta käyttäjä voi kylpeä tai käydä suihkussa normaalisti. Tätä täysin vedenpitävää ja upotettavaa suojaa voi käyttää myös rannalla tai uima- tai kahlualtaassa.

**VAROITUS:** Luonnonkumilateksi voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos olet läkehoidossa, pyydä lääkärin hyväksyntä ennen suojan käyttöä. ÄLÄ KÄYTÄ, JOS OLET ALLERGINEN LATEKSILLE.



**Precision Dippings  
Manufacturing Ltd**  
Unit J, Lawrence Drive  
Stover Trading Estate, Yate,  
Bristol, BS37 5PG  
UK



Obelis s.a.  
Bd. Général Wahis 53  
B-1030, Brussels  
Belgium



Obelis SWISS GmbH  
Ruessenstrasse 12  
6340 Baar/ZG  
Switzerland

### Valmistettu Iosssa- Britanniassa.

Kaikki tuotteet on valmistettu voimassa olevan ja hyväksytyt ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmästandardin mukaisesti.

©Bloccs® 2023



### Bloccs®

Precision Dippings  
Manufacturing Ltd, Unit J,  
Lawrence Drive, Stover Trading  
Estate, Yate, Bristol, BS37 5PG, UK  
Puhelin: +44 (0) 1454 318197  
Sähköposti: [info@bloccs.com](mailto:info@bloccs.com)

[www.bloccs.com](http://www.bloccs.com)



A reprodução, cópia, obras derivadas, distribuição e exibição pública deste Manual só são permitidas com o consentimento prévio por escrito da Bloccs®.

# BLOCCS®-SUOJAN HOITO JA KÄYTTÖ

Kiitos, että valitsit Bloccs®-tuotteen. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen Bloccs®-suojan käyttöä tai sitä käyttävän lapsen valvomista. Näin varmistat, että suojaa käytetään oikein ja se pysyy vedenpitävänä.

Käytät Bloccs®-suojaa kylvyssä, suihkussa tai muussa vesiaktiiviteetissa omalla vastuullasi. Pyydä lääkäriltä neuvoa, jotta varmistut siitä, ettei tällainen aktiiviteetti vaikuta vammaan.

## Bloccs®-suojan laittaminen paikalleen

Bloccs®-suoja on tehty luonnonkumilateksista, joten poista terävät korut ja varo puhkaisemasta sitä sormenkynsillä. Peitä terävät kulmat teipillä tai joustavalla siteellä.

Ennen käyttöä hiero tiivisteosaa yhteen käsilläsi ja venytä sitä hellästi. Tarkista tiiviyys kokeilemalla suojaa käteen tai jalkaan, jossa ei ole kipsiä. Jos tiivisteosa tuntuu liian kireältä tai liian löysältä kokeiluissa, valitse toinen kokoinen suoja.

Sileän ja ihonmyötäisen vedenpitävän tiivisteosan pitäisi venyä helposti kipsin yli.

**Bloccs®-käsivarsisuojan/-jalkasuojan ja -kynnänpääsuojan/-polvisuojan asettaminen paikalleen on helppoa tämän vihkosen viisivaiheisten ohjeiden avulla.**

## Bloccs®-suojan käyttäminen

Bloccs®-suoja on tarkoitettu pitämään side tai kipsi kuivana, kun se altistuu vedelle tai upotetaan veteen. Bloccs®-suoissa käytetään samanlaista tiivistettä kuin märkäpuvuissa.

Ennen veteen menemistä poista kaikki ilma Bloccs®-suojaista hieromalla sitä ylöspäin kohti tiivisteosaa. Tämä voidaan tehdä myös laskemalla raaja hitaasti veteen, jolloin veden paine pakottaa ilman suojan yläosaan.

Poista ilma venyttämällä tiivisteosaa hieman irti ihosta ennen veden alle upottamista, ja varmista, ettei suojan sisään pääse vettä.

Suoja täytyy laittaa paikalleen vasta juuri ennen veteen menemistä ja poistaa heti vedestä poistuttua.

Veteen meneminen on omalla vastuullasi. Älä hyppää tai sukella uima-altaaseen. Suojaa ei ole suunniteltu sukellukseen, snorklaukseen tai muuhun vesiurheiluun.

Suosittellemme tarkistamaan Bloccs®-suojan vedenpitävyyden ja mukavuuden säännöllisesti käytön aikana.

Suojaa voidaan käyttää jopa 30 minuutin ajan – kunhan se pysyy mukavana eikä ole liian kireä ja se tarkistetaan säännöllisesti. Jos suojaa käytetään pidempään kuin 30 minuutin ajan, sen sisälle jäänyt ilma voi aiheuttaa hikoilua ja epämukavuutta.

LAPSIA ON VALVOTTAVA ALTAASSA TAI MERESSÄ JATKUVASTI

# Suojan poistaminen

Poista Bloccs®-suoja liu'uttamalla se varovasti kädessä tai jalassa olevan siteen tai kipsin yli. Varo, etteivät sormenkynnet tai korut vaurioita tiivisteitä.

## Bloccs®-suojan hoito

Bloccs®-suoja kuuluu käytössä, mutta se kestää noin neljän viikon ajan tavallisessa käytössä.

Suoja on tarkistettava ennen jokaista käyttökertaa vaurioiden ja heikkenemisen varalta.

Jos suoja on heikentynyt tai vaurioitunut millään tavalla, sen tilalle on hankittava uusi.

Suojaa on säilytettävä alle 26 °C:n lämpötilassa ja poissa lämmittimien läheisyydestä. Erittäin kylmässä suoja voi jäykistyä, mutta tämä ei ole pysyvää, ja se palautuu ennalleen lämpimässä.

Säilytystä kosteassa paikassa on vältettävä. Vältä suojan pitkäaikaista altistamista valolle, etenkin suoralle auringonvalolle, ja voimakasta UV-säteilyä tuottavalle keinovalolle.

Bloccs®-suoja voidaan pestä lämpimässä vedessä, minkä jälkeen se on kuivattava huolellisesti sisä- ja ulkopuolelta. Bloccs®-suojan asettaminen paikalleen on helpompaa, jos sen sisäpuolelle levitetään hieman talkkia. Älä kuivaa suojaa kuivausrummussa tai lämpöpatterin päällä.

Vältä kosketusta kuparin, kuparia sisältävien metalliseosten, liuottimien, öljyjen ja rasvojen kanssa, sillä ne voivat vaurioittaa Bloccs®-suoja.

Pidä poissa avotulen luota, sillä tämä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman.

*Jos sinulla on kysyttävää Bloccs®-suojusta, käy osoitteessa [www.bloccs.com](http://www.bloccs.com) tai lähetä sähköpostia osoitteeseen [info@bloccs.com](mailto:info@bloccs.com).*

*Tämä käyttöopas, kokotaulukko ja tiedot Bloccs®-takuusta ovat saatavilla verkkosivustollamme [www.bloccs.com](http://www.bloccs.com)*

*Bloccs® pidättää oikeuden muuttaa käyttöopasta tarpeen mukaan. Kuluttajana vastuullasi on tarkistaa käyttöoppaan verkkoversio mahdollisten muutosten varalta.*

**Varoitus:** Bloccs®-suoja voi olla liukas märkänä. Käytä liukuestemattoa suihkussa tai kylvyssä ja pidä toinen liukuestematto tai pyyhe saatavilla suihkusta tai kylvystä poistumista varten. Älä kävele uima-altaan reunalla Bloccs®-suojan kanssa, ja ole erityisen varovainen uima-altaan portaissa, sillä ne voivat olla liukkaat. Pidä tiukasti kiinni kaiteesta.

**Varoitus:** Bloccs®-suoja ei ole lelu. Vältä tukehtumisriski pitämällä tuote ja sen pakkaus poissa lasten ja vauvojen ulottuvilta.

**Varoitus:** Luonnonkumilateksi voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos olet lääkehoidossa, pyydä lääkärin hyväksyntä ennen suojan käyttöä. **ÄLÄ KÄYTÄ, JOS OLET ALLERGINEN LATEKSILLE.**

**Varoitus:** Erityistä varovaisuutta on noudatettava upotettaessa jalkakipsi veteen, sillä se voi olla raskas ja rajoittaa liikkumista. Älä yritä uida jalkakipsin kanssa.

**Varoitus:** PICC-katetriin tai tiputusletkujen kanssa on oltava varovainen.


*Varoitusta kaikista mahdollisista vaaroista tämän tuotteen käyttöön liittyen ei ole mahdollista antaa. Kuluttajia kehoitetaan siksi noudattamaan tervettä järkeä ja hyvää harkintaa Bloccs®-suojan käytössä.*

**Kaikista tuotteen käyttöön liittyvistä vakavista tapauksista on ilmoitettava valmistajalle ja ostamaan asianmukaiselle viranomaiselle.**

# BLOCCS®

## BLOCCS®- KÄSIVARSISUOJAN TAI -JALKASUOJAN LAITTAMINEN PAIKALLEEN

Suojaa on käytettävä  
kaikkien hoito- ja  
käyttöohjeiden mukaisesti.  
Katso opasvideot ja usein  
kysytyt kysymykset  
osoitteessa  
[www.bloccs.com](http://www.bloccs.com).

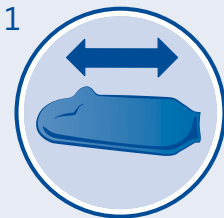

Ota suoja pakkauksesta ja taita se auki. Poista kaikki terävät sormukset ja vastaavat esineet.



Ennen käyttöä hiero tiivisteosaa yhteen käsilläsi ja venytä sitä hellästi.



Taita suoja avoimesta päästä puoliaksi nurin päin.



Tarkista tiiviyys kokeilemalla suojaa ensin käteen tai jalkaan, jossa ei ole sidettä tai kipsiä.

Aseta käsivarsi tai jalka, jossa side tai kipsi on, suojan avoimesta päästä sisään niin, että käden tai jalan pää tulee suojan päätyyn asti.




Rullaa suoja takaisin käsivarren tai jalan päälle niin, että tiiviste on tiiviisti ihoa vasten. Jos tiiviste tuntuu liian kireältä tai liian löysältä kokeiltaessa, valitse toisen kokoinen suoja.

Päästä ilmaa ulos kellumisen estämiseksi.

# BLOCCS®

## BLOCCS®- KYYNÄRPÄÄSUOJAN TAI - POLVISUOJAN LAITTAMINEN PAIKALLEEN

Suojaa on käytettävä  
kaikkien hoito- ja  
käyttöohjeiden mukaisesti.  
Katso opasvideot ja usein  
kysytyt kysymykset  
osoitteessa  
[www.bloccs.com](http://www.bloccs.com).

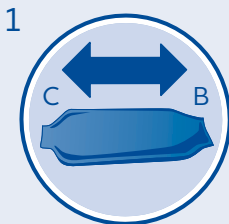


Ota suoja pakkauksesta ja  
taita se auki. Poista kaikki  
terävät sormukset ja  
vastaavat esineet.


Suojassa on kaksi päätä:  
leveämpi pää, joka tulee  
tiivisti olkaparren tai reiden  
ympäri (B), ja pienempi  
pää, joka tulee tiiviisti ranteen  
tai pohkeen ympärille (C).



Ennen käyttöä hiero  
tiivisteosia yhteen käsillä ja  
venytä niitä  
hellästi.

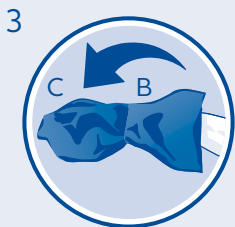


Voit asettaa suojan  
paikalleen helposti  
kääntämällä B-pään puoliksi  
nurin päin niin, että se on  
juuri ja juuri C-pään  
yläpuolella.

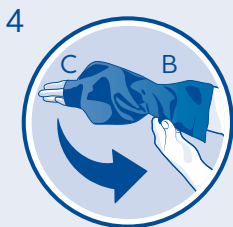

Tarkista tiiviyys kokeilemalla  
suoja ensi käteen tai  
jalkaan, jossa ei ole sidettä  
tai kipsiä.

Työnnä joko käsi tai jalka  
hitaasti sekä B- että C-pään  
läpi. Rullaa sitten varovasti  
B-pää ylös niin, että se on  
tiivisti käsivarren tai reiden  
päällä.

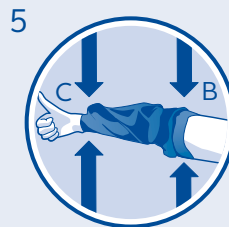

Koko sidealueen on oltava  
peitettyä, ja suojan täytyy  
tiivistyä vedenpitävästi  
käsivarren tai jalan  
ympäri molemmista  
päistä. Jos tiiviste tuntuu liian  
kireältä tai liian löysältä  
kokeiltaessa, valitse toisen  
kokoinen suoja.

Päästä ilmaa ulos kellumisen  
estämiseksi.

# KUV AKESANASTO

	Valmistaja
	Vaatimustenmukaisuuden osoittava CE-merkintä
	UK Vaatimustenmukaisuus arvioitu
	Lääkinnällinen laite
	Yksilöllinen laitetunniste
	Laitteiden lukumäärä
	Erätunnus
	Valmistuspäivä
	Jakelija
	Valtuutettu edustaja Euroopan unionin alueella
	Sveitsin valtuutettu edustaja
	Maahantuoja
	VAROITUS
	Sisältää luonnonkumilateksia
	Liukas pinta
	Tukehtumisvaara
	Pidä poissa auringonvalosta
	Säilitada temperatuuril 5–26 °C (41–78 °F)
	Samalle potilaalle useasti käytettävä
	Steriloimaton
	Tarkista käyttöohjeet
	Kierrätettävä pakkaus
	Ei avotulta