

5 | הוראות ניקוי

משאבת אנבלה אינה מחוטאת בעת האספקה ויש לחטאה ביסודיות לפני השימוש הראשון. על מנת להגן עלייך ועל תינוקך, יש לחטא את החלקים הניתנים לשטיפה בהתאם להוראות מדריך זה (שטיפה בלבד אינה מספיקה). תהליך החיטוי נועד למגר מיקרואורגניזמים שעלולים לסכן אותך ואת תינוקך ולזהם את החלב שלך.

ודאי כי חיטאת את חלקי המשאבה הבאים במגע עם גופך או עם החלב, לפני השימוש הראשון ולאחר כל שאיבה

הערה חשובה: מדריך הניקוי אינו מתייחס לחלקים החשמליים. אין להשרות, לשטוף או לחטא כל חלק חשמלי במשאבת אנבלה.



הערה חשובה: לחלקי הסיליקון והפלסטיק יש תאריך תפוגה ועלייך לתחזק ולהחליף אותם כל **3 חודשים**.



אילו חלקים עלי לחטא?

לפניך רשימת החלקים שאותם יש לחטא לפני השימוש הראשון:



- מגן שד מתכווץ 2x
- שסתום 2x
- דיאפרגמה 2x
- כוסית דיאפרגמה 1x
- מחבר 2x
- בקבוק 2x
- מכסה לבקבוק 2x

איך עלי לחטא את החלקים הללו?

אין לחטא את חלקי המשאבה במיקרוגל. שימוש במיקרוגל עלול לגרום למגן השד ולשאר חלקי המשאבה המפורטים בפרק זה להיות בלתי שמישים.



לאחר כל שימוש:

ניתן לנקות את חלקי המשאבה במדיח או על ידי שטיפה במים חמים וסבון. לפני השימוש הראשון ופעם ביום: הרתיחי את החלקים הניתנים לשטיפה.




הרתחה:

1. לפני חיטוי חלקי המשאבה, שטפי את החלקים הניתנים לשטיפה במים קרים (כ-20 מעלות).
2. שטפי את החלקים במים חמים (כ-30 מעלות) עם סבון עדין טבעי, במידת האפשר.
3. הסירי ושטפי את הסבון מחלקי המשאבה במים קרים.
4. הרתיחי את חלקי המשאבה השטופים ~~במים חמים~~ בסיר עם מים רותחים.
5. הוציאי את החלקים מתוך הסיר בזהירות על מנת להימנע מכוויות, והניחי את חלקי המשאבה על משטח נקי לייבוש.



שימי לב - אין להרתיח את חלקי המשאבה יותר מ-5 דקות.




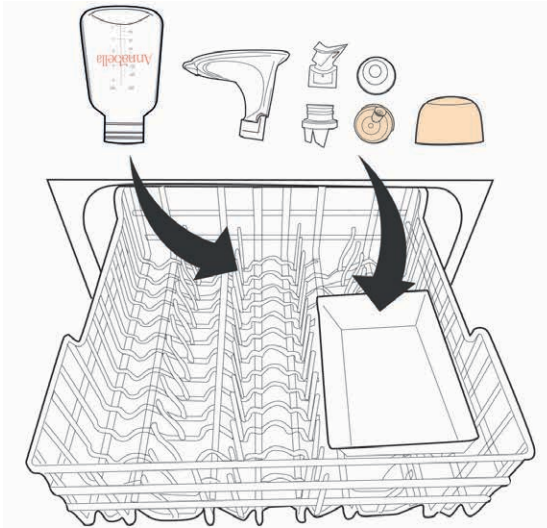

1. הניחי את החלקים הניתנים לשטיפה במגש העליון של המדיח.
2. וודאי כי את משתמשת בסבון עדין, או אפילו טבעי, למדיח, במידת האפשר (ניתן לחטא את חלקי המשאבה ללא סבון כלל).
3. אפשרי לחלקים להתייבש על משטח נקי.

ייבוש

אין להרכיב את משאבת החלב לפני שהחלקים יבשים לחלוטין.

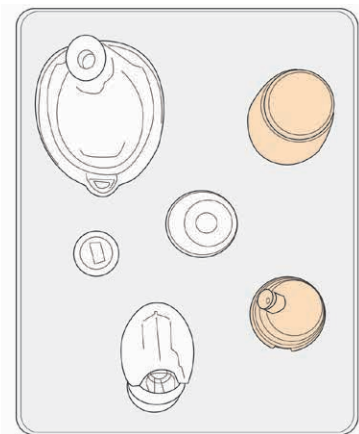

1. אפשרי לחלקים להתייבש על משטח נקי. ניתן לכסות את המשטח במגבת מטבח נקייה או במטלית נייר.
2. אין לאחסן את החלקים הנקיים בכלי אטום. חלקים לחים עלולים לצבור בקטריות שעלולות לזהם את המשאבה וגם את החלב שלך.
3. אחסני את החלקים שעברו חיטוי בשקית או במיכל אחסון נקי והרחיקי מאור שמש ישיר, ורק לאחר שהתייבשו לגמרי. קראי עוד על תנאי האחסון בסוף פרק 7.

ניקוי יחידת הוואקום


אין לנקות את יחידת הוואקום בעודה מחוברת למטען או למשאבה.
וודאי כי יחידת הוואקום מנותקת לחלוטין מכל הכבלים.



אין לרסס או לשפוך נוזלים ישירות על יחידת הוואקום.



ניקוי יחידת הוואקום בקביעות יבטיח את פעילותה התקינה.

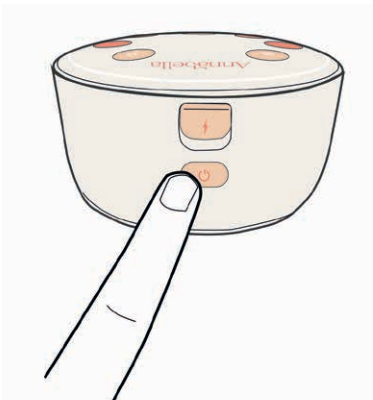

1. כבי את יחידת הוואקום.

2. נתקי את היחידה מהמטען ו/או מהמשאבה.

3. נגבי את יחידת הוואקום במטלית לחה ונקייה.

4. נגבי את יחידת הוואקום במטלית יבשה עד לייבוש מלא.