


6 | הכנה לשאיבה

לפני שאיבת החלב בצעי בבקשה את הפעולות הבאות, על מנת להבטיח חוויית שאיבה נוחה ובטוחה.

טעינה

משאבת החלב של אנבלה היא מכשיר חשמלי המופעל על ידי סוללה, ועליה להיות טעונה באופן מלא לפני השימוש. **שימי לב שלא ניתן להשתמש במשאבה כל עוד היא מחוברת למקור מתח.** אין צורך לטעון את יחידת העיסוי.

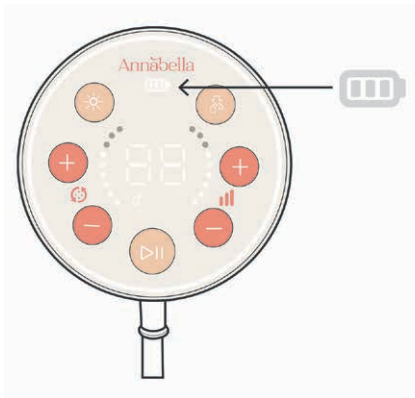

1. וודאי כי המשאבה טעונה במלואה לפני השימוש הראשון.
2. תוכלי לדעת כי יחידת הוואקום נטענת כאשר אייקון הסוללה מופיע על המסך.
3. כאשר הקווים על אייקון הסוללה מתחילים להתמלא – הסוללה נטענת.
4. אם כל הקווים של הסוללה מופיעים באייקון והוא כבר אינו מתמלא – הסוללה טעונה במלואה.
5. יש להשתמש רק במטען שסופק באריזת אנבלה. אין להשתמש במטענים אחרים.
6. אם קווי הסוללה אינם מופיעים והאייקון מהבהב רמת הסוללה נמוכה מאוד.
7. כאשר המשאבה אינה בשימוש, הקפידי לכסות את שקע טעינת יחידת הוואקום.


ניקוי

לפני הרכבת משאבת החלב של אנבלה יש לחטא ולנגב היטב את כל החלקים הבאים במגע עם חלב האם. עקבי אחר הוראות החיטוי המופיעות בפרק 5.


הרכבת המשאבה

החלקים הנחוצים להרכבת משאבת החלב הינם:


- יחידת עיסוי
- מגן שד מתכוונן
- מחבר
- שסתום
- דיאפרגמה
- כוסית דיאפרגמה
- מכסה דיאפרגמה
- בקבוק

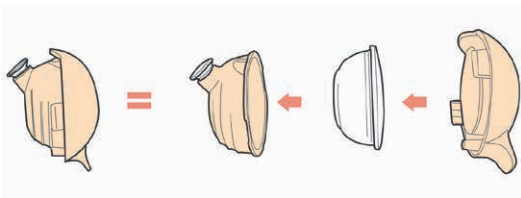

1. הכניסי את הדיאפרגמה לתוך כוסית הדיאפרגמה וסגרי את מכסה הדיאפרגמה.

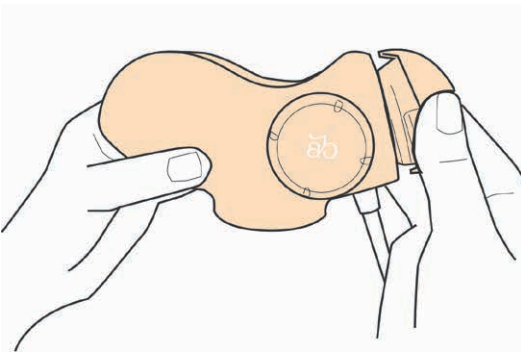


2. הכניסי את החלקים המורכבים לחלקה האחורי של יחידת העיסוי (יש להקפיד שחלק הסיליקון פונה כלפי מעלה ושידית מכסה הדיאפרגמה פונה כלפי מטה), וודאי כי הם נצמדו בקליק.

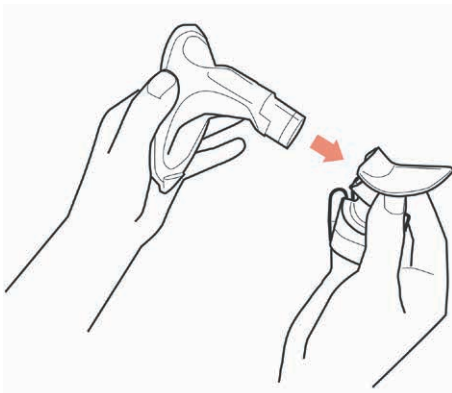


3. חברי את מגן השד והמחבר אחד לשני. וודאי כי הם אטומים היטב.




4. הכניסי את השסתום לחלק התחתון של המחבר. וודאי שהחלקים מהודקים במקומם ומורכבים היטב.

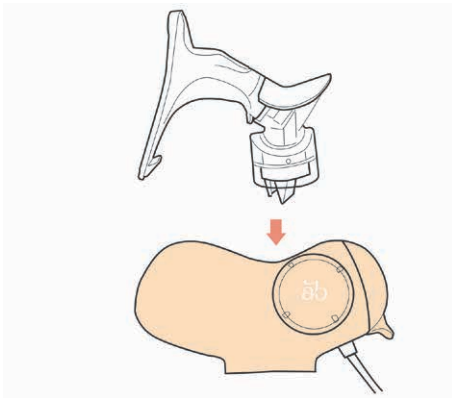


5. חברי את מגן השד ליחידת העיסוי.

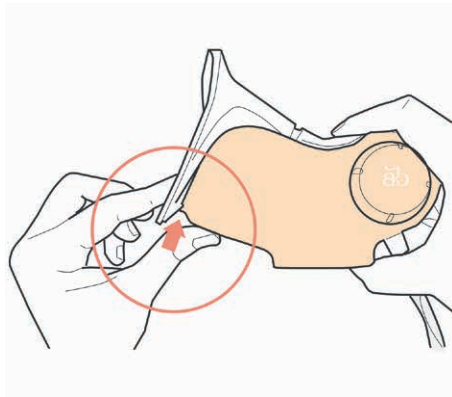

6. וודאי כי הסוגר מאובטח במקומו בקליק.

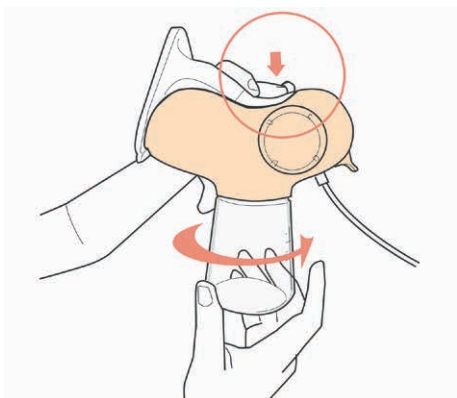

7. בעת חיבור הבקבוק וודאי כי את מחזיקה את המחבר ומהדקת אותו אל גוף יחידת העיסוי באחיזת צבת. וודאי כי הבקבוק מוברג היטב.

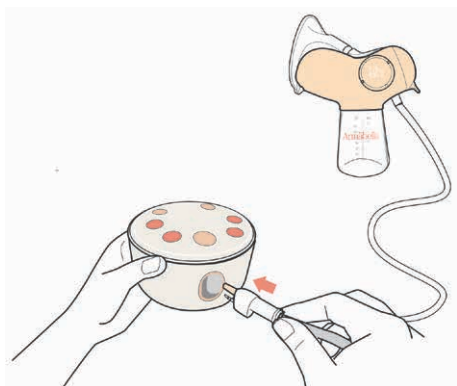

8. לאחר שיחידת העיסוי הורכבה, הכניסי את קצה צינורית הוואקום אל תוך יחידת הוואקום. ודאי כי שמעת את הקליק המבטיח שהצינורית מעוגנת במקומה.