

פתרון	תקלה
<ul style="list-style-type: none"> • ודאי כי כל החלקים יבשים ומורכבים כראוי (להרכבה נכונה ראי פרק 6). • החליפי את החלקים הניתנים לשטיפה המתוארים בפרק 5, אחרי 3 חודשי שימוש. • אזהרה: אי החלפת החלקים הניתנים לשטיפה בזמן, עלולה לפגוע בביצועי המשאבה ואף לגרום לפגיעה או לפגיעה בייצור החלב. • ודאי כי צינורית הוואקום אינה מקופלת. • ודאי כי מגן השד מוצמד לחזה כראוי. • ודאי כי אינך מושכת את מכסה הדיאפרגמה או צינורית הוואקום בזמן השאיבה. 	רמת ואקום חלשה מדי
<ul style="list-style-type: none"> • בדקי את רמת הטעינה של הסוללה. • נתקי את המשאבה מהחשמל. לא ניתן להשתמש במשאבה בעודה מחוברת לחשמל. 	המשאבה אינה נדלקת
<ul style="list-style-type: none"> • החליפי את צינורית הוואקום מיד. • אזהרה! אי החלפת צינורית הוואקום עלול לפגום במשאבה ולהפוך אותה לבלתי שמישה. 	יש לחות או רטיבות בצינורית
<ul style="list-style-type: none"> • כבי את המכשיר והדליקי בחזרה. • במקרה והתקלה ממשיכה, צרי קשר עם שירות הלקוחות. 	תקלת תצוגה E1 או-E2
<ul style="list-style-type: none"> • הרכיבי מחדש את המשאבה בהתאם להוראות בפרק 6. • כבי והדליקי את המשאבה. • ודאי כי יחידת העיסוי וסיבוב הלשון עובדות בצורה חלקה. • במקרה והתקלה ממשיכה, צרי קשר עם שירות הלקוחות. 	תקלה ביחידת העיסוי E3
<ul style="list-style-type: none"> • כבי את המשאבה והמתיני 5 דקות עד שתתקרר. • הדליקי את המשאבה. • במקרה והתקלה ממשיכה, צרי קשר עם שירות הלקוחות. 	תקלת התחממות סוללה E4