

בטיחות:

קראי את כל ההנחיות לפני השימוש במכשיר. האזהרות מצינות את כל ההנחיות החשובות בענייני בטיחות. שימי לב, אי ציות להוראות הבטיחות עלול לגרום לפציעתך או נזק למכשיר.

⚠️ זהירות:

- על מנת להימנע משריפה, שוק חשמלי או כוויות חמורות:
 - אין להפעיל את משאבת החלב אנבלה בעודה מחוברת לחשמל.
 - אין להשאיר את משאבת החלב ללא השגחה בעודה מחוברת לחשמל.
 - אין להפעיל את משאבת החלב אם הכבל או התקע שלה פגומים, אם אינה פועלת כראוי, אם הופלה או ניזוקה או אם באה במגע עם מים. במקרה ומשאבת החלב נפגמה, יש להפסיק את השימוש בה מיד וליצור קשר עם שירות הלקוחות.
 - אין להשתמש בספק כוח מלבד זה המסופק באריזה לטעינת משאבת החלב.
 - אין להשתמש במשאבת החלב אם באה במגע עם מים או נוזלים אחרים, לרבות:
 - אין להשתמש במשאבה בזמן מקלחת או באמבטיה.
 - יש להימנע מהשמטת המשאבה למיכל הנוזלים.
 - אין לשטוף את המשאבה, למעט החלקים המיועדים לכך.
 - אין להכניס או להשמיט את המשאבה לתוך מים או כל נוזל אחר.
 - אין לשטוף את המשאבה במים זורמים.
 - אין להחדיר נוזלים לצינורית הוואקום של המשאבה.
 - אם המשאבה נחשפה למים או לכל נוזל אחר, אין לגעת בה. יש לנתק את המשאבה משקע החשמל, לכבותה, וליצור קשר עם היצרן.
 - במידה והצינורית נחשפה למים או לכל נוזל אחר, יש לוודא שהמשאבה כבויה וליצור קשר עם היצרן.

- יש לחבר את המשאבה לחשמל רק בעת טעינתה, ולנתקה לאחר סיום הטעינה.
- אין להניח את המשאבה או לאחסנה במקום שיש בו סיכון לנפילה.
- משאבת החלב והאביזרים הנלווים לה אינם עמידים בחום. יש להרחיקם ממשטחים מחוממים ולהבה גלויה.
- אין להשתמש במשאבה בקרבת חומרים דליקים.
- אין להשאיר את המשאבה ברכב.
- אין לחטא או לייבש את המשאבה או האביזרים הנלווים לה במיקרוגל.

לתשומת ליבך

- יש לשטוף את כל חלקי המשאבה הבאים במגע עם השד ועם חלב האם לאחר כל שימוש. יש לעקוב אחר הוראות השימוש במדריך זה.
- על מנת להימנע מסיבוכים בריאותיים ולהפחית את הסיכון לפציעות:
 - אסור להשתמש במשאבת החלב אנבלה בזמן נהיגה.
 - שאיבה יכולה לעודד צירים. אין לשאוב לפני לידה. יש להיוועץ ברופא מוסמך טרם השימוש במשאבה בזמן הריון.
 - שימוש במשאבת חלב אינו מפחית או מבטל את הסיכון להעברת חיידקים/וירוסים לתינוק דרך חלב האם. מומלץ להתייעץ ברופא מוסמך במידה ונדבקת במחלה כלשהי, לרבות צהבת B, צהבת C או איידס (HIV).
 - יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים ואנשים עם לקות פיזית, חושית או נפשית או אנשים חסרי ניסיון או ידע, אלא אם הונחו בנושא על ידי האדם האחראי לביטחונם או בהשגחתו.
- ניקוי המשאבה ותחזוקתה יבוצעו על ידי מבוגר לאחר קריאה מקיפה של הוראות הניקוי והתחזוקה.
- מוצר זה מיועד לשימוש אישי. שימוש על ידי יותר מאדם אחד עלול לגרום לבעיות רפואיות ולביטול תוקף האחריות.
- במקרה שהמשאבה דורשת תיקון, אין לתקן אותה באופן עצמי. אין לנסות לשנות את המוצר ולא את חלקיו. יש ליצור קשר באופן מיידי עם שירות הלקוחות של אנבלה במקרה שהמכשיר זקוק לתיקון.

- אין להשתמש במוצר פגום. יש להחליף חלקים בלויים או פגומים.
- יש להשתמש במשאבת החלב רק למטרה שלשמה נועדה, כמתואר בהוראות שימוש אלה.
- אין להשתמש במשאבת החלב בזמן שינה או כאשר מרגישים ישנוניים.
- במקרה של עובש, לחות, רטיבות או קרע, או נזק כלשהו בצינורית, יש להפסיק את השימוש במכשיר ולהחליף את צינורית הוואקום.
- יש לנקות ולחטא כל חלק הבא במגע עם השד או עם חלב האם לפני השימוש הראשון. יש לעקוב אחר ההוראות בפרק 5.
- יש להשתמש רק בחלקים שסופקו על ידי אנבלה עבור משאבת החלב.
- בעוד שיייתכן כי תחושי מעט אי-נוחות בעת השימוש הראשוני במשאבת החלב, שימוש במשאבת החלב אינו אמור לגרום כאב. התאימי את גודל מגן השד המתכוונן על ידי סיבוב כפתור גובה-הלשון הנמצא בצד יחידת העיסוי, או את רמת הוואקום שעל גבי יחידת הוואקום. ראי עוד הנחיות הנוגעות לכפתור גובה-הלשון והתאמת גודל מגן השד בפרק 7, או צפי בהדגמה באתר אנבלה.
- אם השאיבה מסבה כאב או לא נעימה, יש לכבות את המכשיר, לשחרר את הוואקום בין השד למגן השד המתכוונן ולהסירו מהשד.
- בנוסף, אם השאיבה מסבה כאב, יש ליצור קשר עם רופא מומחה או עם יועצת הנקה.

יש לעקוב אחר הוראות הטיפול בבקבוקים ובחלקים השונים של משאבת החלב אנבלה:

- שימי לב! אי החלפת חלקי הסיליקון בזמן, תשפיע על ביצועי המשאבה ועל עוצמת הוואקום שלה, ועלולה להשפיע על תפוקת החלב.
- **אין להכניס את בקבוקי הפלסטיק למקפיא!** בקבוקי פלסטיק מתבלים כאשר מקפיאים אותם ועלולים להישבר.
- בקבוקים וחלקים עלולים להינזק כתוצאה מטיפול לא נכון (כלומר, נפילה, הידוק יתר או חבלות).
- בקבוקים עלולים להינזק גם מחימום במיקרוגל.
- אין להשתמש בחלב במידה והבקבוק סדוק או פגום.