


מגן שד מתכוונן מידות 82-52 ס"מ  
זלצה המידה ממ

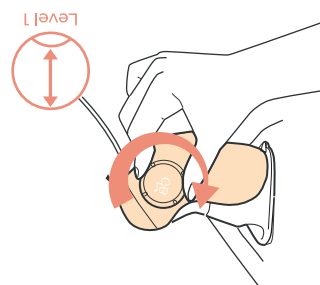


לצה זמט אט קח  
מידה מא זמזל זמט קח  
אזמל מוא זמזל מא זמזמ

Annabella

Annabella

סובכי את גלגלת גובה הלשון  
על מנת לשנות את המידה  
של מגן השד שלך

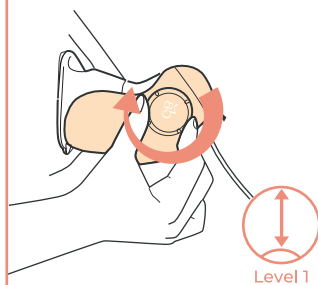

מה המידה שלך?

מגן שד מתכוונן מידות 18-24 ס"מ


השתמשי בסרגל למציאת המידה המתאימה לך.

למידה הניחי את הסרגל מתחת לפטמה, צמוד להילה.  
הפטמה אמורה להכנס בנוחות למדיד, לא "להדחס" לתוכו.

להתאמת מגן השד למידתך השתמשי בגלגל גובה הלשון  
לפי המדידה שלך.

**שימי לב!** עלייך תמיד להשתמש ברמה הגבוהה ביותר אשר  
עדיין מאפשרת לך חווית שאיבה נעימה, מאחר והמידה שלך  
מתשנה לאורך תקופת ההנקה שלך.

### מרכזי

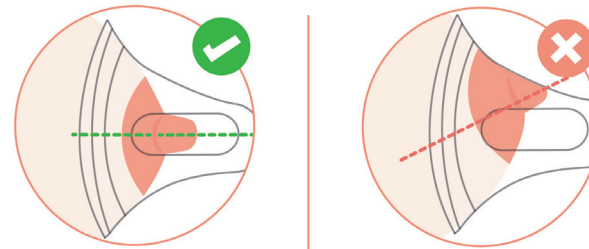

בהצמדת מגן השד לפטמה הקפידי שהפטמה  
תהיה במרכז ותוכל לנוע בחופשיות.

Annabella