

<b>APORTE MEDICO S.A.S</b>	<b>ANEXO</b>	Doc. No.: ANEXO/DT/013.010
		Versión: 02
	<b>FICHA TECNICA REHABILITADOR PELVICO</b>	Fecha : 2018-11-20
		Página : 1 de 3

<b>NOMBRE GENÉRICO DEL DISPOSITIVO MÉDICO</b>	Rehabilitador Pélvico KM 518 -KM526
<b>SUBPARTIDA ARANCELARIA</b>	
<b>MARCA E IMAGEN</b>	 <p style="text-align: center;"> <span style="margin-right: 100px;">KM 518</span> <span>KM 526</span> </p> <p style="text-align: center;"><b>PELVIFINE</b></p>
<b>PRESENTACIONES COMERCIALES</b>	<p>Este dispositivo está compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 Estuche</li> <li>● 1 Unidad Rehabilitador</li> <li>● 1 Sonda vaginal y/o una sonda rectal</li> <li>● Guía del usuario.</li> </ul>
<b>VIDA ÚTIL</b>	Diez años después de la fecha de fabricación
<b>INDICACIONES Y USOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Incontinencia urinaria y/o fecal. Rehabilitación de los músculos pélvicos que se debilitaron después del parto o cirugías pélvicas como la histerectomía.</li> <li>● Dolor pélvico crónico.</li> <li>● Eyaculación precoz</li> <li>● Disfunciones neuromusculares pélvicas no neurogenicas</li> </ul>

<b>APORTE MEDICO S.A.S</b>	<b>ANEXO</b>	Doc. No.: ANEXO/DT/013.010
		Versión: 02
	<b>FICHA TECNICA REHABILITADOR PELVICO</b>	Fecha : 2018-11-20
		Página : 2 de 3

<p><b>ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES</b></p>	<p>Preste especial atención a las siguientes advertencias de seguridad :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No inserte los cables en una red eléctrica.</li> <li>• No sumerja el dispositivo o sus sondas en el agua, líquidos o cualquier otra sustancia.</li> <li>• No use el Rehabilitador Pelvifine en presencia de gases anestésicos inflamables y aire o con oxígeno u óxido nitroso.</li> <li>• Las sondas y electrodos son para uso en un solo paciente.</li> <li>• Mantenga fuera del alcance de los niños.</li> <li>• Utilice únicamente el Rehabilitador Pelvifine en regiones vaginales y rectales Nunca use El Rehabilitador en otras partes de su cuerpo ya que los impulsos eléctricos podrían ocasionar daño.</li> <li>• No abra ni realice ninguna modificación de este equipo.</li> <li>• Para garantizar su higiene personal, no permita que otras personas usen sus sondas.</li> <li>• Siempre lave las sondas a fondo después de su uso.</li> <li>• Utilice sólo sondas vaginales o rectales pelvifine aprobados con su Rehabilitador Pelvifine.</li> <li>• Para encender su dispositivo, utilice una batería de 9V. Nunca conecte su dispositivo o sus sondas a una fuente de alimentación de corriente.</li> </ul> <p><b>NO UTILICE ESTE DISPOSITIVO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si usted es portador de un marcapasos cardíaco</li> <li>• Durante el embarazo.</li> <li>• Infecciones o alteraciones de la piel vaginal o rectal.</li> <li>• En la piel con alteraciones de la sensibilidad.</li> </ul>
<p><b>DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO</b></p>	<p>Los rehabilitadores del piso pélvico fueron desarrollados con el objetivo de lograr mantener la salud de los músculos pélvicos en forma óptima. Es un producto diseñado para dar a los pacientes la oportunidad de ejercitar sus músculos normales, fortalecer los músculos débiles y las fibras nerviosas en un compacto dispositivo, fácil de usar y versátil.</p>
<p><b>MÉTODO DE LIMPIEZA</b></p>	<p>Simplemente enjuague la parte insertable bajo el grifo, manteniendo los cables secos en todo momento. No hierva la sonda. Se puede esterilizar utilizando una solución de esterilización suave.</p>
<p><b>MÉTODO DE DESECHO O DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO</b></p>	<p>Este dispositivo debe seguir las normas de desecho de dispositivos electrónicos según las leyes de cada país.</p>

<b>APORTE MEDICO S.A.S</b>	<b>ANEXO</b>	Doc. No.: ANEXO/DT/013.010
		Versión: 02
	<b>FICHA TECNICA REHABILITADOR PELVICO</b>	Fecha : 2018-11-20
	Página : 3 de 3	