

BELLECCUP

La vie est belle

Vielen Dank, dass Sie Bellecup als Ihre bevorzugte Menstruationstasse gewählt haben. Eine sichere, umweltfreundliche und sauberere Alternative zu Tampons und Binden.

Was ist die Bellecup Menstruationstasse?


Bellecup ist eine wiederverwendbare Menstruationstasse, die unter Reinraumbedingungen aus natürlichem, nicht gefärbtem, weichem, medizinischem Silikon hergestellt wird.

Es nimmt mehr Flüssigkeit auf, als ein Tampon, eine Binde oder andere Menstruationstassen und ist eine sanfte Unterstützung für die inneren Organe für diejenigen, die es benötigen. Das Fassungsvermögen der Tasse beträgt 24 ml.

Bellecup kann mit einer milden Seifenlauge gereinigt und wiederverwendet werden.


Im Laufe der Zeit stellen Sie möglicherweise fest, dass Blut Ihren Bellecup verfärbt, dies beeinträchtigt jedoch nicht die Leistung Ihres Bellecup während des Gebrauchs.

Im unteren Teil Ihres Bellecup finden Sie eine lange Lasche mit 3 Sollbruchstellen (*siehe Bild*1*). Sie können die Lasche auf die gewünschte Länge zuschneiden. Achten Sie darauf, dass Sie den Boden des Bechers nicht abschneiden oder beschädigen.

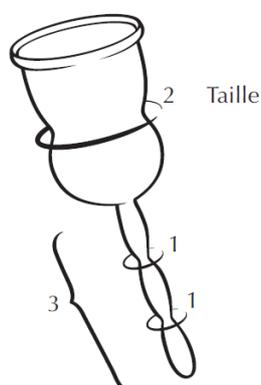

So setzen Sie Ihren Bellecup ein

Es gibt zwei Arten die Bellecup zu falten, damit Sie sie in die Scheide einführen können.

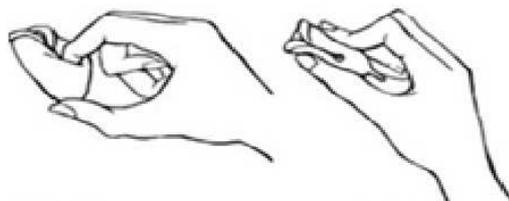

Variante 1


Variante 2

Bevor Sie beginnen:

1. Waschen Sie Ihre Hände und die Bellecup gründlich, finden Sie dann eine bequeme Position und entspannen Sie den Beckenboden.
2. Falten Sie Ihre Bellecup
3. Halten Sie die gefalteten Seiten fest und führen Sie sie mit der Öffnung zuerst in die Scheide ein.

4. Die Tasse befindet sich direkt unter dem Gebärmutterhals und über dem Schambein.

Um Undichtigkeiten zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass sich die Tasse ordnungsgemäß geöffnet hat, indem Sie sie nach dem Einsetzen um 1/4 Umdrehung drehen.

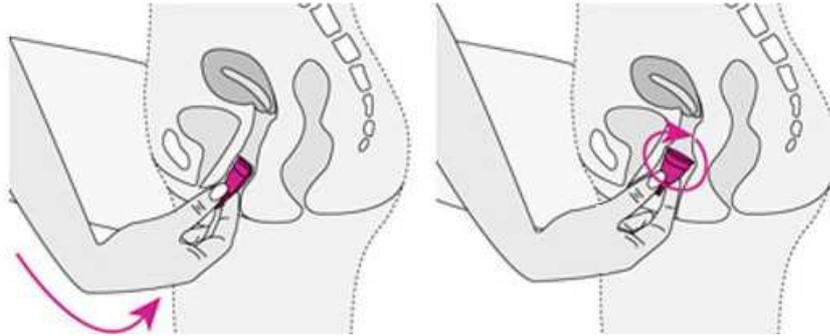

So wird Bellecup entfernt:

1. Waschen Sie Ihre Hände und entspannen Sie Ihren Beckenboden.
2. Einige Frauen finden es einfacher, ein Bein auf einen Fußschemel zu stellen, um die Menstruationstasse zu entfernen.
3. Drücken Sie den mittleren Teil Ihrer Bellecup (die Taille *siehe Bild*2*), direkt über der unteren Wölbung) zusammen, bis Sie die Saugfreigabe spüren.
4. Schaukeln Sie den Becher vorsichtig von einer Seite zur anderen, während Sie den Unterdruck ablassen und nach unten ziehen. Ziehen Sie NICHT allein an der langen Lasche (*siehe Bild*3*) - dies kann zu einer stärkeren Sogwirkung und zu Schmerzen führen.
5. Halten Sie die Tasse am unteren Knollenteil *4 und leeren Sie den Inhalt in die Toilette.

Reinigung und Pflege Ihres Bellecup

- Lassen Sie Bellecup nicht länger als 5 Minuten in sauberem kochendem Wasser kochen.
- Mit IncoClean können Sie Ihren Bellecup reinigen und schützen.
- Sie können Ihre Tasse mit einer milden Seifenlauge und heißem Wasser reinigen. Stellen Sie jedoch sicher, dass alle Seifenreste vor dem Einsetzen abgewaschen wurden.
- Bellecup ist weich und biegsam und kann zum Reinigen von innen nach außen gedreht werden.

Wichtige Notizen.

- Bellecup ist kein Verhütungsmittel.
- Bellecup muss vor dem Geschlechtsverkehr entfernt werden.
- Bellecup kann Sie nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen.
- Verwenden Sie Bellecup nicht länger als 12 Stunden am Stück, ohne es gründlich zu reinigen.

Toxisches Schock-Syndrom

Es gab noch nie Berichte über das Toxic Shock Syndrom im Zusammenhang mit Menstruationstassen. Für Symptome des Toxic Shock Syndroms besuchen Sie bitte unsere Website. Wenn Sie beim Entleeren der Blase Schmerzen, übelriechenden Ausfluss, Entzündungen oder Brennen verspüren, beenden Sie die Anwendung von Bellecup und konsultieren Sie Ihren Arzt. Bei der Anwendung von Bellecup sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Kontaktieren Sie uns bei Fragen: Wir helfen Ihnen gerne weiter.

www.medizintechnik-heise.de