



Tapoter la capsule pour en évacuer l'air.
Tap the cap to evacuate the air from it.



Verser 4 gouttes de liquide sur la poudre.
Pour 4 drops of liquid on the powder.



Placer la capsule au vibreur pendant 30 sec.
Place the cap into your vibrator for 30 seconds.



Temps de prise : 15 minutes
Setting time: 15 minutes




Tapoter la capsule pour en évacuer l'air.
Tap the cap to evacuate the air from it.



Verser 4 gouttes de liquide sur la poudre.
Pour 4 drops of liquid on the powder.



Mélanger durant 1 minute environ
Mix for about 1 minute long.

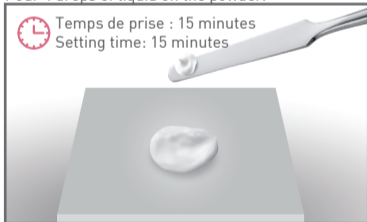

Temps de prise : 15 minutes
Setting time: 15 minutes