

My Perfect Colon[®] *Pro*
Natural Hydro-Therapy at Home



RO

Manual de utilizare





www.waterpowered.eu

customer@waterpowered.eu

800577477



General Diagram

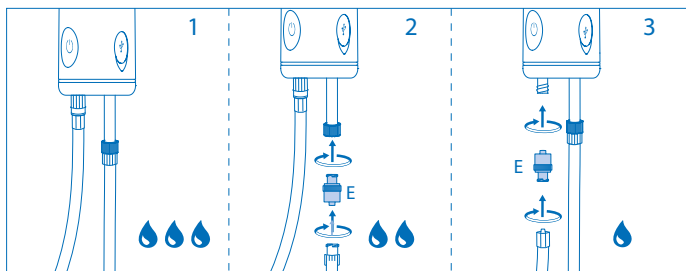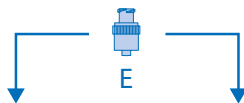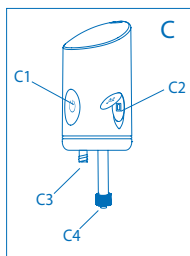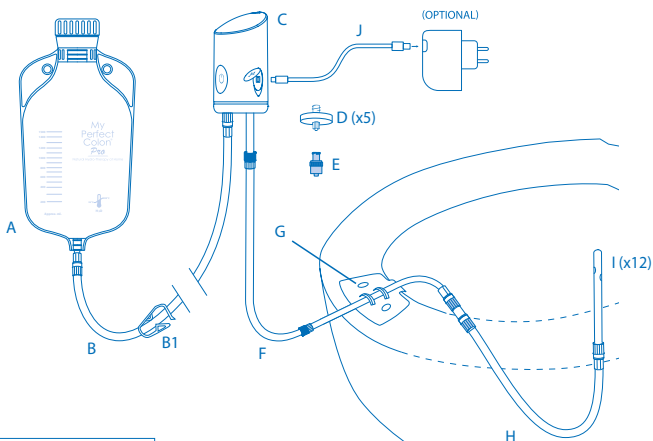

ATENȚIE: Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare și păstrați-l pentru o consultare ulterioară.

Utilizați My Perfect Colon PRO în conformitate cu instrucțiunile medicului dumneavoastră și/sau ale profesioniștilor din domeniul sănătății. Indicațiile primite din partea profesioniștilor sunt importante în ceea ce privește aceste instrucțiuni de utilizare.

CE ESTE MY PERFECT COLON PRO

My Perfect Colon PRO este un dispozitiv medical CE pentru clismă.

STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL PRODUSULUI

- A. Pungă de 2 litri cu ventuze și termometru cu cristale lichide
- B. Tub de aspirație (1,5 metri) cu clemă pentru furtun (B1) și fittinguri
- C. Mâner cu buton de alimentare și indicator luminos (C1), Priză pentru reîncărcare (C2), Racord admisie apă (C3), Racord cu tub de evacuare a apei (C4)
- D. Filtru cu membrană de 5 microni (x5)
- E. Reductor de alimentare cu apă (x1)
- F. Tub de evacuare (1 metru) cu fittinguri
- G. Suport cu ventuze
- H. Tub modelabil cu fittinguri
- I. Canula rectală (x12)
- J. Cablu USB
- Gentuță transport My Perfect Colon PRO
- Manual multilingv

AVERTISMENTE GENERALE

Atunci când se utilizează produse electrice, în special în prezența copiilor, este necesar să se respecte măsurile de siguranță de bază.

- Cu dispozitivul în fază de reîncărcare, pentru a reduce riscurile de electrocutare, nu atingeți ștecherul cu mâinile umede;
- A nu se utiliza în timp ce faceți baie sau atunci când sunteți ud;
- A nu se plasa aproape de apă, pentru a evita căderea produsului în apă sau alte lichide;
- Nu așezați și nu depozitați dispozitivul acolo unde există riscul ca acesta să alunece în cadă sau chiuvetă;
- Verificați dacă cablul electric este deteriorat înainte de utilizare;
- Nu utilizați dispozitivul dacă are cablul sau ștecherul deteriorat, dacă nu funcționează corect, dacă a căzut, dacă este deteriorat sau a căzut în apă. În cazul în care se verifică aceste anomalii, contactați producătorul Water Powered srl;
- Țineți cablul electric departe de sursele de căldură;
- Nu conectați dispozitivul la un alt sistem de tensiune decât cel specificat sau la unul care nu este echipat cu o linie de împământare și protecție împotriva contactelor directe;
- Nu utilizați dispozitivul în timpul fazei de încărcare;
- Dispozitivul nu produce interferențe electromagnetice.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII DE UTILIZARE

- Înainte de a utiliza My Perfect Colon PRO, consultați medicul dumneavoastră sau un cadru medical de specialitate în curățarea colonului (clismă) pentru a verifica necesitatea utilizării acestui produs în funcție de situația dumneavoastră personală;
- Clisma cu My Perfect Colon PRO trebuie efectuată întotdeauna cu prudență; Efectuați prima clismă sub supravegherea unei persoane cu pregătire medicală;
- Consultați medicul dumneavoastră pentru orice fel de îndoială cu privire la utilizarea dispozitivului;
- Dacă prezentați un disconfort deosebit după utilizarea My Perfect Colon Pro, întrerupeți utilizarea și adresați-

- 1 -

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**Pregătiți dispozitivul și utilizați în W.C.**

1. Conectați tubul de aspirație de 1,5 metri (B) la pungă (A) prin intermediul fittingului filetat, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic până la capăt;
2. Asigurați-vă că clemă furtunului (B1) de pe tubul B este strânsă și umpleți punga cu apă caldă (între 36 ° și 38 ° - verificați temperatura evidențiată în verde / maro pe termometrul aplicat pe pungă. Dacă nu apare nici un punct colorat, temperatura apei este mai mare sau mai mică decât temperatura indicată de termometru. Valoarea este orientativă - toleranță +/-10%);
3. Închideți punga înșurubând bine dopul și fixați-o cu ajutorul ventuzelor pe faianță sau pe o suprafață netedă (oglinză), la o înălțime de aproximativ 1m sau în lipsa acestora direct pe pardoseală; Așezați punga lângă vasul de toaletă, astfel încât clemă furtunului (B1) să poată fi atinsă cu mâinile în timp ce stați așezat pe vasul de toaletă;
4. Conectați celălalt capăt al tubului de aspirație (B) la racordul de admisie al apei plasat pe mâner (C3);
5. Conectați tubul de 1 metru (F) la racordul tubului de evacuare a apei (C4) de pe mânerul C;
6. Conectați celălalt capăt al tubului F la suport (G) și aplicați ventuzele pe capacul ridicat în verticală a toaletei sau pe vasul toaletei;
7. Conectați fittingul tubului de susținere cu ventuze (G) la tubul modelabil (H);
8. Conectați canula (I) la tubul modelabil (H);
9. Deblocați clemă furtunului (B1) pentru a permite trecerea apei și, prin plasarea canulei (I) în interiorul W.C., apăsați butonul de alimentare C1; Lăsați să curgă timp de câteva secunde apa prin conducte, pentru a verifica conectarea și funcționarea corectă (este posibil ca inițial aerul prezent în țevile goale să fie, de asemenea, aspirat și expulzat);
10. Opriti dispozitivul prin apăsarea butonului C1, strângeți clemă furtunului (B1) și așezați-vă pe W.C. plasând tuburile între picioare;
11. Introduceți ușor canula în rect, fără a forța. Dacă simțiți rezistență la introducere, scoateți canula și asigurați-vă că rectul este gol (evacuarea manuală poate fi necesară pentru a facilita golirea). Încercați să utilizați un unguet lubrifiant per a facilita introducerea. Dacă rezistența persistă, nu forțați, opriti clisma și căutați ajutorul unui profesionist din domeniul sănătății;
12. Deblocați clemă furtunului (B1) și începeți clisma apăsând butonul de alimentare C1 (LED-ul se va aprinde - citiți paragraful "Indicații pentru irigare");
13. Pentru a întrerupe alimentarea cu apă, apăsați tasta C1. Pentru a avea sub control cantitatea de apă introdusă în timpul clisei, dispozitivul se oprește la fiecare 30", întrerupând alimentarea; Acest sistem de siguranță împiedică pătrunderea accidentală a unei cantități mai mari de apă decât se dorește. Apăsați din nou butonul de alimentare pentru a continua irigarea pentru încă 30". Pentru a verifica cantitatea de apă furnizată în conformitate cu diferitele configurații, a se vedea tabelul 1 de la punctul "Reglementările privind irigarea";
14. După spălare, opriti aparatul apăsând butonul C1 și închideți clemă furtunului (B1).

Utilizare pentru persoane imobilizate la pat:

În cazul persoanelor imobilizate la pat, adică nu pe toaletă, nu este necesară montarea conductei cu suport și ventuze (G) și a furtunului flexibil (H). Conectați canula direct la furtunul de evacuare (F).

Utilizare în poziție fetală (ghemuit)

Pentru o curățare mai eficientă, recomandăm curățarea în poziție fetală (ghemuit). În acest scop, este disponibil Panoul My Perfect Colon sau Salteaua Comfort Wash, accesoriile disponibile pe www.mypperfectcolon.com sau www.waterpowered.eu. În cazul utilizării în poziție fetală (ghemuit), asamblarea tubului cu suport și ventuze (G) și a tubului flexibil (H) nu este necesar. Conectați canula direct la tubul de ieșire (F).

Indicații pentru clismă

- Cantitatea de apă necesară pentru clismă este subiectivă. Pentru adulți poate varia, de fapt, de la 300 la 1.000

- 3 -

vă medicului dumneavoastră; Solicitați imediat asistență medicală dacă prezentați dureri abdominale intense sau continue, dureri de spate sau sângeri rectale în timpul sau după clismă. Perforația intestinală este o complicație a irigației transanale extrem de rară, dar foarte severă. Printre simptomele perforației intestinale se numără dureri abdominale sau de spate intense și prelungite, hemoragie rectală;

- A NU se lăsa produsul la îndemâna copiilor. Supravegheați copiii dacă se află în apropierea dispozitivului pentru a evita riscul de strangulare cu tuburi, sufocare cu punga sau cu componente mici care compun produsul;
- Din motive de igienă, fiecare dispozitiv My Perfect Colon PRO trebuie utilizat de un singur utilizator;
- Canula rectală este de unică folosință, reutilizarea ei reprezintă un potențial risc pentru utilizator;
- Utilizare cu apă între 36° și 38°;
- Utilizați apă potabilă sau, dacă aveți dubii privind calitatea apei, utilizați filtrele pentru apă My Perfect Colon. În caz contrar utilizați apă îmbuteliată;
- Închideți dispozitivul când nu mai este apă în pungă;
- Goliți vezica urinară înainte de clismă;
- Asigurați-vă că vă așezați confortabil pe toaletă pentru a permite relaxarea zonei pelviene;
- În unele cazuri, este posibil ca efectul irigației să fie deosebit de eficient și ca stimulul de evacuare să reapară de mai multe ori în cele 2-3 ore după clismă;
- Corpul trebuie să se obișnuiască cu clisma. În lipsa unor patologii deosebite, și dacă urmăriți un stil de viață sănătos și o dietă corectă, beneficiile se vor vedea după câteva ședințe;
- Tuburile trebuie instalate conform instrucțiunilor, pentru a nu provoca deteriorarea dispozitivului.

CONTRAINDICAȚII

Cu toate acestea, clisma cu My Perfect Colon PRO nu trebuie efectuată în următoarele cazuri:

- Diverticulită acută;
- Boală inflamatorie acută a intestinului;
- Carcinom colorectal;
- Stenoză cunoscută sau colorectală;
- În primele 4 luni de la chirurgie anală sau colono-rectală;
- În primele 5 săptămâni după polipectomia endoscopică;
- Colită ischemică;
- Vârsta sub 3 ani. Pentru copii este întotdeauna necesar să consultați medicul de familie înainte de utilizare;
- Femeie gravidă, sarcină planificată sau în lactație curentă.
- Trebuie să aveți grijă deosebită dacă suferiți sau ați suferit în trecut de următoarele patologii:
 - Constipație puternică: în caz de constipație puternică, este necesar să se efectueze o curățare inițială a intestinului înainte de a începe tratamentul de irigare;
 - Afecțiuni anolo-rectale dureroase, ar fi fisuri, fistule, hemoroizi de gradul trei sau patru;
 - Pacienții cu risc/lipsă a reflexiei autonome trebuie să efectueze clisma sub supraveghere;
 - Diverticulul sever sau absces diverticular;
 - Terapia de iradiere în regiunea abdominală sau pelviană;
 - Intervenții chirurgicale anterioare colono-rectale;
 - Intervenții chirurgicale anterioare majore în zona pelviană;
 - Lipsă a reflexiei autonome severe;
 - Variația consistenței scaunului, ca de exemplu diareea (trebuie identificată cauza diareei);
 - Risc crescut de sângerare sau terapie anticoagulantă continuă (exclusiv aspirina sau clopidogrelul);
 - Terapia cu corticosteroizi pe termen lung;
 - Medicatie rectală.
- Dispozitivul nu este indicat pentru utilizarea de către copii sau persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu excepția cazului în care primesc îngrijire adecvată;
- Nu utilizați dispozitivul pentru alte aplicații decât cele indicate;
- Nu utilizați accesoriile nerecomandate de producător;
- Nu fixați și nu introduceți obiecte străine în orificiile dispozitivului.

- 2 -

ml până la un maxim de 1.500 ml (în funcție de indicațiile medicului dumneavoastră). Pentru copii, 10-20ml pentru fiecare kg de greutate;

- Utilizați apă între 36° și 38°. Dacă apa este prea fierbinte, poate deteriora mucoasa delicată a intestinului. Dacă este prea rece, pot apărea crampe stomacale. Dacă simțiți o temperatură prea caldă sau rece în timpul utilizării, opriti dispozitivul și înlocuiți apa din pungă cu apă la temperatura corectă. Ajuțați-vă în reglarea temperaturii apei de termometrul digital amplasat pe pungă;
- Aveți grijă ca fluxul din tubulatură să nu fie blocat sau încetinit de obstacole sau curbe;
- În timpul clisei, așezați punga la aproximativ 1m înălțime prin intermediul ventuzelor furnizate. În cazul în care punga este poziționată direct pe pardoseală, așezați punga ușor înclinată, astfel încât apa să fie îndreptată spre ieșire pentru a evita aspirarea aerului;
- Golire: după încheierea introducerii apei, intestinele vor începe să se golească. Mai ales în timpul primelor utilizări, este posibil să fie necesar să așteptați câteva minute, chiar 15-30 de minute, înainte ca colonul să înceapă să se golească. Asigurați-te că expulzează toată apa. Pentru a facilita golirea, încercați să vă aplecați ușor înspire în față, să tușiți și/sau să faceți un masaj abdominal;
- Timpii de evacuare sunt subiectivi și pot varia de la o sesiune la alta;
- Cantitatea de apă:
 - Pentru fiecare alimentare de 30 de secunde, se distribuie aproximativ 475 ml de apă (având în vedere plasarea sacului la o înălțime de aproximativ 1m înălțime);
 - Dacă preferați un debit mai mic de apă, conectați reductorul (E) între racordul tubului de ieșire (C4) și tubul F (fig. 2): în acest fel veți avea o reducere de aproximativ 30% a debitului comparativ cu cel normal atunci când reductorul nu este montat (fig.1). Dacă preferați un debit și mai mic (-70% aprox.), conectați reductorul (E) între tubul de aspirație (B) și racordul de admisie a apei (C3 - fig. 3). A se vedea tabelul de mai jos pentru specificația privind diferitele debite;
 - În funcție de înălțimea la care este poziționată punga, cantitatea de apă livrată pe minut poate varia (cu cât punga va fi plasată mai jos, cu atât cantitatea de apă distribuită este mai mică).

Tabelul 1 - Cantitatea de apă pe sesiune, în funcție de diferitele configurații - având în vedere dispozitivul complet încărcat și punga poziționată la aproximativ 1m înălțime - (toler. +/-20%)

Timp / 30 " sesiuni	Fără reductor și filtru E (fig. 1)	Cu Reductor (E) pe tub de ieșire (fig. 2)	Cu Reductor (E) pe tub de admisie (fig. 3)	Cu filtru (D) pe conducta de evacuare	Cu filtru (D) și reductor (E) pe tub de ieșire
30" / 1 Sesiune	475ml ca.	325ml ca.	150ml ca.	375ml	275ml
60" / 2 Sesiuni	950ml ca.	650ml ca.	300ml ca.	750ml	550ml
120" / 3 Sesiuni	1425ml ca.	975ml ca.	450ml ca.	1125ml	825ml

- Calitatea apei și filtre My Perfect Colon Pro:
 - Utilizați apă potabilă sau, dacă aveți dubii privind calitatea apei, utilizați filtrele pentru apă My Perfect Colon. În caz contrar utilizați apă îmbuteliată;
 - Utilizarea filtrului D este opțională. Dacă doriți să-l utilizați, montați-l între racordul tubului C4 și tubul F;
 - Prin montarea filtrului, cantitatea de apă furnizată este redusă ușor și proporțional cu calitatea apei (cu cât există mai multe impurități în suspensie în apă, cu atât debitul tinde să se reducă mai mult - a se vedea tabelul 1 ca referință pentru cantitatea de apă furnizată pentru fiecare sesiune în condiții normale);
 - Atenție: Nu folosiți niciodată filtrul pentru spălări multiple, înlocuiți filtrul după fiecare spălare pentru a asigura puritatea apei, un debit adecvat și pentru a evita proliferarea bacteriilor între o spălare și alta. Filtrele

- 4 -

de înlocuire sunt disponibile pe site-ul importatorului din Romania www.smartcare.ro sau direct pe site-ul producătorului www.myperfectcolon.com sau www.waterpowered.eu.

GESTIONAREA ÎNCĂRCĂRII

- Cablul de încărcare furnizat este un cablu USB. Pentru a reîncărca dispozitivul, trebuie să conectați cablul la priză de încărcare (C2) a dispozitivului și la celălalt capăt la un încărcător comun cu port USB (nu este furnizat), la calculator sau un alt dispozitiv cu port USB;
- Este recomandabil să faceți o primă reîncărcare de cel puțin 1 oră;
- La încărcarea în curs, LED-ul (C1) va fi roșu. Când este reîncărcat complet, lumina se va stinge;
- Protecție la suprasarcină: când bateria este încărcată, încărcarea va fi suspendată automat;
- Cu dispozitivul în funcțiune, LED-ul se va aprinde.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Canula rectală: canula este de unică folosință. Nu reutilizați, spălați, dezinfecțiți sau sterilizați o canulă rectală folosită. Reutilizarea poate duce la infecții. După utilizare, aruncați canula rectală la deșeurile menajere obișnuite (canulele de rezervă sunt disponibile pe site-ul importatorului din Romania www.smartcare.ro sau direct pe site-ul producătorului www.myperfectcolon.com sau www.waterpowered.eu);
- Pungă: după fiecare utilizare, goliiți-o și lăsați-o să se usuce păstrând capacul desurubat și păstrați-o bine uscată. Punga trebuie schimbată, de preferință, după aproximativ 15 utilizări (pungile de rezervă sunt disponibile pe site-ul importatorului din Romania www.smartcare.ro sau direct pe site-ul producătorului www.myperfectcolon.com sau www.waterpowered.eu);
- După utilizare, detașați tuburile și scurgeți apa rămasă din interior (dacă este necesar, suflați de la unul dintre capete);
- După uscarea tuturor componentelor, ștergeți-le cu o cârpă delicată, depozitați-le într-un loc uscat, la temperatura camerei și departe de lumina directă a soarelui. Când depozitați produsul, verificați dacă tuburile nu sunt răscucite și dacă nu sunt depozitate aproape de obiecte ascuțite;
- Depozitați produsul cu tuburile desprinse de pungă și mâner;
- Pentru a curăța periodic suprafața interioară a tuburilor și a pungii, umpleți punga cu apă și săpun lichid natural delicat și porniți dispozitivul astfel încât să curgă apă prin tuburi, direct în chiuvetă. După aceea, repetați această procedură cu cel puțin 4 litri de apă curentă curată pentru a le curăța de orice reziduri de săpun lichid;
- După ce ați terminat utilizarea, deconectați tuburile și porniți dispozitivul pentru câteva secunde, scuturând tuburile în jos pentru a elibera apa reziduală din interior;
- Lăsați mânerul într-un loc răcoros și uscat, de preferință pe verticală, până când tubul transparent este complet uscat.

REZOLVAREA EVENTUALELOR PROBLEME

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE POSIBILĂ
Există o pierdere de apă între conducte	Legătură incorectă	Deșurubați fittingurile acolo unde apare scurgerea și reînșurubați-le
Dispozitivul nu pornește	Pompa nu pornește	Asigurați-vă că dispozitivul este încărcat
Debitul apei care iese din canulă este mic/nu curge nimic	Tuburi înfundate	Asigurați-vă că nu există obstacole în țevi sau că acestea nu sunt îndoite
	Clemă / Furtun prea strâns	Asigurați-vă că clemă furtunului (B1) nu este strânsă
	Punga plasată incorect pe pardoseală	Așezați punga ușor înclinată pentru a direcționa apa spre ieșire și a favoriza alimentarea cu apă și eliminarea aerului
	Apă terminată	Umpleți punga cu mai multă apă

- 5 -

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Water Powered srl declară că acest dispozitiv respectă cerințele de siguranță și performanță și prevederile Regulamentului MDR 2017/745

Puteți descărca declarația de conformitate de pe site-ul www.myperfectcolon.com. În cazul în care nu este posibilă descărcarea documentației de pe site, este posibilă solicitarea acesteia direct de la Water Powered srl.

ACCIDENTE

Este necesar să raportați producătorului și autorității competente a statului membru în care vă aflați orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul medical furnizat de noi.

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ

Niveluri de conformitate în conformitate cu EN 60601-1-2:2015

- Imunitate ESD de 15kV în aer de 8kV în contact (EN 61000-4-2)
- 2kV/100kHz explozie imunitate (EN 61000-4-4) sursa de alimentare/1kV semnale
- Imunitate la supratensiune (EN 61000-4-5): 1kV diferențial comun/2kV
- Câmp magnetic (EN 61000-4-8): 30A/m
- Imunitate dips: 0% 0,5 cicluri; 0% 1 ciclu; 70% 25 cicluri (50Hz) și 30 cicluri (60Hz);
- Întreruperi: 250 cicluri (50Hz); 300 cicluri (60Hz)
- Imunitate la curenții rf din intervalul 150kHz-80MHz (EN 61000-4-6) modulație 3V 80% 1kHz
- Modulație 6V 80% 1kHz pentru următoarele intervale de frecvență:
6.765 MHz ± 6.795 MHz
13.553 MHz ± 13.567 MHz
26.957 MHz ± 27.283 MHz
40,66 MHz ± 40,70 MHz
- Emisii CISPR 11 clasa A
- Armonici EN 61000-3-2 clasa A
- Pălărire pst, dt, dc

AVERTISMENTE:

Deși este conform cu standardul EN 60601-1-2, dispozitivul medical My Perfect Colon PRO poate interfera cu alte dispozitive din apropiere. Dispozitivul nu trebuie utilizat în proximitate sau depozitat cu alte echipamente. Instalați dispozitivul departe de alte echipamente care radiază frecvențe înalte (unde scurte, microunde, electrochiurgicale, telefoane mobile).

Trebuie evitată utilizarea acestui aparat în imediata apropiere sau depozitarea acestuia pe alte aparate, deoarece acest lucru poate duce la funcționare incorectă. În astfel de cazuri, este necesar ca aparatul și alte echipamente să fie ținute sub observație pentru a verifica funcționarea lor normală.

Echipamentele de comunicare RF transportabile (inclusiv perifericele, cum ar fi cablurile de antenă și antenele externe) trebuie utilizate la o distanță de cel puțin 30 cm (12 inch) de orice parte a My Perfect Colon PRO, inclusiv cablurile specificate de Water Powered S.r.l.. În caz contrar, poate exista o degradare a performanței acestui dispozitiv.

Dispozitivul este destinat să funcționeze într-un mediu electromagnetic în care perturbațiile radiate de RF sunt sub control. Clientul sau operatorul poate contribui la prevenirea interferențelor electromagnetice prin asigurarea unei distanțe minime între echipamentele de comunicații RF (emițătoare) mobile și portabile și dispozitivul medical, conform recomandărilor de mai jos, în raport cu puterea maximă de ieșire a echipamentelor de radiocomunicații.

- 7 -

În caz de nevoie, contactați producătorul Water Powered srl pentru a primi instrucțiunile corespunzătoare pentru rezolvarea problemelor (customer@waterpowered.eu - www.myperfectcolon.com - www.waterpowered.eu).

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Presiune maximă a apei: 80 PSI
- Debit maxim de apă pe minut: 1,2 L
- Baterie: Li-Ion 3.7V - 560mAh
- Încărcător recomandat: 5V - 1A
- Protecție: IP21
- Condiții de utilizare a mediului: temperatură de la +18 la +35 °C; Umiditate 30%-75% fără condens; Presiune 860±1060 hPa;
- Condiții de transport și depozitare a mediului: Temperatură -25÷70 °C, Umiditate 25±75%, Presiune 860±1060 hPa.

PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

Puteți cumpăra întreaga gamă de produse My Perfect Colon Pro de pe site-ul importatorului din Romania www.smartcare.ro sau direct de pe site-ul producătorului www.myperfectcolon.com sau www.waterpowered.eu.

garanție

Regulile de garanție sunt valabile numai dacă dispozitivul este utilizat în condițiile de utilizare prevăzute. Cu excepția intervențiilor de întreținere descrise în secțiunea ÎNTREȚINERE și efectuate cu procedurile indicate, orice reparație sau modificare efectuată asupra produsului de către utilizator sau de către firme neautorizate determină automat anularea garanției.

Garanția nu se extinde la daunele cauzate de incompetență sau neglijență în utilizarea produsului sau de întreținerea defectuoasă sau lipsa efectuării acesteia.

Garanția este valabilă pentru o perioadă de 2 ani pentru persoanele fizice și 1 an pentru persoanele juridice, conform legislației în vigoare.

Producătorul se angajează să înlocuiască eventualele piese ce nu funcționează corect sau cu defecte de fabricație, numai după o verificare atentă și constatarea defecțiunii.

Costurile de transport și / sau de transport sunt întotdeauna suportate de cumpărător în cazul utilizării incorecte a termenilor privind garanția produsului.

În timpul perioadei de garanție, componentele înlocuite devin proprietatea producătorului.

Garanția nu include daunele rezultate dintr-o utilizare excesivă, cum ar fi utilizarea produsului după detectarea unei anomalii, utilizarea unor metode de operare inadecvate și nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și întreținere.

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru dificultățile care pot apărea în revânzarea sau utilizarea în străinătate din cauza unor eventuale dispoziții în vigoare în țara în care a fost vândut produsul.

Produsul defect trebuie livrat producătorului în vederea înlocuirii; în caz contrar, partea înlocuită va fi suportată de cumpărător.

Asistența autorizată asupra produsului este efectuată direct de către Water Powered s.r.l. sau de către un tehnician calificat desemnat de către acesta.

RECICLARE

Posibilitatea de reutilizare a unor părți ale produsului este condiționată de responsabilitatea totală a utilizatorului.

Eticheta reprezentată simbolul indicat în Decretul legislativ nr. 49 din 14 martie 2014 care transpune Directiva 2012/19 UE, care indică necesitatea eliminării produsului în deșeurile separate, în special în deșeurile electrice și electronice.

Produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeurile menajere. Utilizatorii sunt responsabili de reciclarea produsului, care urmează să fie casat la punctul de colectare indicat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

- 6 -

Puterea maximă nominală de ieșire a emițătorului (W)	Distanța (m) în funcție de frecvența emițătorului		
	de la 150kHz la 80MHz d = 1,2 VP	de la 80MHz la 800MHz d = 1,2 VP	de la 800MHz la 2.5GHz d = 2,3 VP
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Pentru emițătoarele cu cea mai mare putere nominală de ieșire care nu este prezentată mai sus, distanța de separare recomandată d în metri (m) poate fi calculată utilizând ecuația aplicabilă frecvenței emițătorului, unde P este puterea nominală maximă de ieșire a emițătorului în wați (W), în funcție de producătorul emițătorului.

Notă:

- (1) La 80 MHz și 800 MHz se aplică intervalul frecvenței celei mai mari.
- (2) Prezentele indicații nu se pot aplica în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbția și reflexia structurilor, obiectelor și oamenilor.

• • •

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări parțiale sau totale ale produsului, care pot diferi, prin urmare, de descrierea inclusă în acest manual.

Producătorul, distribuitorii și comercianții cu amănuntul își declină orice responsabilitate pentru orice daune care pot apărea, direct sau indirect, persoanelor sau lucrurilor ca urmare a nerespectării tuturor indicațiilor prezentate în acest manual de utilizare.

Dispozitivele My Perfect Colon nu sunt și nu înlocuiesc echipamentul utilizat în centrele de hidrocolonoterapie. Vizitați www.myperfectcolon.com sau contactați customer@waterpowered.eu pentru mai multe informații.

Pentru orice clarificări sau informații suplimentare vizitați pe site-ul importatorului din Romania www.smartcare.ro sau direct pe site-ul producătorului www.myperfectcolon.com sau www.waterpowered.eu sau contactați asistența prin e-mail customer@waterpowered.eu.

SIMBOLURI

Symbol	Rost	Symbol	Rost
	Producător		Atenție
	Marcajul. Dispozitivul respectă regulamentul MDR 2017/745.		Consultați instrucțiunile de utilizare
	Număr de catalog		Consultați manualul de instrucțiuni
	Codul lotului		Pentru reciclare, produsul trebuie livrat la un punct de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice (DEEE).
	A se păstra departe de lumina soarelui		Dispozitiv medical
	A se păstra departe de umiditate		Data fabricației

- 8 -

Rev.00-11/21