

My Perfect Colon<sup>®</sup> *Pro*  
Natural Hydro-Therapy at Home



FR

Manuel d'utilisation





[www.waterpowered.eu](http://www.waterpowered.eu)

[customer@waterpowered.eu](mailto:customer@waterpowered.eu)

800577477



## General Diagram

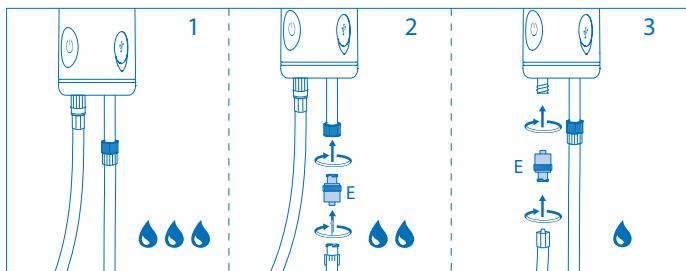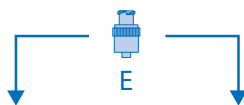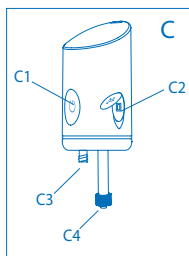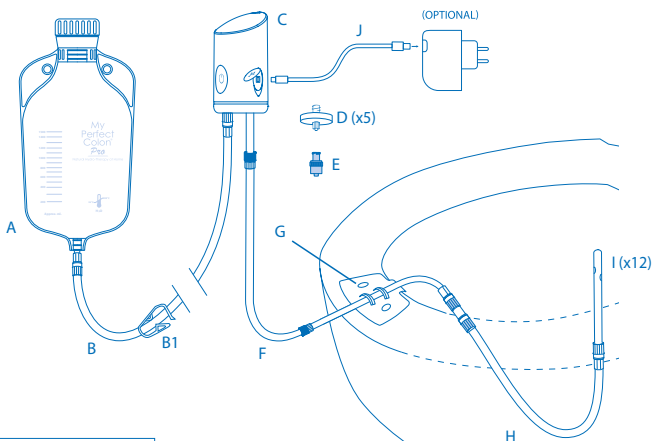

**ATTENTION: Lire attentivement le manuel d'utilisation avant utilisation, et le conserver pour un usage futur.** Utiliser My Perfect Colon PRO en respectant les préconisations du médecin traitant et/ou des professionnels de santé. Les préconisations reçues prévalent sur les présentes instructions d'utilisation.

**QU'EST CE QUE MY PERFECT COLON PRO**

My Perfect Colon PRO est un dispositif médical CE pour l'irrigation transanale.

**STRUCTURE DU PRODUIT et CONTENU**

- A. Sac de 2 litres avec ventouse et thermomètre à cristaux liquides
- B. Tube d'aspiration (de 1,5m) avec collier de serrage (B1) et raccords
- C. Manche avec bouton de démarrage et indicateur lumineux (C1), Prise de recharge (C2), Raccord d'entrée d'eau (C3), Raccord avec tube de sortie d'eau (C4)
- D. Filtre à membrane de 5 Micron (x5)
- E. Réducteur de distribution d'eau (x1)
- F. Tube de sortie (d'1 m) avec raccords
- G. Support avec ventouse
- H. Tube modulable avec raccords
- I. Canule rectale (x12)
- J. Cable USB
- K. Etui Porte My Perfect Colon PRO
- L. Manuel multilingue

**AVERTISSEMENTS GENERAUX**

Lors d'une utilisation de produits électriques, spécialement en présence d'enfants, il est nécessaire de respecter les précautions de sécurité de base.

- Lorsque le dispositif est en phase de recharge, pour réduire les risques d'électrocution, ne pas toucher la prise avec les mains mouillées;
- Ne pas utiliser pendant un bain ou si vous êtes mouillé;
- Ne pas positionner ou faire tomber dans l'eau ou dans d'autres liquides;
- Ne pas positionner ou reposer le dispositif sur une surface qui risquerait de le faire tomber dans la baignoire ou le lavabo;
- Contrôler si le câble électrique est endommagé avant utilisation;
- Ne pas utiliser le dispositif si le câble ou la prise est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, abîmé ou a été immergé dans l'eau. Si besoin, contacter Water Powered srl;
- Maintenir le câble électrique loin des sources de chaleur;
- Ne pas brancher le dispositif à un système de tension différent de celui spécifié ou à un système de tension dépourvu de prise terre et disjoncteur;
- Ne pas utiliser le dispositif pendant la phase de recharge;
- Le dispositif ne produit pas d'interférences électromagnétiques.

**AVERTISSEMENTS et PRECAUTIONS D'USAGE**

- Avant d'utiliser My Perfect Colon PRO, consulter votre médecin traitant ou un professionnel de santé spécialisé en irrigation transanale pour vérifier la pertinence de son utilisation au regard de votre situation personnelle;
- L'irrigation transanale avec My Perfect Colon Pro doit toujours être effectuée avec prudence;
- Effectuer la première irrigation transanale sous la supervision d'un opérateur sanitaire;
- Consulter votre médecin pour chaque doute concernant l'utilisation du dispositif;
- Dans le cas où vous rencontriez des gênes particulières après utilisation de My Perfect Colon Pro, suspendre l'utilisation et consulter votre médecin; Demander immédiatement une assistance médicale si pendant ou après la procédure d'irrigation vous ressentez des douleurs abdominales ou continues, douleurs dans le dos ou saignements rectaux pendant ou après l'irrigation. La perforation intestinale est une complication de

- Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le producteur;
- Ne pas faire tomber, n'insérer aucun objet extérieur dans les ouvertures du dispositif.

**INSTRUCTIONS**

**Préparation du dispositif et Utilisation sur les toilettes.**

1. Relier le tube d'aspiration de 1,5 m (B) au sac (A) grâce au raccord fileté, en tournant en sens horaire jusqu'à l'arrêt;
2. S'assurer que le collier de serrage (B1) sur le tube B soit serré et remplir le sac avec de l'eau tiède (entre 36° et 38° - vérifier la température représentée en vert/marron sur le thermomètre apposé sur le sac. Si aucun symbole coloré n'apparaît, la température de l'eau est supérieure ou inférieure à l'intervalle de température du thermomètre. La valeur est indicative - tolérance +/-10%);
3. Fermer le sac en vissant correctement le bouchon et le fixer au mur (sur une surface lisse) grâce à la ventouse, à une hauteur d'environ 1m ou le poser par terre ou sur une surface stable; Positionner le sac à proximité de la cuvette des toilettes, de façon à ce que soit facilement atteignable avec les mains et en position assise le collier de serrage (B1);
4. Relier l'autre extrémité du tube d'aspiration (B) au raccord d'entrée d'eau (C3) situé sur le manche;
5. Relier le tube d'1m (F) au raccord du tube de sortie d'eau (C4) situé sur le manche C;
6. Relier l'autre extrémité du tube F au support (G) et appliquer les ventouses sur la partie frontale de la tablette des toilettes ou sur les toilettes eux-mêmes;
7. Relier le raccord du tube au support avec ventouse (G) au tube modulable (H);
8. Relier la canule (I) au tube modulable (H);
9. Déverrouiller le collier de serrage (B1) pour permettre le passage de l'eau et, en positionnant la canule (I) à l'intérieur des toilettes, appuyer sur le bouton de démarrage C1; Faire couler l'eau pendant quelques secondes dans les tubes pour vérifier la correcte liaison et le bon fonctionnement (il est possible qu'au début l'air présent dans les tubes vides soit aspiré et expulsé);
10. Eteindre le dispositif en appuyant sur le bouton C1, serrer le collier de serrage (B1) et s'asseoir sur les toilettes en positionnant les tubes entre les jambes;
11. Insérer délicatement la canule dans le rectum, sans forcer. Si vous ressentez une résistance lors de l'insertion, extraire la canule et s'assurer que le rectum soit vide (il peut être nécessaire d'effectuer une évacuation manuellement pour favoriser l'évacuation). Essayer des baumes lubrifiants pour en favoriser l'insertion. Si la résistance persiste, ne pas forcer, interrompre l'irrigation et demander l'aide d'un professionnel de santé;
12. Déverrouiller le collier de serrage (B1) et démarrer l'irrigation en appuyant sur le bouton de démarrage C1 ("Indicateur lumineux s'allumera – lire le paragraphe "Indications pour l'irrigation");
13. Pour interrompre l'écoulement, appuyer sur le bouton C1. Pour permettre d'avoir un contrôle sur la quantité d'eau utilisée pendant le lavement, le dispositif s'éteint toutes les 30 min, stoppant l'arrivée d'eau; Ce système de sécurité évite que ne s'écoule de manière involontaire plus d'eau que ce qu'il est souhaité. Appuyer de nouveau sur le bouton de démarrage pour relancer l'arrivée d'eau pour 30min supplémentaires. **Pour vérifier la quantité d'eau qui s'écoule en fonction des différentes configurations, voir le tableau 1 dans le paragraphe "Indications pour l'irrigation";**
14. Terminer le lavement, éteindre le dispositif en appuyant sur le bouton C1 et serrer le collier de serrage (B1).

**Utilisation pour les personnes alitées:**

En cas d'utilisation par des personnes alitées, et non assises sur les wc, le montage du tube avec support et ventouse (G) et du tube modulable (H) n'est pas nécessaire. Relier la canule directement au tube de sortie (F).

**Utilisation en position couchée.**

Pour un nettoyage encore plus efficace, il est conseillé d'effectuer le nettoyage en position couchée. Dans ce cadre sont disponibles la table MY Perfect Colon ou le matelas Comfort Wash, accessoires disponibles sur [www.myperfectcolon.com](http://www.myperfectcolon.com) ou [www.waterpowered.eu](http://www.waterpowered.eu). En cas d'utilisation en position couchée, le montage du tube avec support et ventouse (G) et du tube modulable (H) n'est pas nécessaire. Relier la canule directement au tube de sortie (F).

**Indications pour l'irrigation**

- La quantité d'eau nécessaire pour l'irrigation transanale est subjective. Pour les adultes, cela peut varier entre

l'irrigation transanale extrêmement rare, mais très grave. Parmi les symptômes de la perforation intestinale figurent une douleur abdominale intense et prolongée, ou au dos, ou une hémorragie rectale;

- Conserver le produit hors de portée des enfants. Surveiller les enfants s'ils se trouvent proches du dispositif pour éviter le risque d'étranglement avec les tubes, d'étouffement avec le sac ou avec les petits composants qui pourraient se détacher du produit;
- Pour des motifs d'hygiène, chaque dispositif My Perfect Colon PRO doit être utilisé par un seul utilisateur;
- La canule rectale est à usage unique, la réutiliser est potentiellement dangereux pour l'utilisateur;
- Utiliser avec de l'eau entre 36° e 38°;
- Utiliser de l'eau courante propre ou, en cas de doute sur la qualité de l'eau, utiliser les filtres à eau My Perfect Colon. Comme alternative, utiliser de l'eau en bouteille;
- Eteindre le dispositif lorsque l'eau de la poche termine;
- Vider la vessie avant irrigation;
- S'assurer d'être confortablement assis sur les toilettes pour favoriser la relaxation du plancher pelvien;
- Dans certains cas il est possible que l'effet de l'irrigation soit particulièrement efficace et que le besoin d'évacuer se représente plusieurs fois dans les 2-3 heures qui suivent le lavement;
- Le corps doit s'habituer au traitement avec irrigation transanale. En absence de pathologies particulières et dans le cadre d'un style de vie sain ainsi que d'un régime alimentaire correct, les effets bénéfiques apparaîtront après quelques séances;
- Les tubes doivent être installés en respectant les instructions pour ne pas causer de dégâts sur le dispositif.

**CONTRE-INDICATIONS**

- L'irrigation transanale avec My Perfect Colon PRO ne doit pas être effectuée dans les cas suivants :
  - Diverticulite aiguë;
  - Maladie inflammatoire intestinale aiguë;
  - Carcinome Colorectal;
  - Sténose anale ou colorectale connue;
  - Avant 4 mois suite à une chirurgie anale ou colorectale;
  - Avant 5 semaines suite à une polypectomie endoscopique;
  - Colique ischémique;
  - Age inférieur à 3 ans. Pour les enfants il reste nécessaire de consulter votre médecin traitant avant utilisation;
  - Femme actuellement enceinte ou grossesse programmée, ou en allaitement.
- Il convient d'être particulièrement vigilant si vous souffrez ou si vous avez souffert précédemment d'une ou plusieurs des pathologies suivantes:
  - Gêne fécale: en cas de forte constipation, il est nécessaire d'effectuer d'abord un nettoyage de l'intestin avant de commencer le traitement d'irrigation;
  - Douleurs ano-rectales, comme par exemples fissures, fistules anales, hémorroïdes de 3ème et 4ème degré;
  - Les patients avec un risque de dysrèflexie autonome doivent effectuer les irrigations sous supervision;
  - Diverticulose grave ou accès diverticulaire;
  - Thérapie de radiation dans la région abdominale ou pelvienne;
  - Précédente intervention chirurgicale anale ou colorectale;
  - Précédentes interventions chirurgicales importantes dans la zone pelvienne;
  - Dysrèflexie autonome grave;
  - Variation de la consistance des selles, comme par exemple la diarrhée (il est important dans ce cas de déterminer la cause de la diarrhée);
  - Haut risque hémorragique ou thérapie anticoagulante en cours (à part aspirine ou clopidogrel);
  - Thérapie corticostéroïde à long terme;
  - Médication rectale.
- Le dispositif n'est pas indiqué pour une utilisation faite par des enfants ou des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à moins qu'elles ne reçoivent une assistance adaptée;
- Ne pas utiliser le dispositif pour des applications différentes de celles indiquées;

300 et 1.000ml, jusqu'à un maximum de 1.500ml (sur la base des indications données par votre médecin traitant). Pour les enfants, 10-20ml pour chaque kg du poids de l'enfant;

- Utiliser de l'eau entre 36° et 38°. Si l'eau est trop chaude, elle peut endommager le revêtement délicat de l'intestin. Si elle est trop froide, elle peut provoquer des crampes à l'estomac. Dans le cas où serait utilisée de l'eau avec une température trop chaude ou froide, éteindre le dispositif et changer l'eau du sac avec de l'eau à bonne température. S'aider du thermomètre présent sur le sac pour réguler la température de l'eau;
- Faire attention à ce que le flux dans les tubes ne soit pas bloqué ou ralenti par des obstacles ou plieurs;
- Pendant le lavement, positionner le sac à environ 1m de hauteur grâce aux ventouses fournies. Lorsque vous positionnez le sac à terre, l'incliner légèrement de façon à ce que l'eau soit dirigée vers la sortie, pour éviter d'aspirer de l'air;
- Evacuation: après avoir terminé le déversement de l'eau, l'intestin commencera à se vider. En particulier lors des premières utilisations, il est possible qu'il soit nécessaire d'attendre quelques minutes, entre 15 et 30min, avant que le colon ne commence à se vider. S'assurer de faire sortir toute l'eau. Pour faciliter l'évacuation, se plier en avant, tousser et/ou faire un massage abdominal;
- Les temps d'évacuation sont subjectifs et peuvent varier d'une session à une autre;
- Quantité d'eau:
  - Pour chaque session de 30min doivent s'écouler environ 475ml d'eau (en considérant que le sac a été placé à une hauteur d'1m environ);
  - Si vous préférez un flux d'eau inférieure, relier le réducteur (E) entre le raccord du tube de sortie (C4) et le tube F (fig. 2): cela permettra une réduction d'environ 30% du flux par rapport à son érogation normale lorsque le réducteur n'est pas monté (fig. 1). Si vous préférez un flux encore plus faible (-70% environ), relier le réducteur (E) entre le tube d'aspiration (B) et le raccord d'arrivée d'eau (C3 – fig. 3). Voir tableau ci-dessous pour les différentes configurations possibles;
  - Selon la hauteur à laquelle vous positionnez le sac, la quantité d'eau s'écoulant par minute peut varier (plus bas sera le sac, plus faible sera le flux d'eau en arrivée)

**Tableau 1 – Quantité d'eau par session et en fonction des différentes configurations – en considérant le dispositif complètement chargé et la position du sac à environ 1m de hauteur (tolérance +/-20%)**

Temps / Sessions de 30min	Sans réducteur et filtre E (fig. 1)	Avec réducteur (E) sur tube de sortie (fig. 2)	Avec réducteur (E) sur tube d'arrivée (fig. 3)	Avec Filtre (D) sur tube de sortie	Avec Filtre (D) et Réducteur (E) sur tube de sortie
30" / 1 Session	475ml env.	325ml env.	150ml env.	375ml	275ml
60" / 2 Sessions	950ml env.	650ml env.	300ml env.	750ml	550ml
120" / 3 Sessions	1425ml env.	975ml env.	450ml env.	1125ml	825ml

- Qualité de l'eau et Filtres My Perfect Colon:
  - Utiliser de l'eau courante propre ou, en cas de doute sur la qualité de l'eau, utiliser les filtres à eau My Perfect Colon. Comme alternative, utiliser de l'eau en bouteille;
  - L'utilisation du filtre D est optionnelle. Si vous désirez l'utiliser, le monter entre le raccord du tube C4 et le tube F;
  - En montant le filtre la quantité d'eau s'écoulant diminue légèrement, en fonction de la qualité de l'eau (plus sont présents des impuretés en suspensions dans l'eau, plus le flux tendra à se réduire – prendre le tableau 1 comme référence pour la quantité d'eau s'écoulant pour chaque session dans des conditions normales);
  - Attention: Ne jamais utiliser le même filtre pour plusieurs lavements, changer le filtre après chaque lavement pour garantir la pureté de l'eau, un flux adéquat et pour éviter la prolifération de bactéries entre deux lavements. Des filtres de recharge sont disponibles sur les sites [www.myperfectcolon.com](http://www.myperfectcolon.com) et [www.waterpowered.eu](http://www.waterpowered.eu).

## GESTION DE LA RECHARGE

Le câble fourni a une prise USB. Pour recharger le dispositif il faut relier le câble à la prise de recharge (C2) du dispositif et l'autre extrémité à un chargeur standard avec port USB (non fourni)

- Il est conseillé d'effectuer une première recharge d'au moins 1 heure;
- Pendant la recharge en cours l'indicateur lumineux (C1) sera de couleur rouge. Lorsque la recharge est terminée l'indicateur lumineux s'éteindra;
- Protection de surcharge: A batterie pleine la recharge se stoppera automatiquement;
- Lors de l'utilisation du dispositif, l'indicateur lumineux s'allumera.

## NETTOYAGE ET MANUTENTION

- Canule rectale : La canule est à usage unique. Ne pas réutiliser, laver, désinfecter ou stériliser. Une réutilisation pourrait provoquer des infections. Après utilisation, jeter la canule rectale avec les déchets domestiques classiques (Des canules de recharge sont disponibles sur les sites [www.myperfectcolon.com](http://www.myperfectcolon.com) et [www.waterpowered.eu](http://www.waterpowered.eu));
- Sac: après chaque utilisation, le vider et le laisser sécher en dévissant le bouchon, puis le conserver bien au sec. Le sac doit être changé préférentiellement après environ 15 utilisations (Des sacs de recharge sont disponibles sur les sites [www.myperfectcolon.com](http://www.myperfectcolon.com) et [www.waterpowered.eu](http://www.waterpowered.eu));
- Après utilisation, détacher les tubes et faire sortir l'eau résiduelle se trouvant à l'intérieur (si besoin, en soufflant à une extrémité);
- Après avoir séché tous les composants avec un chiffon délicat, conserver dans un lieu sec à température ambiante et à l'abri de la lumière directe du soleil. Pendant la conservation du produit, contrôler que les tubes ne soient pas emmêlés et qu'ils ne soient pas proches d'objets coupants;
- Conserver le produit avec les tubes détachés du sac et du manche;
- Pour nettoyer régulièrement les surfaces internes des tubes et du sac, remplir le sac avec de l'eau et du savon naturel délicat et allumer le dispositif pour faire couler l'eau dans les tubes, et le vider dans le lavabo. Ensuite, répéter cette procédure avec au moins 4 litres d'eau courante propre pour nettoyer d'éventuels résidus de savon;
- A la fin de l'utilisation, détacher les tubes et allumer le dispositif pendant quelques secondes en le secouant avec les tubes tournés vers le bas, pour faire sortir l'eau résiduelle;
- Laisser le manche dans un lieu frais et sec, possiblement à la verticale, jusqu'à ce que le tube transparent soit complètement sec.

## RESOLUTIONS D'EVENTUELS PROBLEMES

En cas de nécessité contacter Water Powered srl pour recevoir les instructions adaptées à la résolution des problèmes ([customer@waterpowered.eu](mailto:customer@waterpowered.eu) - [www.myperfectcolon.com](http://www.myperfectcolon.com) - [www.waterpowered.eu](http://www.waterpowered.eu)).

PROBLEME	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Il y a une fuite entre les tubes	Le branchement est incorrect	Dévisser les raccords à l'endroit de la fuite et revisser
Le dispositif ne s'allume pas	La pompe ne s'allume pas	S'assurer que le dispositif soit chargé
Très peu voire pas d'eau sort de la canule	Tubes obstrués	S'assurer que rien n'obstrue les tubes ou qu'ils ne soient pas pliés
	Collier de serrage serré	S'assurer que le collier de serrage (B1) soit desserré
	Sac positionné à terre incorrectement	Incliner légèrement le sac pour diriger l'eau vers la sortie et favoriser l'écoulement
	Eau terminée	Recharger le sac avec de l'eau

- 5 -

Il est possible de télécharger la déclaration de conformité sur le site [www.myperfectcolon.com](http://www.myperfectcolon.com). Dans le cas où il ne serait pas possible de télécharger la documentation du site, il est possible de la demander directement auprès de Water Powered srl.

## INCIDENTS

Il est nécessaire de signaler au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel vous résidez tout incident grave s'étant produit en relation avec le dispositif médical que nous fournissons.

## COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE

### Niveaux de conformité d'après la Norme EN 60601-1-2:2015

- Immunité ESD 15kV dans l'air 8kV au contact (EN 61000-4-2)

- Immunité burst 2kV/100kHz (EN 61000-4-4) alimentation/1kV signaux

- Immunité surge (EN 61000-4-5): 1kV commun/2kV différentiel

- Champ magnétique (EN 61000-4-8): 30A/m

- Immunité dips: 0% 0,5 cycles; 0% 1 cycle; 70% 25 cycles (50Hz) e 30 cycles (60Hz);

Interruptions : 250 cycles (50Hz); 300 cycles (60Hz)

- Immunité au courant rf range 150kHz-80MHz (EN 61000-4-6) 3V modulation 80% 1kHz

6V modulation 80% 1kHz pour les plages de fréquence suivantes :

6,765 MHz ÷ 6,795 MHz

13,553 MHz ÷ 13,567 MHz

26,957 MHz ÷ 27,283 MHz

40,66 MHz ÷ 40,70 MHz

- Emissions CISPR 11 classe A

- Harmoniques EN 61000-3-2 classe A

- Flicker pst, dt, dc

### Immunité aux champs rf (EN 61000-4-3):

Field (V/m)	Fréquence	Modulation
3	80MHz-2700MHz	1kHz AM 80%
27	380MHz-390MHz	18Hz PM 50%
28	430MHz-470MHz	18Hz PM 50%
9	704MHz-787MHz	217Hz PM 50%
28	800MHz-960MHz	18Hz PM 50%
28	1700MHz-1990MHz	217Hz PM 50%
28	2400MHz-2570MHz	217Hz PM 50%
9	5100MHz-5800MHz	217Hz PM 50%

### Niveaux de conformité d'après la Norme EN 60118-13:2011

Test level		
Field	Mod.	Fréquence
90V/m	AM 80% 1kHz	800MHz-960MHz
50 V/m	AM 80% 1kHz	1.4GHz-2GHz
35V/m	AM 80% 1kHz	2GHz-2.48GHz

## AVERTISSEMENTS:

Bien que conforme au standard EN 60601-1-2, le dispositif médical My Perfect Colon PRO peut interférer avec d'autres dispositifs proches. Le dispositif ne doit pas être utilisé à proximité ou empilé sur d'autres appareils. Installer le dispositif à distance d'autres appareils qui émettent à haute fréquence (ondes courtes, micro-ondes, bistouri électrique, téléphones portables).

L'utilisation de cet appareil à proximité ou posé sur d'autres appareils doit être évitée, car cela pourrait provoquer un fonctionnement incorrect. Si cela devait malgré tout se produire, il est nécessaire que cet appareil et l'autre appareil soient maintenus sous observation pour vérifier que leur fonctionnement soit correct.

Les appareils portables de communication RF (y compris les périphériques comme les câbles d'antenne et les antennes externes) doivent être utilisés à une distance non inférieure à 30 cm (12 pouces) de n'importe quelle partie de My Perfect Colon PRO, y compris les câbles produits par Water Powered S.r.l.. Dans le cas contraire, pourrait apparaître une baisse de qualité de prestation de cet appareil.

L'appareil est prévu pour fonctionner dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations de fréquence RF sont sous contrôle. Le client ou l'opérateur peuvent contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en assurant une distance minimum entre les appareils de communication mobiles et portables à RF (transmetteurs) et le dispositif médical, comme recommandé ci-après, en fonction de la puissance maximale de sortie des appareils de radiocommunication.

- 7 -

## DETAILS TECHNIQUES

Pression maximale de l'eau : 80 PSI

Flux maximal de l'eau par minute : 1,2 L

Batterie : Li-Ion 3.7V - 560mAh

Chargeur de batterie conseillé : 5V - 1A

Protection : IP21

Conditions environnementales d'utilisation: Température entre +18 et +35 °C; humidité 30%-75% sans condensation; Pression 860±1060 hPa;

Conditions environnementales de transport et de stockage: Température -25÷70 °C, humidité 25÷75%, Pression 860±1060 hPa.

## PIECES DE RECHANGE et ACCESSOIRES

Il est possible d'acheter la gamme complète des produits My Perfect Colon sur les sites web [www.myperfectcolon.com](http://www.myperfectcolon.com) et [www.waterpowered.eu](http://www.waterpowered.eu).

## GARANTIE

Les conditions de garantie n'ont de valeur que si le dispositif est utilisé dans les conditions d'utilisation prévues. A l'exclusion des interventions de maintenance décrites dans la section MANUTENTION réalisées en suivant les procédures indiquées, toute réparation ou modification apportée au produit par l'utilisateur ou entreprise non autorisée rend caduque la validité de la garantie.

La garantie ne s'étend pas aux dégâts causés par maladresse ou négligence dans l'utilisation du produit, ou à cause d'une mauvaise maintenance ou absence d'entretien.

La garantie est valide pour une période de douze (12) mois selon la nature de l'acheteur (personne juridique ou privée).

L'entreprise productrice se réserve le droit de changer à sa discrétion les pièces hors d'usage ou avec une erreur de fabrication, seulement à la suite d'un contrôle rigoureux ayant démontré une erreur de construction.

Les coûts de transports et/ou d'expédition sont toujours à la charge de l'acheteur en cas d'utilisation erronée des termes de garantie.

Pendant la durée de la garantie les parties remplacées deviennent propriété du producteur.

La garantie ne concerne pas les dégâts causés par une sollicitation excessive comme par exemple l'utilisation du produit après la constatation d'une anomalie, l'utilisation non adéquate ou le non-respect des instructions d'utilisation et de maintenance.

Le producteur décline toute responsabilité pour d'éventuelles difficultés qui pourraient apparaître dans la revente ou l'utilisation à l'étranger, et qui seraient dues aux dispositions en vigueur dans le pays dans lequel le produit a été vendu.

Le produit défectueux doit être consigné à l'entreprise productrice pour son remplacement, dans le cas contraire la partie remplacée sera facturée à l'acheteur.

L'assistance autorisée sur le produit est effectuée directement par Water Powered s.r.l. ou par un technicien habilité et sollicité par elle.

## GESTION DES DECHETS

La possibilité de réutiliser certaines parties du produit est soumise à l'entière responsabilité de l'utilisateur.

Sur l'étiquette figure le symbole indiqué dans le D.lgs. n.49 du 14 mars 2014 qui transpose la directive 2012/19/UE, laquelle indique la nécessité de jeter le produit dans les déchets différenciés, et plus particulièrement dans les déchets de type électrique et électronique.

Le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets domestiques. Les utilisateurs doivent procéder au tri des appareils à détruire en les amenant dans des lieux de recueil indiqués pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

## DECLARATION DE CONFORMITE

Water Powered srl déclare que ce dispositif est conforme aux critères de sécurité et de prestation, ainsi qu'aux dispositions du règlement MDR 2017/745

Puissance nominale maximale de sortie du transmetteur (W)	Distance (m) de séparation en fonction de la fréquence du transmetteur		
	de 150kHz à 80MHz d = 1,2 VP	de 80MHz à 800MHz d = 1,2 VP	de 800MHz à 2,5GHz d = 2,3 VP
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Pour les transmetteurs avec une puissance nominale maximale de sortie non reportée ci-dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être calculée en utilisant l'équation applicable à la fréquence du transmetteur, dans laquelle P est la puissance nominale maximale de sortie du transmetteur en Watt (W) selon le constructeur du transmetteur.

### Notes:

(1) A 80 MHz et 800 MHz s'applique l'intervalle de la fréquence la plus haute.

(2) Ces recommandations ne s'appliquent pas dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est influencée par l'absorption et la réflexion des structures, objets et personnes.

• • •

L'entreprise se réserve le droit d'apporter des modifications partielles ou totales au produit qui pourrait donc être différent de la description présente dans le présent manuel.

L'entreprise productrice, les distributeurs et les revendeurs déclinent toute responsabilité pour d'éventuels dégâts qui pourraient, directement ou indirectement, dériver de personnes ou choses en conséquence d'un non-respect des recommandations indiquées dans le présent manuel.

Les dispositifs My Perfect Colon ne sont pas et ne remplacent pas les appareils utilisés dans les centres d'hydrothérapie du colon.

Visiter [www.myperfectcolon.com](http://www.myperfectcolon.com) ou contacter [customer@waterpowered.eu](mailto:customer@waterpowered.eu) pour plus d'informations.

Pour tout renseignement ou information complémentaire visiter le site [www.myperfectcolon.com](http://www.myperfectcolon.com) ou contacter l'assistance par mail [customer@waterpowered.eu](mailto:customer@waterpowered.eu).

## SYMBLES

SYMBLE	SIGNIFICATION	SYMBLE	SIGNIFICATION
	Fabricant		Attention
	Label CE. Le dispositif est conforme au règlement MDR 2017/745.		Consulter les instructions d'utilisation
	Numéro de catalogue		Consulter le manuel d'utilisation
	Code du lot		Pour la gestion des déchets, le produit doit être consigné à un point de récolte approprié pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques
	Conserver à l'abri de la lumière du soleil		Dispositif médical
	Conserver à l'abri de l'humidité		Date de fabrication

- 8 -

Rev.00-11/21