

My
Perfect
Colon®
Natural Hydro-Therapy at Home



IT Manuale d'uso


www.waterpowered.eu

customer@waterpowered.eu

800577477




General Diagram

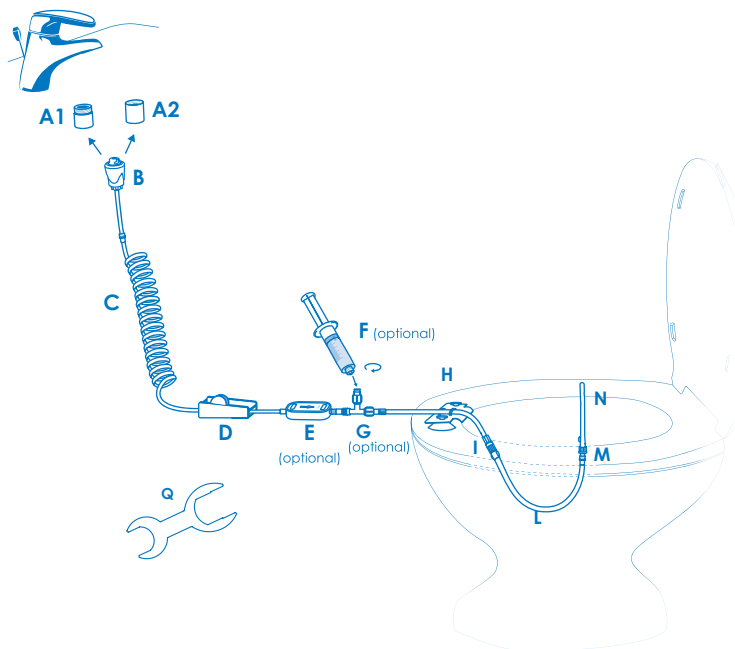


Special Aerator Filter (A1, A2)




Adity (O) - Universal adapter (Included only with "Travel" version)

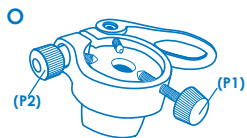


Filter of special filter to the faucet

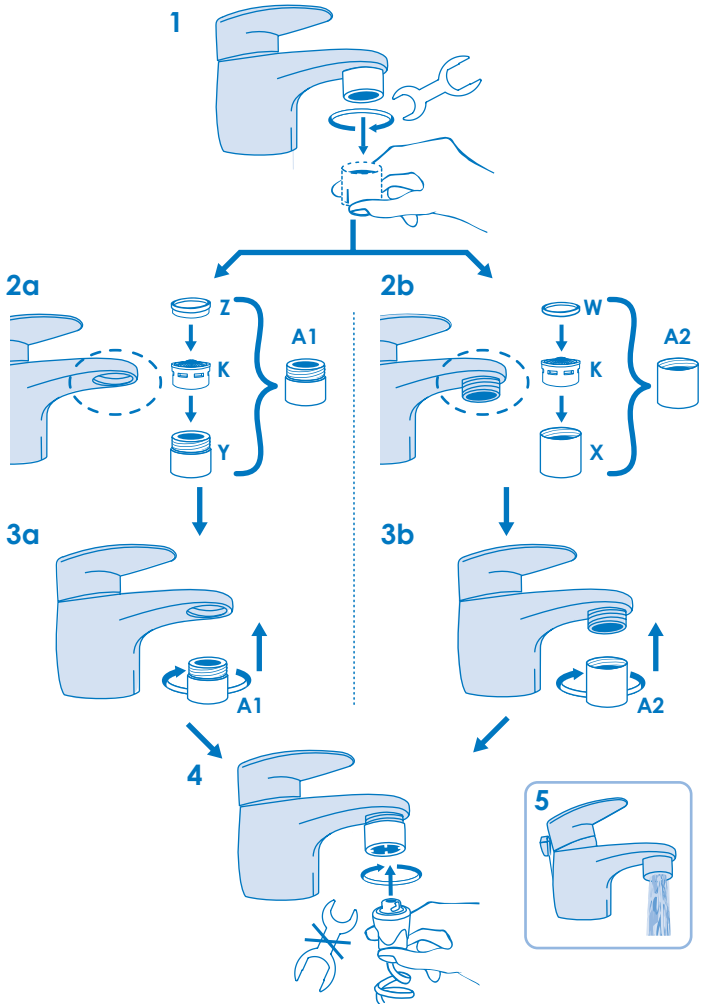


6

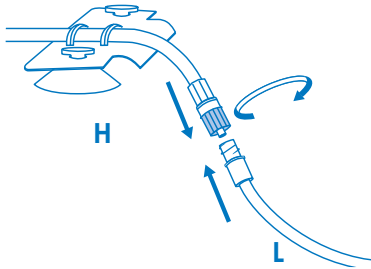


7

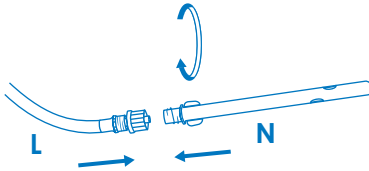


8

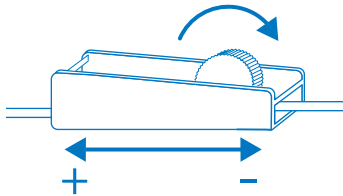


9a

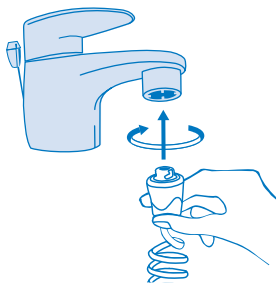


9b Only for "Travel" version

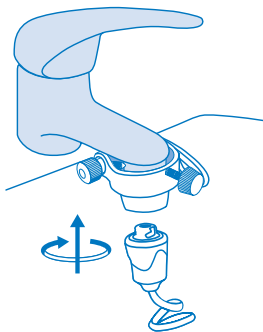


10

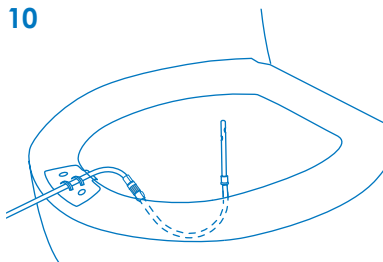


11

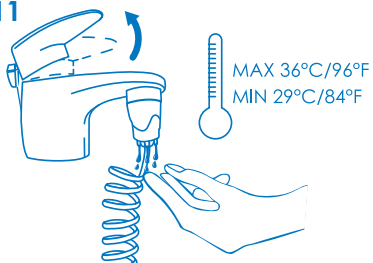


12

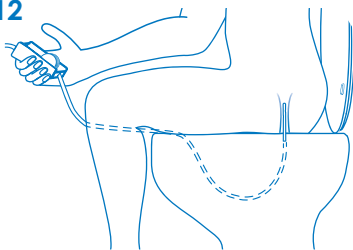

13

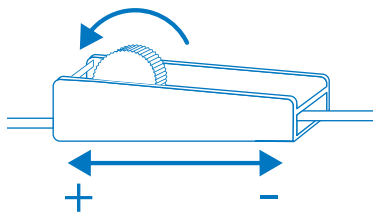


14

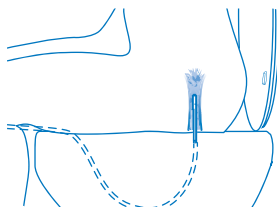

15



16 Only for "Travel" version

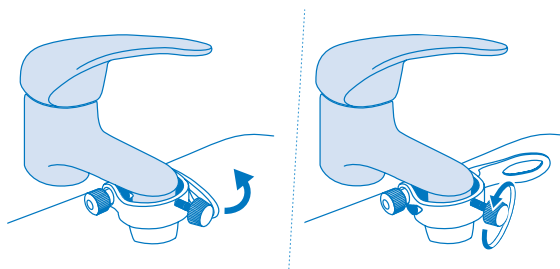


Maintenance

17



18

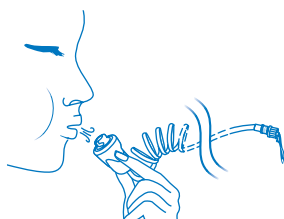


Addy Installation


(For use of My Perfect Colon with Addy, travel adapter.)

To use My Perfect Colon at home, see step 1-4).


19

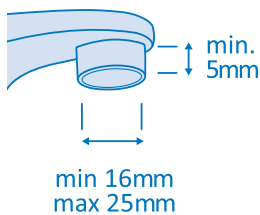


20

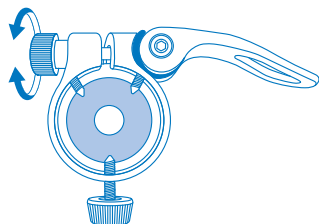


21

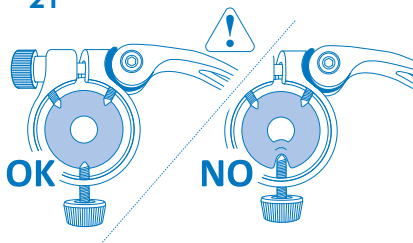


22

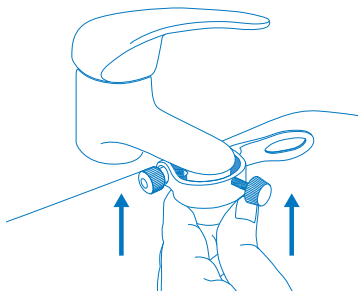


23

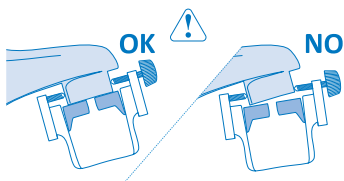


24

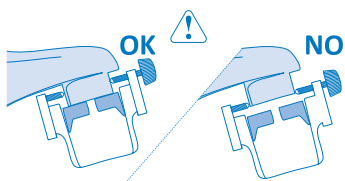


25

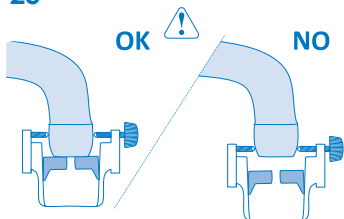

26

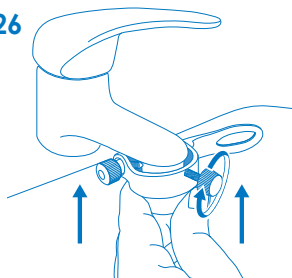

27

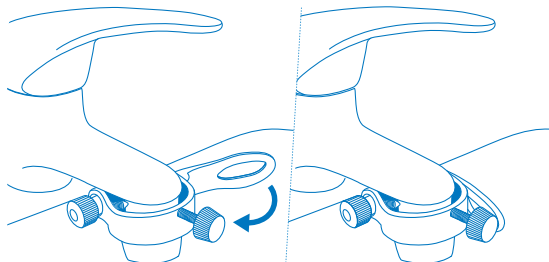

IT MANUALE D'USO

ATTENZIONE: Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Utilizzare solo con acqua tiepida (29°C/84°F - 36°C/96°F circa).

LA CONFEZIONE CONTIENE:

- **Busta "Special Filter" contenente:**
 - Porta filtro speciale con filettatura interna (X)
 - Porta filtro speciale con filettatura esterna (Y)
 - Filtro aeratore (K)
 - Guarnizione (W - con sezione a rettangolare) per attacco con filettatura interna
 - Guarnizione (Z - con sezione a scalino) per attacco con filettatura esterna
- **Busta n.1 contenente:**
 - Innesto (B) con tubo a spirale da 3m (C) e regolatore di flusso manuale (D)
 - Tubo e supporto con ventose (H) e raccordo mobile colorato (I)
- **Busta n.2 contenente:**
 - Tubo semirigido modellabile (L) con Valvola di non ritorno (M)
- **Busta Cannule Rettali** contenente n.12 cannule monouso (N).
- **Adattatore universale Addy (O)****
- **Chiave per svitamento porta filtro (Q)**
- **Astuccio porta My Perfect Colon**
- **Manuale d'uso multilingue**

Le lettere tra parentesi si riferiscono allo schema generale. I componenti E e F non sono inclusi e sono acquistabili separatamente (F è incluso nella confezione di Phyto Regula).

*** Incluso solo nella confezione "Travel".*

CHE COS'È MY PERFECT COLON CARE

My Perfect Colon Care è un dispositivo medico ad uso domestico per il lavaggio del colon inferiore (sigma e retto). **My Perfect Colon Care** si collega direttamente al rubinetto grazie al suo speciale porta filtro e all'innesto con valvola per il controllo automatico della pressione dell'acqua (sistema brevettato).

PERCHÉ SI USA

Il lavaggio effettuato con **My Perfect Colon Care** ammorbidisce ed aiuta ad espellere i residui fecali presenti sulle pareti del colon. **My Perfect Colon Care** è indicato in caso di stipsi, meteorismo, flatulenza, disturbi intestinali in genere e per una corretta igiene intima rettale. È particolarmente indicato anche per le persone allettate, immobilizzate e/o in caso di fecalomi.

CONTROINDICAZIONI

L'uso di **My Perfect Colon Care** è assolutamente sconsigliato in caso di:

Enterite-Colonproctite (Infiammazione del piccolo e grande intestino e dell'ano); Patologie addominali acute; Gravidanza; Emorroidi e ragadi anali in fase di sanguinamento; Perforazioni colon retto; Tumori Colon retto; Rettorragia; Melena; Recenti interventi chirurgici a carico di colon, retto o ano; Insufficienza cardiaca/respiratoria; Epilessia e sindromi psicosomatiche; Diarrea; Sindromi dismetaboliche; Patologie arterovenose; Malattia diverticoli colare in fase attiva; Nausea o vomito; Serio stato di disidratazione; Intervento chirurgico alla prostata.

Oltre che in caso di patologie che necessitano di particolari precauzioni, è comunque sempre opportuno consultare il proprio medico prima di utilizzare il dispositivo.

AVVERTENZE

- Prima di utilizzare **My Perfect Colon Care**, controllare l'integrità del dispositivo e di tutti i suoi componenti, nonché il corretto montaggio di tutte le parti;
- Se si dovessero avvertire particolari fastidi dopo il lavaggio, sospendere l'utilizzo di **My Perfect Colon Care** e consultare il proprio medico;
- **My Perfect Colon Care** va utilizzato con acqua tiepida. La temperatura non deve comunque mai essere superiore a 37,5°C ca. o inferiore a 29°C ca. (84°F-96°F). Una volta collegato **My Perfect Colon Care** al rubinetto e dopo aver chiuso il regolatore di flusso (D), controllare con la mano la temperatura dell'acqua che fuoriesce dalla valvola per la regolazione automatica del flusso d'acqua (B - fig.11), tenendo ben presente che la sensibilità al calore o al freddo del condotto rettale è

decisamente maggiore rispetto a quella della mano;

- Durante l'utilizzo, nel caso in cui si avvertisse una temperatura troppo calda o fredda, chiudere immediatamente il flusso dell'acqua e regolare la temperatura dal rubinetto. È possibile che, una volta collegato **My Perfect Colon Care** al rubinetto, alcuni modelli di caldaie a gas non si avvino per riscaldare l'acqua: per ovviare a questo inconveniente, è sufficiente aprire il flusso d'acqua contemporaneamente anche da un altro rubinetto in modo da far avviare il funzionamento della caldaia;
- Le cannule rettali sono mono uso. Ogni cannula rettale va utilizzata una sola volta, anche se usata dalla stessa persona;
- L'acqua utilizzata deve essere pulita (normale acqua potabile fornita dalla rete idrica domestica). Nel caso si ritenga che l'acqua del proprio rubinetto non sia di buona qualità o potabile, per effettuare il lavaggio utilizzare il filtro **My Perfect Colon Care** a doppia membrana da 1,2/5/10/5/10 micron (E – venduto separatamente).
- Si consiglia, in particolare nei primi impieghi, di usare **My Perfect Colon Care** con un flusso d'acqua moderato (utilizzando il regolatore di flusso manuale D). In caso di diverticolosi, il flusso dell'acqua deve essere impostato al minimo;
- Non piegare o schiacciare il tubo modellabile semirigido (L) per evitare di impedire o rallentare il passaggio dell'acqua;
- Solo con il consenso del pediatra e sempre sotto la supervisione del genitore, il dispositivo può essere utilizzato dai bambini;
- Non utilizzare il dispositivo su persone che stanno dormendo o inconse, bambini o persone con stato mentale alterato o con scarsa sensibilità della pelle.

MONTAGGIO

Installazione del filtro al rubinetto

(Per l'utilizzo con il adattatore universale **Addy**, consultare la sezione relativa ad **Addy**).

Attenzione: Il montaggio del filtro al rubinetto va fatto solo la prima volta che si collega **My Perfect Colon**: l'esclusivo filtro per rubinetto **Water Powered** non va rimosso e rimontato ogni volta poiché consente il normale utilizzo del rubinetto (fig.5), garantendo l'aerazione, con risparmio idrico, ed il filtraggio dell'acqua. (Il filtro speciale **Water Powered** è adattabile a tutti rubinetti a norma CEN-EN 246. Tale standard è rispettato solitamente da tutti rubinetti con filtro svitabile presenti sul mercato).

Per collegare il filtro per rubinetto **My Perfect Colon (A1/A2)** al rubinetto (lavabo, bidet, tubo doccia** o vasca):

- 1 - Svitare il filtro del proprio rubinetto, assicurandosi che sia rimossa anche la guarnizione (fig.1);
- 2a - Se il proprio rubinetto ha la filettatura interna fig. 2a, inserire il filtro aeratore (K) all'interno dell'attacco con filettatura esterna (Y) e appoggiare la guarnizione a sezione a scalino (Z) sul filtro aeratore (fig.2a). Avvitare quindi al rubinetto il filtro con filettatura esterna (A1) appena assemblato (fig.3a).
- 2b - Se il proprio rubinetto ha la filettatura esterna fig.2b, inserire la guarnizione a sezione rettangolare (W) e il filtro aeratore (K) all'interno dell'attacco con filettatura interna (X) (fig.2b). Avvitare quindi al rubinetto il filtro con filettatura interna (A2) appena assemblato (fig.3b);
- 3 - Avvitare fino in fondo (a battuta) il nuovo filtro al rubinetto usando l'innesto rapido (B - fig.4) con mani asciutte, ruotando in senso anti orario.

**** Per collegare My Perfect Colon al tubo doccia utilizzare il raccordo multi funzione (accessorio acquistabile separatamente - vedere sezione "ricambi e Accessori"). My Perfect Colon può essere collegato al rubinetto anche tramite l'adattatore universale rapido "Addy" (O. Incluso solo nella confezione My Perfect Colon Care Travel e acquistabile separatamente come accessorio per la versione Basic – vedere sezione "Ricambi e Accessori") senza dover svitare il filtro del rubinetto. Ideale in viaggio.**

COME USARE MY PERFECT COLON CARE

1. Avvitare il raccordo presente sul tubo semirigido modellabile (L - busta 2) al raccordo mobile di colore blu (I) posto alla fine del tubo passante nel supporto per il fissaggio con ventose (H) (fig.6).
2. Avvitare una cannula rettale (N) sulla valvola di non ritorno (M) posta alla fine del tubo semirigido (L - fig.7).
3. Chiudere completamente il regolatore di flusso (D) posto alla fine del tubo a spirale spostando la ruota zigrinata verso il supporto con ventose (fig. 8 - posizione meno "...")
4. Collegare **My Perfect Colon Care** al filtro del rubinetto (A1-A2) o **Addy** (O) con l'innesto rapido (B), inserendo e ruotando in senso anti orario (fig. 9a-9b) – per una presa migliore, collegare l'innesto con le mani asciutte.
5. Fissare il supporto con le ventose (H) sull'estremità frontale della tavoletta del WC o del WC stesso, premendo in corrispondenza delle due ventose. La cannula (N) deve essere rivolta verso l'alto, al centro della tazza, sagomando il tubo semirigido modellabile (L) a forma di "U" (come nello "Schema generale" e nella fig.10).
6. Aprire il rubinetto e regolare la temperatura desiderata (si consiglia tiepida – 29°C/84°F - 36°C/96°F - Mai usare con acqua a temperatura superiore a 36°C/96°F) controllando con la mano la temperatura dell'acqua che esce dalla valvola di controllo (B - fig.11).
7. Aprire leggermente il regolatore di flusso (D) per verificare che l'acqua fuoriesca dalla cannula e che i collegamenti siano corrette non ci siano perdite. Quindi chiudere nuovamente il regolatore di flusso (D).
8. Sedersi sulla tazza posizionando il supporto con ventose (H) tra le gambe e, adattando la posizione del tubo semirigido modellabile (L), inserire delicatamente la cannula rettale (N) nell'apertura anale per circa 4-5 cm, assicurandosi che i due fori per l'uscita dell'acqua siano all'interno (fig. 12). Non forzare la cannula rettale nel retto in quanto ciò potrebbe causare lesioni. In caso di sanguinamento o dolore, contattare il proprio medico immediatamente.
9. Per iniziare il lavaggio, rimanendo seduti, aprire gradualmente il passaggio dell'acqua con il regolatore di flusso (D - fig.13) fino al livello desiderato e iniziare il lavaggio (fig.14 – ATTENZIONE: vedere i paragrafi "Frequenza e durata" e "Suggerimenti per il lavaggio intestinale" per le indicazioni di utilizzo durante il lavaggio).
10. Ogni lavaggio consiste di queste 3 fasi:
 - a. Riempimento (immissione di acqua nel retto): Smettere di riempire con acqua immediatamente se ci si sente pieni, anche se si tratta del primo riempimento e si è avviato da pochi secondi;
 - b. Mantenimento (acqua è trattenuta all'interno del colon fino a che l'impulso dell'evacuazione non è forte, di solito da 1 a 5 minuti);
 - c. Svuotamento (evacuazione): durante l'evacuazione, la cannula rettale può essere lasciato dentro o fuori del condotto anale; se non c'è stimolo dopo 5 minuti, cercare di svuotare l'intestino; chiamare immediatamente un medico se l'acqua non esce dopo 30 minuti poiché questo potrebbe essere un segno di disidratazione.
11. Finito il lavaggio, rimanendo seduti, chiudere il passaggio dell'acqua con il regolatore di flusso (D - fig.8) e quindi sfilare delicatamente la cannula rettale (N).
12. Assicurarsi di espellere tutta l'acqua dal colon. Se tutta l'acqua non viene espulsa, si possono verificare successive perdite o leggeri fastidi.
13. Chiudere il rubinetto e svitare la cannula rettale (N) dal tubo semirigido modellabile (L – operazione inversa alla fig.7). Non riutilizzare la cannula per

altri lavaggi (la cannula è monouso e non va assolutamente riutilizzata, neanche dalla stessa persona).

14. Lavare il tubo semirigido modellabile (L – fig.17): svitare il raccordo mobile blu (I – operazione inversa alla fig.6), staccare la parte finale del tubo semirigido e pulirla con cura, sciacquandola abbondantemente, asciugando il tutto successivamente. Si consiglia, comunque, di pulire regolarmente anche tutte le altre parti.
15. Staccare l'innesto rapido (B) dal filtro del rubinetto ed il supporto (H) dalla tavoletta del WC. Riporre **My Perfect Colon Care** asciutto nell'astuccio.

FREQUENZA E DURATA DEI LAVAGGI

Il lavaggio intestinale con **My Perfect Colon Care** è una pratica per il benessere personale: va quindi effettuato in totale rilassatezza, dedicando il tempo necessario, senza fretta.

- Per una corretta esecuzione del lavaggio si consiglia di alternare fasi di immissione di acqua con fasi di trattenimento ognuna della durata di circa 5-10 secondi;
- Per i primi lavaggi, ripetere le fasi di immissione e trattenimento per 2 volte. Per i successivi lavaggi, ripetere al massimo tali fasi per 5 volte. In ogni caso, terminare subito l'immissione dell'acqua se si avverte la sensazione di riempimento (anche se si è immessa acqua solo una volta e per pochi secondi);
- Terminata l'ultima fase di immissione di acqua, cercare di trattenere l'acqua all'interno (senza sforzarsi particolarmente e, comunque, non oltre 4-5 min.) prima di evacuare. Con il passare degli utilizzi, la resistenza allo stimolo sarà sempre maggiore;
- La quantità totale d'acqua da immettere durante il lavaggio è soggettiva e dipende dalla conformazione e dalla condizione personale. Normalmente per ogni lavaggio non si deve immettere, complessivamente durante l'intero lavaggio, più di 1,5 lt. d'acqua ca. (che fuoriescono dalla cannula mediamente in circa 40 secondi con rubinetto e regolatore di flusso completamente aperti);
- La durata totale del lavaggio è variabile e soggettiva in quanto dipende, oltre che dal tempo necessario per il riempimento, anche dal tempo in cui si riesce a trattenere l'acqua all'interno del colon e dal tempo necessario per l'evacuazione che possono variare a seconda dei singoli casi ed esigenze.
- Si consiglia di effettuare non più di un lavaggio a settimana per il primo mese e non più di 3 lavaggi a settimana successivamente, salvo diversa indicazione del proprio medico;

SUGGERIMENTI PER IL LAVAGGIO INTESTINALE

- E' preferibile, in caso di parti colare sensibilità, ungere la cannula (N) con gel lubrificante (vaselina, olio o simili) prima dell'uso per facilitarne l'inserimento;
- Per facilitare l'evacuazione, respirare profondamente, contrarre la pancia e massaggiare la zona sopra il pube ed il lato sinistro della pancia per circa 1-2 minuti. L'evacuazione avverrà in modo naturale quando l'intestino sarà pronto e le feci ammorbidite;
- La sensibilità alla pressione ed alla temperatura dell'acqua sono soggettive e quindi l'utilizzatore dovrà valutarle e regolarle tenendo comunque sempre presenti le controindicazioni (vedere paragrafo specifico);
- Si raccomanda, specialmente per i primi lavaggi, di usare **My Perfect Colon Care** con flussi di acqua moderati (regolando con il regolatore di flusso manuale);
- Dopo i lavaggi è consigliabile assumere fermenti lattici per reintegrare la flora batterica intestinale;
- In alcuni casi è possibile che l'effetto del lavaggio sia particolarmente efficace e che lo stimolo possa ripresentarsi più volte nelle 2-3 ore successive. Si consiglia quindi, in particolare per i primi utilizzi, di avere la possibilità, per le 2-3 ore successive l'uso, di poter usufruire di un bagno. Se si dovesse verificare tale situazione, nei lavaggi successivi, ridurre progressivamente la quantità di acqua immessa;
- All'interno dell'innesto rapido è presente una valvola che controlla automaticamente il flusso d'acqua - sistema brevettato - che scaricherà automaticamente l'acqua in eccesso direttamente nel lavabo/bidet (fig.15). È possibile che si avverta un suono, simile ad un sibilo/fischio, quando si chiude completamente passaggio dell'acqua mentre il rubinetto è aperto. Per eliminare tale suono è sufficiente diminuire il flusso dell'acqua dal comando del rubinetto;
- Durante l'evacuazione è facoltativo trattenere o estrarre la cannula (N) dal condotto rettale.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

- Al termine di ogni lavaggio, soffiando dalla parte dell'innesto (B), fare uscire l'acqua residua dai tubi per conservare **My Perfect Colon Care** in modo igienico (fig.18);
- Si consiglia di conservare il prodotto, tra un utilizzo e l'altro, con il regolatore di flusso (D) aperto (fig.13, posizione più "+");
- La parte finale del tubo semirigido (L) va lavata alla fine di ogni utilizzo (fig.17), prima di riporlo, staccando il raccordo filettato (punto 11 "Come usare **My Perfect Colon Care**"). Si consiglia, comunque, di pulire anche tutte le altre parti;

- Non utilizzare detergenti aggressivi per la pulizia del prodotto, per evitare di rovinare le parti in gomma o plastica;
- Prima dell'uso, collegando **My Perfect Colon Care** al rubinetto, far scorrere liberamente l'acqua per circa 30 secondi all'interno del dispositivo fino all'uscita dalla cannula;
- Per evitare la formazione di muffe o batteri, il prodotto va conservato, tra un utilizzo e l'altro, ben pulito e asciutto all'interno dell'astuccio.
- Quando si avvista la vite di serraggio (P1) fare attenzione a non deformare la guarnizione (fig. 21);
- In caso di distacco dal rubinetto, ripetere la procedura di montaggio stringendo leggermente la vite P1 e la rotella P2;
- Non smontare i componenti dell'adattatore **Addy**;
- Contiene piccole parti – tenere lontano dalla portata dei bambini.

ADDY - MONTAGGIO al RUBINETTO

1. Posizionare la leva in posizione di apertura (fig. 20) e stringere la rotella di regolazione (P2) fino a che la leva non sia in tensione senza forzare eccessivamente;
2. Controllare che la vite di serraggio sia svitata sufficientemente per permettere l'inserimento sul porta filtro del rubinetto e che la guarnizione sia inserita nella propria sede correttamente, senza deformazioni visibili (fig.21);
3. Impugnare **Addy** (fig.22) spingendo verso l'alto fino a far aderire completamente la guarnizione al porta filtro del rubinetto e assicurarsi che:
 - La vite di serraggio (P1) sia nella parte frontale o laterale del rubinetto (mai nella parte posteriore);
 - **Addy** segua l'inclinazione del porta filtro del rubinetto per permettere alla guarnizione di aderire completamente e garantire la tenuta (fig. 23);
 - **Addy** sia più in alto possibile rispetto al porta filtro del rubinetto (fig. 24).

Casi particolari:

- Alcuni porta filtro hanno una leggera rientranza: fare in modo che la punta delle viti non si appoggi in prossimità della rientranza per evitare che **Addy** possa staccarsi.
- In caso di rubinetti leggermente svasati /stondati (tipo rubinetti da cucina), montare le viti sulla parte dritta del porta filtro, mai sulla parte svasata per evitare che **Addy** si sfili dal rubinetto (fig. 25).
- 4. Mantenendo fermo **Addy** al rubinetto, avvitare la vite di serraggio (P1) fino all'aggancio al rubinetto (fig. 26), senza stringere eccessivamente;
- 5. Ruotare la leva portandola in posizione di chiusura (fig. 27);

Ora puoi collegare il tuo dispositivo My Perfect Colon (fig. 9b);

6. Una volta terminato l'utilizzo, riportare la leva in posizione di apertura (fig. 16) e, se necessario, svitare la vite di serraggio (P1);
7. Dopo l'uso di **Addy** si consiglia di asciugarlo e lasciare leggermente avvitata la vite di serraggio (P1) controllando, comunque, che la punta delle viti sia sopra e non deformi la guarnizione (fig. 21).

ADATTATORE UNIVERSALE ADDY

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni per un corretto montaggio ed uso.

COS'E' ADDY

L'adattatore **Addy** consente di collegare in modo semplice e veloce **My Perfect Colon** a tutti i più comuni rubinetti con uscita a forma circolare senza la necessità di montare lo speciale porta filtro filettato. È ideale per l'utilizzo in viaggio, in albergo o anche in caso di rubinetti circolari con filettatura fuori standard. **Addy** può essere collegato a tutti rubinetti con porta filtro per l'uscita dell'acqua circolari con diametro esterno da 16mm a 25mm e con altezza minima di 5mm (fig.19).

AVVERTENZE e SUGGERIMENTI PER L'UTILIZZO DI ADDY

- Aprire gradualmente il rubinetto, non di scatto e non alla massima pressione;
- Con il rubinetto aperto, non cercare di riposizionare o spostare **Addy** per evitare di perdere la tenuta;
- Inizialmente, per alcuni istanti, potrebbero esserci delle piccole fuoriuscite d'acqua dalla parte superiore di **Addy** che però andranno a scomparire velocemente. Nel caso tali perdite dovessero prolungarsi o dovessero essere eccessive, si consiglia di ripetere la procedura di aggancio al rubinetto;
- Assicurarsi che il porta filtro sia ben avvitato al rubinetto per evitare perdite una volta montato l'adattatore;
- L'utilizzo di **Addy** in caso di eccessiva pressione nell'avvitamento e di utilizzo ripetuto sullo stesso rubinetto, potrebbe causare dei leggeri segni sul porta filtro del rubinetto dovuti al contatto con punte (per utilizzi prolungati di My Perfect Colon sullo stesso rubinetto, si consiglia di utilizzare i filtri speciali filettati);
- Si sconsiglia di lasciare **Addy** montato al rubinetto; se ciò dovesse avvenire, al nuovo utilizzo si consiglia di controllare che l'aggancio sia solido, controllando che la vite (P1) sia serrata;

RICAMBI E ACCESSORI

È possibile acquistare la gamma completa dei prodotti

My Perfect Colon sul sito web:

www.myperfectcolon.com

Cannule rettali: disponibili in diverse misure.

Filtro a doppia membrana da 1,2/5/10 micron: per il filtraggio dell'acqua da batteri e impurità in sospensione di dimensione superiore a 1,2/5/10 micron.

Comfort Wash materasso gonfiabile: permette di effettuare il lavaggio con **My Perfect Colon Care** stando comodamente sdraiati, al fine di aumentare l'efficacia della pulizia.

Tavola: consente di effettuare il lavaggio con **My Perfect Colon Care** in posizione distesa, aumentando ulteriormente l'efficacia della pulizia in quanto l'acqua riesce a penetrare ancora più in profondità. La tavola si appoggia sul WC e, grazie al foro e all'area di scolo, convoglia i residui fecali espulsi direttamente nella tazza, permettendo di evacuare senza dover interrompere il lavaggio. Realizzata in polietilene ad alta resistenza, la tavola è idrorepellente e facilmente lavabile.

Soluzioni concentrate "Phyto Regula": da aggiungere attraverso il raccordo per Phyto Regula nel dispositivo **My Perfect Colon Care** per aumentare l'efficacia del lavaggio. Disponibili in varie formulazioni, adatte a diversi disturbi intestinali. La confezione delle soluzioni Phyto Regula include la siringa dosatrice.

Adattatore universale "Addy": permette l'uso di **My Perfect Colon** senza svitare il filtro dal rubinetto. Il suo utilizzo è ideale in viaggio, in albergo o in caso di rubinetti con filettatura non standard.

Raccordo multifunzione per doccia: per il collegamento di **My Perfect Colon** al tubo doccia.

Filtro per rubinetto My Perfect Colon in metallo: disponibili con filettatura standard interna ed esterna.

Adattatori: per rubinetti con filettature non standard.

Prolunga: tubo a spirale per collegare **My Perfect Colon Care** anche in caso di distanza dal rubinetto superiore ai 3mt del tubo in dotazione.

Sono disponibili, inoltre, come ricambi tutti gli altri componenti del dispositivo **My Perfect Colon Care**: Tubo con innesto rapido; Dosatore con tubo e supporto con ventose; Tubo semirigido modellabile.

La casa produttrice, i distributori ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone o cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel presente manuale d'uso e riguardanti il montaggio, l'uso, le controindicazioni e la manutenzione dell'apparecchio.

My Perfect Colon non è e non sostituisce le apparecchiature utilizzate nei centri di idrocolonerapia.

L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche parziali o totali al prodotto che potrebbe quindi differire dalla descrizione inserita nel presente manuale.

Per qualsiasi chiarimento o informazione visitare il sito www.myperfectcolon.com o contattare l'assistenza via email a: customer@waterpowered.eu (o support@waterpowered.us solo per USA e Canada).