



Plum pH Neutral 200 ml

Øyeskyl



Plum pH Neutral er en fosfatbuffer som hurtig og effektivt nøytraliserer både syrer og baser. Den har en høy væskeflyt og samtidig dokumentert effekt ved øyeulykker med kjemikalier.

Produktet er tilgjengelig i en liten, håndterlig 200 ml flaske du alltid kan ha med deg i den spesialdesignede beltevesken eller i førstehjelps- og verktøykassen.

Produktet kan brukes enkeltvis eller som refill i de vegghengte førstehjelpsstasjoner og -bokser.

Bruksområde	På arbeidsplasser, verksteder, produksjonslokaler, skoler, barnehager, i hjemmet og andre steder hvor skader kan oppstå.
Produktegenskaper	4,9 % steril fosfatbuffer som raskt nøytraliserer syrer og baser i øynene. Etter skylling med pH nøytral anbefales det å skylle med Plum øyeskyl.
Bruksanvisning	Anbefalt skylletid: 2 min. Det er viktig at øyeskyllevæsken alltid treffer øyet i en myk og jevn strøm. Etter skylling med pH Neutral anbefales det å skylle med Plum Øyeskyl.
Merk	På arbeidsplasser hvor det brukes kjemikalier skal arbeidsplassen utstyres med hensiktsmessige førstehjelpstiltak tilpasset arbeidets art. Ved øyeulykker som involverer alle former for øyekorrosjon, må øynene umiddelbart skylles med rikelig med rennende vann. Ifølge Arbeidstilsynet er vann fra øyeskylleflasker å foretrekke. Det anbefales å oppsøke lege for alle typer øyeskader. Du bør imidlertid alltid bruke øyeskyllevæske eller fosfatbufferen (pH Neutral) umiddelbart etter at du har fått en øyeskade, avhengig av skadens art. Ha alltid ekstra flasker innen rekkevidde slik at du kan fortsette å skylle øyet under transport til lege eller legevakt.
Utseende og lukt	Klar væske
Produksjonsland	DANMARK

Forpakningsstørrelse Salgsenhet / Artikkel nr.	Artikkel nr.	GTIN	Type forpakning
--	--------------	------	-----------------

10 x 200 ml	614752	5701684475225	Flaske
-------------	--------	---------------	--------

**Tilleggsinformasjon**

Sjekk den oppdaterte versjonen av en trykket brosjyre på vår nettside www.kiilto.no, eller send en epost til vår kundeservice post.no@kiilto.com.