


NeuroTrac Tens enkel Produktinformation

Enkel och användarvänlig stimulator för
nervstimulering och smärtlindring

Teknisk data:

- Två-kanalsapparat
- Intensiteten kan ökas med 1,0 mA per knapptryck
- Fast tidsinställning på 30 min, 2 h eller 4 h. Återstående tid visas i displayen
- Amplitud: 0-80 mA
- Frekvens: 2-200 Hz
- Apparaten slår av automatiskt efter 4 minuter, i ej bruk

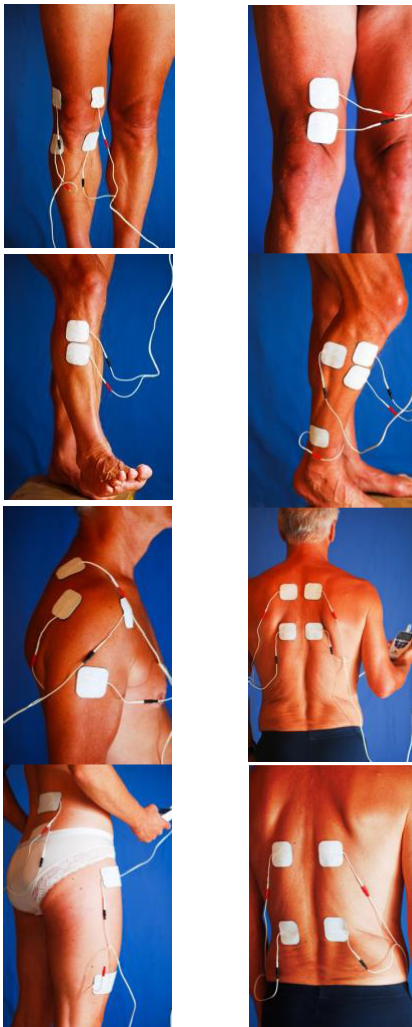

NeuroTrac TENS är en enkel och användarvänlig två-kanals TENS- stimulator som innehåller program för generell nervstimulering och smärtlindring.

Stimulatorn innehåller totalt 14 olika program, varav 11 är fasta och förprogrammerade. Dessa består av högfrekventa (HF), lågfrekventa (LF), burst, modulerade program och program för blandad frekvensstimulering (HAN). Om du önskar att stimulera med olika program på de olika kanalerna väljer du P10.

Stimulatorn har dessutom tre öppna program där du kan lägga in dina egna preferenser.

NeuroTrac TENS har en stor display med ljus som visar valt program, tid, frekvens, pulsbredd och inställd stimuleringsstyrka. Stimulatorn har två kanaler så du kan använda fyra elektroder samtidigt. Kan även låsas till ett önskas program och har även möjlighet till användarstatistik.

Apparaten kan användas till elektroakupunktur.

Inställning av tid: Programmen har en fast inställning på 30 min, 2 timmar eller 4 timmar i förprogrammerade programmen. Om du vill ändra tiden på de öppna programmen (PC1-PC3): ta bort batterilocket, tryck dig fram till SET knappen till dess att tiden blinkar. Välj önskad tid med den högra +/- knappen. Tryck ESC för att spara.

Skapa egna program:

Du kan lägga in ett eget program på PC1- PC3. Tryck dig fram till något av dessa program med PGR-knappen och håll därefter ESC- knappen intryckt tillsdessa att Hz blinkar på displayen.

Välj önskat Hz med +/- knappen, tryck på SET igen till uS blinkar på displayen och välj önskad pulsbredd med +/- knappen. Tryck ESC för att spara.

Tillbehör:

Alla våra TENS-apparater levereras i en väska med två ej uppladdningsbara 9 volt batteri, halsband och kablar.

NeuroTrac Tens Programöversikt

Program	Modus	Frekvens (Hz)	Pulsbredd (uS)	Tid
1	Högfrekvent	90	200	4 timmar
2	Högfrekvent	90	175	4 timmar
3	Högfrekvent	80	200	4 timmar
4	Högfrekvent	100	200	4 timmar
5	Lågfrekvent	10	200	4 timmar
6	Lågfrekvent	2	200	4 timmar
7	Modulerat	Alternerar i området 100-65	Alternerar i området 200-100	2 timmar
8	Modulerat	Alternerar i området 90-10	200	2 timmar
9	Burst	2	200	2 timmar
10	Blandad frekvens stimulering	Kanal 1:80 Kanal 2:2 (Burst)	Kanal 1 och 2 175	2 timmar
11	Blandad frekvens stimulering (HAN)	Skiftar mellan 2 och 100 med 3 sek intervall	200	30 min
PC1, PC2, PC3	Öppna Program	...Hz	...uS	...timmar

Hudelektroder finns i många olika storlekar. Det finns även elektroder för känslig hud.

www.medifa.se