

NeuroTrac Continece

NeuroTrac Continece är en enkel och användarvänlig elektrostimulator för behandling av olika typer av inkontinens och buksmärtor. Den är också mycket lämplig för tibialisstimulering vid överaktiv blåsa och fekal urgeinkontinens.



Continece hanteras enkelt via tydliga knappar och behandlingsdata kan tydligt läsas från skärmen. Enheten har två utgångar vilket gör att du kan använda både vaginal- och analprober samtidigt



NeuroTrac Continece innehåller totalt 13* program:

9 fasta program som inte kan ändras (P01-P09).

4* öppna program där parametrar som frekvens och pulsbredd kan ändras (PC1-PC4*).

NeuroTrac Kontinens kan låsas i valt behandlingsprogram så att användaren bara behöver tänka på sitt fasta program när apparaten startas.

Elektroder /prober

Det finns ett antal elektroder för både vaginal och anal stimulering som kan användas tillsammans med NeuroTrac Continece. För vaginal elektrostimulering rekommenderar vi Periform-proben och för anal elektrostimulering rekommenderar vi Anuform-proben.



För tibialisstimulering finns separata hudelektroder.

Läs mer på vår hemsida medifa.se

AB Medifa, Björkhagsvägen 21

Programoversikt: (P01-P09 er faste, PC1-PC3 (og evt PC4) er åpne)

Nr.	Program	Frekvens (Hz)	Pulsbredde (μ S)	Ramp-up (sek)	Stimulering (sek)	Pause (sek)	Tid (min)	
P01	Smertelindring Tibialisstimulering	3	150	1	Kontinuerlig		20	
P02	Overaktiv blære	10	250	1	5	5	20	
P03	Stressinkontinens – 1	40	200	1	6	15	20	
P04	Stressinkontinens – 2	30	200	0,8	5	8	20	
P05	Overaktiv blære – 1	10	200	1	5	5	20	
P06	Overaktiv blære – 2	10	200	1	Kontinuerlig		15	
P07	Manglende sensitivitet	Varierer mellom 3Hz i 3 min 10Hz i 10 min 20Hz i 5 min (250 μ S, ramp up 0,8sek) 30Hz i 4 min 40Hz i 3min (200 μ S, ramp up 0,7sek) 4 sek stim, 4 sek pause						25
P08	Bekkenbunnstrening	Varierer mellom 20Hz i 3 min 3Hz i 5 min 10Hz i 15 min 20Hz i 15 min (250 μ S, ramp up 0,8sek) 30Hz i 5 min 40Hz i 5 min (200 μ S, ramp up 0,6sek) 10Hz i 12 min (250 μ S, ramp up 0,8sek) 4 sek stim, 4 sek pause						60
P09	Utholdenhetstrening	20	250	0,8	5	5	20	
PC1	Overaktiv blære	10	300/450	0,5	60	2	20	
PC2	Stressinkontinens	30/20	250	1,6	8	10	12	
PC3	Transkutan tibialisstimulering	10	200	0,5	60	2	20	
PC4	Transk. tibialisst. (nyere versjoner)	10	200		Kontinuerlig		20	