

## Fakta Öronclips

Art nr: 14

### **Allmän information om öronclips.**


Våra öronclips kan användas våra TENS- och TEMS-enheter.

**Före användning:** Huden måste vara ren och torr. Tvätta gärna huden med tvål och vatten där elektroderna ska fästas. Undvik användning av desinfektionsmedel eller annan form av rengöring, eftersom detta kan skada huden. Fukta gärna kolfiberplattan enkelt genom att ta lite vatten på fingret.

**Efter användning:** Tvätta öronclipset lätt och lägg tillbaka det i påsen. Av hygieniska skäl får elektroderna endast användas av en person.

**Förvaring:** Förvaras i rumstemperatur, gärna i slutna påse.

**Livslängd:** Elektrodernas livslängd kan variera mycket och beror på användning.

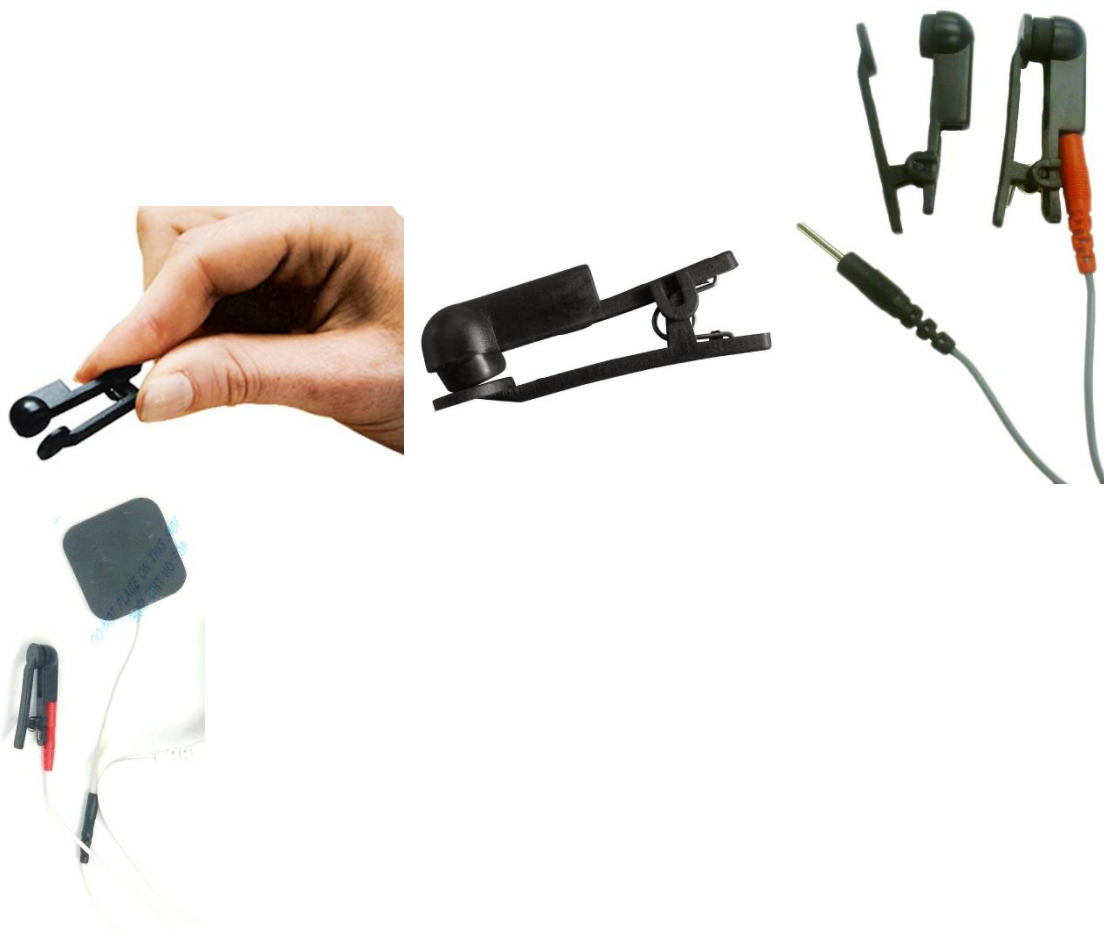

# QUINTET

