



Snabbmanual NeuroTrac TENS


1. Ta av batteriluckan. Sätt in ett 9V batteri i batterihuset – alkaliskt eller uppladdningsbart. Stäng batteriluckan.

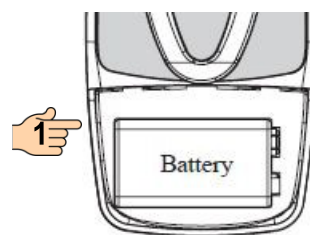

2. Plugga in apparatledningarna på toppen av apparaten. kanal A (CH A vänster sida) om en kanal ska användas och Kanal B (CH B höger sida) om bägge kanalerna ska användas. Använd alltid kanal A (CH A) om endast en kanal skall användas.

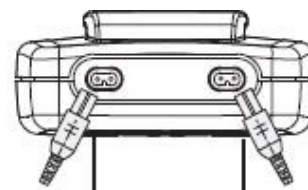


3. Ta ut hudelektroderna ur påsen, men ta inte bort dem ifrån plastfilmen ännu. Fäst dem på de medföljande kablarna. Kontakterna på apparatkablarna pluggas in i ledningarna som sticker ut från hudelektroderna. Du behöver två elektroder till varje kabel. Huden runt behandlingsområdet skall inte vara fet eller oljig. Raka med fördel bort hår (dagen innan).

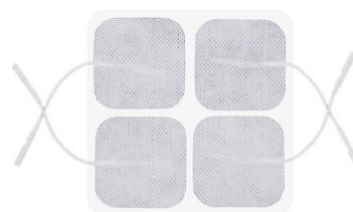

Ta nu bort hudelektroderna ifrån plastfilmen och placera dem på huden.


4. Fäst elektroderna på kroppen. Elektroderna placeras i eller runt det smärftulla området, i dermatomet i närliggande område, över triggerpunkt eller på muskelbuk. Se även sid. 20 i den stora manualen för olika elektrodplaceringar.

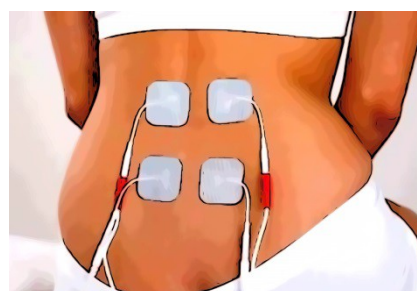


Alla hudelektroder kan beställas via
AB Medifa

E-mail: order@medifa.se
Telefon: 070-305 37 35
Alt 076-922 33 32

5. Slå på apparaten genom att trycka på knappen PÅ/AV.

 mitt på apparaten

6. Tryck program-knappen PRG/ESC  för att välja de önskade programmet, se programöversikt i stora manualen alt. på baksidan av apparaten. Om din terapeut har valt ett program åt dig och låst apparaten så kan inte PRG/ESC- knappen användas.

7. För att starta stimuleringen tryck på + knappen till vänster om du använder endast en kanal A (CH A) eller båda + knapparna om du använder både kanal A och kanal B.


Välj önskad stimuleringsstyrka (mA) genom att fortsätta att trycka på + knappen till önskad styrka.

Stimuleringen reduceras genom att trycka på

– knappen. När du är i gång med stimuleringen, visas återstående tid av programmet i displayen.

8. Apparaten låses automatiskt efter 60 sekunder. Vill du öka stimuleringsstyrkan (mA) på den enskilda kanalen efter det att apparaten har låst sig, trycker du först på – knappen och därefter så kan du öka stimuleringen genom att trycka på + knappen till önskad styrka.

9. Programmet stänger av sig själv efter avslutad behandlingstid. Du kan alltid avsluta behandlingen genom att trycka PÅ/AV.

10. Om du önskar att pausa programmet under stimuleringen så trycker du på  PRG/ECS knappen och stimulatorn går i pausläge. För att åter aktivera stimuleringen, tryck på + knappen till önskad styrka.

11. Viktig: Ta inte bort ledningarna medans apparaten är påslagen. Fäst elektroderna åter på plastfilmen och lägg tillbaka dem i påsen.

