

PHILIPS

HearLink

AudioClip



Bruksanvisning

HEA6000

Garanticertifikat

Datum: _____ Modell: _____

Garantiperiod: _____

Serienr: _____

Hörselklinik

Internationell garanti

Ditt AudioClip har en begränsad internationell garanti som gäller i 12 månader från inköpsdatumet. Denna begränsade garanti omfattar tillverkningsfel och materiella defekter på själva enheten, men inte tillbehör som t.ex. batterier, kablar, strömenheter osv. Problem som uppkommit pga. felaktigt eller olämpligt handhavande, åverkan, slitage, olyckshändelser, reparationer utförda av ej auktoriserad serviceverkstad eller om enheten har utsatts för frätande kemikalier, täcks INTE av garantin och garantin upphör då att gälla. Ovanstående garanti påverkar inte legala rättigheter som kan finnas i nationell lagstiftning som styr handel i konsumentled. Din audionom kan ha utfärdat garanti som går utanför nämnda begränsade garanti. Vänd dig till din audionom för ytterligare information.

Service

Kontakta din hörselklinik vid behov. De kan hjälpa dig med enklare problem och justeringar.

Introduktion

Denna bruksanvisning visar hur du använder och sköter ditt nya AudioClip. Läs bruksanvisningen noggrant, inklusive avsnittet om varningar. Det hjälper dig att använda ditt nya AudioClip på rätt sätt.

Om du har ytterligare frågor kring hantering av din AudioClip, kontakta din audionom.

Mer information finns på
hearingsolutions.philips.com

Avsedd användning

Avsedd användning	AudioClip är en trådlös mottagare och sändare av ljud mellan den omgivande ljudmiljön, inklusive tal och trådlösa elektroniska ljudenheter. AudioClip hjälper dessutom hörapparatsanvändare att hantera funktionerna i sina hörapparater.
Indikation för användning	Ingen indikation för användning.
Avsedda användare	Vuxna och barn över 36 månader.
Användningsmiljö	Inomhus/utomhus.
Kontraindikationer	Användare av aktiva implantat måste vara särskilt uppmärksamma vid användning av enheten. Läs mer i varningsavsnittet.
Kliniska fördelar	Se hörapparatsens kliniska fördelar.

Viktigt!


Läs gärna igenom hela bruksanvisningen innan du använder AudioClip. Den innehåller instruktioner och viktig information om användning och hantering av AudioClip.

Introduktion

AudioClip kan användas både som ett trådlöst headset för mobiltelefoner och som en extern mikrofon.


1. Headset för mobiltelefon

Ljudet från mobiltelefonen strömmas till dina hörapparater genom AudioClip (A). Din röst fångas upp av AudioClip och sänds till mobiltelefonen (B).

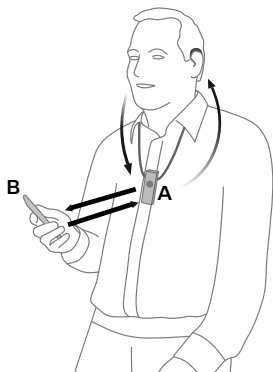

2. Extern mikrofon

Rösten från personen som bär AudioClip överförs trådlöst till dina hörapparater.

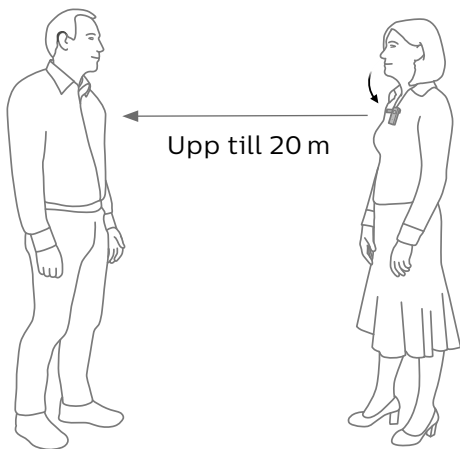

Innehållsförteckning

Förpackningens innehåll	11
Översikt – huvudfunktioner	12
Översikt – indikationer	14
Komma igång	16
Daglig användning På/Av	22
Daglig användning: Laddning	23
Använd AudioClip med mobiltelefon	25
Kontrollera att AudioClip är ansluten till telefonen	26
Besvara samtal	27
Ringa samtal	29
Avancerade headsetfunktioner	30
Lyssna på musik	31
Använda AudioClip som extern mikrofon	33
Välja mikrofonläget	34
Starta och stoppa ljudet från extern mikrofon	35

Justera volymen från extern mikrofon	36
Starta och stoppa ljudet från den externa mikrofonen från dina hörapparater	37
Använda AudioClip som fjärrkontroll för hörapparaterna	38
Andra möjligheter och funktioner	39
Rengöra AudioClip	40
Varningar	41
Teknisk information	47

Förpackningens innehåll

AudioClip-förpackningen innehåller följande:



AudioClip



USB-kabel
för laddning



Laddare för
vägguttag
(olika för
olika länder)



Halsband – långt



Halsband – standard





Fodral




Bruksanvisning


Översikt – huvudfunktioner

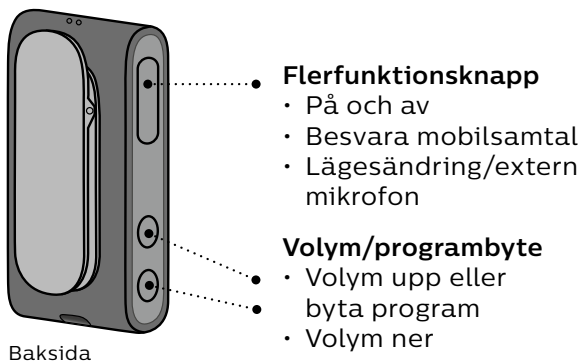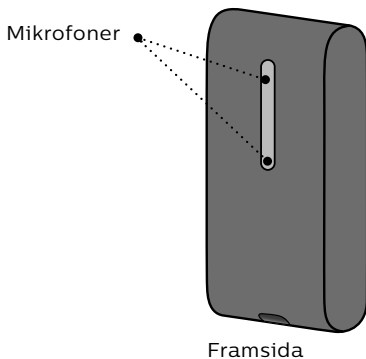

Statusindikator Strömindikator

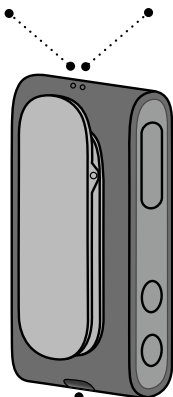



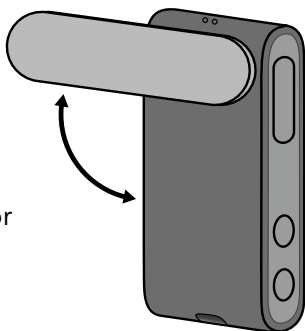









Laddningsuttag
(Micro-USB)



Klämma (vridbart) för
att bära AudioClip

Översikt – indikationer


Status	Beskrivning	
	Blinkande gult	Söker efter hörapparater
	Fast gult	Hörapparater är anslutna men AudioClip är inte ansluten till en mobiltelefon
	Blinkande blått	Söker efter en mobiltelefon (parkopplar)
	Fast blått	Ansluten till en mobiltelefon
	Fast grönt	Samtal pågår
	Blinkande grönt	Inkommande samtal
	Fast orange	Musiklyssning pågår
	Fast magenta	Läge för extern mikrofon
	Blinkande magenta	Extern mikrofon återansluts

Ström- förbrukning	Beskrivning	
	Fast rött	Svagt batteri
	Fast grönt	PÅ- laddar inte
	Blinkande grönt	PÅ- laddar
	Avtagande grönt	PÅ- laddning slutförd
	Blinkande orange	AV- laddar
	Fast orange	AV- laddning slutförd

Komma igång


Innan du kan använda AudioClip med dina hörapparater, behöver båda hörapparaterna parkopplas med AudioClip. När AudioClip ska användas med en mobiltelefon behöver den också parkopplas med telefonen

A. Parkoppla hörapparaterna med AudioClip

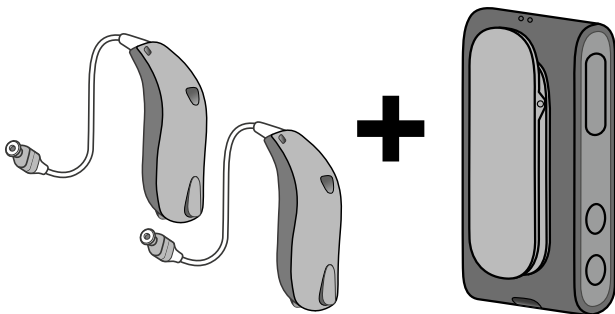

Se sidan 18 för detaljerad instruktion om hur AudioClip parkopplas med hörapparaterna

B. Parkoppling av AudioClip och mobiltelefon

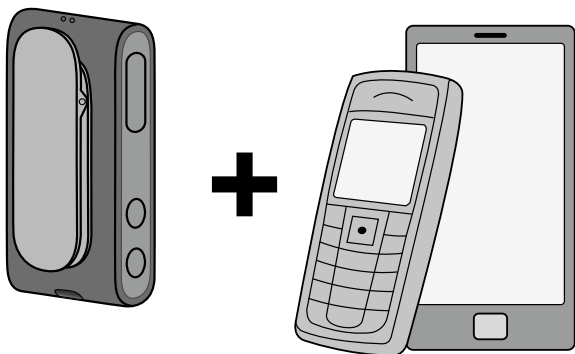


Se sidan 20 för detaljerad instruktion om hur AudioClip parkopplas med mobiltelefon


A. Parkoppling av hörapparaterna med AudioClip

1. **Försäkra dig om att AudioClip är avstängd**


Tryck och håll in flerfunktionsknappen i cirka 6 sekunder tills strömindikatorn visar **AV** ●.

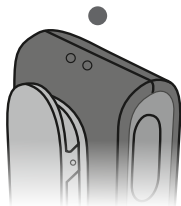


2. **Stäng AV båda hörapparaterna**
(öppna batterifacket)

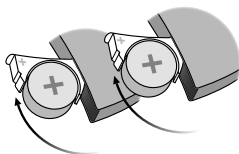


3. **Sätt PÅ båda hörapparaterna**
(stäng batterifacket)
Hörapparaterna är nu redo att parkopplas med AudioClip för första gången. Du har nu tre minuter på dig att slutföra parkopplingen.

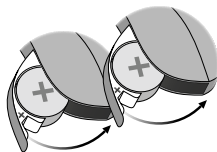


4. **Sätt PÅ AudioClip**
Tryck och håll in flerfunktionsknappen i c:a tre sekunder tills strömindikatorn lyser **FAST GRÖNT** ●.

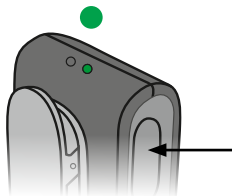

5. **AudioClip söker nu efter dina hörapparater**
Statusindikatorn kommer att **BLINKA GULT** 🟡.

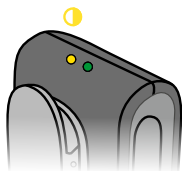


6. **Placera AudioClip och båda hörapparaterna nära varandra**
(maximalt avstånd 20 cm)

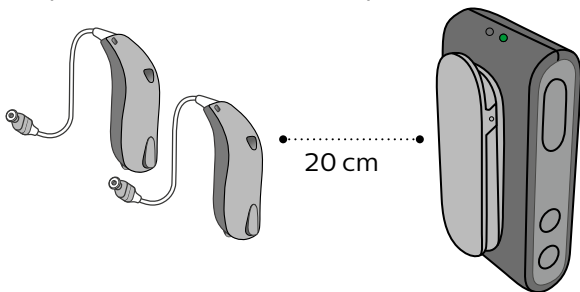


7. **När anslutning upprättats med hörapparaterna**
visar statusindikatorn ett **FAST GULT** ljus 🟡.



B. Parkoppling av mobiltelefon med AudioClip

1. **Sätt AudioClip i parkopplingsläge**
Tryck och håll in flerfunktionsknappen OCH volymens UPP-knapp i cirka 6 sekunder (A) tills statusindikatorn **BLINKAR BLÅTT** .
2. **AudioClip förblir i parningsläge i c:a tre minuter**

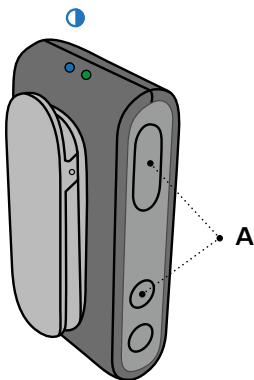


3. Aktivera parkopplingsläget på mobiltelefonen

Slå på Bluetooth®. Sök upp och parkoppla med AudioClip.

Detta görs normalt under -> Bluetooth®-inställningarna i din telefon.


4. Mata in pinkoden

Om din telefon begär pinkod, mata in 0000 (fyra nollor).

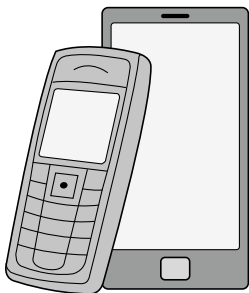


5. Parkopplingen är slutförd


Parkopplingen är slutförd när statusindikatorn visar ett **FAST BLÅTT** ljus ●.

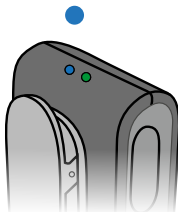

Daglig användning På/Av

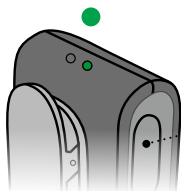


- **PÅ**
Tryck och håll in flerfunktionsknappen tills strömindikatorn visar ett **FAST GRÖNT** ljus ●.

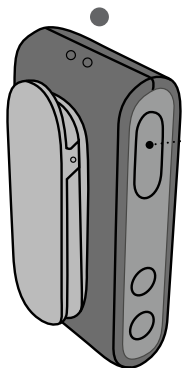


- **AV**
Tryck och håll in flerfunktionsknappen i sex sekunder tills strömindikatorn visar **AV** ●.


Daglig användning: Laddning

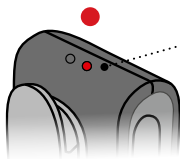



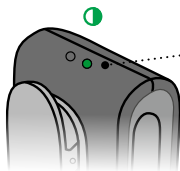

- **Svagt batteri**
När cirka 30 minuters batteritid återstår visar strömindikatorn ett **RÖTT** ljus ●.

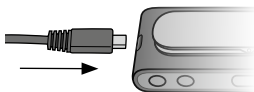

- **Laddar**
Anslut den medföljande laddaren till micro-USB-uttaget i nedre änden av AudioClip. Ström-indikatorn **BLINKAR GRÖNT** ● eller **ORANGE** ●.



Laddningsindikatorer			Status
	Blinkar	Laddar	AudioClip PÅ
	Avtar	Laddning slutförd	
	Blinkar	Laddar	AudioClip AV
	Fast ljus	Laddning slutförd	

Viktigt!



Under laddning ska laddningsindikatorerna lysa enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Om laddningsindikatorerna inte lyser enligt beskrivningen, koppla bort enheten från laddaren och kontakta din audionom.

Viktigt!

Ladda AudioClip med medföljande originalladdare 5.0V / 1A, CE och säkerhetsmärkt med:




Använd AudioClip med mobiltelefon

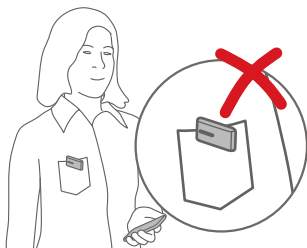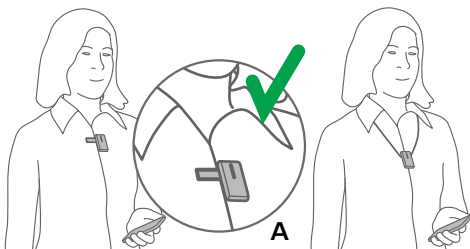

Viktigt!

AudioClip bör användas som visas på bilden för bästa resultat. Det är viktigt att mikrofonen i AudioClip vänds mot din mun (A), och att AudioClip inte täcks av kläder etc. Maximalt avstånd mellan AudioClip och mobiltelefonen är 10 meter.

Kontrollera att AudioClip är ansluten till telefonen

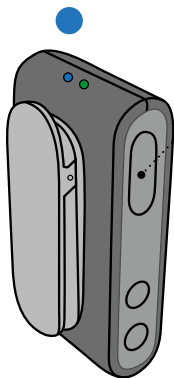


- **Välj telefonläge**
Tryck och håll in flerfunktionsknappen i cirka 3 sekunder för att välja läge. Ändrat läge bekräftas av en ljudsignal i dina hörapparater. Statusindikatorn har **FAST BLÅTT ljus** ●.



Status	Beskrivning
●	AudioClip är i passivt läge, d.v.s inte ansluten till någon mobiltelefon. Ansluten till hörapparater.
●	Ansluten till mobiltelefon
●	AudioClip är i läget för extern mikrofon

Besvara samtal

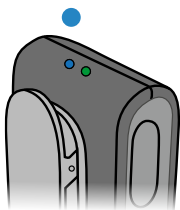

Telefon ansluten


När AudioClip är påslagen och inom räckvidd för din mobiltelefon kommer den automatiskt att ansluta till telefonen.

Statusindikatorn visar **FAST BLÅTT ljus** ●.




Telefonen ringer


När telefonen ringer hör du en ringsignal (om möjligt ringsignalen från din telefon) i dina hörapparater.

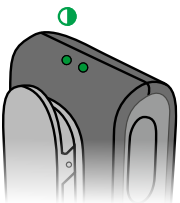

Statusindikatorn **BLINKAR GRÖNT** ●.

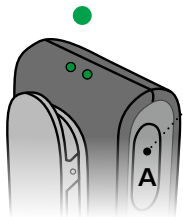


- **Besvara samtal**
Klicka kort på flerfunktionsknappen – eller svara från din mobiltelefon. När samtalet är öppnat kommer statusindikatorn att ändras till ett **FAST GRÖNT** ljus ●.

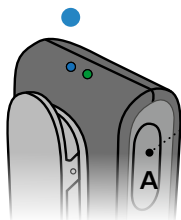

- **Avsluta samtal**
Klicka kort på flerfunktionsknappen (A) – eller avsluta samtalet från din mobiltelefon. Statusindikatorn visar ett **FAST BLÅTT** ljus ●.

Ringa samtal

För att ringa ett samtal behöver du bara använda mobiltelefonen. Samtalet kommer automatiskt att kopplas till AudioClip.

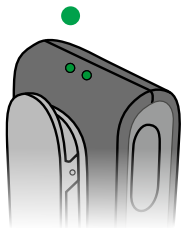

När samtalet är kopplat ändras statusindikatorn till ett **FAST GRÖNT** ljus ●.

Avancerade headsetfunktioner

Röstuppringning och röststyrning

När AudioClip är ansluten till en mobiltelefon kan du dubbelklicka på flerfunktionsknappen för att aktivera röstuppringning, om din mobiltelefon har denna funktion.

Avvisa samtal

När telefonen ringer kommer ett långt tryck på volymens NER-knapp att avvisa samtalet.

Stäng av ljudet från hörapparaternas mikrofoner

Tryck och håll in volymens NER-knapp i tre sekunder för att stänga av ljudet från hörapparatmikrofonerna.

Tryck kort på volymknappen (upp eller ner) för att inaktivera tyst läge.


Lyssna på musik

Trådlöst ljud (A2DP)

Om din AudioClip är ansluten med Bluetooth® till en telefon eller annan ljudenhet, kommer musiken som spelas automatiskt och trådlöst överförs till dina hörapparater.

Statusindikatorn visar ett **FAST ORANGE** ljus ●.


Ingen åtgärd på AudioClip krävs.

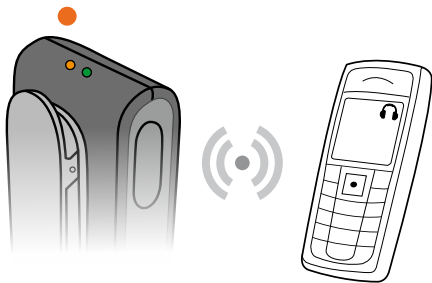

Status	Beskrivning
●	AudioClip strömmar musik från telefonen

Justera volymen

När du lyssnar på musik kan volymen på den överförda musiken justeras med hjälp av volymknapparna (upp eller ner).

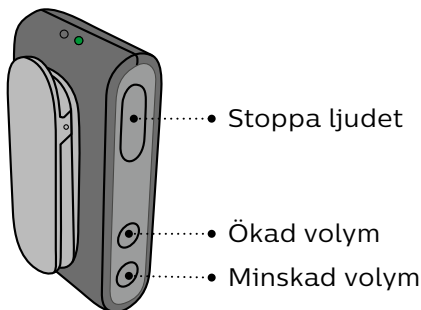


Stäng av ljudet från telefonen

Ett kort tryck på flerfunktionsknappen stänger av ljudet från telefonen. Använd knapparna på telefonen för att återuppta ljudet.

Använda AudioClip som extern mikrofon

Extern mikrofon


I detta läge kommer talet från personen som bär AudioClip att överföras direkt till dina hörapparater.

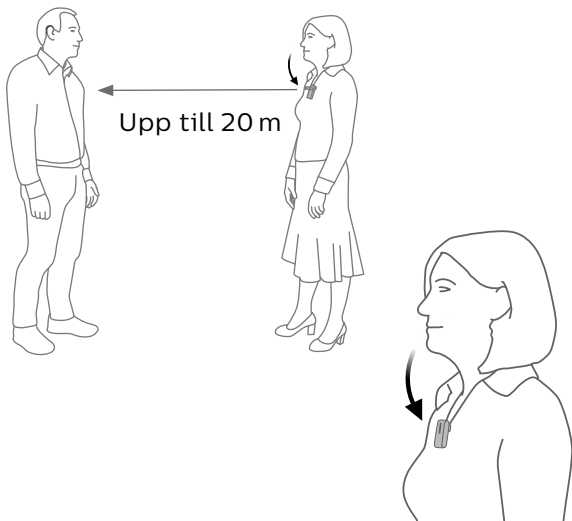

Viktigt!

Kontrollera att mikrofonen är riktad mot talarens mun och att den inte täcks av kläder etc.

Välja mikrofonläget

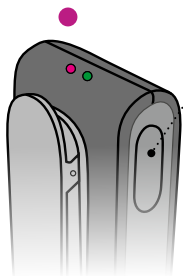

- **Välj mikrofonläge**
Tryck och håll in flerfunktionsknappen i c:a tre sekunder för att ändra läge.


Ändrat läge bekräftas av en ljudsignal i dina hörapparater.



Statusindikatorn lyser **FAST MAGENTA** ●.

Status	Beskrivning
●	AudioClip är i passivt läge, d.v.s inte ansluten till någon mobiltelefon. Ansluten till hörapparater.
●	Ansluten till mobiltelefon
●	AudioClip är i läget för extern mikrofon

Starta och stoppa ljudet från extern mikrofon

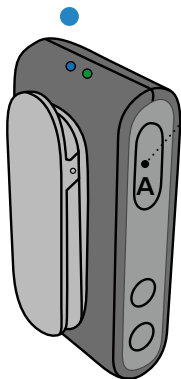

- **Stoppa ljudet från mikrofonen**


Tryck och håll in flerfunktionsknappen (A) i c:a tre sekunder för att stoppa ljudet från mikrofonen till hörapparaterna. Hörapparaterna växlar tillbaka till det normala programmet.

Statusindikatorn visar ett **FAST GULT** ● eller ett **FAST BLÅTT LJUS** ●.

Justera volymen från extern mikrofon

Öka eller minska volymen

Ljudet från den externa mikrofonen kan justeras med hjälp av volymknapparna (upp eller ner).

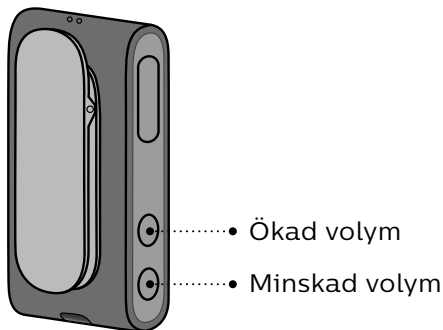

Stäng av ljudet från hörapparaternas mikrofoner

(endast ljud från den externa mikrofonen)

Tryck och håll in knappen för volym NER i tre sekunder för att stänga av hörapparaternas mikrofoner.


Ett kort tryck på volymen (UPP eller NER) slår på ljudet igen.

Starta och stoppa ljudet från den externa mikrofonen genom att trycka på dina hörapparater

P1 → P2 → TV →

Mikrofon

Ett tryck på hörapparatknappen växlar till nästa program i hörapparaterna.

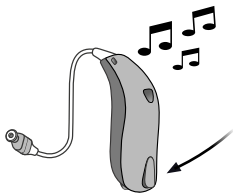


När du når programmet för extern mikrofon hör du en signal i hörapparaterna.

För att stoppa ljudet från den externa mikrofonen, växla tillbaka till det önskade hörapparat-programmet.

Viktigt!

Se hörapparaternas bruksanvisning för mer information om funktionerna i din hörsellösning.

Använda AudioClip som fjärrkontroll för hörapparaterna

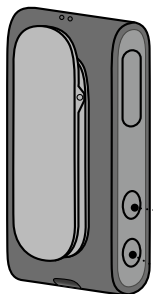


När AudioClip inte används för att överföra ljud fungerar den som fjärrkontroll för dina hörapparater.

- **Ökad volym**

Kort tryck

- **Minskad volym**

Kort tryck

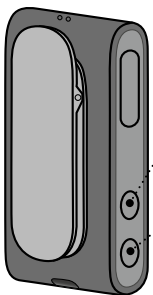

- **Nästa program**

Tryck och håll in i tre sekunder för nästa program

- **Stäng av hörapparaternas mikrofoner – långt tryck**

Ett kort tryck på volymens upp- eller ner-knapp återställer mikrofonljudet

Viktigt!

Maximalt avstånd mellan AudioClip och hörapparaterna är 2 meter i fjärrkontroll-läge.

Andra möjligheter och funktioner

En anslutning i taget

AudioClip kan parkopplas med upp till åtta andra enheter, men ansluter bara till den första mobiltelefonen inom räckvidd.


Inga samtal när den används som extern mikrofon

När AudioClip används som extern mikrofon är den inte ansluten till mobiltelefonen.

Timeout (utanför räckvidd) i mikrofonläget

Om AudioClip är utanför hörapparaternas räckvidd, kommer hörapparaterna att återta ursprungligt program efter 90 sekunder.

Ta bort Bluetooth®-parkopplingar

Tryck och håll in flerfunktionsknappen och volymens upp- och ner-knappar i 10 sekunder för att ta bort alla Bluetooth®-parkopplingar. Efter borttagning visar statusindikatorn ett **BLINKANDE RÖTT ljus** .

Rengöra AudioClip

Använd en mjuk, ren duk för rengöring av AudioClip. Den ska aldrig tvättas eller nedsänkas i vatten eller någon annan vätska.

Viktigt!

AudioClip får aldrig tvättas eller sänkas ner i vatten eller andra vätskor.

Varningar

För din personliga säkerhet och för att säkerställa korrekt användning bör du bekanta dig med följande allmänna varningar innan du använder ditt AudioClip. Kontakta din audionom om du upplever oväntade resultat eller allvarliga händelser med ditt AudioClip under användning eller på grund av dess användning. Din hörselklinik kan hjälpa dig med problem och anmäla eventuella fel till tillverkaren och/eller nationella myndigheter.

Kvävningsrisk och risk att svälja smådelar.

AudioClip och dess delar bör förvaras utom räckhåll för barn och andra personer som riskerar att svälja dessa delar eller på annat sätt skada sig själva. Om någon del har svalts ned, uppsök läkare omedelbart.

Explosionsrisk

AudioClip är säker att använda under normala förhållanden. AudioClip har inte testats för överensstämmelse med internationella standarder för explosiva miljöer. Använd därför inte AudioClip i miljöer med explosionsrisk, t.ex. gruvor, syrgasrika miljöer eller områden där brandfarliga narkosmedel hanteras.

Undersökning med slätröntgen/CT/MR/ PET, samt elektroterapi och kirurgi

Avlägsna AudioClip före röntgenundersökning, CT/MR/PET-skanning, elektroterapi och kirurgi etc., eftersom den kan skadas av att utsättas för starka energifält.

Värme och kemikalier

AudioClip får aldrig utsättas för hög värme. Lämna den t.ex. aldrig i en parkerad bil i solen. AudioClip får inte torkas i en mikrovågsugn eller vanlig ugn. Kemikalierna i kosmetika såsom, hårspray, parfym, lotion, solkräm och insektsmedel kan skada AudioClip. Lagg alltid undan AudioClip innan sådana produkter appliceras och låt torka innan den används igen.

Störningar

AudioClip har genomgått grundliga tester för störningar enligt de striktaste internationella normerna. Störningar kan dock förekomma mellan din AudioClip och andra enheter (som t.ex. en del mobiltelefoner, komradioenheter, larmbågar och andra trådlösa system). Om detta inträffar, öka avståndet mellan AudioClip och den störande enheten.

Varningar

I trafiken

Användning av AudioClip kan störa din uppmärksamhet. Håll fokus på omgivningen vid användning av AudioClip. Konsultera lokala bestämmelser för användning av kommunikationsenheter i trafiken.

Vid flygning

AudioClip innehåller Bluetooth®-teknik. AudioClip ska inte användas ombord ett flygplan om inte särskilt tillstånd givits av flygpersonalen.

Aktiva implantat

AudioClip har testats noggrant och godkänts för människors hälsa enligt internationella normer för exponering för människor (Specific Absorption Ratio - SAR), inducerad elektromagnetisk kraft och spänning i människokroppen.

Exponeringsvärdena ligger långt under internationellt accepterade säkerhetsgränser för SAR, inducerad elektromagnetisk kraft och spänning i människokroppen som definieras i standarderna för människors hälsa och samexistens med aktiva medicinska implantat som pacemakers och hjärtdefibrillator.

Laddningsbart batteri

Försök inte att öppna AudioClip, eftersom det kan förstöra batteriet.

Försök aldrig att byta ut batteriet.

Om batteribyte är nödvändigt, låt återförsäljaren ombesörja detta.

Servicegarantin gäller inte om tecken på åverkan finns på enheten.

Säkerheten för uppladdning av batterier med USB-sladden avgörs av den externa signalkällan. När apparaten är ansluten till nätströmsdriven utrustning, måste denna utrustning överensstämja med IEC 62368-1 eller motsvarande säkerhetsstandarder.

Anslutning till extern utrustning

Säkerheten vid användning av AudioClip tillsammans med extern utrustning (via aux-ingång, USB-ingång eller direkt), bestäms av den externa utrustningen. Vid uppkoppling till extern utrustning som är kopplad till vägguttag, måste denna utrustning efterleva IEC-60065, IEC-60950 eller motsvarande säkerhetsstandard.

Varningar

Säker förvaring

För din egen säkerhet och för att undvika felaktig användning ska fjärrkontrollen hållas utom räckhåll för barn och andra som inte ska ha tillgång till funktionerna.

Användning av halsband

Om halsbandet skulle fastna i något medan du bär det, är det utformat så att det lossnar automatiskt. Försök därför aldrig korta ner eller modifiera halsbandet. Halsbandet ska inte användas till barn under tre års ålder.

Möjliga biverkningar

Hörapparaterna är tillverkade i ett icke allergent material, men kan i undantagsfall orsaka hudirritation eller annan biverkan. Vänligen kontakta en läkare om dessa tillstånd uppstår.

Användning av tillbehör från tredje part

Använd endast tillbehör, transducers och kablar som levererats av tillverkaren. Ej kompatibla tillbehör kan leda till minskad elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i din enhet.

Laddning

För att inte batteriet ska skadas under förvaring bör AudioClip laddas en gång i halvåret.

Kompatibilitet med mobiltelefon

Gå in på hearingsolutions.philips.com för att se en lista av mobiltelefoner som Philips utfört omfattande tester på och som befunnits uppfylla minimikrav för kompatibilitet vid tiden för testerna. Philips tar dock inte ansvar för sådan kompatibilitet i allmänhet. Philips tar i synnerhet inte ansvar för inkompatibilitet för framtida uppdateringar av mobiltelefonen, eller för inkompatibilitet som uppstår i samband med händelser som inte testats av Philips. Philips tar inget ekonomiskt ansvar i form av ersättning för mobiltelefoner som inte fungerar som väntat.

Före inköp av en ny mobiltelefon rekommenderas konsultation av ovan nämnda lista.

Teknisk information

Model name	AC1A
GTIN	05714464003662
Användningsförhållanden	
FCC/IC	FCC ID: 2ACAHAC01 IC: 11936A-AC01
Kompatibilitet	Philips 2,4 GHz trådlösa hörapparater
Mått	53 x 27 x 18 mm; vikt 27g
Hanterings- anvisningar	Temperatur: +5°C till 40°C Luftfuktighet: 15 % till 93 % relativ fuktighet, ej kondenserande Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1060 hPa
Transport och förvaring	Temperatur och fuktighet får inte överstiga nedan angivna gränser under längre perioder vid transport och förvaring: Temperatur: -20°C till +60°C Luftfuktighet: 15 % till 93 % relativ fuktighet, ej kondenserande Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1060 hPa

System-funktioner	Mobiltelefonheadset (handsfree / headsetprofil) och stereomusik (A2DP) Fjärr- / partnernmikrofon
Fjärrkontroll av HI	Volym, programbyte och stänga av mikrofoner i hörapparater
Batteriet ¹	Typisk daglig användning 16 timmar: 2 timmar ljudöverföring + 2 timmar telefon + 12 timmar standby. 36 timmar standby (påslagen, ingen överföring) Laddningstid 2 timmar Förväntad total batterilivstid: 80 % kapacitet kvar efter 720 laddningscykler
Ljudkvalitet ²	Stereo / 20 kHz sample freq.
Ljudbandbredd ²	80 Hz - 10 kHz
Parkopplingsdetaljer	Upp till 8 parkopplade Bluetooth [®] -enheter
Bluetooth [®] -öve-rensstäm-melse	Version 4.2 + EDR
Bluetooth [®] -profilstöd	Advanced Audio Distribution Protocol (A2DP) 1.3 Headset-profil (HSP) 1.2 Handsfree-profil (HFP) 1.6 inklusive stöd för bredbandstal

Trådlöst räckvidd ³	10 meter med Bluetooth® Class 2-enheter (t.ex. mobiltelefoner) upp till 20 meter mellan AudioClip och hörapparater
Överföringsfrekvens	2.4 GHz (Bluetooth® band)
Strålning	Max. 17 dBm e.i.r.p. i enlighet med alla relevanta standarder
Statusindikationer	LED-Indikatorer på AudioClip. Akustiska signaler i hörapparater
HearSuite 2019.1 (eller senare)	Anpassning av ljudstreamingsprogram.

- ¹ Använd den medföljande laddaren
- ² Faktisk ljudprestanda beroende på kundens hörapparater
- ³ Fritt utrymme mellan AudioClip och andra enheter. Andra enheter som arbetar i 2,4 GHz-bandet kan störa och minska räckvidden.

AudioClip innehåller en radiosändare med Bluetooth Low Energy (BLE) och kortdistansradioteknik som båda arbetar på ISM-bandet 2,4 GHz. Radiosändaren är svag och verkar alltid under 50 mW, lika med 17 dBm i total utstrålad effekt. AudioClip efterlever internationella standarder gällande elektromagnetisk kompatibilitet och mänsklig exponering.

På grund av det begränsade utrymmet på AudioClip återfinns all relevant godkännandemärkning i detta dokument.

USA and Canada

This device contains a radio module with the following certification ID numbers:

FCC ID: 2ACAHAC01

IC: 11936A-AC01

The device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada's licence-exempt RSSs.

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Beskrivning av symboler som används i denna bruksanvisning och på förpackningar

	Varningar Text markerad med en markeringsymbol måste läsas innan produkten används.
	Tillverkare Produkten är tillverkad av tillverkaren vars namn och adress anges vid sidan av symbolen. Indikerar tillverkaren av medicinsk utrustning, enligt definitionen i EU-direktiv 90/385/EEC, 93/42/EEC och 98/79/EC.
	CE-märkning Produkten överensstämmer med direktivet om medicinsk utrustning 93/42/EEG. De fyra siffrorna anger identifieringen av det anmälda organet.
	Elektroniskt avfall (WEEE) Återvinn dina hörapparater, tillbehör och batterier enligt lokala föreskrifter eller skicka dem till din audionom. Elektronisk utrustning omfattas av direktiv 2012/19/EU om avfall och elektrisk utrustning (WEEE).
	Märkning för regelefterlevnad (RCM) Produkten uppfyller kraven på elektrisk säkerhet, EMC och radiospektrumkrav för produkter som levereras till Australien eller Nya Zeeland.

	<p>Dubbel isolering Indikerar att produktens strömförsörjning är dubbelisolerad. Detta betyder att det är mycket låg risk för enstaka fel, d.v.s. enstaka fel kan inte inträffa.</p>
	<p>Inomhusbruk Indikerar att produkten är klassad för inomhusbruk.</p>
	<p>Batteriåtervinningssymbol Återvinningssymbol för Li-Ion-batteri.</p>
	<p>Medicinteknisk enhet Produkten är en medicinskteknisk utrustning.</p>
	<p>Håll torr Innebär att detta är en medicinteknisk utrustning som behöver skyddas mot fukt.</p>
	<p>Varningssymbol Läs bruksanvisningen för varningar och försiktighetsåtgärder.</p>
	<p>Katalognummer Tillverkarens katalognummer så att den medicinska utrustningen kan identifieras.</p>
	<p>Serienummer Anger tillverkarens serienummer för att lätt identifiera den medicinska enheten.</p>
<p>Rated input: 5,0 V  0,4 A</p>	<p>Strömförsörjning Anger strömförsörjningen från strömkälla till enhet.</p>

CTN

CTN

CTN är ett kommersiellt unikt artikelnummer som används av säljare och köpare för att identifiera varje produkttyp som bär Philips varumärke.

REACH-deklaration:

REACH kräver att Philips Hearing Solutions tillhandahåller information om kemiskt innehåll för skadliga ämnen (SVHC) om de innehåller mer än 0,1 % av artikelns vikt. Mer aktuell information finns på webbplatsen hearingsolutions.philips.com/REACH.

Tillverkaren deklarerar att AudioClip överensstämmer med grundläggande krav samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiv 2014/53/EC. Denna medicintekniska produkt överensstämmer med förordningen för medicintekniska produkter (EU) 2017/745.

Deklaration gällande överensstämmelse finns att tillgå från tillverkaren.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.sbohearing.com



Avfall från all elektronisk utrustning ska hanteras enligt lokala föreskrifter.



Bluetooth®

< 8,15 mm >



> 19 mm >

< 9,0 mm >

< 15 mm >

hearingsolutions.philips.com



Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av eller för och säljs under ansvar av SBO Hearing A/S, och SBO Hearing A/S är garant för denna produkt.



0000262506000001

2022-10-03 | SE | Firmware 1.x