

BIOpH +

FOOTCARE

Medicintekniskt fotbad
för behandling av
fotsvamp, hälsprickor
och förhårdnader

Räcker till ca.
80 behandlingar

1250 gram

Made in Sweden

Användning

BIOpH+ Footcare är en medicinteknisk behandling som reducerar symtomen vid fotsvamp (hudrodnad, huderosion, maceration, klåda, stickande känsla, hyperkeratos och odör), hälsprickor och förhårdnader.

Behandlingsanvisning

1. Mät upp 3 liter ljummet vatten (cirka 38 °C) och håll i ett rent kärl.
2. Tillsätt 1 matsked (15 ml) av BIoPH+ Footcare och placera fötterna direkt i badet.
3. Bada fötterna i cirka 20 minuter och torka därefter med ren handduk.
4. Upprepa varje dag under sju dagar. Därefter varannan dag i ytterligare två veckor.

Effekten startar när granulatet kommer i kontakt med vattnet, vilket gör att det är viktigt att placera fötterna i badet direkt när granulatet tillsatts.

Tips! För att bibehålla och/eller förbättra fothälsan efter 3 veckor, gör ett fotbad ett par gånger i veckan.

VIKTIGT!

 Läs samtliga instruktioner före användning.
Använd produkten för dess avsedda användning.

(PM0008, 03)
Issued 2021-10-01

Biocool AB ansvarar endast för den medicintekniska produktens säkerhet och prestanda om:

- den medicintekniska produkten används i enlighet med dess avsedda användning och;
- den medicintekniska produkten används i enlighet med dess etikett samt denna användarinstruktion.

Produktnamn: ...BIOpH+ Footcare



..... BPPFC1250SV

Kundsupport:kontakt@biophplus.com



..... Biocool AB
Malmskillnadsgatan 39,
111 38 Stockholm, Sweden
Tel. +46 8 121 511 30



Varningar och försiktighet

- Endast för utvärtes bruk.

- Det är användarens ansvar att använda BIoPH+ Footcare för dess avsedda användning samt att läsa instruktionerna på produktens etikett före användning.
- BIoPH+ Footcare skall förvaras oåtkomligt för barn.
- Användning av gravida och ammande kvinnor har ej testats. Därav kan produkten ej rekommenderas för denna grupp.
- BIoPH+ Footcare skall inte användas på öppna sår.
- Undvik kontakt med ögon, kan orsaka irritation. Om produkten kommer i kontakt med ögon, skölj noggrant med ljummet vatten i minst tio minuter.
- Om BIoPH+ Footcare används på fel sätt eller om överkänslighet mot natriumperkarbonat föreligger kan produkten orsaka hudirritation.
- BIoPH+ Footcare är endast avsedd för utvärtes bruk på fötter.
- BIoPH+ Footcare kan orsaka hala fötter / golv efter behandling; därför rekommenderas att torka fötterna med ren handduk efter behandlingen.
- Använd inte BIoPH+ Footcare om burken är skadad eller om plomberingen saknas på en ny burk. För säker öppning av locket, dra av plomberingen i pilens riktning.
- BIoPH+ Footcare skall förvaras i rumstemperatur, ej över 45°C, och ej tillsammans eller i närheten av brandfarliga produkter.
- Förpackningen ska tillslutas väl då granulatet är fukt känsligt.
- Användaren skall kontakta sjukvården om allvarliga hud- eller ögonirritationer uppkommer.

Avsedd användargrupp

BIOpH+ Footcare kan användas av alla över 18 år.

Kontradiktioner

Användning hos gravida och ammande har ej testats i kliniska studier varpå det ej kan rekommenderas.

Potentiella oönskade händelser

BIOpH+ Footcare kan orsaka hudirritationer hos användaren. Vid händelse av allvarlig incident förknippad med produkten skall detta rapporteras till Biocool AB samt till Läkemedelsverket.

Beskrivning och innehåll av den medicintekniska produkten

BIOpH+ Footcare är icke-invasivt. Granulatet består av natriumperkarbonat och natriumperkarbonat som skall lösas i ljummet vatten. Burken är tillverkad av högdensitets-polyeten (HD-PE) och locket av lågdensitets-polyeten (LD-PE).

Förvaring

BIOpH+ Footcare skall förvaras i rumstemperatur med förslutet lock.



Kontrollpunkter före användning

Kontrollera att förpackningen, inklusive lock, är helt.

Kontakta Biocool AB om etikett och/eller användarinstruktion innehåller felaktig information.

Spårbarhet

BIOpH+ Footcare spåras via batchnummer. Etiketten samt följesedel medföljer produkten och innehåller all relevant information för spårbarhet.

Ansvar

Biocool AB ansvarar endast för produktens säkerhet och prestanda om den används i enlighet med dess avsedda användning samt medföljande användarinstruktion.

Det är användarens ansvar att läsa denna användarinstruktion före användning.

Bortskaffande av produkt

Överskott av produkten bör lösas upp i vatten och spolas ner i avlopp eller toalett.

Bortskaffande av förpackning

Tom och rengjord förpackning kan sorteras som plastförpackning.



LOT



Biocool AB
Malmskillnadsgatan 39
111 38 Stockholm
Sweden

kontakt@biophplus.com
www.biophplus.com



SUP-1030-03-48 1576
Label revision issued 2021-10-01



7 392059 101030