

- **PASUL 1**

Citiți cu atenție formularul de solicitare și chestionarul. Completați datele solicitate lizibil cu litere majuscule.

- **PASUL 2**

Înainte de a trimite proba la laborator (24h), se scufundă acumulatorul în apă timp de 15 min. După ce se umflă se pune la congelator.

- **PASUL 3**

Recoltați proba urmând instrucțiunile din formularul de solicitare. După ce se recoltateaza proba se păstrează la frigider.

- **PASUL 4**

Pentru a trimite proba la laboratorul din Spania, sunați la numărul **0753.109.866** de luni până miercuri între orele 09:00h - 10:30h pentru a solicita awb-ul de transport **GRATUIT**.

AWB-ul îl primiți pe e-mail. Se printează, se adaugă în plicul transparent și se lipește pe punga de transport (Teletest)

Dacă proba se trimite în aceeași zi în care se recoltează se păstrează la frigider până când ajunge curierul. Dacă se trimite a doua zi, proba se păstrează la congelator.

- **PASUL 5**

Înainte de a ajunge curierul, se pregătește coletul. Se introduce proba (coproductorul) în plicul izoterm împreună cu acumulatorul congelat. Plicul izoterm se pune în cutia de carton împreună cu formularul de solicitare iar aceasta în punga de transport și se sigilează.