



Trusa pentru disbioza intestinala

Expediere de laborator: Conform instrucțiunilor de pe spate.

Ref: **34.099.860**

F-520-05



Completati toate datele solicitate

Pacient _____

Sex M / F Data de nastere _____ ID/Passp _____

Telf _____

email _____

Trimiterea prin e-mail. Parola indicată pe chitanță

Data probei ____/____/____ ____:____

SEMNATURĂ în tabel

Autorizez transferul de date către grupul Teletest

Autorizez trimiterea către solicitant. Vezi spatele RGPD

teletest
Lab Analysis

34.099.860



Trusa pentru disbioza intestinala

Setul contine:

Mănuși
Borcan pentru scaun
Fe-Col® CE. Suport de colectare a scaunului
Geantă bio (UN3373)
Condensator la rece hidrabil
Teletest înveliș izotermic

Solicitant Autorizez sa trimit raportul solicitantului



Trusa pentru disbioza intestinala

Selectați testul:

Microbiom Parazitom De bază
 Extins Plus Max

Markeri: Digestie Permeabilitate Infecție

Inflamație Complet

Metale Neurobiologie

Alții: _____

Raport de acces Pentru descarcare web. QR disponibil.



teletest

www.teletest.es Tel +34 932.123.345

Descărcați rezultatele web:
www.teletest.es-> „Rezultatele mele”



Sigur pentru acces la raport


Descărcați

Contact pentru expediere (Spania):

NACEX: 93.293.84.37

Abonat: **858/90933**

rezultatele prin QR

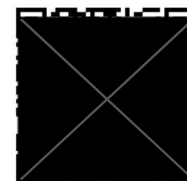

34.099.860



Completați formularul cu informațiile solicitate și semnați-l.

CONSIDERAȚII PRELIMINARE


- Așteptați 3 săptămâni în cazul examinărilor digestive invazive (colonoscopia, lavaj de colon), chimioterapie sau intervenții chirurgicale.
- Continuați dieta obișnuită. Este important să NU eliminați alimentele pe care le consumați zilnic.
- Cu 15 zile înainte:** nu luați antibiotice sau plante medicinale (berberină, ulei de oregano etc.), probiotice, prebiotice sau protectori pentru stomac.*
- Cu 3 zile înainte de test:** Evitați consumul de suplimente (enzime, vitamine, minerale).*

* Dacă NU puteți opri tratamentul, indicați acest lucru în chestionar.
(Clarificați în chestionar orice medicament sau supliment pe care îl luați de obicei)

Scufundați condensatorul rece hidratabil în apă și înghețați-l cu cel puțin o zi înainte de a preleva proba.

INSTRUCȚIUNI PENTRU PRELUAREA MOSTREI

- Înfășurați Fe-Col pe scaunul de toaletă (puteți întări suportul cu hârtie igienică) și faceți nevoile pe acest suport.
- Umpleți sticla **la maximum** cu o probă de scaun, cu ajutorul lingurii încorporate în capac (strângeți materialul defecat din diferite zone). Eliminați Fe-Col și restul prin toaletă.
- **Păstrați proba la frigider până când este trimisă la laborator.** [Dacă anticipați că livrarea nu va fi efectuată în următoarele câteva ore după colectarea probei, păstrați proba în congelator până la colectare.]
- **Puneți condensatorul rece înghețat și punga UN3373 cu proba în plicul izoterm Teletest.** Păstrați-l în cutia de carton, împreună cu documentația completată, și trimiteți-l la laborator cu punga de transport albă sigilată.

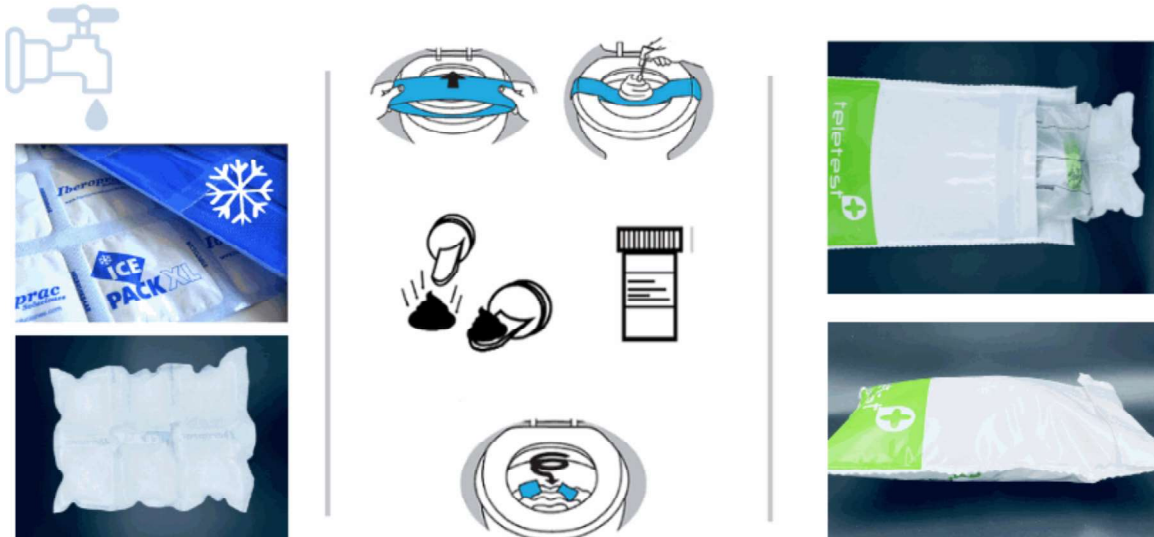

Teletest garantează că dispozitivele medicale incluse în kit au marcajul CE și declarația de conformitate, în conformitate cu legislația în vigoare privind dispozitivele medicale. În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 (DPGR) privind protecția naturii personale: transferăm datele personale către Teletest Analytika SA astfel încât acestea să fie incluse într-un fișier pentru prelucrare în scopuri de îngrijire tratament. Sunteți autorizat să utilizați datele personale necesare pentru emiterea facturii către entitatea care vă acoperă cheltuielile de sănătate. Autorizez accesul la date de către medicul prescris indicat pentru monitorizarea și tratamentul pacientului. Toate acestea, fără a aduce atingere cazurilor excepționale și autorizațiilor cuprinse în legislația sanitară actuală. Partea interesată își poate exercita drepturile de acces, rectificare, anulare și opoziție în conformitate cu RGPD la adresa companiei c / Montseny 11, 08012 Barcelona Spain, comunicându-i în scris Teletest Analytika SA. data@teletest.es Pentru minori (<14 ani): declar că subsemnatul este tutorele legal al părții interesate. Indicați cartea de identitate, pașaportul sau echivalentul.



Chestionar Disbioza Intestinala

Doc 19123 - V4


Nume si prenume :
Data de Nastere :

/ /

Motivul probei (Detalii)

Boli, afectiuni intestinale?	Nu	Da:					
Aveti stari de depresie sau stres?	Nu	Stres	Depresie	Anxietate			
Aveti migrena?	Nu	Da					
Dureri abdominale sau balonare ?	Nu	Durere	Balonare				
Probleme cu digestia?	Nu	Maldigestie	Acid	Reflux			
Gaze intestinale?	Nu	Da					
Ce consistenta are ?		Constipatie	Diaree				
Sensibilitate alimentara	Nu	Sensibilitate	Intoleranta	Alergie			
Viermisorii in materiile fecale sau mancarime?	Nu	Da					
Fumator ?	Nu	Da					
Ce tip de tratament urmati?	NU	<input type="checkbox"/> Antibiotice (ATB) <input type="checkbox"/> Probiotice (Lactobacillus, Bifidobacterium...) <input type="checkbox"/> Prebiotice (inulina, FOS...)					
Cate mese pe zi?	1	2	3	4	5	6	
Cate pahare de apa pe zi?	1	2	3	4	5	6	+

Alimente
Consum saptamanal

Alimente	Consum saptamanal	1-2	3 o +	Zilnic
Fructe	Niciodata	1-2	3 o +	Zilnic
Carne	Niciodata	1-2	3 o +	Zilnic
Oua	Niciodata	1-2	3 o +	Zilnic
Peste	Niciodata	1-2	3 o +	Zilnic
Paste, orez, cartofi	Niciodata	1-2	3 o +	Zilnic
Paine, cereale	Niciodata	1-2	3 o +	Zilnic
Verdeata	Niciodata	1-2	3 o +	Zilnic
Legume	Niciodata	1-2	3 o +	Zilnic
Mezeluri	Niciodata	1-2	3 o +	Zilnic
Produse lactate (branza, lapte, yaurt)	Niciodata	1-2	3 o +	Zilnic
Alcohol	Niciodata	1-2	3 o +	Zilnic
Cafea, Ceai	Niciodata	1-2	3 o +	Zilnic
Produse cu zahar (sucuri, dulciuri)	Niciodata	1-2	3 o +	Zilnic