

| | |
|----------------|--|
| マテリアルID | 3100050692 |
| 形 式 | 平板 2つ折り、断裁 |
| 寸 法 (仕上り) | 114.3mm(L) × 127mm(W) |
| 備 考 (展開サイズ) | 228.6mm(L) × 127mm(W) 両面印刷 1枚 |
| 材 質 | コート紙(OKトップコート) 〈坪量〉 157g/m ² |
| 印 刷 色 | 1c × 1c スミ 両面印刷 |
| 倍 率 | 100% |
| 株式会社 日相印刷 | |

3M™ リットマン®

コア デジタル ステソスコープ

クイックスタートガイド

初めてご使用になる前に本製品を充電してください。充電後、ご使用ください。



eko

Apple App Store または Google Play ストアから Eko アプリ（ダウンロードが可能な場合）をダウンロードすることで、ワイヤレスリスニング、高度なサウンドコントロール・フィルタリングコントロール、録音の保存・共有などの機能をご利用いただけます。




モバイル機器のカメラでQRコードを読み取って、Eko アプリをダウンロードしてください。

内容物

- 3M™ リットマン® コア デジタル ステソスコープ (Eko コアデバイスおよび 3M™ リットマン® カーディオロジー IV™ ステソスコープ)
- 3M™ リットマン® ソフトシーリング・イアーチップ (小)
- ノンチルスリーブ
- USB 充電ケーブル
- クイックスタートガイド (本書)

イアーチップ

イアーチューブの前後の向きを確認し、正しい方向になるように、イアーチップを耳に挿入します。(下図参照)

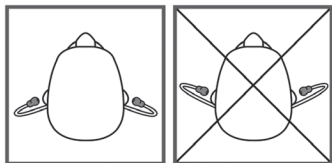

音量

(+) ボタンと (-) ボタンで音量を調節します。7段階の音量調整が可能です。

電源

リットマン® コア デジタル ステソスコープの電源がオフの状態の場合、機械式での聴診が可能です。

電源ボタンを押し込んで、本製品の電源を入れます。電源が入ると、LED表示が点滅します。増幅され、フィルタリングされた音がイアーチップから聞こえます。

電子聴診を使用するには、本製品の電源を入れる必要があります。

アクティブノイズキャンセリング

リットマン® コア デジタル ステテスコープには、アクティブノイズキャンセリング機能が搭載されており、周囲のノイズを低減します。Eko アプリを使用して、アクティブノイズキャンセリング機能のオンとオフを切り替えることができます。

アップデートおよび新しい機能

聴診器の性能を向上するために新しい機能を追加しています。Eko アプリに接続して、最新のアップデートを取得してください。

お知らせ（LED表示）



（白色に点滅）電源がオンで、デバイスを探しています



（オレンジ色に点灯）電源がオフで、充電中です



（オレンジ色に点滅）バッテリー残量が少なくなっています



（白色に点灯）電源がオンで、接続中です



（緑色に点灯）バッテリーがフル充電されました



（青色に点滅）録音を再生しています

録音

本製品を Eko アプリに接続して録音することができます。詳細については、ユーザーマニュアル (ekohealth.com/ifu) をご確認ください。



充電

本製品にマイクロ USB ケーブルを接続します。UL / CE 認証の 5V USB 充電器を使用してください。フル充電には約 2 時間かかります。フル充電されたら、緑色のライトが点灯します。充電中は、本製品の使用および Bluetooth® や Eko アプリへの接続ができません。

ユーザーマニュアル

本製品のご使用前にユーザーマニュアルをご確認ください。マニュアルは、ekohealth.com/ifu でご覧いただけます。

サービスおよびサポート

カスタマーコールセンター 0570-000-470までお問い合わせください。

管理医療機器 電子聴診器（機械式聴診器） 販売名：リットマン コア デジタル ステスコープ
医療機器認証番号：305ADBZX00011000 製造販売業者：スリーエム ジャパン イノベーション 株式会社
使用目的又は効果：聴診器を部位に接触させて、心音等を検出し、生体音を直接または電氣的に増幅させた音を診療のために提供すること。

3M、Littmann、リットマン、L の Littmann ロゴ、Cardiology IV、およびカーディオロジー IV は、3M 社の商標です。

CORE を含む Eko の商標は、Eko Health, Inc. 社の商標です。

Apple および Apple ロゴは、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークで、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Eko はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

LBL 143 改訂 3.0